

# Blue Wave Badesystem

Bruksanvisningen for E541, E542 & E543



## Anbefalt bruk

Blue Wave badestoler er utviklet for å gjøre badingen til en mer avslappet og hyggelig opplevelse for både personen som bader, og for pleieren. Badestolen er komfortabel og enkel å tilpasse. Den har et stabilt, polstret og hurtigtørkende sete, for bading i badekar eller i dusjen.

Velg ønsket størrelse badestol, legg evt. til et badestativ eller rullende dusjstøtte for bedre arbeidsforhold, velg mellom standard vinyltrekk eller mykt softtrekk for å møte behovene til de forskjellige personene som skal bruke badestolen.

Badestolen er justerbar, bærbar og kompakt for enkel lagring. Den gjør badingen enklere for pleiere, og behagelig for barnet.


### Blue Wave badestol

kommer i liten, mellomstor og stor størrelse. Den kan brukes med eller uten stativ. Standard eller soft trekk er tilgjengelige for alle størrelser.




### Blue Wave Badestativ

hever stolen til en praktisk arbeidshøyde, slik at det blir lettere for pleierne. Stativet passer til alle størrelsene av badestoler (liten, medium og stor)

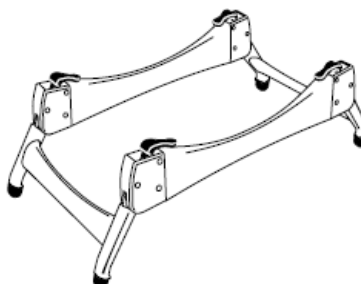

### Blue Wave Dusjunderstell

setter badestolen på hjul, slik at høyden blir perfekt for pleierne, og lettere å flytte stolen. Alle tre størrelser kan brukes på samme dusjunderstell.

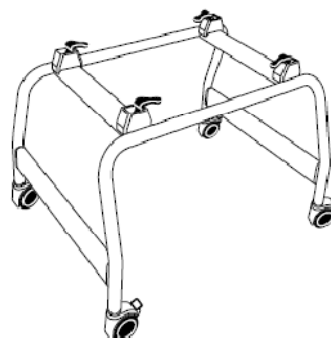

## Bruker og elementstørrelse

Brukerstørrelse – cm	Liten	Medium	Stor
Høyde	Opp til 91	81 – 127	117 – 173



### Hovedbrukerens høyde:

Velg riktig badestol ved å se på total høyde. Velg størrelsen som tillater vekst.

### Viktig:

Kontroll at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Elementstørrelse – cm	Liten	Medium	Stor
Setedybden	33	33	42
Setebredden	37	37	37
Rygghøyden	46	64	81
Setehøyden	5 – 18	5 – 18	5 – 18
Setehøyden (inkl. stativ)	28 – 43	28 – 43	28 – 43
Setehøyde (inkl. dusjst.)	71	71	71
Lengde når stolen er flat	83	98	126
Områdebredde	43	43	43
Områdelengde (flat stol)	76	76	76
Stativhøyde	25	25	25
Stativlengde	81	81	81
Stativbredde	43	43	43
Dusjunderstellhøyde	53	53	53
Dusjunderstellbredde	69	69	69
Dusjunderstelllengde	84	84	84
Maksimal arbeidsbelastning (kg)	27	54	73
Rygg / setevinkel			0°, 22°, 45°, 67° og 90°

Badestolen, stativet eller dusjstøtten kommer ferdigmontert.

Stolen leveres med ben i nedslått posisjon og hodestøttene nede.

Omplasseres før bruk.


## Justeringer

### Juster beina

Badestolen og badekarstativet har bein som kan justeres opp med 18 cm ekstra for å heve stolen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å heve stolen (figur 1):

- 1) Trekk foten utover
- 2) Skyv fot ned
- 3) Trykk sprosser i lås

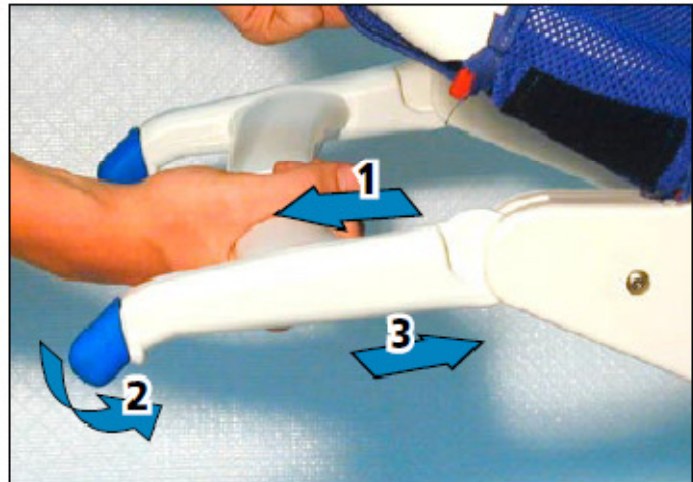

Figur 1

Badestolen legges flat for enkel oppbevaring (figur 2)



Figur 2

## Juster setet og ryggen

Setet og ryggen justeres i 5° for å tilpasse forskjellige brukere. De påfølgende trinnene viser deg hvordan du skal justere setet, ryggen skal justeres på samme måte.

- 1) Trekk røde triggere på hver side av rammen
- 2) Roter setet til riktig posisjon
- 3) Slipp triggerne.



Figur 3

## Juster hodestøttene

Skyv hodestøttene inn og ut på remmen for å justere bredden. Hodestøtten kan justeres opp / nedover med hjelp av borrelås



Figur 4

## Standard Skin remmer

Det kommer med to brystremmer i pakken. Bruk en eller begge remmer som er nødvendig for å støtte brukeren, og unngå at brukeren sklir ned under bruk.



Figur 5

Fest beinremmen for å støtte brukerens ben. Ved å trekke endene av remmene under setet, kan den brukes til justering av beina (figur 6)



Figur 6

## Soft Skin remmer

Soft skin har en unik polyesterborrelåsrem som gir komfortabel støtte og stabil posisjonering.

Fest brystbeltet som vist i figur 7. Innvendig rem går rundt stolen og festes med borrelås.

Den ytre remmen går rundt brukerens bryst, og sideremmene gir ytterligere sidestøtte (figur 8)



Figur 7



Figur 8

Benreimen tres gjennom "loop" på trekket, og kan justeres rundt brukerens ben (figur 9 + 10). Alle remmene kan fjernes. Justeringer kan gjøres med brukeren i stolen.



Figur 9



Figur 10

## Tilbehør

Blue Wave Badestativ hever stolen til en bekvem arbeidshøyde (9 eller 23 cm), og gjør det enklere for pleierne. Alle størrelsene (liten, medium og stor) passer til samme stativ.

---

**NB! Den kan ikke brukes på Shower stand eller andre Tub Stand.**

---

Blue Wave Dusjunderstell plasserer dusjstolen på hjul, og hever den til stående høyde for pleieren. Alle størrelsene (liten, medium og stor) passer til samme dusjunderstell.

Beina på badestativ justeres på samme måte som badestolen (se figur 1).

For å montere badestolen på badestativ eller dusjunderstell skal man trekke ut begge settene med bena på stolen, sette inn i stikkontakter, og trykk hardt ned til de røde låsene sier klikk. Da er stolen låst fast på plass.

For å ta bort badestolen, trykk ned på de røde låsene og dra oppover. (figur 11).


Lås de fire hjulene på dusjunderstellet for å forhindre at den flytter seg under bruk.



Badestativ



Dusjunderstell

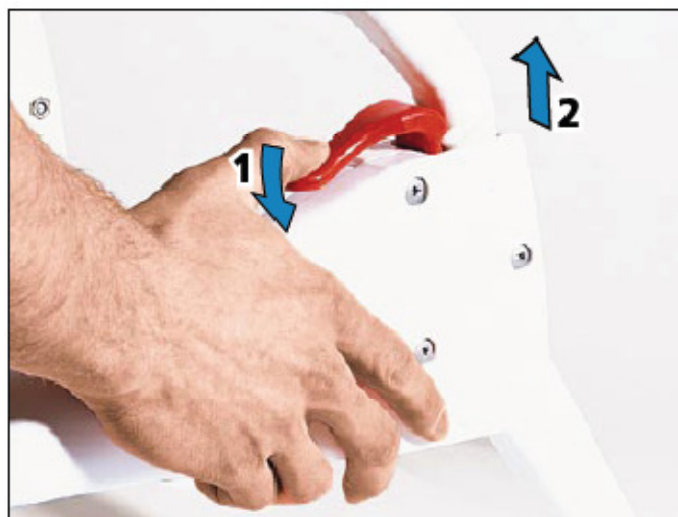

Figur 11



## Vedlikehold

Kontroller jevnt badestolen for sprekker, ødeleggelse, løse deler, manglende deler, og / eller funksjonsfeil. Ikke bruk produktet hvis omstendighetene gjør det usikkert å bruke produktet.

## Rengjøring

Fjern badestoldekslet ved å vri både setet og ryggen til vertikal posisjon, og dra trekket fra rammen. Setedelen tas først.

### Maskinvask

- Trekket og remmer kan vaskes ved 60 ° C / 40 ° C (softtrekk)
- Tørketrommel ved lav varme
- Ta av kroppselte og fester før vask

Vask badestativ og dusjunderstell med kun såpe og vann. Ikke bruk blekemiddel eller andre oljemidler.

-



Figur 12

## Materiale

- Badestolen og badestativet er bygget av solid støpt plast
- Soft trekk er laget av polyester. Remmene er festet ved hjelp av nylon med borrelås
- Standard trekk er laget av forsterket vinylmaske. Remmene er laget av robust polypropylen med borrelås.
- Dusjunderstell er konstruert av aluminium med en holdbar overflate
- Alle materialer er lateksfrie
- Alle hardware er rustfritt stål

## Advarsel

- Riktig bruk av dette produktet krever veiledning av en terapeut eller helsearbeider. Voksentilsyn er nødvendig til enhver tid.
- Stropper er gitt som sikkerhet for brukeren. Bruken må nøye overvåkes. Stroppene må justeres nøyaktig slik at det blir god komfort og god sikkerhet for brukeren. Den kan aldri erstatte pleieren
- Begrensninger – Noen mennesker bruker reimer, eller støtte til å begrense bevegelsene til et barn. Dette er en atferdsbegrensning, og kan øke etisk og juridiske spørsmål som du bør sjekke. Rifton utstyret er ikke beregnet for dette bruk.