



Montering av tilbehør

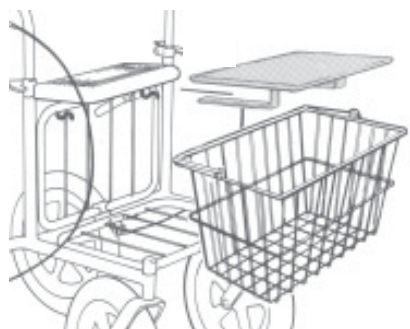

Skyv brettet inn over setet.

Korgen festes på krokene under setet.
Max last: 10 kg

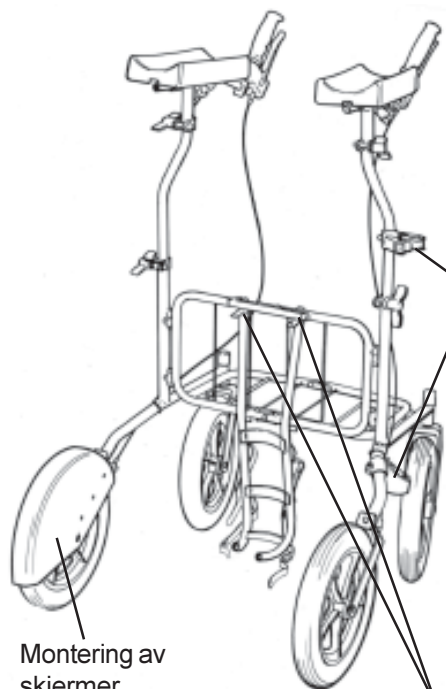

Montering av krykkeholder.

Montering av skjermer.

Montering av holder for oksygenflaske.

Rengjøring og service

Gjennomsyn bør utføres en gang årlig.

Rammen, underarmstøtten og hjulene rengjøres med oppvaskmiddel og svamp.

Flekkfjerning

Flekker fra asfalt og tjære kan tas bort med whitesprit. Rengjør med såpevann etterpå for å unngå flekker fra whitesprit.

Etterbehandling

Etter vask bør alle ledd og hulrom tørrblåses med trykkluft. Spray til slutt med tynnflytende olje.

Hjulene er vedlikeholdsfrie.

Max brukervekt: 125 kg

Obs! Carl Oskar med underarmstøtte må kun anvendes som gåstøtte. Egne inngrep i hjelpemiddelet er ikke tillatt.

Ved behov for service eller reparasjoner kan du kontakte Varodd Industrier AS, eller din Hjelpemiddelsentral.

Varodd

Serviceboks 620
4606 Kristiansand
Telefon 38 14 48 00
Telefaks 38 14 48 70



Ahlberg Leber AB

Ilabäcksvägen 5, 342 32 ALVESTA, SWEDEN
Tel. +46 (0)472-122 02 Fax. +46 (0)472-122 04
www.ahlbergleber.com




Ahlberg Leber AB - 2003

Bruksanvisning


Carl-Oskar RA med underarmstøtte

Art. nr. 601030

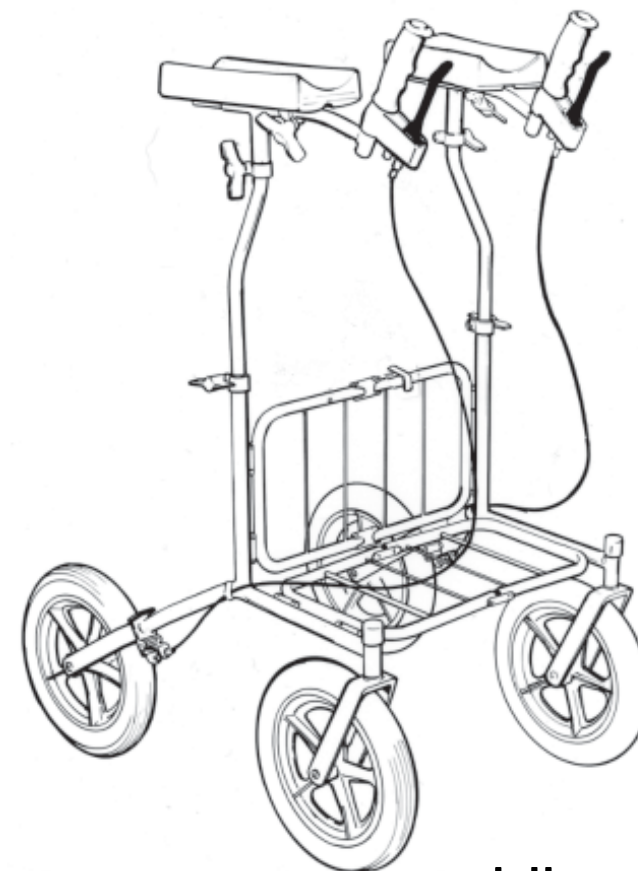



**ahlberg
leber**
En del av Human Care

Innstilling

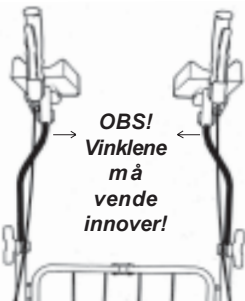


Det er viktig at armstøtterørene er innstillet innover for at full stabilitet oppnås.

RA-putene kan vrides fritt mot høyre, venstre eller parallellt med hverandre etter brukerens behov. Avstand fra albue til kjørehåndtaket kan justeres ved å løsne vingemutterne på undersiden av RA-puten. Fig.1

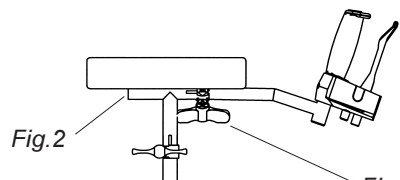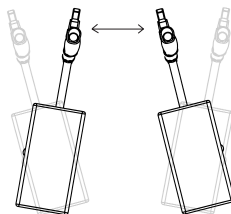


Kjørehåndtakene må maksimalt reguleres så langt frem at rørene kommer kant i kant med hverandre. Fig.2

Armstøtten stilles inn i høyden ved å løsne vingmutterne på sidene. Fig.3

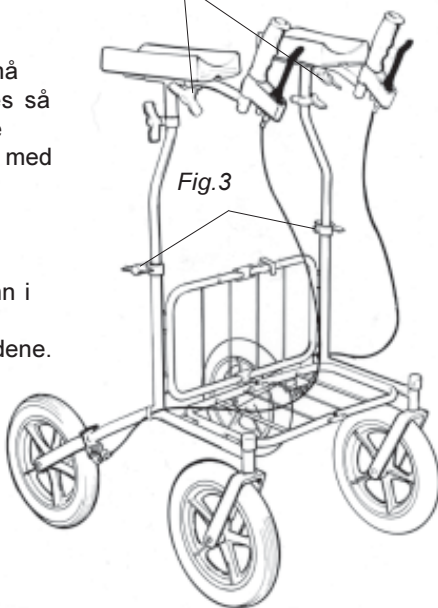

Oppfelling Med sete

Press setet fremover. Fig.4

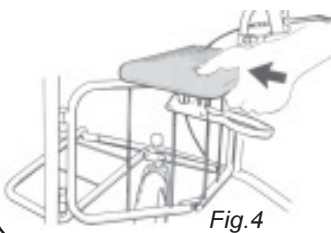

Obs!
Kontrollere at låsen går i inngrep! Fig.5




Brems

Press bremsehåndtaket nedover for å låse bremsen




Trekk bremsehåndtaket bakover for å bremse hjulene ved kjøring.

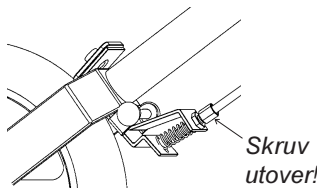


Ved svak bremseeffekt justeres bremsewiren.

Gåbordet kan leveres med enhåndsbrems. Begge hjulene kan da bremses med høyre eller venstre hånd. Fig.6

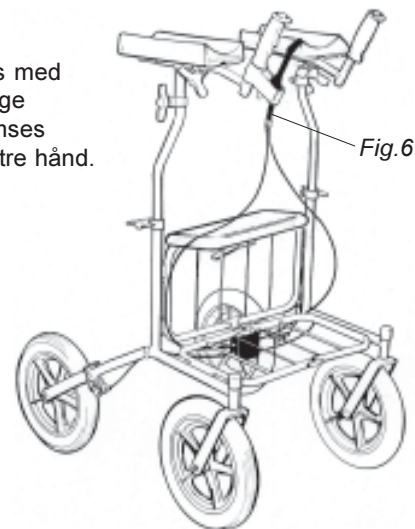

OBS!
Husk å låse parkeringsbremsen før du setter deg!

Sammenlegging Standardmodell

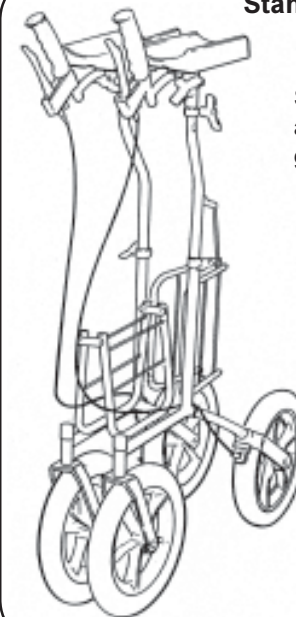

Slå sammen rollatoren ved å åpne grindlåsen Fig.7 Dra grinden mot deg.

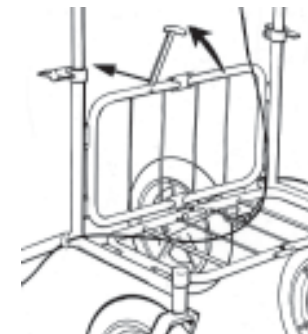


Fig.7

Sammenlegging Med sete

Carl Oskar RA med sete, har låsen plassert under seteputen. Trekk i utløserhåndtaket og rollatoren legges sammen. Fig.8


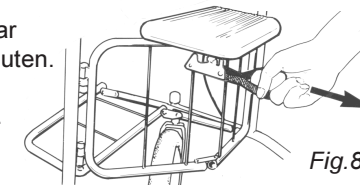


Fig.8

Oppfelling Standardmodell

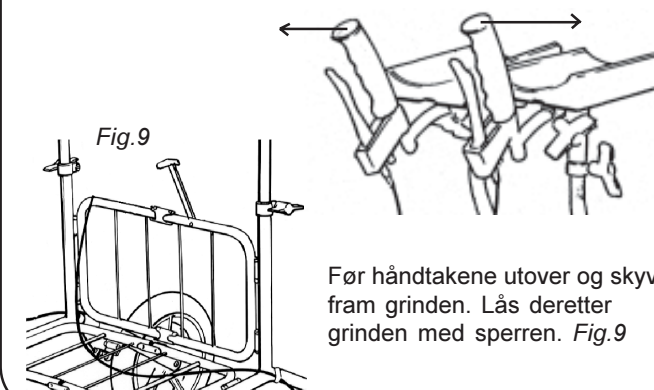

Før håndtakene utover og skyv fram grinden. Lås deretter grinden med sperren. Fig.9