
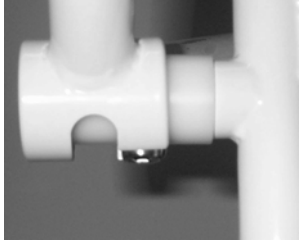
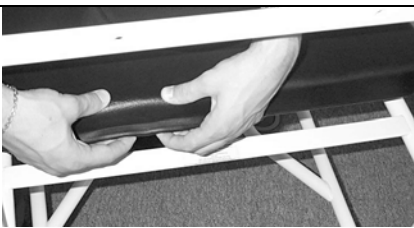


Dusj- og toalett stol M2 HD Brukerveiledning

Vare nr. 671100
Vare nr. 671105

Dusj- og toalettstol M2 HD 200 kg
Dusj- og toalettstol M2 HD 200 kg lav

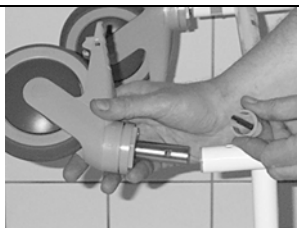

Dusj-og toalettstol M2 HD 200 kg. Art.nr. 671100 og 671105	Stol beregnet til bruk innendørs, ved vask/dusj og toalettbesøk.
BREMSER	BENSTØTTER
	
Ved bading / dusjing skal alle 4 hjul være låst før man tar stolen i bruk. Hjulene låses ved å trykke bremsen ned.	Benstøttene monteres ved å sette dem i benstøtteholderne.
RENGJØRING	ARMLEN
	
For å lette rengjøringen kan man ta av seteputen	Armlen avmonteres ved å løfte det opp til man kommer til utfresingen, da kan armlenet trekkes ut og av.
SETE	SKIFTE HJUL
	
Påse at bakerste kant av sete kommer ut over kanten på den flate tværrstangen.	Ta ut klipsen og skift hjul. Ved montering påse at klipsen kommer helt gjennom røret.
Daglig vedlikehold: Se punkt om rengjøring. Kontroller hjulene med jevne mellomrom.	
Rengjøring: Ved desinfisering benyttes Ethanol og Propanol oppløsninger. Ellers benyttes alminnelig ikke-alkoholiske rengøringsmidler. Max.85 grader.	Max. belastning 200 kg 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og rust.

Tekniske data



Vare nr. 671100 Dusj- og toalettstol M2 HD 200 kg

Vare nr. 671105 Dusj- og toalettstol M2 HD 200 kg lav

Vare nr. 671100

Setehøyde: 57 cm Setebredde: 56 cm Setedybde: 44 cm Bredde: 68 cm Lengde: 69cm Vekt: 17,5kg

Vare nr. 671105

Setehøyde: 46 cm Setebredde: 56 cm Setedybde: 44 cm Bredde: 68 cm Lengde: 69 cm Vekt: 16,8 kg

Max. Belastning: 200 kg.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og rust .

Dusj- og toalett stol M2 er beregnet til innendørs bruk ved bading/dusj og ved toalettbesøk.

Varenr.:	RESERVEDELER:		
	DUSJ- OG TOALETSTOL M2 HD 200 KG		
679209	Sete intim PU sort M2 HD		
673213	Setelukk PU sort M2		
673350	Armlen m pute M2 HD H		
673351	Armlen m pute M2 HD V		
673371	Armlenpute PU sort M2		
673511	Hjul m brems 100mm 1 hull M2 HD		
673510	Hjul m brems 125mm 1 hull M2 HD		
679209	Rørplugg		
673231	Rygg PU sort M2		
673240	Skruer rygg M2 syref		
673000	Rørclips 26mm HMN		
673375	Armlenpute buede armlen PU sort M2		
673425	Skruer til armlensputer M2		
673430	Nylonforing for armlen M2		
673432	Bolt til armlen M2		
673018	Rørforing ben M2		

Forhandler:



Serviceboks 620
4606 Kristiansand

Telefon: 38 14 48 00

Telefaks: 38 14 48 70

www.varodd.no

Produsent:

HMN a/s
Midtager 22, 2605 Brøndby,
Danmark

www.hmn.dk