


# Brukerveiledning

## Dusj- og toalettstol M2 24" drivhjul.


Designet for bruk ved bading/dusjing og toalettbesøk





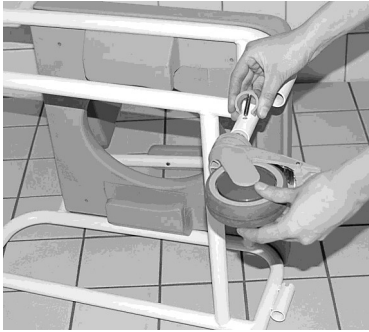


Når du skal monterer hjulet føres det teleskopiske benet opp i røret og låses med klipset i ønsket høyde.

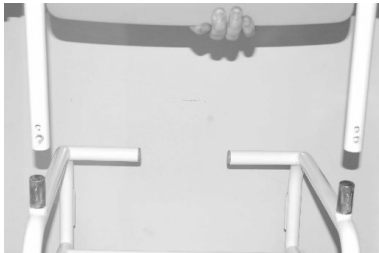


#### **Montering av rygg:**

Før ryggen over tappene i rammen og lås med de medfølgende skruer. Pass på at skruene er strammet for å sikre stolens stabilitet. Husk å ettertrekke etter en måned. Bytt til nye skruer hvis de er skadet. Ved demontering og ny montering bytt til nye skruer.

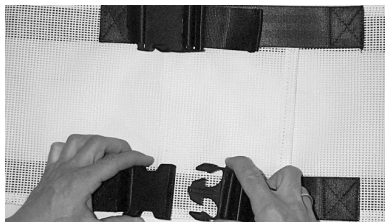


#### **Nettrygg**

Justering tilpasning av nettrygg (se bilder).

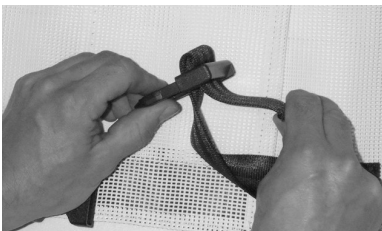

**Viktig! Vask maks. på 80 grader.**

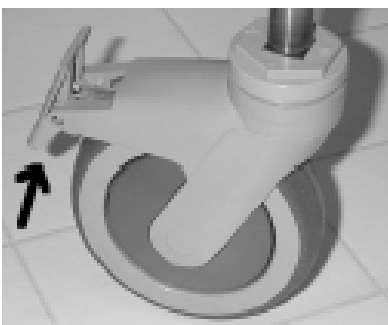


Lås alle fire hjulene når stolen er i bruk til dusj eller toalettbesøk. Det høyre framhjul (mørk grå) har retningsperre som gjør kjøring lettere.




### Montere og demontere armlene

For å montere eller avmontere armlene løft opp i loddrett posisjon og før armlenet ut til siden.

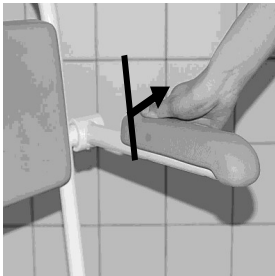



Montere og demontere buede armlene **(ikke standard i Norge)**

Samme prosedyre som for rette armlene (se tekst over)

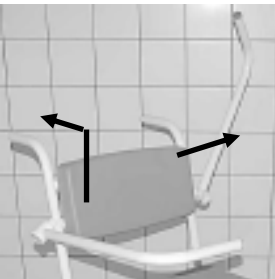


Montere og demontere smale armlene **(ikke standard i Norge)**

Armlene løftes opp og svinges til siden.

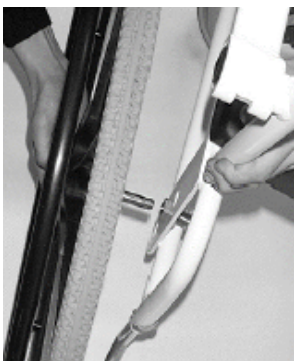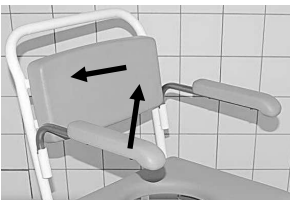

### Montere drivhjul


Ved mottak av stolen må bakhjulene monteres på følgende måte: (Stolen er satt til midtstilling fra produsent). Før hurtigkoblingen inn i foringen press til du hører et klikk. Drei hjulet og forsikre deg om at det sitter fast.

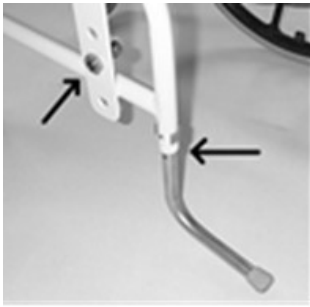

### Setehøyde



Setehøyde reguleres ved å flytte hylsen til hurtigkoblingen opp eller ned. Den løsnes med en skiftnøkkel og flyttes til ønsket posisjon.

Antitipp bøylene skal flyttes i henhold til hjulenes plassering. Høyden til framhjulene må tilpasses til valgt høyde på drivhjulene. Dobbelt sjekk til slutt at alle muttere er strammet og klips sitter på plass.

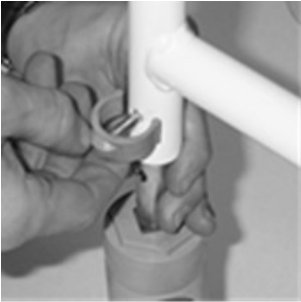

### Montere forhjul

For å kunne montere forhjulene må klipsene fjernes fra rammen. Hjultappene plasseres inn i rørene og klipsene monteres inn fra baksiden. Forhjulene kan ved behov plasseres i en høyde som avviker fra drivhjulene. (Hvis du vil sitte med setet vinklet bakover)

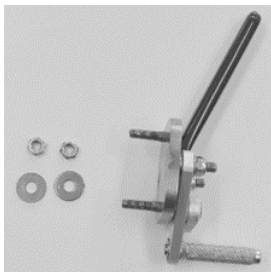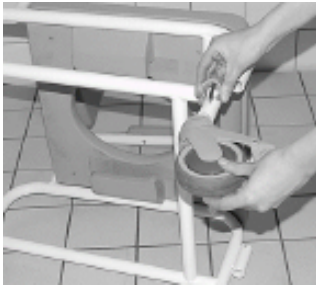

### Montere bremses for drivhjul

Deler: 2 x Bremses, 4 x Skiver, 4 x bolter, 4 x muttere




Monter bremsen på stolen



Monter skiver og bolter



Bremsen flyttes til ønsket posisjon deretter strammes skruene

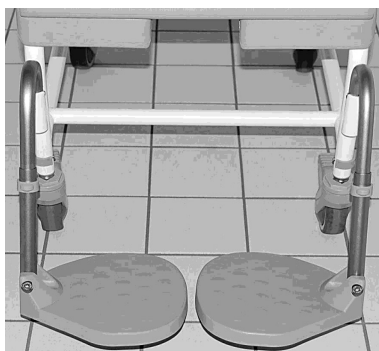

Høyden til benstøtten reguleres ved hjelp av klips. For ekstra plass ved inn/utstigning kan benstøttene svinges sideveis ved å løfte benstøtten. Fotplatene kan vippes opp.



Leggstøtte (tilbehør)  
Leggstøtten er festet- og blir regulert med borrelåsen på baksiden.

**Viktig!** Må vaskes på maks. 80 grader.



Bekkenet skyves inn fra baksiden av stolen.



Unngå å sitte ytterst på setet fordi stolen kan tippe framover



**NB!** Ikke stå på fotplatene.



**NB!**

Må ikke benyttes i klorholdige miljøer som f.eks i svømmehaller.

**Garanti**

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

**Rammebrudd garanti.**

Vi yter 5 års garanti imot rammebrudd på M2-dusj- og toalettstoler.

Garantien gjelder ved fabrikasjons- eller materialfeil og under forutsetning av normalt bruk. Vi gjør oppmerksom på at alminnelig slitasje ikke er dekket av garantien.

**Rengjøring:**

Produktet kan rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler uten slipemiddel. Etter rengjøringen skal produktet skylles og tørkes. Produktet kan tåle rengjøring opp til 85° C i 3 minutter.



For å unngå at stolen triller under forflytning må alle fire hjulene låses.

**NB!**

Hvis det er en glatt overflate, er det fortsatt en risiko for at rullestolen skli.



Miljøfyrtårn®

Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand • Postboks 8343 • N-4676 Kristiansand  
+ 47 38 14 48 00 • [hjelpemidler@varodd.no](mailto:hjelpemidler@varodd.no) • Org. nr. 919 571 039  
[www.varodd.no](http://www.varodd.no)



**HMN** since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: +45 4396 2400 - E-mail: [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk) - Web: [www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)