

BRYTERTILKOBLING USB OG TRÅDLØS BRYTERTILKOBLING

Trådløs betjening med én eller to brytere.

Art.nr. 18 800

HMS nr. 123921

Art.nr. 18 804



BRYTERTILKOBLING USB

BESKRIVELSE

COGNITA BRYTERTILKOBLING USB er en enkel måte å koble brytere til en PC for betjening av for eksempel et skjermstatur.

Løsningen består av en mottaker som kobles inn i PCens USB inngang og 2 små sendere som kan kobles til valgfrie brytere.

INSTALLASJON

Om du benytter Windows 2000 eller Windows XP trenger du ikke installere noe. Bryterene vil automatisk installeres første gang du setter i mottakeren.

Bryteren er å finne under Kontrollpanel - spillekontrollere.

Når du skal velge bryterstyring i det programmet du benytter - velg "Joystick/styrespak". Bryterene fungerer som knappene på en joystick.

TRÅDLØS BRYTERTILKOBLING

BESKRIVELSE

COGNITA TRÅDLØS BRYTERTILKOBLING gjør det mulig å bryterstyre ulike enheter trådløst. Dette kan f.eks. være batterileker, talemaskiner eller andre bryterstyrte løsninger.

Løsningen består av en mottaker med 2 bryterutganger og 2 små sendere som kan kobles til valgfrie brytere.

INSTALLASJON

Mottaker boksen har et batteri som må lades. Lader ligger ved.

Mottakeren har to ledninger som du kan koble rett inn i den tingen som skal betjenes. Se på disse som forlengelsen av ledningene på bryteren.

Bryterne du benytter kobles inn i de små sender brikken.

TEKNISK BESKRIVELSE

Mottakeren kommuniserer med senderne på en bestemt frekvens. Det er derfor viktig at du ikke blander senderne om du kjøper flere Trådløse brytertilkoblinger. Du har også mulighet til å bestille flere sendere som fungerer sammen med den mottakeren du har i dag. Ring oss og opplys om din senderkode.

Sender kode for denne enheten er: _____

Senderne er de to små enhetene som ligger ved. Disse er drevet av et standard knappcelle batteri (CR2032

eller CR2430) som varer omtrent 1 år. Brytere kobles til via en 3,5 mm jack plug på siden.

SERVICE/HJELP

Har du problemer eller spørsmål til løsningen, kan du sende en e-mail til support@cognita.no eller ringe 2212 1450.

Mer informasjon kan du også finne på www.cognita.no

COGNITA AS
KRANVEIEN 62 A
N-4950 RISØR

MAIL	INFO@COGNITA.NO
TELEFON	+47 2212 1450
FAKS	+47 3715 3060