

# TEKST- KOMMUNIKASJON Brukerveiledning

Fritekstkommunikasjon for døvblinde.

Art.nr. 12 090

HMS nr. 135 764



## OM PROGRAMMET

COGNITA TEKSTKOMMUNIKASJON er en enkel og fleksibel løsning for kommunikasjon med tekst. Programmet kan benyttes til nærkommunikasjon med tekst for døve og svaksynte.

Alle funksjoner i programmet kan styres med hurtigtaster og er derfor enkelt å tilpasse til bruk sammen med andre skjermtastatur løsninger eller spesielt tilrettelagte tastaturplater.

## INSTALLASJON AV PROGRAMMET

Programmet er laget for å enkelt kunne installeres på hvilken som helst maskin. Man kan bruke installasjonsprogrammet og trykke seg gjennom veilederen. Eller man kan kopiere programfilen fra CDen inn dit man ønsker å ha den.

## NÆRKOMMUNIKASJON

Programmet brukes som nær-kommunikasjon. Et eksempel på bruk av er at hovedpersonen sitter med en tablet-pc foran seg på bordet eller i fanget, mens samtalepartnern skriver på et tastatur. Hovedpersonen kan da lese teksten i sitt eget tempo (lese buffer), og kan selv navigere gjennom teksten som han/hun vil. Størrelsen på skriften, samt fargen og bakgrunnsfarge kan stilles helt fritt.

## KOMMANDOOVERSIKT

F4	Slette siste ord
F9	Bytte mellom Aktiv/ikke aktiv meny linje
F12	Tømme skrivebuffer
PageDown	Bla til neste side
PageUp	Bla til forrige side
Ctrl+S	Lagre Innstillinger
Alt+F4	Avslutt

## MENYOVERSIKT

Fra filmenyen

- Lagre Innstillinger
- Avslutt

## FRA INNSTILLINGER MENYEN

- Endre skriftstørrelse i skrivefelt
- Endre skriftfarge i skrivefelt
- Endre bakgrunnsfarge i skrivefelt
- Endre farge på blinkende tekststolper

## HJELP OG SUPPORT

Om du ønsker hjelp til oppsett, tilpasning eller feilsøking, kan du kontakte Cognita AS.

COGNITA AS  
KRANVEIEN 62 A  
N-4950 RISØR

MAIL [INFO@COGNITA.NO](mailto:INFO@COGNITA.NO)

TELEFON +47 2212 1450

FAKS +47 3715 3060