

## Ergositter Bankhang® stolens funksjoner

1. WOBPS (Without Back Pain Sitting) traksjonssetets spak er plassert på høyre side under setets fremre del. Før spaken vannes rett bakover og frigjør det trinnløst justerbare traksjonssetet, slipp spaken ved ønsket ryggavlastning. For å få opp setet, før spaken bakover, løft deg fra setet og slipp spaken.

2. Sittehøyden reguleres med flat spak som er plassert på høyre side, løft spaken og slipp ved ønsket høyde.

3. Gyngemotstanden reguleres med rund spak som er plassert på høyre side, vri fremover for økt gyngemotstand, bakover for mindre motstand.

4. Sittedybden reguleres trinnløst med flat spak som er plassert på venstre side, løft spaken for å frigjøre glidningen og slipp ved ønsket sittedybde.

5. Synkronisert gyngereguleres med rund spak som er plassert på venstre side. Åpne den vribare spaken bakover, still inn en av 5 valgfrie komfortstillinger, vri fremover og lås gyngen. OBS! Åpne gyngen fra en bakoverlendt posisjon, for å åpne gyngen trykk deg bakover mot ryggstøtten slik at gyngen slipper.

6. Ryggstøtten reguleres ved at man trekker støtten helt opp, så helt ned for så å trekke den opp til ønsket høyde.

7. Korsryggens støtte reguleres opp ved hjelp av håndpumpen og ned ved å trykke på ventilknappen.


8. Armstøtten heves via knappen som finnes plassert under håndledet. Armstøtten kan også reguleres fremover og bakover og kan vris inn og ut. Armstøttens bredde justeres med skruer plassert under setet.

9. Nakkestøtten er hev- og senkbar samt regulerbar i dybden.



Floor-Tec Norge AS  
Løxaveien 15  
Postboks 57  
1309 Rud  
Telefon 67174600  
Faks 67174601  
floortec@online.no  
www.floortec.no

Forhandler:

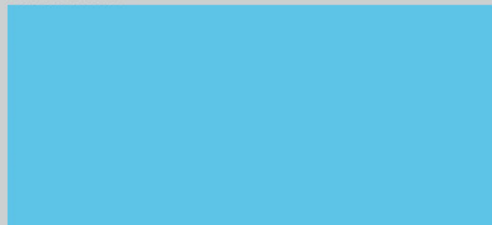

Ergositter Backhang chair is a worldwide patent pending.  
Trademark and patent is protected by patent law.  
ALL RIGHT RESERVED TM ® & COPYRIGHT ©  
www.ergositter.com or www.backhang.com  
Place of original Sweden