

## *Glidelaken* Stretch

Et hjelpemiddel som gjør det lettere for bevegelseshemmede og smertepasienter å kunne endre stilling i sengen, alene eller ved hjelp av pleier.



---

### Arcus Vita As

Pb 213            Telefon: 53 75 77 50  
5591 Etne        Telefaks: 53 75 77 51  
E-post: [post@arcus-vita.no](mailto:post@arcus-vita.no)

*Arcus*  
*Vita as*

[www.arcus-vita.no](http://www.arcus-vita.no)

## Bruk og sikkerhet

---

### HVORFOR *Glidelaken Stretch*?

Mange mennesker har av forskjellige årsaker problemer med å kunne snu seg i sengen. Mange må også ha hjelp av pleiere. Det unike med *Glidelaken Stretch* er det blanke, friksjonsreducerende midtpartiet som gir den sengeliggende mulighet til å endre stilling i sengen ved å gli rundt sideveis. Bevegelsen blir mye lettere fordi friksjonen mellom glideflaten og brukerens kropp blir sterkt redusert. *Glidelaken Stretch* er også et utmerket hjelpemiddel for pleiepersonell. Belastningen blir redusert fordi det kreves mye mindre kraft å snu en pasient.

### BRUKERVEILEDNING

*Glidelaken Stretch* legges på madrassen som et alminnelig stretchlaken. Stram godt til slik at det ikke er folder i glideflaten.

**Lakenet skal ligge med glidefeltet opp mot hodeenden. Er du i tvil se på undersiden etter vaskeanvisningen. Denne er alltid montert i hodeenden.** Det skal være 5-20 cm fra øverste madrasskant til glidefeltet. Kontroller at lakenet ligger sentrert sideveis slik at ikke glidefeltet kommer ut over kanten på madrassen.

Personer som kan snu seg selv ligger direkte på glidelakenet med eller uten klær. Den lave friksjonen mot glideflaten gjør det mye lettere for personen å endre stilling i sengen. En kan ta spenntak med føttene og gli med overkroppen til ønsket stilling.

Personer som skal snus av pleiere skal ligge med et stikkklaken (trekklaken) mellom seg og glidelakenet. Den lave friksjonen mellom stikkklakenet og glideflaten gjør det mye lettere for pleieren å snu eller flytte personen. Pleieren skal ikke løfte med stikkklakenet, men dra personen mykt og rolig til seg og deretter vende personen.

### SIKKERHET

Pass på at lakenet ligger sentrert i sengen slik at det er like lang avstand fra madrasskanten til glidefeltet på begge sider av sengen. Denne kanten fungerer som en sikkerhet for at personen ikke skal gli ut av sengen. Bruk heller ikke et annet glidelaken eller et glatt laken som stikkklaken. Dette medfører fare for at personen kan gli ut av sengen.

Sømmen i kanten av glidefeltet er laget så liten som mulig for å forebygge fare for trykksår. Pass allikevel på at personer som utsatt for å utvikle trykksår ikke ligger på denne sømmen. Pass også på at det ikke er folder i glidelaken eller stikkklaken under personen i sengen. Husk at bruk av glidelaken fremmer pasientens egne bevegelsemønstre og virker dermed trykksårforebyggende.

## Produktinformasjon

### VASKERÅD

Vasketemperatur: Max 90 grader

Unngå bruk av skyllemiddel, dette kan nedsette glideeffekten.

Kan tørkes i tørketrommel på lave og middels temperaturer.

Stryking av glideflaten på middels temperatur etter vask forbedrer glideeffekten.

Unngå skarpe gjenstander mot glideflaten, for eksempel glidelåser.

### MATERIALE

Glideflate: 100 % polyester

Sidefelt Stretch: 95 % bomull og 5 % lycra

Alle komponenter brukt i **Glidelaken** Stretch er testet ihht Øko-Tex Standard 100 klasse 2. Denne klassen er for produkter brukt mot bar hud, og garanterer fravær av miljøskadelige og allergifremkallende stoffer.

**Glidelaken** Stretch er CE-merket



### MODELLER

Glidelaken Stretch leveres i følgende modeller:

#### Art. nr. 1090

**Glidelaken** STRETCH 90

Glideflaten B70 x L130 cm.

Passer til seng 80/90 cm bred.



#### Art. nr. 1094

**Glidelaken** STRETCH 120

Glideflaten B100 x L130 cm.

Passer til seng 120 cm bred.



#### Art. nr. 1092

**Glidelaken** STRETCH 150

Glideflaten B130 x L130 cm.

Passer til seng 150 cm bred.



Art. nr. 1010

Stikklaken B95 x L190 cm

## Andre nyttige hjelpemidler

---

### Glidelaken (ikke stretch):



**Art. 1083 Glidelaken Standard**  
Glideflaten B60xL100 cm  
Totalmål: B210xL100 cm



**Art. 1084 Glidelaken Lang**  
Glideflaten B60xL140 cm  
Totalmål: B210xL140 cm



**Art. 1968 Glidelaken Dobbeltseng**  
Glideflaten B130xL120 cm  
Totalmål: B280xL120 cm

---

### Turn Master

Regulerbar dreieskive for bruk i stol, inn og ut av seng mm



### Master Belt

Pleiebelter og støttebelter i flere størrelser og modeller.



### Master Glide

Fleksibelt glidebrett for sittende forflytning. Avrundede hjørner og 3 håndtak letter håndteringen.



### AutoSlide

Glidepute for inn- og utstiging av bil



### MasterTurner

Komplett glide- og vendesystem for pleie av tunge immobile brukere.



## Arcus Vita As

---

Pb 213  
5591 Etne

Telefon: 53 75 77 50  
Telefaks: 53 75 77 51  
E-post: [post@arcus-vita.no](mailto:post@arcus-vita.no)

**Arcus**  
**Vita as**

[www.arcus-vita.no](http://www.arcus-vita.no)