



Bamse Produkter AS

Nabbetorp hovedgård
Nabbetorpveien 99
1636 Gamle Fredrikstad
Org. nr 992 814 942
(+47) 928 99 054
info@bamseprodukter.no

BRUKSANVISNING BAMSE PRODUKTER

Kileputer

Beskrivelse:

Kileputer og skråputer i blå celleplast. Høy kvalitet i materialet gjør at produktene kan brukes ofte og over lang tid uten at egenskapene reduseres. Produktene er lette, har fin temperatur og stabilitet, god friksjon og er passe trykkfaste.

Brukergruppe:

Brukerne er hovedsakelig barn fra nyfødt til barneskolealder, med funksjonsnedsettelse som har utfordringer med posisjonering og motorikk. Brukerne er ofte forsinket i sin motoriske utvikling og har behov for målrettet trening for å fremme den motoriske utviklingen. Behandler er utdannet fysioterapeut, ergoterapeut eller annen ansvarlig voksen i samråd med fysioterapeut eller ergoterapeut.

Bruksområde:

Produkter for god posisjonering i hverdagen og under behandling. Brukes for eksempel under pølle for god balanse- og likevektstrening i sagittal- og frontalplanet for å endre utgangspunktet og fremme god forflytning og bevegelse. Også anvendelig som strekkpute for legg og akillessene. Kileputer og skråputer brukes for god postural oppreisning, symmetri og midtstilling i liggende, sittende og stående. Enkelte puter kan tilby ekstra støtte i barnevogn, stol eller i bilen. Se flere tips til behandlingsmetoder på vår hjemmeside her:

<https://bamseprodukter.no/produkter/enkeltprodukter/kileputer/> og

<https://bamseprodukter.no/produkter/enkeltprodukter/skraputer/> ved å klikke deg inn på ønsket produkt og se lenker til videoer i produktbeskrivelsen.

Sortiment:

Kileputer tilbys i 7 ulike størrelser for ulike behandlingsformål. I tillegg kan det bestilles avrundede skråputer i 10 forskjellige størrelser som også benyttes for posisjonering. Disse kan også kombineres med hverandre. Se hele sortimentet på vår hjemmeside her: <https://bamseprodukter.no/produkter/enkeltprodukter/kileputer/> og <https://bamseprodukter.no/produkter/enkeltprodukter/skraputer/>

Materiale og rengjøring:

Produktene lages av celleplast med lukkede celler, og absorberer derfor verken fuktighet, smuss eller bakterier. Materialet er uten ftalater, latex og andre

toksiske substanser. Produktene er derfor enkle å rengjøre, og kan vaskes med våt klut og såpe, eller et desinfiserende middel.

Gjenbruk og avfallshåndtering:

Vi anbefaler å ta kontakt med nærliggende helseklinikker eller fysioterapeuter for å vurdere om produktene kan gjenbrukes, i stedet for å kastes. Siden produktene er svært slitesterke, kan de ofte benyttes for behandling i mange år. Dersom produktene skal gjenbrukes, bør de desinfiseres med klut og desinfiserende middel.

Dersom produktene skal kastes, leveres de til nærmeste avfallshåndteringsstasjon.

Klassifisering:

Produktene klassifiseres som ikke-sterilt medisinsk utstyr i risikoklasse I. Produktene er CE-merket og samsvarsvurdert etter EU-forordningen for medisinsk utstyr (MDR) (EU) 2017/745. Det foreligger liten eller ingen fare for at produktene kan føre til skade ved bruk for tiltenkte formål.

ADVARSEL:

All behandling skal utføres i samråd med fysioterapeut eller ergoterapeut for å hindre feilstilling eller unødig belastning. Påse at produktet plasseres på et stabilt underlag før bruk. Ved kombinerende av flere produkter må behandler forsikre seg om at produktene plasseres stabilt før barnet plasseres på dem. Forlat aldri et barn uten tilsyn. Dersom en alvorlig hendelse mot formodning skulle inntreffe i forbindelse med utstyret, ber vi om at dette rapporteres til [Bamse Produkter AS](https://bamseprodukter.no) samt vedkommende myndighet i området der behandler og/eller pasient er etablert (i Norge kan du benytte <https://melde.no/>).

