



## **Stikklaken / glidelaken Absorb-Plus EZ (Art. nr. 14811932T)**

### **Bruksanvisning:**

Stikklaken / glidelaken Absorb-Plus EZ plasseres med glideflaten opp og sentreres midt i sengen, med øvre kant litt nedenfor puten.

NB: Markeringssømmen skal følge madrasskantene ved en sengebredde på 90cm. Sidepartiene brettes inn under madrassen.

Vær nøye med at hele kroppen fra skuldre til sete hviler på glideflaten. Sidepartiene på lakenet fungerer som viktige bremseflater slik at brukeren ikke glir ut av sengen. De gir også støtte ved legging og oppreising i sengen.

Stikklakenet / glidelakenet erstatter vanlig stikklaken i tillegg til at det forenkler vending av/for pasient.

### **Vaskeinstruks:**

Kan vaskes på 90 grader.

Tørketromles på maks 70 grader. Det ideelle er å henge glidelakenet til tork, og at det strekkes før opphenging.

Kan strykes på middels høy temperatur, noe som også forbedrer glide-evnen.

### **Størrelse:**

120x180 cm. Glidefeltet er 120x63 cm.

### **Materiale:**

Glidedelen er 100 % spesialvevd polyester i sateng.

Side- og underdel er 100 % polyester.

### **Miljø:**

Kan sorteres som brennbart avfall uten skadelig innvirkning på miljøet.