



Bruksanvisning
SnowComfort kjelke

BANO LIFE

INNHold

SPRENGSKISSE SNOWCOMFORT	3
HÅNDBREMS FOR BRUKER/LEDSAGER	4
FOTBREMS FOR LEDSAGER	4
REGULERING AV NAKKESTØTTEN	5
HVORDAN LØSNE/FESTE SKALLSETET	5
RENGJØRING	6

SPRENGSKISSE SNOWCOMFORT



HÅNDBREMS FOR BRUKER/LEDSAGER



På hver side av kjelken er det håndbrems for bruker/ledsager. Bremseshåndtaket trekkes opp for å bremse

FOTBREMS FOR LEDSAGER



Bremsen er plassert på ståbrettet mellom føttene til ledsager

REGULERING AV NAKKESTØTTEN



Nakkestøtten
reguleres opp og ned
ved å løsne på det
svarte skruerattet

HVORDAN LØSNE/FESTE SKALLSETET



Bardumsetet er festet med 3 (4)
unbracoskruer (4 ved større seter)
og festemutter under setet. Benytt 4mm
unbraco og 10mm fastnøkkel for å
løsne/feste setet.

RENGJØRING

Ikke bruk løsemiddel. Bruk klut med vann og nøytral såpe. La det tørke naturlig, langt fra direkte varmekilder. For å desinfisere tekstilprodukter, bruk typen Sanytol.



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no