


Brukerveiledning


Dusj- og toalettstol M2 200 og 300kg

Designet for bruk ved bading/dusjing og toalettbesøk



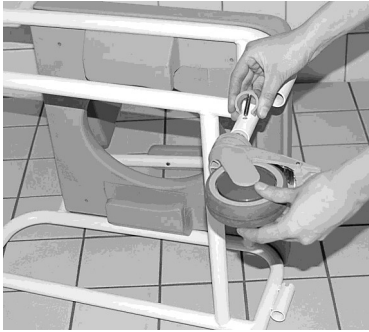


Når du skal monterer hjulet føres det teleskopiske benet opp i røret og låses med klipset i ønsket høyde

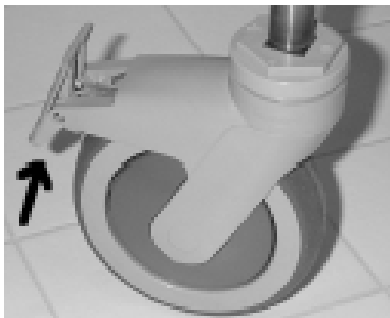

Lås alle fire hjulene når stolen er i bruk til dusj eller toalettbesøk. Det høyre framhjul (mørk grå) har retningssperre som gjør kjøring lettere




Det høyre framhjulet har retningstyring noe som gjør kjøring lettere

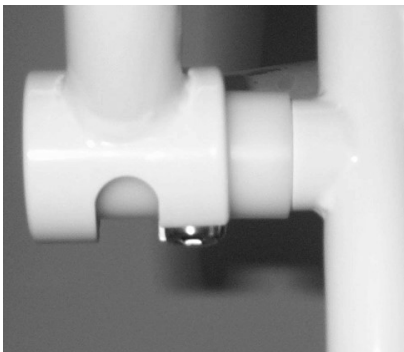

Montere og demontere armlene

For å montere eller avmontere armlene løft opp i loddrett posisjon og før armlenet ut til siden.

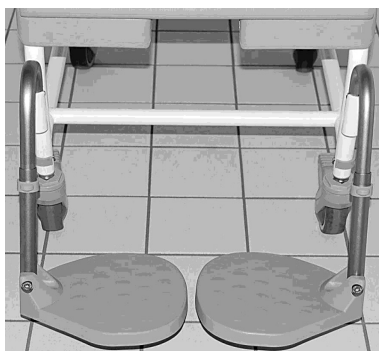

Høyden til benstøtten reguleres ved hjelp av klips. For ekstra plass ved inn/utstigning kan benstøttene svinges sideveis ved å løfte benstøtten. Fotplatene kan vippes opp.



Leggstøtte (tilbehør)
Leggstøtten er festet- og blir regulert med borrelåsen på baksiden.

Viktig! Må vaskes på maks. 80 grader.



Bekkenet skyves inn fra baksiden av stolen.



Unngå å sitte ytterst på setet fordi stolen kan tippe framover



NB! Ikke stå på fotplatene.

NB!

Må ikke benyttes i klorholdige miljøer som f.eks i svømmehaller.

Garanti

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Rammebrudd garanti.

Vi yter 5 års garanti imot rammebrudd på M2-dusj- og toalettstoler.

Garantien gjelder ved fabrikasjons- eller materialfeil og under forutsetning av normalt bruk. Vi gjør oppmerksom på at alminnelig slitasje ikke er dekket av garantien.

Rengjøring:

Produktet kan rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler uten slipemiddel. Etter rengjøringen skal produktet skylles og tørkes. Produktet kan tåle rengjøring opp til 85° C i 3 minutter.



For å unngå at stolen triller under forflytning må alle fire hjulene låses.

NB!

Hvis det er en glatt overflate, er det fortsatt en risiko for at rullestolen skli.



Varodd

Velferdsteknologi



Miljøfyrtårn®

Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand • Postboks 8343 • N-4676 Kristiansand
+ 47 38 14 48 00 • hjelpemidler@varodd.no • Org. nr. 919 571 039
www.varodd.no



HMN since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: +45 4396 2400 - E-mail: info@hmn.dk - Web: www.hmn.dk