

Vaskeveiledning Lück madrasser

Generell informasjon

- Følg instruksjonene på vaskemiddelet
- Kontroller lokale vaskerutiner med hygiene-sykepleieren

Madrasskjerne av kaldskum

- Brukes inkontinestrek er rengjøring av selve madrasskjernen sjelden nødvendig
- Hvis madrassen tross alt må rengjøres anbefaler vi følgende fremgangsmåte:
 - Avtørking med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, ikke klorbasert middel
 - Ved fjerning av flekker, bruk en klut som er oppvridd i lunkent vann
 - Autoklaving 105°C

Inkontinestrek

- Flekker av blod, urin, avføring mm skal først bearbeides med lunkent vann
- Maskinvaskes ved 95°C, sentrifugering og tørketrommel ved maks. 80°C (må ikke overtørkes)
- Avtørking med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, ikke klorbasert middel

Vaskeveiledning ROHO madrasser

ROHOs madrasser kan rengjøres som håndvask eller maskinvask. Så lenge madrassen benyttes av samme bruker er det normalt tilstrekkelig å dusje eller håndvaske produktet. Benytt gjerne desinfeksjonsmiddel, men helst uten alkohol.

Om puten / madrassen er meget skitten - eller det er mistanke om smitte - velg da et kjemisk desinfeksjonsmiddel eller vask i maskin ved 60°C.

Anbefalt desinfeksjonsmiddel: Perasafe eller VIRKON.

Forberedelse

Slipp ut luften av puten eller madrass seksjonen, og steng ventilene.

Legg alltid puten / madrassseksjonen i 40°C vann før de skal vaskes for å løse opp proteiner (f.eks. urin, blod og avføring)

Lukt kan fjernes hvis puten / madrassseksjonen bløtlegges i 7% eddik (1 del eddik og 9 deler vann). La det ligge i 3 - 6 timer

og skyll deretter godt i kaldt vann. Alternativt "Biofresh" i minst 5 minutter.

Maskinvask

Beskytt vaskemaskinen og produktet ved å legge ROHO produktet i et nett eller vaskepose. Benytt flytende vaskemiddel uten blekemiddel (vaskemiddel for kulørt tøy). Et normalt skittent produkt skal rengjøres ved 40°C finvask. Et kraftig skittent produkt skal vaskes / rengjøres ved 60°C finvask .

OBS! Produktene må ikke sentrifugeres eller tørketromles!

Håndvask

Skyll eller dusj produktet med lunkent vann. Tørk av med en klut fuktet med desinfeksjonsmiddel. Skyll eller dusj produktet med vann. Tørketromles ved maks 100°C (må ikke overtørkes).