

Hepro Synkron arbeidsstol For modellene G2- og E2 Synkron



NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:

EN 12182

EN 1335-1, 2, 3

EN ISO 14971

EN 1021 – 1

EN 1021 – 2

EN 60601-1-2


CE

Tilsiktet bruk

Hepro Synkron arbeidsstol er laget for å være til hjelp for personer som har problemer med å stå eller flytte seg til og fra arbeidsplassen. Alle spakene har tydelige symboler og er plassert på høyre side av setet. Bare rattet som justerer strammingen på fjære til tilte-/gyngefunksjonen er plassert under setets forkant. Stolen kan justeres slik at den passer ergonomisk mens den samtidig tar hensyn til kroppens bevegelser. Vinkelen mellom sete og rygg kan endres, men ikke låses. Når sitteenheten tiltes vil vinkelen mellom sete og rygg endres synkront med tiltvinkelen. Dette gjør at ryggen støtter kroppen under hele tiltebevegelsen. Stolen har store hjul og god plass til beina. Den triller lett men står stødig når bremsen er aktivert.

Montering / regulering rygg

Stolen leveres ferdig montert. Hendelen for høyde-reguleringen **A** trykkes inn og ryggen kan skyves opp eller ned

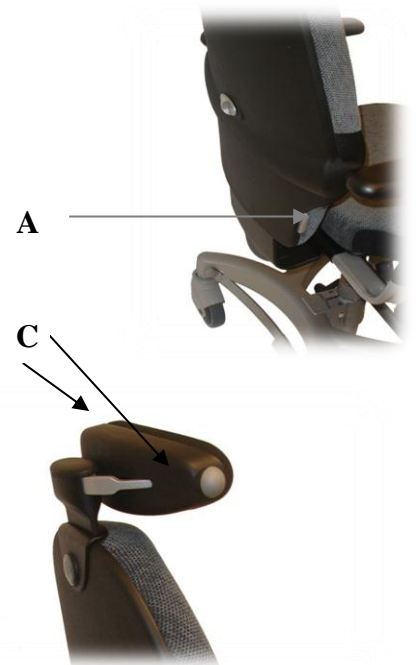

Regulering nakkestøtten

Stolen leveres med nakkestøtte. Støtten kan heves eller senkes ved å dra den opp eller ned. Ved å skru de to knappene **C** på sidene av støtten kan den forskyves forover eller bakover.



Regulering av armlener

Armleneputen kan enkelt skyves frem eller tilbake. Høyden reguleres ved å holde oppe den utvendige knappen og flytte armlenet dit det passer for deg. Hele armlenet kan vippes bort ved å trykke opp plasthendelen helt nederst.

Regulering av sitteenheten

For modeller med gassløft


- Hendel **I** løftes og sittehøyden kan reguleres

For modeller med elektrisk løft

- Bryter **L** regulerer sittehøyden, opp ved å skyve bryteren forover, og ned ved å skyve den bakover.
- Ladepluggen **M** sitter i samme boks som bryteren. Stolen bør lades før den tas i bruk.

For alle Synkron modellene:

- Rattet **G** skrues mot klokka for å åpne sete tilten (sittevinkelen). Vinkelen kan låses i alle posisjoner ved å skru rattet med klokka. Når rattet er i åpen posisjon fungerer sitteenhetens gyngbevegelse.
- Rattet **O** regulerer strammingen på fjæra til tilte- (gyng)bevegelsen. Ved å skru rattet med klokka strammes fjæra.
- Hendel **N** løftes for å regulere setedybden.
- Spaken **J** løftes og for å rotere setet. Setet kan låses i 4 posisjoner (for hver 90-ende grad). For Elektro-modellene bare i 3 posisjoner.

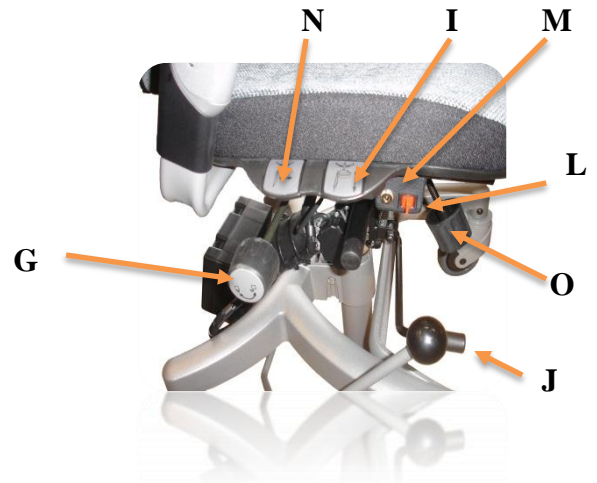

Regulering av bremsespaken

Bremsespaken kan flyttes sidevegs ved å løsne de to unbracoskruene som holder spaken. Spaken kan også flyttes til andre siden. Posisjonen låses ved å stramme skruene. Bruk 2,5 mm unbraconøkkel som leveres med stolen. (Den henger på høyre side i senter av hjulkrysset).

Stolen leveres med bremsespaken regulert helt inn.



Rengjøring

Trekket kan vaskes på 60 °C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.

Garanti

Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll

Dersom stolen er brukt i samsvar med bruksanvisningen yter Hepro 2-års garanti mot material- og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet skal produktets serienummer alltid oppgis som referanse.

- **Sikkerhet!**

Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som "leketøy" for barn. Største tillatte brukervekt er 150 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på bruker og produkt.

- Ikke stå på fotringen! Stolen kan da velte!
- Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, må det vises forsiktighet ved bruk av åpen ild nær stolen