



Hepro MOTO Std.

Hepro MOTO Tilto

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk første gang.

Testet og godkjent i henhold til følgende krav:

EN 12184

MDD 93/42/EEC

CE

Tilsiktet bruk


MOTO Elektrisk Arbeidsrullestol er konstruert og designet for personer som har problem med å utføre en aktivitet stående og problem med forflytning ved hjelp av beina i løpet av aktiviteten. Stolen har elektrisk fremdrift, elektrisk høyderegulering av sitteenheten og er testet og godkjent for innendørs bruk. Gjennom mange justeringsmuligheter tilpasses en meget god sittekomfort og riktig arbeidsstilling.

Montering

MOTO leveres ferdig montert med oppladede batterier. Unbraco-nøkkel for innstilling og justering av teleskopisk benstøtte leveres sammen med denne bruksanvisningen.

Regulering armlene og rygg høyde (Std.)

- Armlene høyden reguleres ved å skru rattet **G**, heve eller senke armlenet til ønsket høyde og deretter skru fast rattet **G**.
- Bredden mellom armlenene reguleres ved å åpne låse-spaken **I**, deretter dra armlenet til ønsket posisjon for så og låse spaken **I**.
- Rygg høyden reguleres ved å klemme inn låse-mekanismen for rygg høydereguleringen **F**, holde den inne mens ryggen heves eller senkes til ønsket høyde.

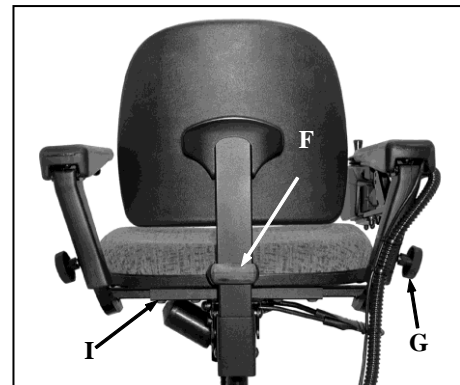

Regulering rygg høyde (Tilto)

Hendelen for høydereguleringen løftes og ryggen skyves opp eller ned til ønsket posisjon. Hendelen trykkes ned igjen for å låse ryggen i posisjon. Stolen kan leveres med Høy rygg (HR) eller Ekstra Høy rygg (EHR). EHR-ryggen har innebygd oppblåsbar korsryggstøtte. Denne betjenes med handpumpen som ved å klemme på pumper luftputen opp, og ved å trykkes inn knappen slipper luften ut igjen.



Oppfelling av armlene

- For armlene uten kontrollerfeste:


En kule under armlenets forkant trekkes fremover samtidig som armlenet løftes. Armlenet går automatisk i lås igjen når det legges ned.

- For armlene med kontrollerfeste:

Kontrolleren skal felles bakover før utløsermekanismen betjenes. En kule under armlenets bakkant trekkes fremover samtidig med at armlenet løftes. Armlenet går automatisk i lås igjen når det legges ned. Det må ikke slippes ned da dette kan medføre skade på kontrolleren.

Regulering av sitteenheten (Std.)

- Spaken **D** løftes og setetilten (setevinkelen) reguleres til ønsket vinkel.
- Spaken **E** løftes og ryggvinkelen reguleres til ønsket vinkel.
- Sittehøyden justeres: Se side 5

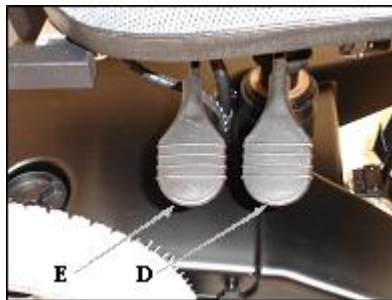



Regulering av sitteenheten (Tilto)

- Spaken **H** løftes og setetilten (setevinkelen) reguleres til ønsket vinkel.
- Spaken **I** løftes og ryggvinkelen reguleres til ønsket vinkel.
- Knappen **N** trykkes inn for å regulere setedybden.
- Rattet **O** regulerer stramningen på fjæra som stabiliserer tilte- (gynge)bevegelsen. Ved å skru rattet medurs strammes fjæra (for tunge brukere) og moturs slakkes fjæra (for lette brukere).



Regulering av kontrollereens posisjon

- For å justere i lengden løses Unbracoskruen G, braketten skyves til ønsket lengde og skruen G trekkes til igjen.
- For å justere i høyden løses Unbraco skruen F, braketten løftes eller senkes til ønsket høyde og skruen F trekkes til igjen.

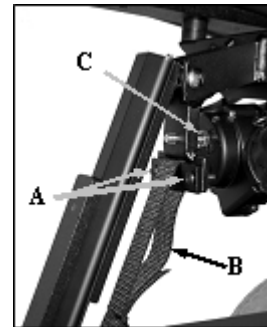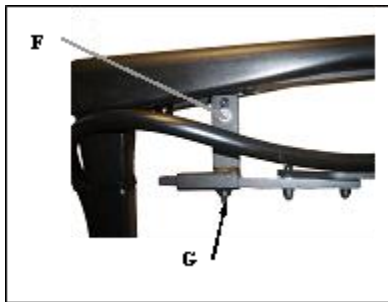


Regulering av benstøtten


- For å justere lengden løsnes skruene A (moturs), stroppen B dras til ønsket høyde er oppnådd og skruene A trekkes til igjen (medurs).

OBS! Stroppen B skal alltid oppta belastningen når fotbrettet er i nedre posisjon.

- Ved å benytte skruen C kan benstøttevinkelen justeres. Låsemutteren på baksiden løsnes, skruen C justeres til ønsket vinkel er oppnådd og låsemutteren trekkes til.
- Ved hjelp av skruene D kan vinkelen på selve forplaten justeres. Løsne låsemutteren først, juster vinkelen med skruen D og dra deretter til låsemutteren.

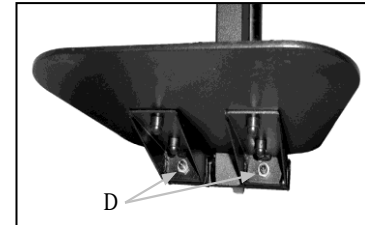

KONTROLLEREN med betjeningsorganer

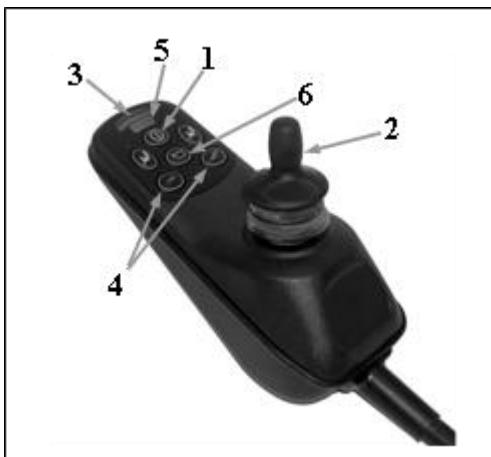

• Når av/på-bryteren **1** trykkes ned en gang, aktiveres kontrolleren og statusindikatoren **3** lyser opp. Trykkes bryteren en gang til brytes strømmen og kontrolleren deaktiveres.

Bryteren må aldri opereres når stolen kjører!

Statusindikatoren **3** viser batteristatus ved normal drift. Oppstår det elektrisk/elektronisk feil begynner den å blinke. Kontakt da servicehjelp.

• Joysticken **2** styrer stolen bevegelser. Stolen forflytter seg i samme retning som Joysticken beveges. Det er avstanden Joysticken skyves ut fra midtstilling som avgjør hastighet og svingradius. Hurtig bevegelse gir rask reaksjon.

Når Joysticken slippes går den automatisk tilbake i midtstilling, og stolens bevegelser stopper.

• Ved hjelp av bryterne **4** kan maks.kjørehastighet endres. Hvert trykk på bryteren regulerer hastigheten et step, høyre bryter øker hastigheten og venstre bryter minsker den. Samtidig viser indikatoren **5** aktuell hastighet.

• Bryter **6** betjener stolens horn (fløyte).

• I posisjon **7** kobles laderen til. Når lader er tilkoblet kan ikke stolen kjøres.

Hev/senk-funksjon av setet

Denne bryteren er som standard plassert under høyre armlene. Bryteren skyves bakover når setet skal heves, og forover når setet skal senkes.



Bremser

Rullestolen har elektromagnetiske bremses som er innkoblet helt til av/på-bryteren aktiveres og Joysticken beveges ut fra hvilestillingen. Slippes Joysticken kobles bremsene automatisk inn igjen.

Ved manuell forflytting av stolen kan bremseeffekten oppheves manuelt ved å vri frioblingsrattene på oversiden av motordekslet til åpen posisjon. (se bildet). Den kan ikke kjøres med Joysticken når den er frikoblet

OBS! Husk å koble til bremsene igjen før stolen tas i bruk!

Lading

Når kontrolleren slås på viser statusindikatoren **3** hvor mye strøm som er i batteriet. Den er ikke 100% nøyaktig, men hjelper til at bruker ikke kjører "tørt".

Avlesning foretas når rullestolen er påslått og står stille. Dersom både Rødt, Orange og Grønt felt lyser er batteriet full-ladet. Når bare Rødt felt lyser, er det lite strøm igjen, og det er tid for opplading.

Dersom en stolpe blinker må opplading foretas umiddelbart.
Dersom flere stolper blinker må servicehjelp kontaktes.

Lading skal bare skje med den medfølgende laderen og den skal tilsluttes 220V standard stikkontakt. Laderen endrer automatisk fra opplading til vedlikeholdslading, og kan derfor alltid stå tilkoblet når stolen ikke er i bruk

Rengjøring

Stofftrekket på sete og rygg kan vaskes ved maksimumstemperatur på 60°C, eventuelt rengjøres med skumrens. Sete- og ryggputer er festet med "snapplås" og kan tas av for rengjøring.

De øvrige delene på stolen rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.
Alle deler og mellomrom kan støvsuges.

Vedlikehold

Stolen trenger ikke spesielt vedlikehold bortsett fra regelmessig lading av batteriene og nødvendig rengjøring.

Det anbefales likevel at Joystikken sjekkes hver gang før kontrolleren slås på. Den skal automatisk gå i midtstilling etter at den er blitt ført ut til alle sider og slippes.
Er det feil på Joystikken må servicehjelp kontaktes.

Henvendelse ved feil

Dersom det oppstår feil eller problemer som krever servicehjelp skal Hjelpemiddelsentralen eller førstelinjetjenesten i kommunen kontaktes.
Ved henvendelse **SKAL** alltid **serienummeret**, som er festet bak på setekryssets høyre side, oppgis.

Garanti

Ved normalt bruk i samsvar med bruksanvisningen yter HEPRO 3-års garanti mot material- og produksjonsfeil.

Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet skal produktets serienummer alltid oppgis som referanse.

Sikkerhet

Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som "leketøy" for barn. Største tillatte brukervekt er 150 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på bruker og produkt.

Kjøring med elektrisk rullestol er forbundet med fare og skal utøves med forsiktighet. Vær oppmerksom på følgende:

- Kjør aldri over forhøyninger over 4cm
- Kjør aldri på skråplan brattere enn 3 grad.
- Kjør aldri i trapper
- Fjern aldri antivelthjulet

Bruk alltid lader og batteri levert eller anbefalt av leverandør. Hvis det benyttes andre typer enn det som er anbefalt, bortfaller garantien.

Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt straks Hjelpemiddelsentralen eller føstelinjetjenesten i kommunen for kontroll.



ADVARSEL

- Selv om polstringen er godkjent motstandsdyktig mot antennelse, så **må** det vises forsiktighet ved bruk av åpen flamme nær produktet, for eksempel ved røyking.
- Stolen **skal ikke** løftes etter armlenene.
- Ikke stå på benstøtten dersom den ikke har støtte mot gulvet.
- Stolen **skal ikke** tas i bruk før Bruksanvisningen er lest og eventuell nødvendig opplæring er gitt.
- Nødvendig opplæring i kjøreteknikk med Joystick **må** gjennomføres på et egnet område, for ikke å skade seg selv, omgivelsene eller rullestolen.
- Rullestolen **skal ikke** kjøres med setet i øvre stilling eller med fotbrettet i gulvet.
- Det **må** utøves særlig forsiktighet dersom rullestolen justeres med sitteenheten løftet over normal sittehøyde eller øvre stilling. Denne type posisjonsjustering **skal** foregå med hastighetsregulatoren innstilt på laveste hastighet.
- Vedlikehold utover det som er beskrevet **skal** foretas av Hjelpemiddelsentralens servicepersonell eller etter avtale med disse.
- Eventuelle spesialtilpasninger **skal** avklares og godkjennes av produsenten.