



## Brukerveiledning/montering

Opus pleieseng


## Sikkerhetsregler

Les bruksanvisningen og følg den.

**Advarsel:** Det er klemfare når sengen senkes fra hevet posisjon.

- ⚠ Se alltid på sengen når du bruker håndbetjeningen.
- ⚠ Påse at ikke noe eller noen er i klemme når sengen betjenes.
- ⚠ Overlat kun håndbetjeningen til en som du vet kan bruke den.
- ⚠ Kjør helst sengen i bunn før den forlates.
- ⚠ Bruk ikke sengen dersom den er i stykker.
- ⚠ Kryp aldri inn under sengen.
- ⚠ La aldri barn leke med eller betjene sengen.

# Betjeningspanel

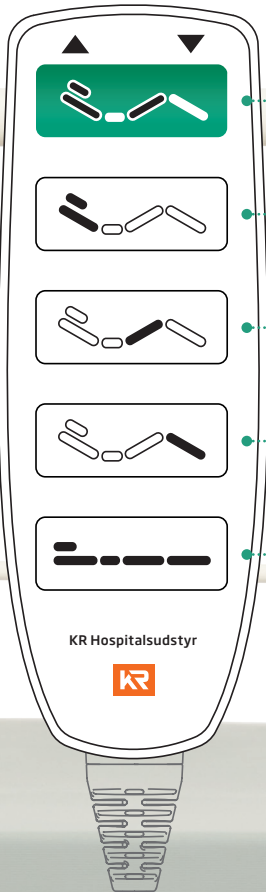

**Regulere opp.**  
**Regulere ned.**

## Grønn knapp

Grønn knapp, sittestilling.  
Regulere rygg- og lårdel opp og ned.

## Ryggdel

Ryggdelen reguleres separat.  
Regulere ryggdel opp og ned.

## Lårdel


Lårdelen reguleres separat.  
Regulere lårdel opp og ned.

## Leggdel

Leggdelen reguleres separat.  
Regulere fotdel opp og ned.

## Høyde

Hele sengen reguleres i høyden.  
Regulere sengen opp og ned.

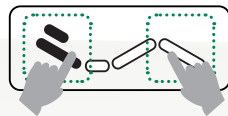

## Reset funksjon


Feil i elektronikken kan resettes ved å trykke på håndbetjeningen.

Begge de viste knapper skal aktiveres samtidig, slik at det kommer et pipe-signal.

Hold knappene inne til signalet stopper. (ca. 5-10 sek.).


## Sentralbrems

Opus kan leveres med sentralbrems.

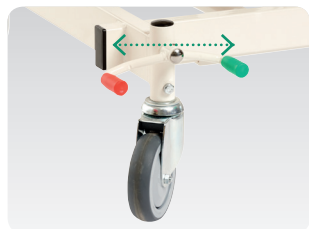


### Nøytral

Hjulene er frikoblet slik at de triller og roterer fritt.

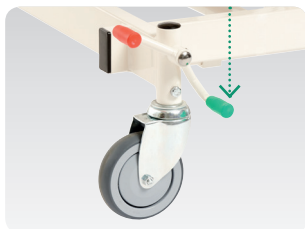

### Grønn = Kjør

Bremsen er frigjort. 2 av hjulene er låst i slik at de ikke roterer. Brukes når sengen skal transporteres.

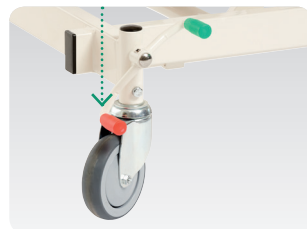



### Rød = Stopp

Hjulene er låst slik at de ikke ruller og ikke kan rotere.

## Sengeforlenger

Opus 1 har innebygget sengeforlenger. Det betyr at sengeflaten kan forlenges inntil 220 cm, 10 cm i hver ende av sengen.

1. Løs fingerskruene under sengesidene i begge ender av sengen.
2. Trekk gavlbreslaget ut til stopp og skru til fingerskruene.
3. Løs fingerskruene under madrassbøylen i fotenden.
4. Trekk madrassbøylen ut til ønsket lengde stram fingerskruer.

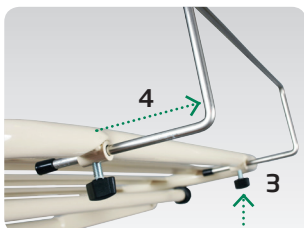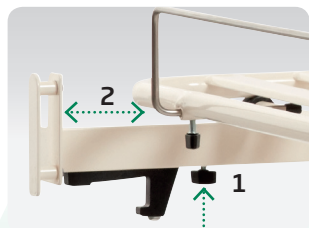

## Løftebøyle


Løftebøylene monteres i sengens hodeende. Den kan plasseres på høyre eller venstre side. Se til at låsebolten plasseres i et av sporene.



## Sengegrind


1. I hodeende plasseres sengegrinden i hullet i sengens sidevange. Sengegrindens låse klammer settes på sengevange.
2. Spenn låsekrokene slik at sengegrinden sitter fast.
3. For å felle sengegrinden ned, trykkes utløserhåndtaket ned slik at sengegrinden frigjøres.
4. Vær spesielt oppmerksom på at feil bruk av sengegrinden kan medføre klemfare. Når sengegrinden felles ned skal man holde hvor det er merket "GRIB HER" på sengegrinden.



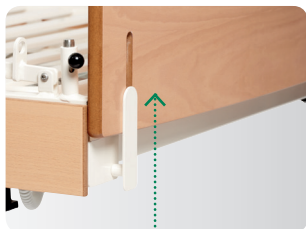

Sengegavlebeslag 2015 design

## Opus i 5 bredder

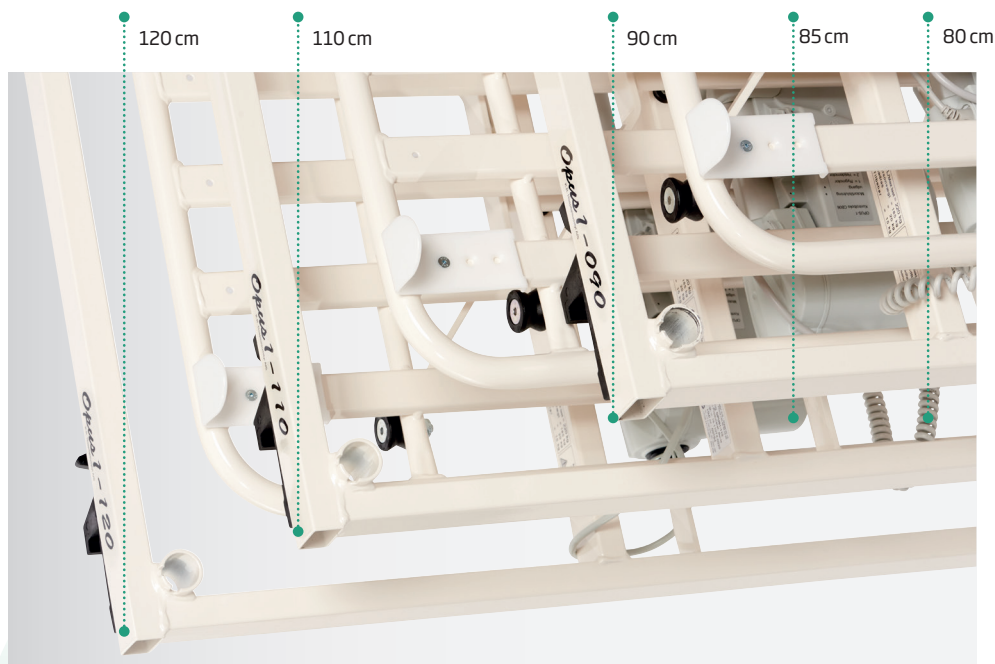



Sengelampe



Infusjonsstativ

Støttegrep leveres i 3 modeller



Støttegrep A



Støttegrep B



Støttegrep C

### Bremser

Sengen kan leveres med 4 bremsehjul.




Bremse frigjort



Bremse låst

## Sengegrinder integrert

Betjening av integrerte sengegrinder.

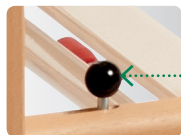

### Sengegrind opp

Løft sengegrinden opp til den går i lås. Man kan også løfte i en ende av sengegrinden om gangen.

### Sengegrind ned

Løft sengegrinden litt opp og før låsegrepet tilbake. Nå kan sengegrinden senkes. Man kan senke en ende av sengegrinden om gangen.

## Rengjøring av Opus Pleieseng


- OPUS Pleieseng kan rengjøres med alminnelige rengjøringsmidler.
- Liggeflaten kan løftes opp, det letter arbeidet.
- Sengen må IKKE vaskes med høytrykksspyler.
- Den skal tørkes etter vask.
- Det elektriske systemet på Opus er i tetthetsgrad IP66.
- Materialene i sengen tåler de fleste rengjøring og desinfeksjonsmidler som vanligvis benyttes innen helsesektoren.
- Materialene i seng og el. anlegg tåler varmt og kaldt vann, avfettningsmidler og teknisk sprit.
- Organiske løsemidler (halogener, hydrokarboner) må ikke brukes.
- Det anbefales å vaske sengen for hånd.
- Sengen kan maskinvaskes og spyles under visse forutsetninger. Se teknisk dokumentasjon for nærmere beskrivelse.







**1**  
Kjør liggeflaten opp i knehøyde og lås bremsen. Ta av gavler.

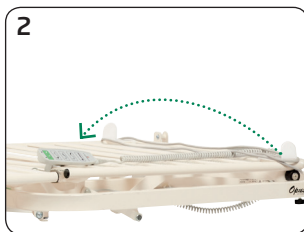

**2**  
Fest håndbetjeningen på liggeflaten og fest nettleidingen på madrassstopperene.




**3**  
Løft ben-liggeflaten opp.




**4**  
Trekk kabellåsen ut og trekk ut kontakten til legg- og lårmotor.




**5**  
Ta kontakten ut av strekk-avlastningen og ta ut stikket til løftmotor.

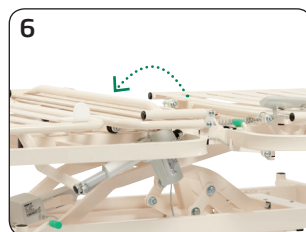

**6**  
Sete-delen felles opp.

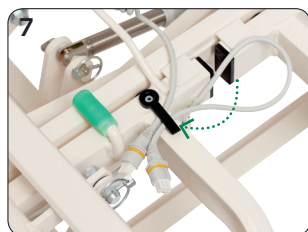


**7**  
Fest kontaktene i holderne.

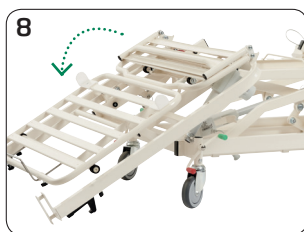


**8**  
Liggeflaten trekkes tilbake og løftes av. Først hodedelen og deretter bendelen.




**9**  
Delene plasseres på hver sin side av underrammen. Se fargekode.

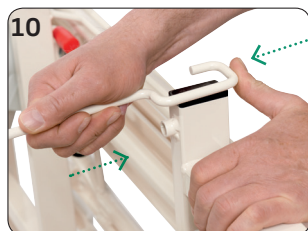


**10**  
Støttestang settes mellom hode- og bendel. Gavleslagene felles ned.




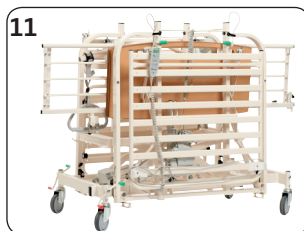


**11**  
Gavler eventuelt sengegrinder henges på plass. Løftebøyle plasseres i røret i bunnrammen. Sengen står nå i transportstilling.

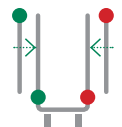


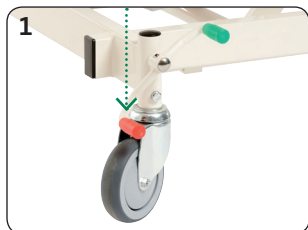

Lås sengens bremses.

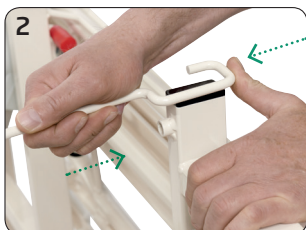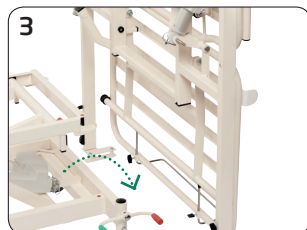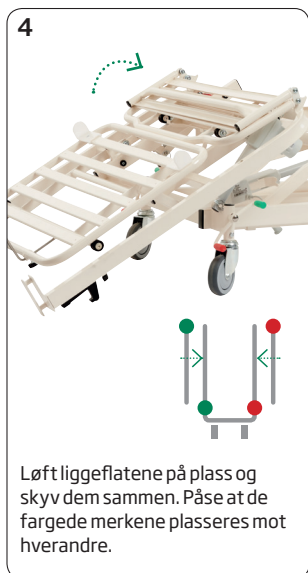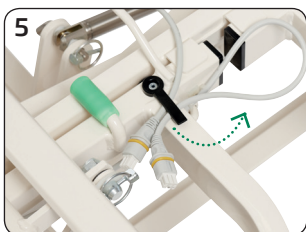Fell opp gavleslag og før støtte-  
stangen inn i holderen.Løft liggeflatene ned fra under-  
stellet.Løft liggeflatene på plass og  
skyv dem sammen. Påse at de  
fargede merkene plasseres mot  
hverandre.Kontaktene tas ut av holderen og  
settes inn i motorene.

Løft ben-liggeflaten opp.

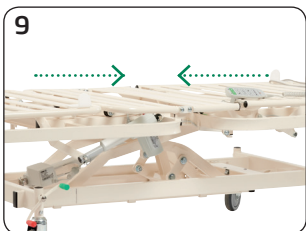Sett kontakten i løftmotoren og  
fest denne i strekkavlastningen.Sett kontakten i lår- og leggmo-  
ten og trykk låsen inn.Ta løs nettledningen og påse at  
liggeflatene er skjøvet helt sammen.  
Legg ned setedelen og test sengen.

Monter gavler, sengegrinder etc.

## Teknisk data

Liggeflate	Opus 85	Opus 90	Opus 110	Opus 120	Opus Kort
4 delt - elektrisk innstilling	X	X	X	X	X
Lengde	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	180 cm
Bredde	85 cm	90 cm	110 cm	120 cm	80 cm
Høyde liggeflate	36-84 cm	36-84 cm	36-84 cm	36-84 cm	36-84 cm
Maks brukervekt	185 kg	185 kg	185 kg	185 kg	145 kg
Maks løftekapasitet (SWL)	220 kg	220 kg	220 kg	220 kg	180 kg

Seng	Opus 85	Opus 90	Opus 110	Opus 120	Opus Kort
Lengde utvendig	214 -234 cm	214 -234 cm	214 -234 cm	214 -234 cm	194 -204 cm
Bredde utvendig	98 cm	104 cm	124 cm	134 cm	93 cm
Frihøyde	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm

Vekt	Opus 85	Opus 90	Opus 110	Opus 120	Opus Kort
Understell	14,0 kg	14,0 kg			14,0 kg
Understell med sentralbrems	18,5 kg	18,5 kg	21,5 kg	21,5 kg	18,5 kg
Sakseløft	25,0 kg	25,0 kg	25,0 kg	25,0 kg	25,0 kg
Overramme hovedende -avtagelig ryggdel	29,5 kg 5,6 kg	30,5 kg 6 kg	33,0 kg 9,0 kg	34,5 kg 10,0 kg	28,5 kg 5,0 kg
Overramme fotende -avtagelig bendel	28,5 kg 5,2 kg	29,5 kg 5,5 kg	35,0 kg 7,0 kg	36,5 kg 8,0 kg	27,5 kg 5,0 kg
Gavler	2 x 6,25 kg	2 x 6,25 kg	2x8,0 kg	8,7 kg	2 x 6,2 kg
Total vekt uten madrass	119,0 kg	120,0 kg	131,0 kg	135,0 kg	111,0 kg

## Elektriske data

### Elektriske data Opus 85, 90, 110, 120

Linak el-system

Kontrollboks	1 x	CB6 "openbus"
Actuator 1 x	LA31 høyde	
Actuator 3 x	LA27	
Håndbetjening	1 x	HB85
Tetthesgrad	IP66	

### Elektriske data Opus K180

Linak el-system

Kontrollboks	1 x	CB09
Actuator 4 x	LA31	
Håndbetjening	1 x	HB75
Tetthesgrad	IP66	

### Støynivå

Sengen støyer mindre enn 51 dB, ved normal bruk.



- forebygging av sykefravær
- oppfølging av sykmeldte
- kurs og opplæring
- arbeidspraksis og formidling
- regnskapstjenester
- velbekomme!
- mekanisk
- emballasje
- søm og profilering
- lagertjenester
- tekniske hjelpemidler