

ReadEasy+

Hurtig Guide

Uttak av kamera

1)



2)



3)



Kontroll

På /Av

Trykk knapp hurtig:

Forrige setning

Trykk og hold:

Forrige avsnitt

Trykk knapp hurtig:

Neste setning

Trykk og hold:

Neste avsnitt


Hurtigere

Saktere

Play /
Pause

**Trykk hurtig & saktere knapp
samtidig:** Bytt stemme/språk


Trykk knapp hurtig:
Tar bilde av side
Trykk og hold:
Ta bilde av en kolonne

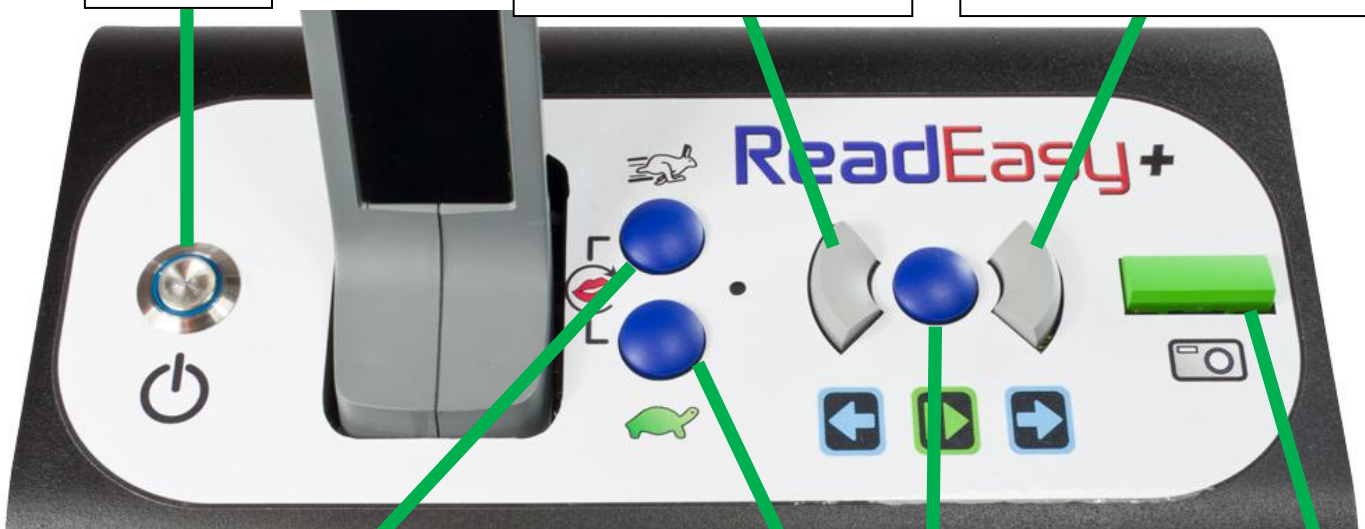

Volum og hodetelefon uttak

For å øke eller redusere volum kun flytt volum kontrollen (skyvemeter). Dette finner du på høyre kortside sentrert på midten.

For å bruke hodetelefoner bare plugg dem inn i hodetelefonuttaket (minijack 3,5 mm). Dette finner du på høyre kortside 4 cm fra fronten og 2,5 cm fra bunnen.

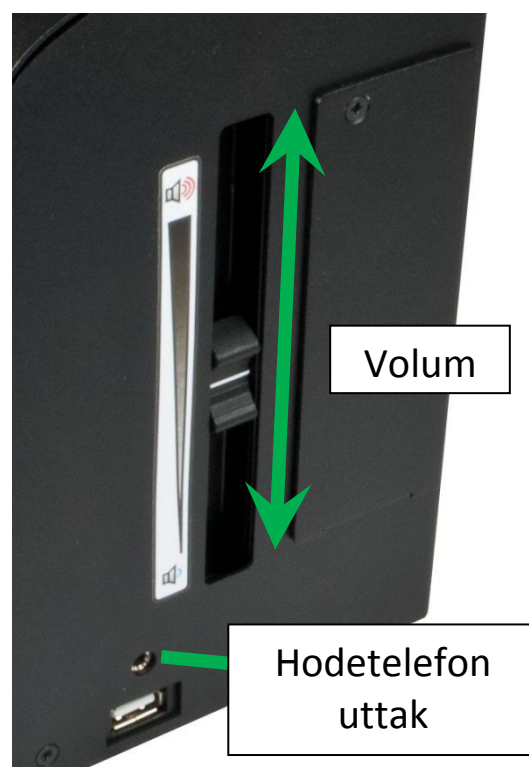

Kontakt informasjon

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din ReadEasy+, vennligst kontakt oss i Tagarno Norge.

TAGARNO
seeing solutions

Tagarno Norge AS, Østre Akervei 24, 0581 Oslo
Tlf: 21951600

Mail: beskjed@tagarno.no Web: www.tagarno.no

Design og produksjon



VisionAid International Ltd

Bridge Lodge,
Spalding Common
Spalding, Lincolnshire
PE11 3AU England

Phone:

+44 (0)1775 711 977

Email:

sales@visionaid-international.com