

ReadEasy+

Hurtig Guide

Uttak av kamera

1)



2)



3)




Kontroll

På /Av

Trykk knapp hurtig:
Forrige setning
Trykk og hold:
Forrige avsnitt

Trykk knapp hurtig:
Neste setning
Trykk og hold:
Neste avsnitt

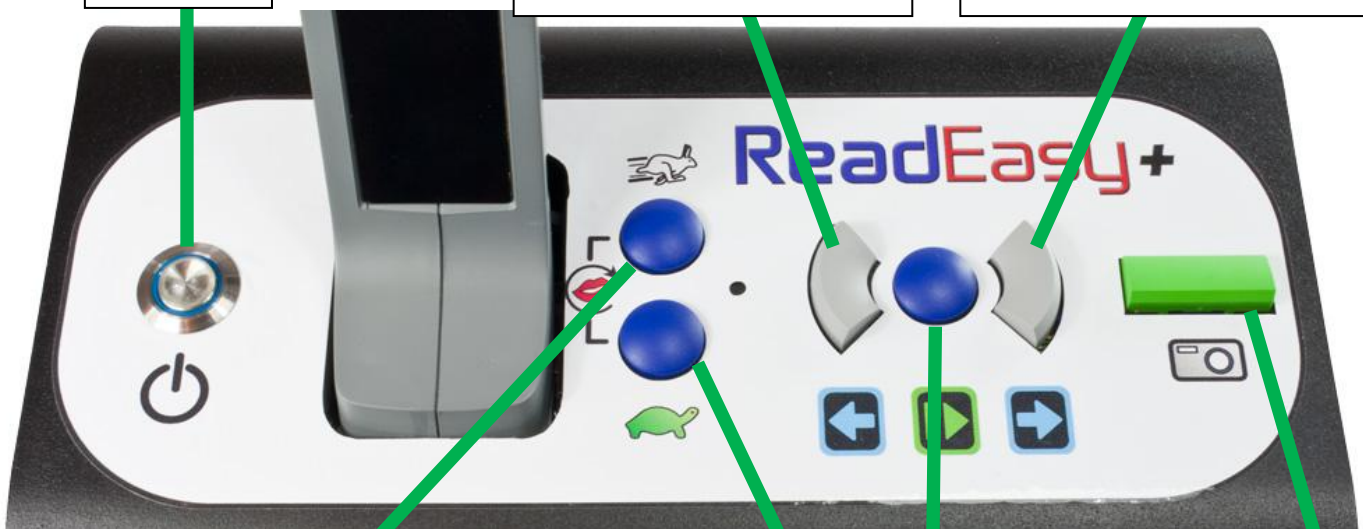


Hurtigere

Saktere

Play /
Pause

**Trykk hurtig & saktere knapp
samtidig:** Bytt stemme/språk

Trykk knapp hurtig:
Tar bilde av side
Trykk og hold:
Ta bilde av en kolonne

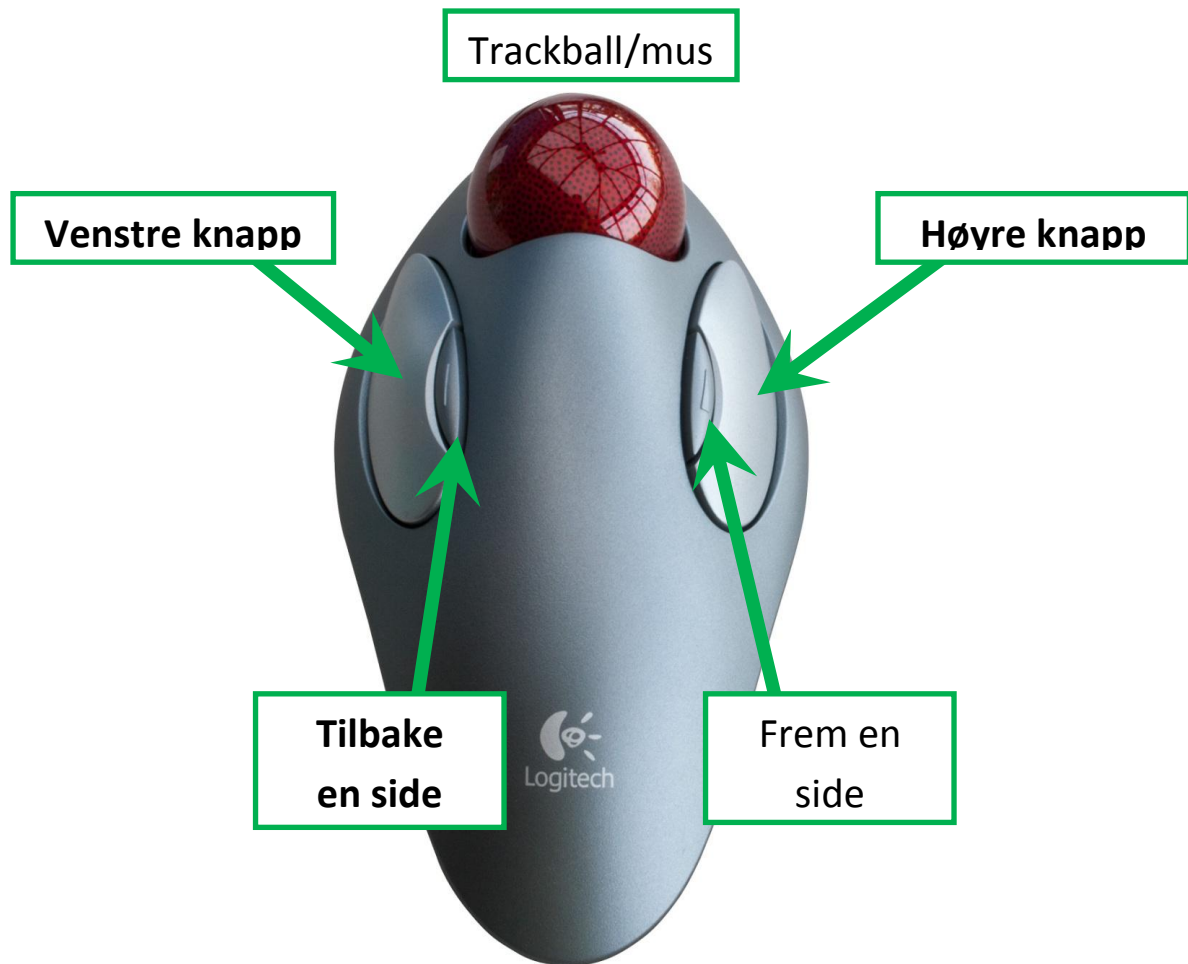

Trackball/mus kontroll for “Low Vision Pack”

Trackball/mus

Brukes sammen med skjerm for å bevege seg rundt i dokumenter som en har tatt bilde av. (I virtuellet X/Y mode.)

Venstre knapp

Enkelt klikk – brukes for å stoppe lesing og for å aktivere nedtrekks menyvalg
Double click – brukes for å starte lesing fra et spesifikt sted og for å velge menyvalg

Høyre knapp

Reservert for fremtidig bruk.

Tilbake og frem en side

De to knappene tillatter deg å bevege deg frem eller tilbake en side tekst om gangen.

Kontrollpanel




Kontrollpanel (tekst)

Dokument håndtering	Side editering	Bokmerker	Innstillinger
Hjelp	Dokument mode/ Fremvisnings metode	Virtuelt X/Y Mode	Zoom inn
Forrige avsnitt	Neste side	Neste avsnitt	Zoom ut
Forrige setning	Play / pause	Neste setning	Neste skjerm med tekst
Forrige ord og staving	Neste side	Neste ord og staving	Ta bilde
Avbryt		Ta flere bilder	

Volum og hodetelefon uttak

For å øke eller redusere volum kun flytt volum kontrollen (skyvemeter). Dette finner du på høyre kortside sentrert på midten.

For å bruke hodetelefoner bare plugg dem inn i hodetelefonuttaket (minijack 3,5 mm). Dette finner du på høyre kortside 4 cm fra fronten og 2,5 cm fra bunnen.

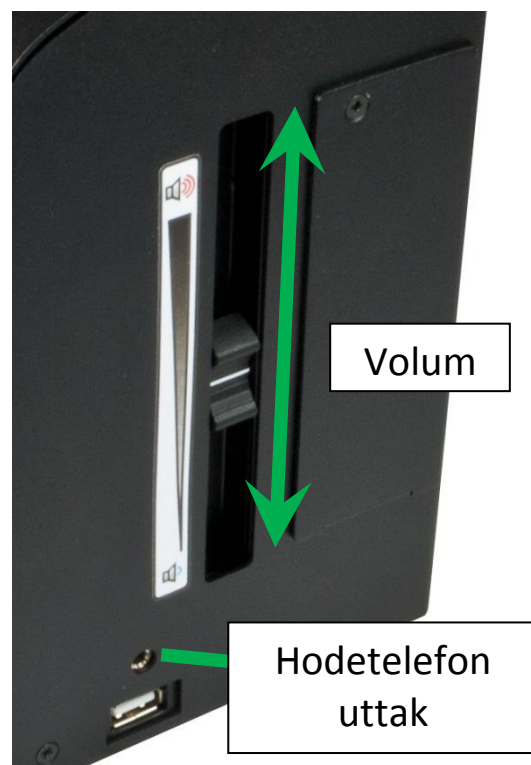

Kontakt informasjon

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med din ReadEasy+, vennligst kontakt oss i Tagarno Norge.

TAGARNO
seeing solutions

Tagarno Norge AS, Østre Akervei 24, 0581 Oslo
Tlf: 21951600

Mail: beskjed@tagarno.no Web: www.tagarno.no

Design og produksjon



VisionAid International Ltd

Bridge Lodge,
Spalding Common
Spalding, Lincolnshire
PE11 3AU England

Phone:

+44 (0)1775 711 977

Email:

sales@visionaid-international.com