

VEDLIKEHOLD – SIKKERHET

For å opprettholde funksjon og sikkerhet bør du regelmessig sørge for at nedenstående gjøres:

- Bruk en myk og fuktig klut for å fjerne støv og smuss. Bruk såpevann for å fjerne vanskelig smuss. Tørk med en myk klut. Følg hygienespesialistens anbefalinger for desinfisering i sykehusmiljø.
- Kontroller at skruer muttere er ordentlig dratt til.
- Dersom ikke ditt gåstativ fungerer ordentlig - ta øyeblikkelig kontakt med din leverandør.
- Produktets forventede levetid er 5 år

Defekt gåstativ må ikke brukes. Utfør ingen inngrep selv!


MERK! Benyttes bare som gåhjelpemiddel. Brukerens maksvekt: P409 135 kg. For inngrep på gåstativet (tilpasninger, mangelfulle reparasjoner etc.), utenfor **INVACARES** kontroll fraskrives ansvar.

ANVISNING FOR DESTRUKSJON AV PRODUKT OG PAKNING:

Når produktet er forbrukt, skal dette med tilbehør og innpakkingsmaterieell sorteres på riktig måte.

På etiketten på P409 finnes all viktig teknisk informasjon.


- 1: Artikkelnummer
- 2: Produktnavn
- 3: Lotnummer
- 4: Produksjonsdato
- 5: Maks brukervekt
- 6: MERK! Se bruksanvisning.
- 7: Beregnet for inn- og utendørs bruk.
- 8: Maks bredde på gåstativet.
- 9: Produsentens navn.

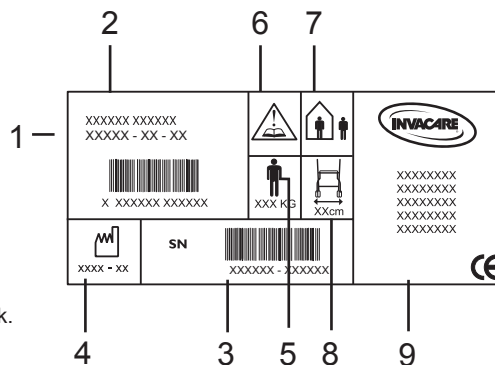

1516319-2 100315



P409 ASTERIA

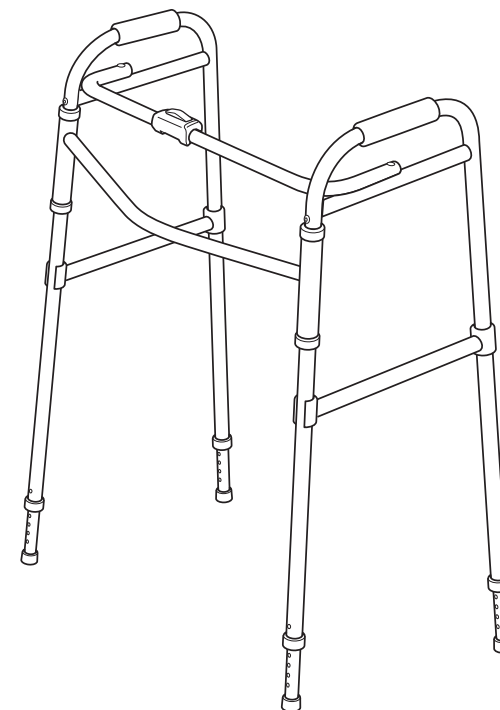

BRUKSANVISNING

Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Gåstativet er tilpasset både innen- og utendørsbruk.

BEREGNET BRUK

Gåstativet er bare beregnet til bruk som gåhjelpemiddel, all annen bruk kan medføre fare for skader.

NB!

Innholdet i denne bruksanvisningen skal kommuniseres til brukeren før gåstolen leveres.

Foreskriveren av hjelpemiddelet må sørge for at brukeren har tilstrekkelig intellektuelle og fysiske evner til å bruke gåstolen.



Produsent:
INVACARE DOLOMITE AB, Växjövägen 303, SE-343 75 Diö, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 98, www.dolomite.biz

Salgsselskaper:
Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo
TEL (47) (0)22 57 95 00, FAX(47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com, island@invacare.com



SIKKERHET


- Kontroller at gåstativet som du har fått er i god stand før du bruker det
- Gåstativet skal være helt utfelt og låst når du går med det. MERK! Benyttes bare som gåhjelpemiddel.
- NB! Sitt ikke på tverrstangen
- NB! Ikke bruk tverrstangen som støtte
- Vis forsiktighet når du går på hel lende underlag.
- Ikke gå opp eller ned i trapper med gåstativet.
- Ikke bruk gåstativet i rulletrapper.
- Ikke overskrid den maksimale brukervekten som oppgis på gåstativets etikett.
- Deler som er utslitt, skadet eller mangler må øyeblikkelig byttes ut av en kvalifisert reparatør.
- Ikke oppbevar eller etterlat gåstativet utendørs.
- Kontroller med jevne mellomrom gåstativets stabilitet og ved behov, at skruer og muttere er dratt til, samt at doppskorna er i god stand.
- Vis stor forsiktighet når gåstativet brukes på våte eller glatte underlag.

REGULERING AV GÅRAMENS HØYDE

Trykk den fjærende låsetappen helt til benet frigjøres. Juster benet til ønsket lengde og kontroller at låsetappen stikker ut fra røret. Alle ben skal ha samme lengde.



Sitt ikke på tverrstangen på grund av tippe risikoen!

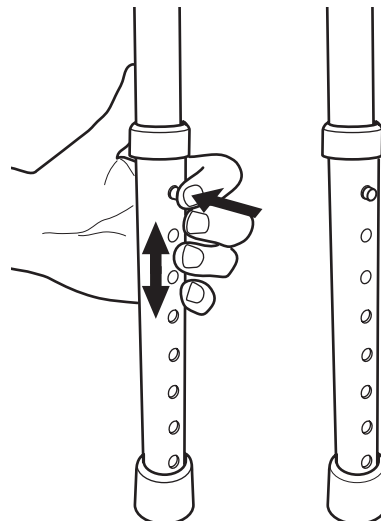


FØR BRUK


Før gåstativet brukes første gang skal all emballasje fjernes.


UTFELLING

Fell ut sidearmene helt til du hører en tydelig klikkelyd. Kontroller at sidearmene **ikke kan folde** inn før gåstativet brukes.

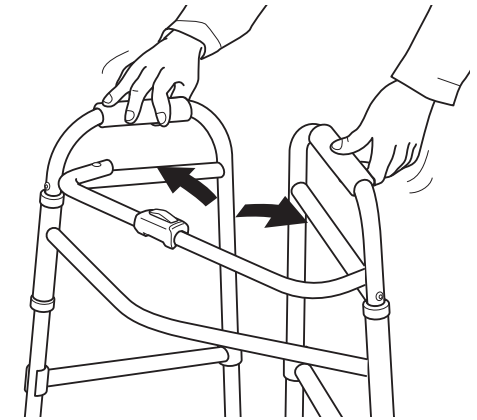


NB!

 Frigjør låseknappen kun hvis du har tenkt å slå sammen gåstolen

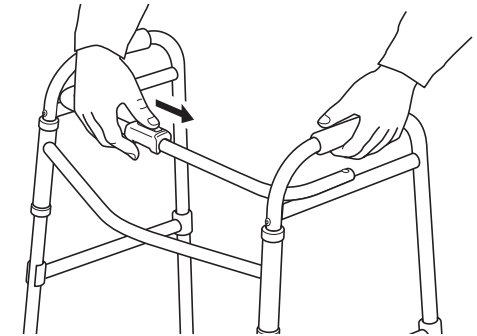

SAMMENFELLING

Trykk låseknappen midt på det øvre tverrstaget og fell inn i sidearmene.

 MERK! Vær forsiktig så du ikke klemmer deg mellom stativdelene.

