

Bruksanvisning Maja hjørnestol

Art.nr. 5501, str.1 Art.nr. 5502, str.2 Art.nr. 5503, str.3



1.0 Innledning	side 1
2.0 Bilde av Maja hjørnestol	side 1
3.0 Sikkerhet	side 1
4.0 Montering av stol/bord	side 2
5.0 Tilpasning av stolen	side 2+3
6.0 Vedlikehold	side 4
7.0 Garanti	side 4

1.0 Innledning

Maja hjørnestol finnes i 3 størrelser. Stolen er designet for barn fra alder 8 måneder som trenger støtte til trening av balanse. Kan brukes hjemme, i barnehagen eller på skolen. Les bruksanvisningen nøye, bruks av stolen skal alltid skje under oppsyn av en voksen.

2.0 Bilde av Maja hjørnestol, fig.1

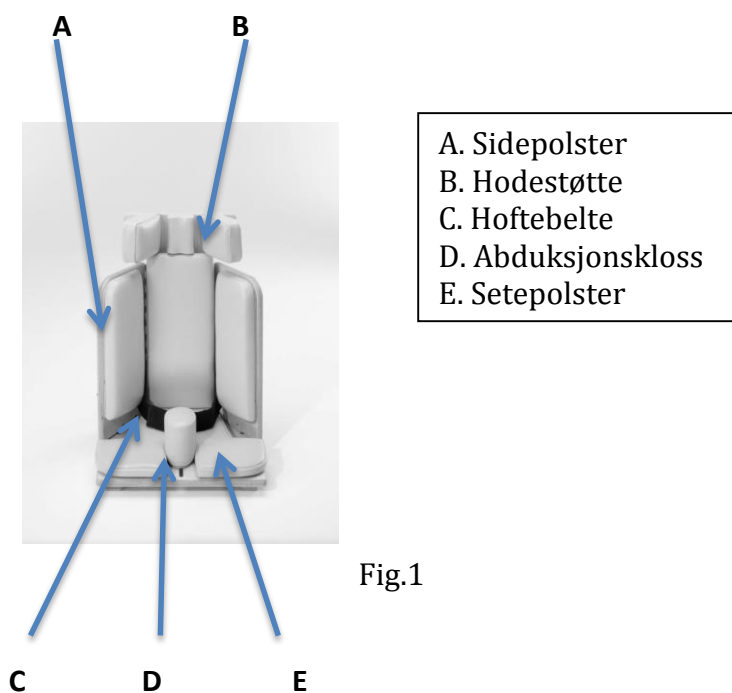


Fig.1

3.0 Sikkerhet

Hold barnet under oppsyn når det sitter i stolen. Finner du feil på stolen skal du kontakte leverandøren (Bardum AS). Bruk innstillingene som er tilgjengelige for å tilpasse stolen til barnet. Stolen skal kun brukes på flatt underlag. Bruk alltid hoftebeltet som følger med. Følg anvisningen for vedlikehold. (Se 6.0). Hold stolen vekk fra åpen flamme eller varmekilder.

4.0 Montering av stol

Skru fast de to føttene med umbracoskruene.

5.0 Tilpasning av stolen

5.1 Abduksjonskloss



Abduksjonsklossen (A) kan reguleres fram og tilbake uten bruk av verktøy. Løsne skruerattet under stolen og finn ønsket posisjon. Skru deretter til skruerattet(Fig.2). Reguleringen er begrenset til sporet som abduksjonsklossen er festet til.

Fig.2

5.2 Sidestøtter

Sidestøttene kan reguleres i høyde og vinkel uten bruk av verktøy.

5.2.1 Vinkelregulering av sidestøtter



Løsne skruerattet (B) på baksiden av sidestøtten og finn ønsket posisjon. Skru deretter til skruerattet. Du kan oppnå større vinkel ved å flytte skruerattet til bakre stilling(Fig.3).

Fig.3

5.2.2 Høyderegulering av sidestøtter



Løsne de to skruerattene bak på sidestøtten (C), finn ønsket posisjon og skru til skruerattene. Gjør denne innstillingen på begge sidestøttene(Fig.4).

5.3 Hodestøtte

Hodestøtten kan reguleres i høyde og bredde og hver av sidestøttene i hodestøtten kan roteres(Fig.4) Høyden på hodestøtten reguleres ved å løsne de to umbracoskruene som sitter i sporet på baksiden av ryggen. Du regulerer opp ryggen og hodestøtten følger med (Fig.4). Bredde og rotasjon av den enkelte sidestøtten på hodestøtten reguleres ved å løsne skruerattet (D).



Hjørnestol innstilt til minimum



Hjørnestol innstilt til maximum

5.4 Hoftebelte

Festes sammen med velcro bånd, bør overlappe minst 75 mm.

6.0 Vedlikehold

- Tørk av polsteret med en fuktig klut med mildt vaskemiddel, IKKE BRUK NOE ANNET!
- Merker på treverket kan pusses forsiktig vekk
- Ikke senk stolen ned i vann
- Hoftebeltet kan vaskes i maskin på lav temperatur med mildt vaskemiddel, henges opp til tørk
- Ikke la stolen stå i direkte sollys

6.1 Sjekk daglig

- Sjekk at stolen er hel og fin
- Sjekk at alle skruer/skrueratt er festet ordentlig
- Sjekk at sidestøttene er festet

7.0 Garanti

Det er 2 års garanti på produktet.

8.0 Kontakt

Leverandør av dette produktet er Bardum AS. Har du spørsmål angående dette produkt skal du kontakte Bardum AS, tlf. 64918060, mail post@bardum.no

