

PreVento Soft 2

Bruksanvisning ver 2.1



	Modell	Artikkelnr	EAN-nummer
Komplett produkt	PreVento Soft	570 408	7350009773157
Luftpumpe	SR313	570 057	7350009773171
Madrass	SR105	570 358	7350009773188

Innehållsförtegnelse

INNHOLDSFORTEGNELSE	2
BRUKSOMRÅDE.....	3
MERKING OG ADVARSLER	3
LEVERANSEINNHOLD	4
PRODUKTBSKRIVELSE.....	4
INSTALLASJONS- OG BRUKSOMRÅDER	5
CPR-FUNKSJON	6
TRANSPORTFUNKSJON.....	6
VIKTIG	6
EGENSKAPER LUFTPUMPE	6
KOMFORTINSTILLNING	7
TEKNISK INFORMASJON LUFTPUMPE	8
TEKNISK INFORMASJON MADRASS	8
VASK OG RENGJÖRING.....	9
OPPBEVARING OG NEDPAKKING.....	10
KILDESORTERING	10
VEDLIKEHOLD OG FEILSÖKNINGSSKJEMA.....	10
GARANTI	11
REKLAMASJON.....	11
SERVICE.....	11
KONTAKTINFORMASJON.....	11

Bruksområde

PreVento Soft statisk trykkavlastende luftmadrass er utviklet for å forhindre forekomst av trykksår, samt behandle allerede oppståtte sår. Trykket fordeles i hele madrassen etter instilt nivå. Slik fordeles trykket jevt på pasienten og forekomsten av trykksår forebygges. Madrassen skal plasseres oppå eksisterende madrass.

Observer!

- Om madrassen brukes i seng med sengegrinder, er laveste anbefalte grindhøyde 32 cm.
- Bruk madrassen etter anvisning fra ansvarlig terapeut/behandler.
- Bruk av madrassen eliminerer ikke behovet for å snu pasienten regelmessig.
- Miljøvilkår ved transport, bruk og oppbevaring: Temperaturen bør være mellom 5°C og 45°C. Luftfuktigheten bør være mellom 15% og 60%.
- Systemet er beregnet for brukervekter mellom 0 og 220 kg.
- Systemet er beregnet for pasienter med medium risiko for å utvikle sår, samt for pasienter i sårstadiet 1-2.

Merking og advarsler



Viktig! Les vedlagte dokumentasjon nøye



Dobbeltisolert (Klasse II)



Declaration of Conformity samsvarende med MDD93/42/EEG

IP42

Beskyttelse mot faste objekter >1mm, beskyttelse mot dryppende vann ved en vinkel på 15°



Type BF utstyr

Leveranseinnhold

Madrass-systemet består av:


- En luftpumpe
- En madrass
- En luftslange
- En skrukork
- Et lagningskit
- En bruksanvisning

Som ekstra tilbehør kan også overtrekk SR604 medfølge leveransen.

Produktbeskrivelse


Kontrollpanel luftpumpe:

1. Strømbryter (OFF/ON)
2. Bryter for vektinstilling

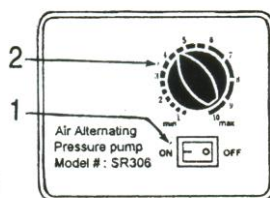

Luftpumpe:

1. El-kabel
2. Stikk-kontakt
3. Luftmunnstykke
4. Opphengskrok

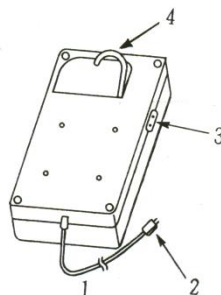

Madrass:

1. Overtrekk (ekstra tilbehør)
2. Madrass
3. Slange-tilslutning/CPR-funktion
4. Festebånd for fixering i sengen



Installasjons- og brukerinstruksjoner

Les gjennom hele bruksanvisningen før madrassen tas i bruk.

Sørg for at bruksanvisningen alltid finnes tilgjengelig for behandlerne.

Installasjon:

1. Madrassen skal plasseres oppå eksisterende madrass (laveste anbefalte madrasshøyde: 7 cm).
2. Madrassen skal plasseres slik at slangen og pumpen kommer ved sengens fotende. Fest madrassens festebånd ved hode- og fotende. Madrassen kan også fylles med luft på annet sted og plasseres i sengen når den er luftfylt.
3. Koble til slangens ene ende til pumpens munnstykke og forsikre deg om at den ikke kan løsne. Skru fast slangens andre ende på madrassens luftventil og forsikre deg om at den er ordentlig fastskrudd. Sørg for at luften kan strømme fritt in i slangen. Pumpen kan plasseres på slett underlag eller henges på f.eks. sengegavelen, ved hjelp av opphengingskroken på pumpens underside.
4. Koble til pumpens kontakt til et eluttag og trykk på strømbryteren på pumpens kontrollpanel. Strømbryteren lyser nå, som en indikasjon på at strømmen er på.
5. Den første fyllingen av madrassen tar ca 30-40 minutter. Ved behov for raskere påfylling, bruk håndpumpen som følger med. Koble den til slangen og pump for hand. Madrassen kan da fylles opp på ca: 5 minutter. Koble deretter på supportpumpen.
6. Skal overtrekket brukes, legg i madrassen og fest overtrekket med trykkknappene. Hvis madrassen fylles på med brukere plassert på madrassen, må du kontrollere at overtrekket og laken ligger rett og er slette når påfyllingen er ferdig.
7. Tilpass deretter komfortstillingen individuelt etter hver pasients behov. Systemet er beregnet for vekt mellom 0 og 220 kg; begynn med å bruke pasientens vekt som retningslinje for foreløpig instilling. Se tabellen.
8. Gjør "håndkontroll" for å kontrollere rett instilling. Det bør være 1-2 cm luft mellom brukeren og bunnmadrassen.
9. Madrassen kan brukes med eller uten tilkoblet pumpe. Hvis pumpen skal kobles vekk; skru løs luftslangen fra madrassens tilkobling og skru i stedet på den korken som følger med leveringen. Forsikre deg om at korken er korrekt fastskrudd. Deretter kan pumpen stenges av med On/Off-knappen. Gjør håndkontroll for å kontrollere lufttrykket.
10. Hvis pumpen kobles bort, må håndkontroll av madrassens lufttrykk skje daglig. For å slippe ut luft; trykk forsiktig ned den svarte bakventilen inni madrassens tilkobling med f.eks. en penn.

CPR-funksjon

Ved hjerte-, lungeredning bør madrassen først tømmes for luft. Dra i det røde båndet ved madrassens hodeende. Madrassen kommer da raskt å tømmes for luft och hjerte-, lungeredning kan utføres. Husk å sette tilbake returventilen og luftslangen/korken når madrassen skal brukes igjen.

Transportfunksjon

Ved transport av pasienten/systemet; skru løs slangen fra madrassens anslutning og skru på den medfølgende korken i stedet. Steng deretter av strømmen til pumpen med On/Off-knappen.

Viktig

- Plasser aldri en vanlig madrass på PreVento Soft.
- Beskytt madrassen mot skarpe gjenstander.
- Plasser ikke varmeelement eller dylikt i nærheten av madrassen. Sørg alltid for at det er ordentlig avstand mellom eventuelle varmekilder og madrassen.
- Bruk alltid vanlige laken sammen med madrassen.
- Forsøk aldri selv å reparere eller modifisere pumpen. Reparasjon må kun utføres av kyndig tekniker.
- Beskytt pumpen for støt.
- Beskytt alltid elektrisk utstyr for vann.

Egenskaper luftpumpe

1. Brukervennlig display; utstyrt med lettanvendt bryter for komfortinnstillinger.
2. Luftpumpen er utviklet og isolert for å minimere lydnivået.
3. Plassbesparende opphengningskrok på baksiden av luftpumpen.

Komfortinnstilling

Komforten kan tilpasses individuelt etter hver pasients behov. Som retningslinje kan nedenstående tabell brukes. Observer at disse verdiene kun er veiledende. Gjør alltid "håndkontroll"; kontroller at det er 1-2 cm luft mellom pasienten og under madrassen.

1 = < 50 kg	2 = 50 - 70 kg	3 = 70 - 90 kg	4 = 90 - 110 kg
5 = 110 - 130 kg	6 = 130 - 150 kg	7 = 150 - 170 kg	8 = 170 - 190 kg
9 = 190 - 210 kg	10 = 210 - 220 kg		

Teknisk informasjon luftpumpe

Artikell nr:	570 057
EAN nr:	7350009773171
Modell:	SR313
Spenning:	220 V
Frekvens:	50 Hz
Strømstyrke:	0,05 A
Effekt:	10 W
Sikkring:	63mA
Mål:	26 x 13 x 9,5
Vekt:	1,2 kg
Testet og godkjent i følge:	SS-EN 60601-1, 60601-1-2
CE-merket:	Ifølge MDD 93/42/EEG

Teknisk informasjon madrass

Artikell nr:	570 358
EAN nr:	7350009773188
Modell:	SR105
Material madrass:	100% PU
Mål:	200 x 85 x 10 cm
Vekt:	2,5 kg
Min/max pasientvekt:	0/220 kg
Branntestet ifølge:	SS-EN 597-1, SS-EN 597-2

Vask og renjøring

For å redusere faren for smittespredning og øke systemets livslengde anbefaler vi at madrassen og pumpen rengjøres regelmessig, og før en ny bruker av systemet.

Viktig:

- Forsikre deg om at madrasssystemet ikke er tilkoblet eluttaket før rengjøring begynner.
- Madrassen må ikke bløtlegges eller i autoklav og Fenol må ikke brukes ved rengjøring.
- Madrassen må ikke tørkes i tørketrommel.
- Hvis madrass-systemet utsettes for smitte, eller fare for smitte, skal det rengjøres og/eller kastes i samsvar med de lokale forskriftene.
- Bruk bare milde rengjøringsmiddel for å rengjøre madrassen og pumpen. Det må ikke brukes høykonsentrerte rengjøringsmidler.

Vask hendene og rengjør arbeidsoverflaten med desinfeksjonsmiddel i følge gjeldende forskrifter, før og etter rengjøring. Hansker, munnskydd og forklær skal brukes hvis det er foreskrevet.

Renjøring overmadrass

1. Tørk av/rengjør overmadrassen med mildt rengjøringsmiddel. Desinfiser hvis det behøves. Bruk bare desinfeksjonsmiddel som ikke kan reagere kjemisk med overmadrassens materiale. Bruk ikke middel som inneholder fenol eller klor, men f.eks. DAX overflatedesinfeksjon eller lignende.
2. Rengjorte områder må tørke godt før laken legges på igjen.
3. Hvis overmadrassen er synlig skittent, kan det tas av og vaskes i maskin i max 95°C.
4. Overmadrassen kan tørkes i tørketrommel eller tørkes i tørkeskap.

Rengjøring madrass

1. Tørk av/rengjør madrassen med mildt rengjøringsmiddel. Desinfisere hvis det er nødvendig. Bruk bare desinfeksjonsmiddel som ikke kan reagere kjemisk med madrassens material. Bruk ikke middel som inneholder fenol eller klor, men f.eks. DAX overflatedesinfeksjon eller lignende.
2. Ferdig rengjort område må tørke godt før eventuelt overmadrassen og laken legges på igjen.

Rengjøring av pumpen

Pumpen og slangen kan rengjøres med fuktig klut og/eller desinfeksjonsmiddel. Spray aldri væske direkte på pumpen.

Oppbevaring og pakking

For å redusere faren for smittespredning bør madrassen og pumpen rengjøres før de pakkes sammen og oppbevares. Sørg for at madrassen og pumpen er helt tørre før de pakkes sammen.

Skru løs slangen fra madrassens tilkobling og ta ut returventilen som sitter inni madrastilkoblingen gjennom ved å dra lett i plastringen. Rull eller Brett sammen madrassen fra hodenden og nedover. Sett tilbake returventilen og skrukorken når madrassen er tømt for luft og sammenrullet.

Kildesortering

Pumpen kildesorteres som elektrisk avfall. Madrassen kildesorteres som brennbart avfall. Eventuelt overmadrass kildesorteres som brennbart avfall.

Vedlikehold og feilsøkingsskjema

Reparasjon av pumpen må kun utføres av kyndig tekniker. Pumpen krever ikke daglig vedlikehold. For å avhjelpe mindre problem, vennligst følg feilsøkingsskjemaet nedenfor. Husk alltid å slå av strømbryteren og dra ut kontakten til pumpen før vedlikehold starter.

Problem	Feilsøking	Åtgärd
Luftpumpen fungerer, men madrassen fylles ikke med luft.	<ol style="list-style-type: none">1. Kan luften strømme fritt i slangen? Har slangen blitt bøyd?2. Lekker luftslangen?3. Er slangen korrekt tilkoblet pumpen?4. Lekker madrassen?	<ol style="list-style-type: none">1. Juster luftslangen så luften kan strømme fritt.2. Bytt ut slangen.3. Koble slangen korrekt.4. Reparer/bytt ut madrassen.
Luftpumpen fungerer	<ol style="list-style-type: none">1. Er elkontakten tilkoblet	<ol style="list-style-type: none">1. Koble elkontakten til

ikke.	uttaget? 2. Er strømbryteren på?	uttaget. 2. Slå på strømbryteren (ON)
-------	-------------------------------------	---

Hvis skjemaet over ikke løser problemet; vennligst kontakt Parir AS, se nedenfor.

Garanti

Garantitiden er 2 år for pumpen og madrassen. Normal slitasje eller uaktsomhet omfattes ikke av garantien.

Reklamasjon

Kontroller produkten nøye ved mottagelsen. Reklamer umiddelbart hvis det oppdages feil, eller hvis produktet har blitt skadet under transporten.

Ved reklamasjon, kontakt vår kundetjeneste på tel 64 94 59 60 fax 64 94 59 61 eller e-post: post@parir.no. Vær forberedt på å oppgi hvilken produkttype det gjelder, ved behov produktets serienummer, samt en beskrivelse av feilen/problemet.

Service

For behov av service, kontakt vår serviceavdeling på tel. 64945960 eller fax 64945961.

Kontaktinformasjon

Importør/distributør:

Parir AB
Åldermansvägen 19-21
171 48 Solna, Sverige

Norge:

Parir A/S
Drøbakveien 255
1430 Ås

Tel: 08-556 241 20
Fax: 08-556 252 50
E-post: info@parir.se

64945960
64945961
post@parir.no

Autorisert representant (EU):

Carilex Medical GmbH
Turmbergstrasse 9A
76227 Karlsruhe
Germany

Produsent:

Suzric Enterprise Co. Ltd
No 77, Keji 1st Rd, Guishan Township
Taoyuan County (333)
Taiwan

Artikelnummer bruksanvisning 570 069. EAN-nummer bruksanvisning 7350009773294.

Copyright Parir AB, 2011. Innehållet i denna bruksanvisning må ikke kopieres uten tillatelse fra Parir AB.



7 350009 773294