

# Bruksanvisning - Dinky armstøtte for toalett

## Introduksjon

Dinky armstøtte for toaletter er laget med pulverlakkerte stålrør med en monteringsplate på veggen. Den er hengslet med et støttestag som tillater at den felles opp og låses i oppreist posisjon. Dinky har et høydejusterbart støtteben som hjelper når ekstra støtte er nødvendig.

## Bruksanvisning

Monteringsplaten leveres med ferdig borede hull for fastskruing på veggen. Den bør monteres av en kompetent person og festes til en vegg som kan tåle den vertikale belastningen den utsettes for ved bruk.

## Justering av støtteben

For å justere høyden på benet, ta tak i hurtiglåsen med tommel og pekefinger og dra den ut. Dra benet ut til ønsket posisjon og dytt låsen tilbake i hullet på benet. Støttebenet justeres med 8x25 mm intervaller. Høydejustering fra 725 til 925 mm. **MERK:** Bestem benhøyde før armstøtten monteres fast i veggen.



Hurtiglås

For å justere høyden på benet, ta tak i hurtiglåsen med tommel og pekefinger og dra den ut. Dra benet ut til ønsket posisjon og dytt låsen tilbake i hullet på benet. Støttebenet justeres med 8x25 mm intervaller. Høydejustering fra 725 til 925 mm. **MERK:** Bestem benhøyde før armstøtten monteres fast i veggen.

## Vedlikehold

Armstøtten er designet for minimalt med vedlikehold og trenger kun i blant å tørkes av med en fuktig klut. Bruk vanlige butikkjøpte rengjøringsmiddel og varmt vann. Ikke bruk kraftig oppløsende/etsende midler! Kontroller regelmessig festet i veggen og vippepunktene for støtte og ben. Tåler vask med vann opp til 85 °C.

## Spesifikasjoner

| Artikkelnummer | Hjelpemiddelnummer | Lengde | Maksimal brukervekt |
|----------------|--------------------|--------|---------------------|
| 091357037      | 199606             | 740 mm | 125 kg              |

## Garanti

Dinky har 1 års garanti fra kjøpsdato på fabrikk- eller materialfeil. Vennligst ta kontakt med din forhandler dersom du oppdager en feil. Produsent og leverandør vil ikke påta seg ansvar for eventuelle skader på personer eller eiendeler som en følge av feilbruk eller ignorering av instruksjonene over.