



Starfish Badestol

Bruksanvisning



Innhold

Om Starfish badestol

Side 3

Reservedelsliste og teknisk informasjon

Side 4-5

Montering av Starfish badestol

Side 6-8

Tilpasning av Starfish badestol

Side 9-13

Sikkerhetsinstruksjoner

Side 14

Vedlikeholdsinstrukser

Side 15

Gjennomgang av produktet

Side 16

Kontaktinformasjon

Side 17

Om Starfish badestol

Starfish Badestol er ment for bruk i dusjen eller i badekaret. Bruk i dusj bør også innebære bruk av Starfish understell. Annbefalt brukergruppe er handikappede barn i alderen 1-18 år. Badestolen er designet for best mulig funksjonalitet og enkle justeringsmuligheter. Stolen har vinkeljusterbare ben, samt vinkeljustering i ryggen og for bena til bruker, og tilbyr derfor et stort utvalg av muligheter for vinkling til å passe hver enkelt bruker. Justeringene krever kun en hånd for å betjene. De polstrede sidestøttene gir økt beskyttelse og støtte.

Rammen på Starfish badestol er laget i aluminium. noe som gjør den enkel å løfte og bære. For enkel oppbevaring og transport kan badestolen flatpakkes, og er også utstyrt med antiskli-skum på bena for trygg plassering i badekar. Sete er dekket med et ekstra mykt og pustende mesh-materiale som er avtakbart i forhold til vask. Starfish badestol er tilgjengelig i 4 størrelser. Maksimalbrukervekt for Starfish er 72 kg.

Reservedelsliste

Artikkelnummer:

	Beskrivelse
92152411	Starfish Badestol, str. 1, uten trekk
92152412	Starfish Badestol, str. 2, uten trekk
92152413	Starfish Badestol, str. 3, uten trekk
92152414	Starfish Badestol, str. 4, uten trekk
921525	Høydejusterbart understell med hjul

	Beskrivelse
9215240102	Bath Chair Cover – Size 1 – Ocean Blue
9215240202	Bath Chair Cover – Size 2 – Ocean Blue
9215240302	Bath Chair Cover – Size 3 – Ocean Blue
9215240402	Bath Chair Cover – Size 4 – Ocean Blue
9215241102	Chest Belt Strap – Ocean Blue
9215242102	Abduction Strap – Size 1 & 2 – Ocean Blue
921527	Abduction Strap – Size 3 & 4 – Ocean Blue
9215243102	Head Laterals – Ocean Blue
9215244102	Hip Belt – Ocean Blue

Teknsik informasjon

Brukervekt og brukerhøyde			
Størrelse	Maks. brukervekt (Kg)	Min. brukerhøyde (cm)	Maks. brukerhøyde (cm)
1	72	80	100
2	72	90	120
3	72	110	140
4	72	130	165

Spesifikasjoner				
Størrelse	1	2	3	4
Hodestøtte	15 cm	15 cm	8.5" (215)	8.5" (215)
Rygghøyde	35 cm	40 cm	46 cm	55 cm
Setedybde	22,5 cm	27,5 cm	33,5 cm	40 cm
Setebredde	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Benstøtte	26 cm	26 cm	34 cm	34 cm
Total lengde	97,5 cm	105 cm	131 cm	149 cm
Setehøyde	50-42,5 cm	50-42,5 cm	50-42,5 cm	50-42,5 cm

Montering av Starfish badestol

*****VIKITG*****

Pakk forsiktig ut produktet, og pass på at du har fått med følgende deler:

- 1) Ramme
- 2) Trekk
- 3) Hoftebelte
- 4) Brystbelte

Om noe mangler, kontakt Hjelpemiddelspecialisten AS umiddelbart.

Festing av trekket

- 1) For å feste trekket på rammen heves først benstøtten til den øverste posisjonen.
- 2) Dra trekket over ryggen først, deretter drar man bunne av trekket over fotstøtten.
- 3) Når trekket er sikret, festes løkkene rundt rammen, slik at trekket sitter fast i rammen.



Feste av hoftebelte

Når brukeren sitter i stolen føres beltet rundt stolen og bruker. Pass på at beltet går igjennom de blå slissesporene festet på rammen for å forsikre deg om at beltet sitter på plass. Sikre med kroken, og fest borrelåsfestet.



Feste av brystbelte

Når brukeren sitter i stolen føres beltet rundt stolen og bruker. Sikre med kroken, og fest borrelåsfestet.

Feste av abduksjonsbeltet

Dra abduksjonsbeltet rundt rammen og sikre den på undersiden med kroken og fest borrelåsfestet.

Feste av sidestøttene

Når brukeren sitter i stolen føres beltet rundt stolen og bruker. Sikre med kroken, og fest borrelåsfestet.

Montering av Starfish til understellet

- 1) Juster lengde på rammen ved å løsne håndskruene på undersiden av understellet og dra rammen slik at det korresponderer med innstilt posisjon på badestolen. Pass på at håndskruene strammes godt igjen etter at justeringen er utført, for å sikre brukers sikkerhet.



- 2) Posisjoner badestolens ben inn i sporene og sikre de på plass med medfølgende borrelåsfeste.



MERK: Når understellet står stille, påse at alle fire svingjulene er låst og peker vekk fra selve understellet.

Tilpasning av Starfish badestol

Tilpasning og bruk av dette produktet bør utføres av en person med tilstrekkelig opplæring og som er kjent med generelt bruk av hygieneprodukter.

Denne personen kan videreføre ekspertise til foreldre og assistenter på hvordan produktet justeres - i tillegg til å og opprettholde funksjonalitet gjennom generelt vedlikehold på produktet.

ADVARSEL:

Putt aldri fingrene under de svarte klaffene på rammeleddene.
Disse utgjør en klemmefare og kan påføre personskade.



Høydejustering

Starfish Badestol kan høydejusteres for å tillate en rekke posisjoneringsmuligheter i badekaret. Høyden justeres ved å dytte ned de nederste blå spakene på siden av badestolen. Stolen er designet for enkel tilpasning og denne justeringen kan gjøres med kun en hånd på begge sider av stolen.

MERK: Aldri juster bena foran og bak samtidig. Juster først et ben, og deretter det andre. Juster aldri høyde på stolen mens barnet sitter i badestolen.



Ryggvinkeljustering

Ryggvinkeljusteringen på Starfish Badestol tillater fire forskjellige posisjoner. Vinkelen justeres ved å trykke ned den øverste blå spaken på en av sidene på stolen. Justeringen er utført når man hører ryggen "klikker" i posisjon.

MERK: Før man justerer vinkelen på ryggen bør det alltid konsulteres med barnets medisinske annsvarlig/fysioterapeut at dette ikke påvirker åndedretten til barnet.



Bakben/Tiltjustering

Det bakre benet på Starfish Badestol kan justeres over 90° for å oppnå en mer markant tilt på stolen. Bakbenet justeres ved å trykke ned den nederste blå spaken på en av sidene på stolen - Justering er utført når benet "klikker" i posisjon.

MERK: Hver gang det justeres på det bakre benet må det legges vekt på tippefare. Dersom stolen tipper bakover med bruker i stolen kan dette påføre personskaade.



Justering av benstøtte

Benstøtten på Starfish Badestol tillater fire forskjellige posisjoner. Vinkelen justeres ved å trykke ned den øverste blå spaken på en av sidene på stolen. Justeringen er utført når man hører Benstøtten "klikke" i posisjon.



Justering av brystbelte

For å justere brystbeltet, posisjoner skumputene under brukerens armhuler. Sikre beltet med kroken og borrelåsfestet.

Justering av abduksjonsbelte

Etter at abduksjonsbeltet er festet til stolen, posisjoneres brukerens ben og sikres med krok og borrelåsfeste.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Les hele bruksanvisningen før bruk.
2. Ikke la stolen i bruk uten oppsyn.
3. Bruk bare Starfish komponenter og tilbehør til badstolen. Hvis du ikke gjør det, blir garantien for produktet ugyldig.
4. Hvis en del på produktet skulle være ødelagt, vennligst kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS umiddelbart.
5. Før du setter brukeren i stolen, må du sørge for at alle posisjonsjusteringer er utført og sikret.
6. Den eneste justeringen som skal gjøres under bruk, er ryggvinkeljusteringen. Hold den på ryggen ved håndtakene på toppen av rammen mens du justerer vinkelen.
7. Maksimal vektgrense for alle Starfish badestoler er 72 kg. Denne vektgrensen må ikke overskrides.
8. Når understellet er stasjonært, sørg for at alle de 4 hjulene er låst og vender bort fra rammen.
9. Mens brukeren er i stolen med understellet, må det unngås å kjøre den over ujevne overflater.
10. Transport av brukeren i produktet gjøres ved å bruke håndtakene på toppen av ryggstøtten.
11. Produktet må aldri settes igjen på en skrånende overflate, og husk alltid å låse hjulene når produktet ikke blir flyttet.

Vedlikeholdsinstruksjoner

- 1) Starfish badestol må rengjøres med jevne mellomrom.
- 2) Ikke bruk etsende eller korroderende rengjøringsmidler på rammen, da dette kan ødelegge overflatestrukturen og gjøre den mindre sikker. Bruk mildt såpevann eller antibakteriell spray ved rengjøring. Ved grundigere rengjøring kan det brukes en damprensler med lavt trykk. Det må ikke brukes løsningsmiddel til rengjøring av plast- og metallkomponenter, da dette kan skade/ ødelegge komponentene og på lengre sikt utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- 3) Trekkene kan tas av stolen og vaskes i maskin på 60°. Eventuelt tilbehør bør rengjøres for hånd med mildt såpevann. Unngå etsende eller korroderende rengjøringsmidler. Det anbefales at det utføres noen form for medisinerings mens bruker er i stolen, da dette kan blande seg med badevannet og oppløse limet som fester polstringen til stolens ben.
- 4) Etter at stolen er rengjort, må den tørkes godt før neste bruk.

Gjennomgang av produktet

For å forsikre deg om trygg bruk av Starfish badestol anbefaler vi daglige inspeksjoner av følgende:

- 1) Kontroller alle justeringsspaker før bruk.
- 2) Kontroller alle festemekanismer for trekk og belter etter slitasje. Reservetrekk og nye belter kan bestilles via Hjelpemiddelspesialsten AS.
- 3) Pass på at alle de fire hjulene på understellet ruller fritt og låser seg sikkert.

***MERK: DERSOM DET OPPSTÅR NOEN BEKYMRINGER RUNDT
PRODUKTET OG FORTSATT TRYGG BRUK AV STOLEN,
VENNLIGST KONTAKT HJELPEMIDDELSPELIALISTEN SÅ
RASKT SOM MULIG.***

Garanti

Garantiene på Starfish Badestol er som følgende:

- Understell - 2 års garanti
- Badestolrammen - 2 års garanti
- Trekk og belter - 1 års garanti

Dersom produktet ikke brukes i henhold til forskrifter i denne bruksanvisningen og for ment bruk av produktet faller garantiene på produktet bort.

Kontaktinformasjon

Skulle det oppstå noen problemer eller spørsmål rundt bruken av Starfish badestol, vennligst bruk følgende kontaktinformasjon:



Hjelpemiddelspesialisten AS, Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Telefon: 66 81 60 70 **E-post:** firmapost@hm-spes.no **Internett:** www.hm-spes.no