



brukerveiledning

DuoMotion 24 dusj- toalettstol

Forord

Kjære kunde.

Vi gratulerer med deres nye dusj- og toalettstol.

Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir grunnlag for sikker og riktig bruk.


Veiledningen beskriver montering, bruk, vedlikehold og rengjøring av produktet.

Veiledningen må leses nøye før produktet tas i bruk og skal alltid være tilgjengelig for alle brukere av produktet.

Innholdsfortegnelse

	Side
1. Dusj- toalettstolen består av -----	3
2. Bruksområde -----	4
3. Sikkerhetsinstruksjoner -----	4
4. Montering -----	5-6
5. Montering brems og drivhjul -----	7
6. Brems svinghjul -----	8
7. Benstøtter -----	8-9
8. Renhold, vedlikehold, gjenbruk -----	9
9. Tekniske data -----	10
10. Merkeskilt -----	10
11. Garanti -----	11
12. Kassasjon -----	11
13. Produsent og Leverandør -----	11

Dusj – toalettstolen består av

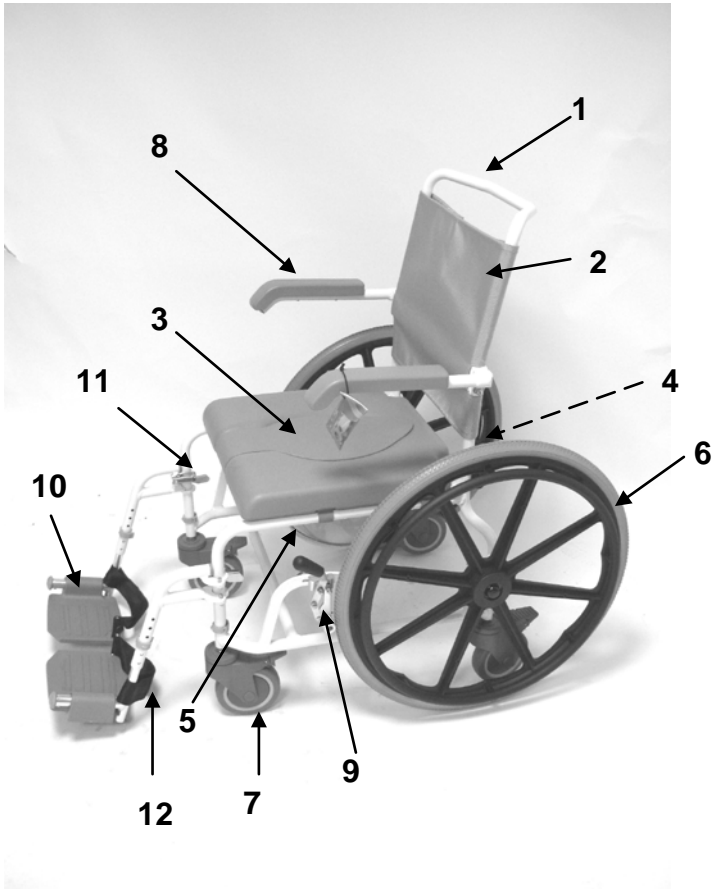

- 1 Skyvebøyle
- 2 Rygg
- 3 Sete lokk
- 4 Monteringsskrue rygg
- 5 Toalettbøtte med lokk
- 6 24" Drivhjul
- 7 Svinghjul med brems
- 8 Armlen
- 9 Brems for drivhjul
- 10 Benstøtte
- 11 Benstøtte lås
- 12 Hæl kappe

Bruksområde

Dusj – toalettstolen er beregnet for bruk ved toalettbesøk. Ved å fjerne bøtten kan stolen kjøres over toalettskålen. Den kan også brukes som toalettstol med bøtte eller i dusjen, på badet eller hvor man skulle ønske. Den er kun beregnet til innendørs bruk.

Med god komfort, armlen og benstøtter er stolen godt egnet til forflytning mellom for eksempel bad og soverom.

Den gode intimåpningen i setet gjør den svært godt egnet til intimhygiene for personer med nedsatt funksjon.

Sikkerhetsinstruksjoner


- Les brukerveiledningen nøye.
- Kontroller alle komponenter for skade og feil før produktet tas i bruk.
- Kontroller at seteplaten er riktig montert og er forsvarlig festet før produktet tas i bruk.
- Når man setter eller reiser seg eller når seteplaten eller lokk tas opp eller ned vil det kunne være fare for å få klær eller kroppsdeler i klem.
- Når armlen eller fotstøtter betjenes vil det det kunne være fare for å få klær eller kroppsdeler i klem.
- Når bøtte tas ut eller settes inn vil det kunne være fare for å få klær eller kroppsdeler i klem.
- Bremsen skal **alltid** være på når stolen brukes i dusj eller ved toalettbesøk. Bremsen løsnes kun ved forflytning av stolen.
- Ved inn eller utstigning av stolen, sving benstøttene til siden.
- Stå **aldri** på fotplatene.
- La aldri barn leke med stolen og forebygg utilsiktet bruk og uhell ved alltid å låse bremsene når stolen forlates.

Montering



Monter svinghjulene ved å sette dem inn i rammerøret. Sett inn låsesplinten i ønsket hull. Man kan velge mellom 4 forskjellige setehøyder fra 50cm til 57cm.

Påse at alle hjulene er montert i samme høyde.

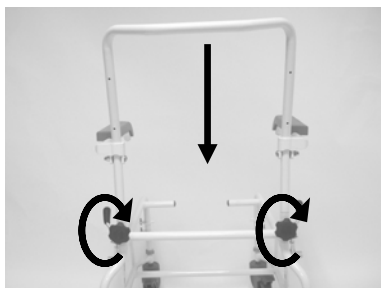

Monter ryggen ved å sette den ned i rammen og skru til festeskruene på begge sider.



Monter setet på rammen som vist på bildet. Påse at alle klipsene låser om rammerørene.



Ryggtrekket kan tas av for renhold etc. ved å åpne låsene og trekke det ut over armlenene.

Monteres ved å trekke inn over armlen og feste bak med låsene. Ryggtrekket kan justeres ved å slakke eller stramme stroppene.



Bøtten settes inn fra baksiden. Skyv bøtten inn i glideskinnene under setet og skyv den inn til den stopper. Etter bruk trekkes bøtten ut i setets bakkant.



Benstøttene festes med hullene ned på to pinner som vist på bildet, låsen skal være på innsiden av rammerøret. Kontroller at benstøttene låser når de svinges til riktig posisjon og at de kan svinges ut til siden og tas av.



Setelokket settes på plass i hygieneåpningen.

Montering og justering av bremses, montering av drivhjul.



Drivhjulets akslinghylse monteres i ønsket høyde. Det er 4 intervaller som gir setehøyde fra 50-57cm.

Hjulene settes på ved å trykke inn Quick release knappen og sette akslingen inn i hylsen. Påse at hjulet er låst når quick release knappen slippes.



Monter bremsene på begge sider som vist på bilde, håndtaket skal peke fremover. Bremsen monteres slik at det er ca 1 cm klaring til dekket på hjulet når bremsen ikke er aktivert.




For å justere bremsen løsnes muttere og bremsen skyves frem eller tilbake i sporet.

Nødvendig verktøy for monteringen medfølger ved levering.



Svinghjul brems

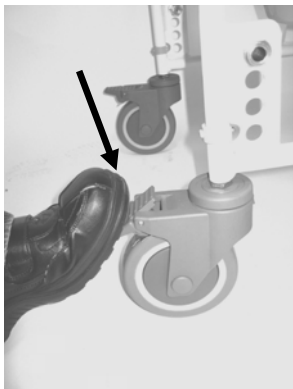

Bremsen aktiveres ved å trykke ned.
Da låses hjulets rulleretning og rotasjon.



Bremsen deaktiveres ved å trykke
utløseren tilbake.

Betjening av benstøtter





Benstøtten løses ut ved å trekke i
utløserhåndtaket. Nå kan benstøtten
enkelt svinges ut til siden.



Når benstøtten er svingt ut kan den
enkelt tas av ved å løfte den rett opp.

Høydeinstilling av fotplate

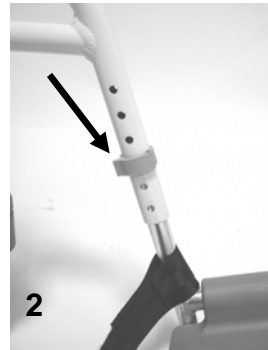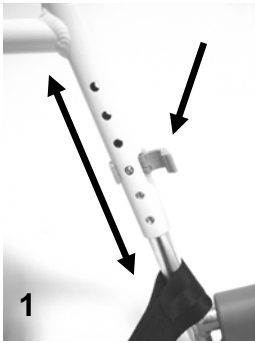

1. For å stille inn høyde på benstøtte løsnes klammer på låsepinnen og denne tas ut. Juster fotplaten til ønsket høyde, det er 6 posisjoner for legglengde fra 42 – 50cm.
2. Når man har funnet riktig høyde settes låsepinnen inn igjen og klammer låses.

ADVARSEL: Stå ALDRI på fotplaten!

Stolen vil da kunne tippe.

Rengjøring / Desinfeksjon / Vedlikehold

Daglig rengjøring gjøres enkelt og regelmessig for hånd med en fuktig klut og eventuelt tilsatt litt vanlig rengjøringsmiddel. Ikke bruk vaskemiddel med bleke eller slipemiddel.

Produktet kan vaskes med milde vaskemidler og desinfeksjonsmidler.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler!

Løsemidler kan ødelegge overflaten og deler av plast.

Resirkulering / Gjenbruk

Produktet kan vaskes med milde vaskemidler.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler!

Løsemidler kan ødelegge overflaten og deler av plast.

Produktet kan vaskes på 85°C i 5 minutter eller desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel.

Setetrekk og seler bør byttes ved klargjøring til ny bruker. Kan desinfiseres og vaskes i vaskemaskin på 60°C.

Tekniske data

Mål		
Bredde	69	cm
Lengde uten benstøtter	85	cm
Lengde med benstøtter	115	cm
Høyde skyvebøyle	95,5-103	cm
Høyde rygg	43	cm
Setehøyde (4 posisjoner)	50-57,5	cm
Setebredde	44	cm
Legglengde benstøtte (6 posisjoner)	39-49	cm

Vekt		
Vekt komplett med benstøtter	20	kg

Max belastning		
Maks brukervekt / belastning	130	kg

Materiale	
Ramme	Aluminiumsrør med slagfast pulverlakk
Toalettsete	PU (Polyurethane)
Armlenspute	PU (Polyurethane)
Rygg	Polyester
Fotplate	PVC

Merkeskilt

1 → **Dusch-Toilettenrollstuhl *drive* DuoMotion 24**

2 → REF 530 500 100

3 → SN / MMYX XXX XXX / 02/10

4 → 

Max. Belastung - Max.load: 130 kg

Drive Medical GmbH & Co. KG, 88316 Isny/Allgäu (Germany)

1. Produkt navn
2. Artikkel nummer
3. Serienummer og produksjonsdato (Måned / År)
4. OBS: Se brukerveiledning.

Garanti

Garanti 24 måneder fra kjøpsdato.

Det tas forebehold om tekniske endringer, feil og utelatelser i denne brukerveiledningen.

Kassasjon

All emballasje og alle deler av produktet kan resirkuleres.



Produsent

Drive Medical GmbH & Co. KG

Leutkircher Straße 44
D-88316 Isny / Allgäu (Germany)

Internet www.drivemedical.de
E-mail info@drivemedical.de



Importør Norge



Varodd AS,
Rigedalen 41, 4626 Kristiansand

Postboks 8343, 4676 Kristiansand

Telefon: +47 38 14 48 00
Faks: +47 38 14 48 70
E.Post: rehab@varodd.no



- forebygging av sykefravær
- oppfølging av sykmeldte
- kurs og opplæring
- arbeidspraksis og formidling
- regnskapstjenester
- velbekomme!
- mekanisk
- emballasje
- søm og profilering
- lagertjenester
- tekniske hjelpemidler

Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand
Postboks 8343 • 4676 Kristiansand
Tlf. +47 38 14 48 00 • Fax +47 38 14 48 70
rehab@varodd.no • www.varodd.no