

Bruksanvisning

Alpha dusjkrakk

Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk.

Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet om dette er det passende hjelpemiddelet for deg.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Innhold

1.0	Sikkerhet	1
1.1	Symboler	1
1.2	Bruk i henhold til krav	2
1.3	Generell sikkerhet	2
1.4	Montering	2
2.0	Innhold	2
3.0	Montering	3
4.0	Justering av setehøyde	4
5.0	Rengjøring og desinfisering	4
5.1	Rengjøring	5
5.2	Desinfisering	5
6.0	Vedlikehold/Reservedeler	5
6.1	Vedlikehold	5
6.2	Reservedeler	5
7.0	Gjenbruk	5
8.0	Deponering	5
9.0	Navneskilt	5
10.0	Spesifikasjoner	5
11.0	Garanti	5

1.0 Sikkerhet

1.1 Symboler

Følgende symboler brukes i bruksanvisningen:



Advarsel!

Dette symbolet identifiserer sikkerhetsinformasjon som varsler om farer under håndtering av produktet.



MERK

Du finner også informasjon om håndtering av produktet under dette symbolet.

1.2 Bruk i henhold til krav

Alpha dusjkrakk tilbyr en sittemulighet til individer med begrenset kapasitet for å stå oppreist, men som fortsatt kan sitte godt nok til å gjennomføre daglig personlig hygiene i dusjen.

Mulige diagnoser eller følger av skader er for eksempel:

- Ustabil stående posisjon / manglende evne til å stå på grunn av manglende styrke som en følge av ondartede sykdommer, kroniske lidelser, fremskredet hjerte- og karsykdommer, sirkulasjons- og lungesykdommer.

Alpha dusjkrakk er bare tiltenkt bruk i standard dusjkabinett og dusjhjørner.

Dusjkrakken må bare brukes i dusjkabinett og dusjhjørner som garanterer at den står i en sikker og stabil posisjon.

Alpha dusjkrakk må bare brukes når den er fullstendig montert.

1.3 Generell sikkerhet

Vennligst les monteringsinstruksjonene for dusjkrakken nøye før monteringen starter!

Ikke fortsett og bruk krakken dersom defekter oppdages under bruk.

Pass på at:

- instruksjonene leses av alle som har tenkt til å benytte seg av dusjkrakken.
- alle som benytter seg av dusjkrakken til en hver tid har tilgang til instruksjonene.

Skader som kommer som en følge av bruk ikke beskrevet i instruksjonene ekskluderer garantien.



Restriksjoner!

- Pasienter som veier mer enn 130 kg må ikke benytte seg av Alpha dusjkrakk.



Risiko!

- Bruk bare Alpha dusjkrakk til tiltenkt bruk. Den er ikke en erstatning for en stige, og er ikke et treningsutstyr eller en leke.
- Alpha dusjkrakk er ikke tiltenkt til bruk under medisinske undersøkelser eller behandlinger.
- Bruk bare Alpha dusjkrakk når den er i teknisk perfekt stand.
- Bruk kun tilbehør og reservedeler levert fra **Hjelpemiddelspesialisten AS**
- Ikke utfør strukturelle endringer på krakken uten tillatelse fra produsent.

1.4 Montering



Risiko for skader ved feilmontering!

- Kontroller at alle deler sitter i perfekt posisjon ikke er løse etter montering.



Risiko for skader!

- Bruk bare egnet verktøy for monteringen.
- Bare utfør monteringen dersom du er komfortabel med det nødvendige verktøyet.

2.0 Innhold

Alpha dusjkrakker pakkes i kartongesker. Bruk følgende liste for å kontrollere innholdet i esken før monteringen. Vennligst ta kontakt med din forhandler ved åpenbare defekter eller om deler mangler.

Innhold:

- 1 x (1) Sete
- 1 x (2) Seteramme
- 3 x (3) Stolben
- 3 x (4) Umbrako skruer
(M6 x 20 mm, størrelse 5 mm)
- 3 x (5) Distanser
- 2 x (6) Umbrako skruer
(M6 x 36 mm, størrelse 5 mm)




3.0 Montering

Nødvendig verktøy:


- 1 x umbrako nøkkel, 5 mm




- ➔ Skyv stolbena inn i låst posisjon.

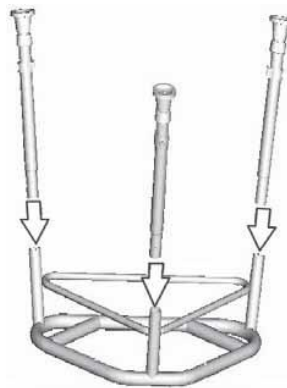

- ➔ Skru fast stolbena (M6 x 20).

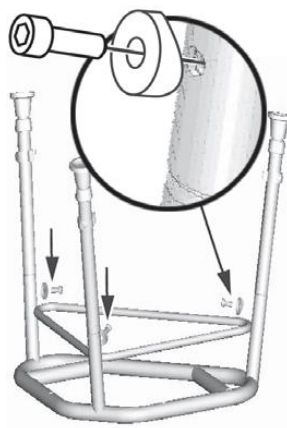

- ➔ 1.) Skyv/klem seteplaten på og
- 2.) skru fast (M6 x 36)

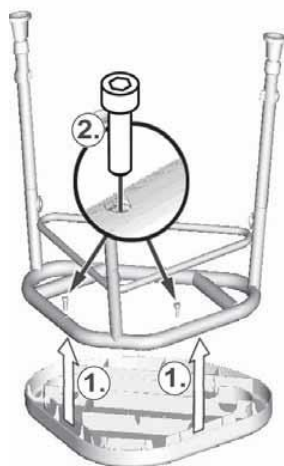

4.0 Justering av setehøyde


Stolhøyden justeres med de justerbare føttene (1).

De fem hullene (a) i føttene kan brukes til å justere høyden maksimalt 10 cm.



Justering av høyden:

- ➔ Fjern sikkerhetsklemmen (2).

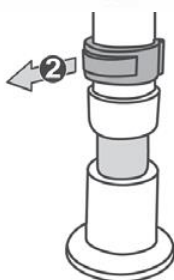


- ➔ Juster foten til ønsket høyde (3) til hullet på foten ses i hullet på benet.

- ➔ Sett på plass sikkerhetsklemmen (4).



Risiko for ulykke!

- Plasser alle stolføttene i samme justeringshull.
- Pass på at alle sikkerhetsklemmene er sikkert låst fast i posisjon etter justering.

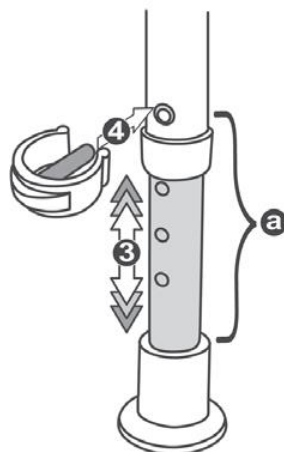

5.0 Rengjøring og desinfeksjon

- Ikke bruk verktøy med skarpe kanter (kniver, metallskrapere) eller aggressive oppløsningsmidler ved rengjøring.

- Les instruksjonene for rengjøringsmidlene til en hver tid for å unngå skade på overflaten. Spesielt ved bruk av brannfarlige midler (alkoholholdige rengjøringsmidler).

5.1 Rengjøring

For å rengjøre krakken, kan den tørkes av med en fuktig klut. Bruk vanlige butikkjøpte rengjøringsmiddel og varmt vann. Ikke bruk kraftig oppløsende/etsende midler! Tåler vask med vann opp til 85 °C.

5.2 Desinfeksjon

For å desinfisere, rengjør slik beskrevet ovenfor og tørk over med en blanding av vann og klor (blandingsforhold 1:1000), skyll av og tørk.

6.0 Vedlikehold/Reservedeler

6.1 Vedlikehold

Alpha dusjkrakk er vedlikeholdsfri, men bør allikevel kontrolleres på en månedlig basis.

Utfør følgende tester:

- ➔ Visuell kontroll av alle deler. Se etter deformasjoner, skader, slitasje og rust.
- ➔ Kontroller alle fester (skruer, muttere, etc.) for funksjon og at de sitter som de skal. Krakken må ikke fortsatt brukes etter at feil har blitt avdekket.

6.2 Reservedeler

Reservedeler kan du få fra din forhandler av Alpha dusjkrakk. Bare originale deler fra Hjelpemiddelspecialisten AS skal brukes på produktet.

7.0 Gjenbruk

Alpha dusjkrakk er designet med tanke på gjenbruk. Rengjør og desinfiser før bruk.

8.0 Deponering

Alpha dusjkrakk består av metall- og plastikkdelene. Deponering av de individuelle materialene må utføres i henhold til reglement for egne regionale/lokale miljø- og avfallsstasjoner.

9.0 Navneskilt

Navneskiltet er plassert på den nederste kryssrammen på Alpha dusjkrakk.

10.0 Spesifikasjoner

Artikkelnummer	091325463
Hjelpemiddelnummer	199601
Maksimal bærevekt	130 kg
Sittehøyde	44 – 54 cm
Setebredde	52,5 cm
Setedybde	38 cm
Antall justerbare høyder	5

Dimensjoner av montert Alpha dusjkrakk, minimale forskjeller kan oppstå ved produksjon.

11.0 Garanti

Hjelpemiddelspecialisten AS tilbyr 2 års garanti sammen med produsent på perfekt kvalitet innenfor rammen av våre felles generelle vilkår og bestemmelser.