


AbleNet®

Quick Start Guide Blue2™ 4th Generation

www.ablenetinc.com

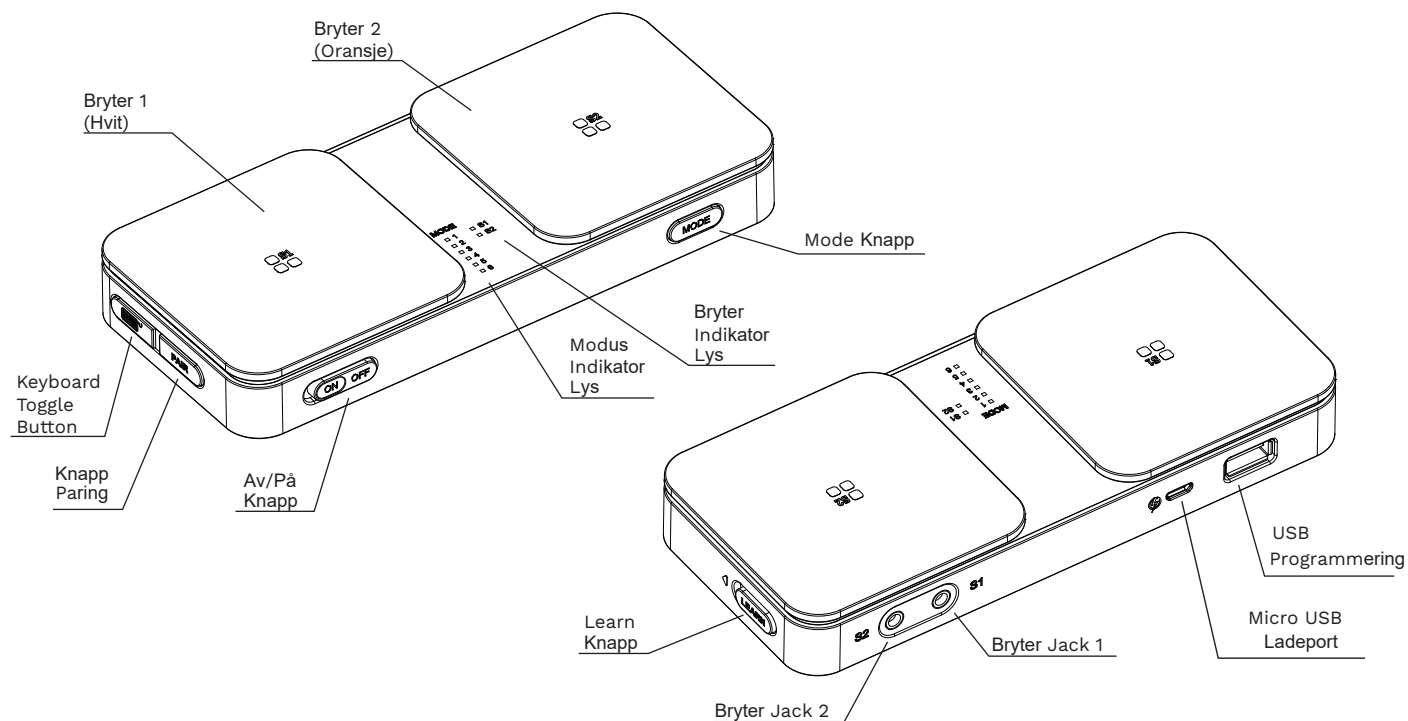

Pare med en enhet

1. Slå på Blue2 ved å bruke on/off-knappen.
2. Trykk på paringsknappen på Blue2 en gang.
3. I Bluetooth®-innstillingene i din enhet finner og velger du BLUE2.
4. Trykk gjentatte ganger på modusknappen på Blue2 for å velge en modus.
5. Sett opp eventuelle innstillinger for den valgte metoden for å bytte tilgang i appen eller gjennom tilgjengelighetsalternativer på enheten du parret med Blue2.
6. Blue2 er nå klar til bruk med enheten og / eller appen din.

Eksterne brytere

Sett kablede brytere i bryterkontakt 1 eller bryterkontakt 2 på Blue2.

Hvilemodus

Etter 15 minutters inaktivitet vil Blue2 gå i hvilemodus. Aktiver en av bryterne for å vekke Blue2. Blue2 vil koble til enheten på nytt innen omtrent 3 sekunder.

Lading

1. Velg riktig adapter for din region
2. Koble Blue2 til lader
3. Under lading blinker bryterindikatorlampen S1 og S2. Når Blue2 er fulladet, vil indikatorlampene for bryteren forbli tent.

Merk: Lad opp batteriet helt før du lagrer enheten.

Moduser

Blue2 sender et tastetrykk til appen eller programvaren når en bryter blir aktivert. Tastetrykkene for hver modus er oppført på baksiden av Blue2.

- Mode 1: Space, Enter
- Mode 2: 1, 3
- Mode 3: ~1, ~3
- Mode 4: Venstreklikk mus, høyreklikk mus
- Modes 5 and 6: Programmerer 1 til 4 valgte taster.

Bruk med iPad eller iPhone

1. Gå til Innstillinger-appen > Bluetooth og sørg for at Bluetooth er slått på
2. Skru på Blue2
3. På Blue2, trykk på Mode-knappen for å velge modus
4. Under enheter velger du BLUE2-XXXXXXXX (X'er angir Blue2s serienummer). Hvis du ser mer enn en Blue2 oppført, kan du se på baksiden av Blue2 og matche serienummeret på Blue2 med serienummeret på iPad eller iPhone.
5. Konfigurer iOS bryter kontroll eller bytt innstillinger i appen du skal bruke
6. Aktiver de hvite og oransje bryteroppene på Blue2

Programmeringsmodus 5 og 6

Du kan programmere ett til fire tastetrykk etter eget valg med modus 5 og 6 på Blue2.

1. Slå på Blue2
2. Koble et tastatur til Blue2s USB-programmeringskontakt
3. Endre Blue2's Learn Switch ved å flytte den til venstre
4. Velg modus 5 eller 6 på Blue2
5. Aktiver bryter 1 for å starte opptaksmodus. S1-lampen vil blinke mens den er i opptaksmodus.
6. Aktiver opptil fire tastetrykk som du ønsker å ta opp til bryter 1 på USB-tastaturet.
7. Aktiver bryter 1 for å stoppe opptaksmodus
8. Aktiver bryter 2 for å starte opptaksmodus. S2-lampen vil blinke mens den er i opptaksmodus.
9. Aktiver opptil fire tastetrykk som du ønsker å ta opp til bryter 2 på USB-tastaturet.
10. Aktiver bryter 2 for å stoppe opptaksmodus
11. Flytt Blue2's Learn Switch ved å flytte den til høyre
12. Koble tastaturet fra Blue2
13. Velg den nye modusen du vil bruke

Support

Om du opplever problemer, besøk www.ablenetinc.com og produktsiden til Blue2.