

# Bruksanvisning av Shape

## Bruk av sitsen/ståskall:

1. Kontroller først at sitsen/ståskall sitter sikkert fast i underlaget/understellet og har rett vinkel.
2. Plasser brukeren riktig i sitsen/ståskall så han/henne sitter/står med full støtte. Kontroller at bekkenet har rettest mulig posisjon. Etterjuster ved behov!
3. Spenn fast hoftebelтет. Eventuelle belteputer bør plasseres på siden brukeren helst vrir seg mot.
4. Spenn fast øvrige bånd og seler.
5. Juster eller kontroller at alle eventuelle støtter sitter riktig (nakkestøtte, fotstøtte, sidestøtter, knestoppere, mm.)




### Observer!

Sitsen er spesialtilpasset for den spesifikke brukeren men vær observant på om det oppstår problemer som trykksår, trykkmerker, etc. Kontakt i så fall ansvarlig terapeut! Ofte orker ikke brukeren sitte aktivt lengre enn i korte perioder av gangen. Varier derfor sittingen til en mer hvilende posisjon flere ganger i løpet av dagen.

### TREKK

Sitsen har avtakbare trekk slik at det lettere kan vaskes. De er merket med vaskeanvisninger som også markerer plasseringen av trekket.

Vaskeanvisningen skal plasseres oppover på ryggdelen og bakover på sittedelen (se skissen)

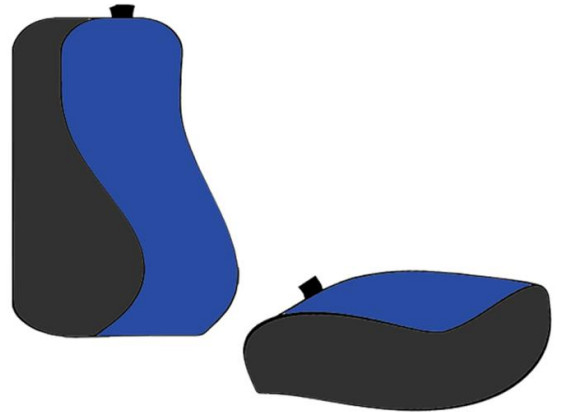

### KONTROLL AV SLITASJE

Kontroller festepunkter, fikseringsbelter og posisjoneringsbånd for slitasje før bruk. Kontakt tekniker for eventuelle utbyttinger.

### VASKEANVISNING

Avtakbare trekk kan vaskes i maskin på 40°. Tørkes i romtemperatur. Løs smuss tørkes av med en fuktig klut.

