

Bruksanvisning for OB Toalettsete

Bruk av sitsen

1. Kontroller først at sitsen sitter godt fast i understellet/underlaget, og at den har riktig vinkling.
2. Plasser brukeren korrekt i sitsen så han/hun sitter med full støtte. Kontroller at bekkenet har en så rett posisjon som mulig. Juster ved behov!
3. Spenn fast hoftebeltet. Eventuelle belteputer skal plasseres på den siden som brukeren vrir seg mot.
4. Spenn fast eventuelle øvrige belter og seler.
5. Still inn eller kontroller at alle eventuelle støtter sitter korrekt (nakkestøtte, fotstøtte, bolstøtte, knestoppere, med mer).



Observer!

Sitsen er spesialtilpasset til hver enkelt bruker, vær observant på om det oppstår problemer som trykksår, rotasjoner, etc. Kontakt i så fall ansvarlig terapeut!

Kontroll av slitasje

Kontroller alltid festepunkter, fikseringsbånd og posisjoneringsbånd for slitasje før bruk. Kontakt din terapeut for eventuelle tiltak for utbedring.

Vaskeanvisning

Alle HM Toalettseter konstrueres slik at all væske renner ut av stolen. For ytterligere rengjøring kan man benytte en klut og et mildt vaskemiddel.

