

TOASEAT

MED UNDERTOÅ



ERGOSEAT

BRUKSANVISNING



WWW.ERGOSEAT.NO

BRUKSANVISNING TOASEAT

Gratulerer med ditt nye Toaseat fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller terapeut. Det er viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisninger før dette produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god og sett det tilbake i plastlommer der du fant det.

Produkt :	Ansvarlig terapeut
_____	_____
Spesialtilpasset til	HMS
_____	_____
Tilbudsnr	Leveringsdato
_____	_____



Riktig posisjonering er avgjørende for at produktet skal fungere optimalt for brukeren!




POSISJONERING

Riktig posisjonering er avgjørende for at setet skal fungere trykkavlastende!


1. SJEKK SIKKERHET

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på understellet er låst, og at setet er godt festet til understellet før du setter bruker i setet.

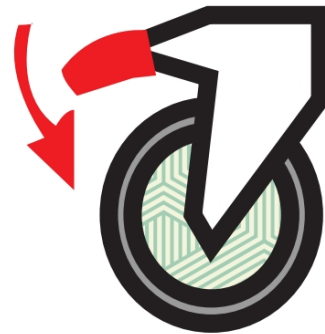


2. LØSNE HOFTEBELTE OG TILT BAKOVER

Tilt setet bakover og løsne eventuelle hoftebelter, slik at de henger ut på hver side.

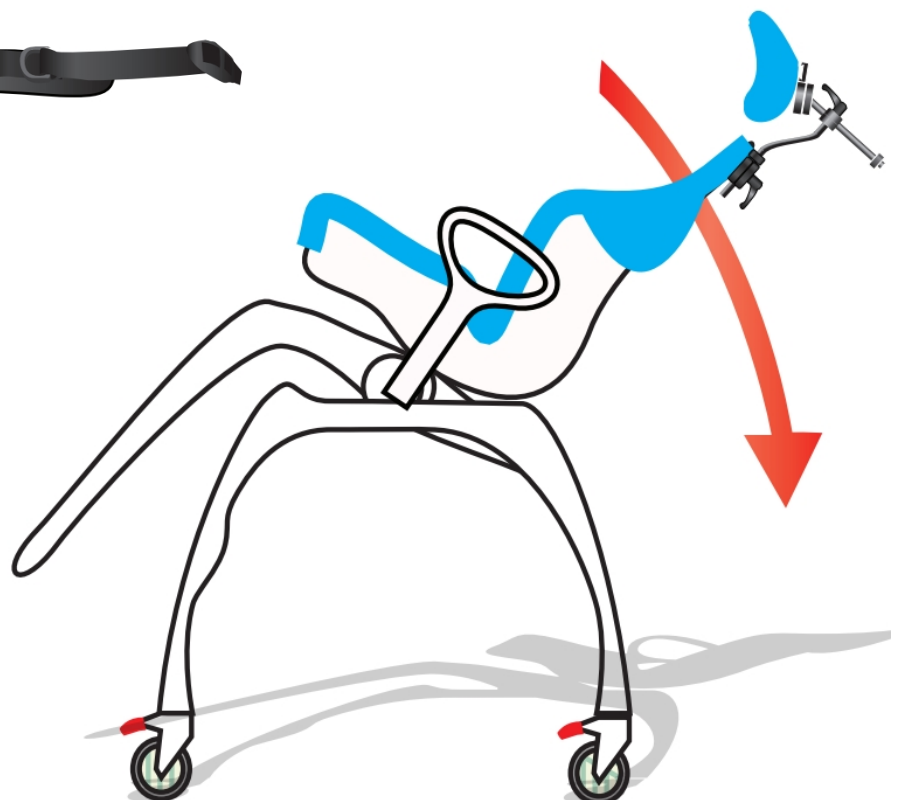

3. PLASSER BRUKER


Det er viktig at bruker kommer helt ned i setet, og flere teknikker finnes for dette. Ved bruk av seil, prøv å senke personen som anvist. Ved manuell løfting, forsøk å justere personen inn i setet til du er sikker på at **Korrekt posisjon er oppnådd.**

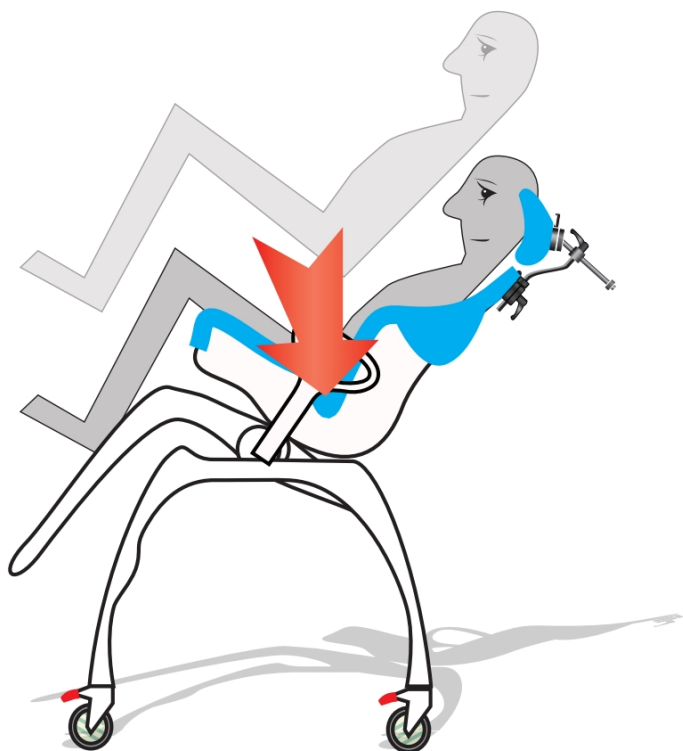

! At bruker sitter korrekt i setet er essensielt for at setet skal fungere trykkavlastende.


4. POSISJONER HOFTEBELTE

Hoftebeltet skal posisjoneres over hofte, og trykket skal gå som anvist på bildet

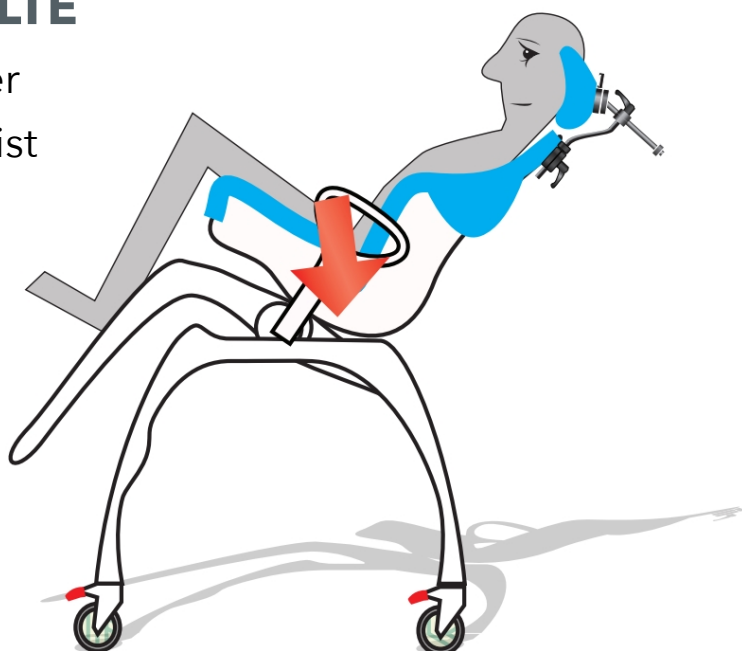


! Hoftebelte skal stramme nedover, og sikre at posisjonen oppnådd i punkt 3 beholdes over tid.

5. STRAM HOFTEBELTE

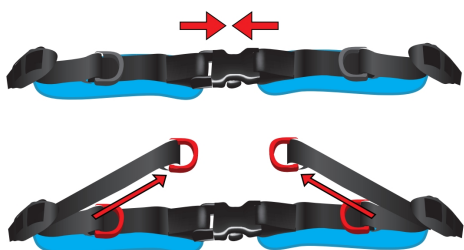


6. FEST VEST OG ANDRE BELTER

Fest vest, anklers (fotreimer) og eventuelle andre innfestninger som er tilordnet stolen.

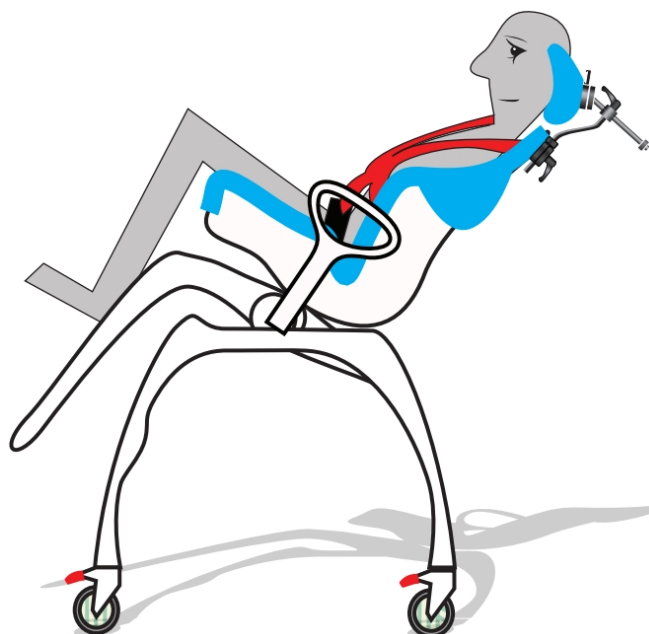

7. TILT BRUKER I RIKTIG POSISJON

Avhengig av om stolen skal benyttes i dusj eller toalettbesøk, tilt til ønsket posisjon.

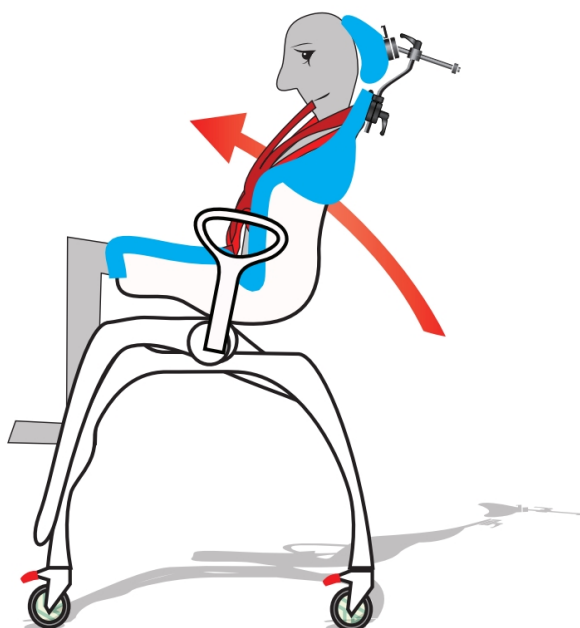

VEDLIKEHOLDSANVISNING

KONTROLL AV SLITASJE

Kontroller alltid festepunkter, fikserings- og posisjoneringsbånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

ETTERTILPASNING

Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. Dette må foretas av Ergoseat sin representant eller i samråd med denne.

SIKKERHET

Av sikkerhetsmessig grunn skal understellet ikke transporteres over terskler eller hindringer høyere en 0.5 cm med bruker i setet.

RENGJØRINGSRUTINER

DAGLIG RENHOLD



- For å forebygge kalkavleiringer, og ansamling av såpe og sjampo rester bør setet og understellet jevnlig tørkes av.