



BRUKSANVISNING

BARDUM MYKSTØP



Innholdsfortegnelse

<i>Bruk av sitsen</i>	3
<i>Vedlikehold og rengjøring</i>	4
<i>Montering av sits</i>	5
<i>Monterings av sits med festeremmer</i>	6
<i>Plassering</i>	6
<i>Justering av bålstødsbredde</i>	6
<i>Håndtak (tilbehør)</i>	6
<i>Resirkulering</i>	7
<i>Gjenvinning</i>	7

! Observer!

Sitsen er skreddersydd til brukeren. Vær derfor observant på eventuelle sår, trykkmerker og lignende. Om det oppstår et problem, kontakt ansvarlig helsearbeider.

! Observer!

Om du ikke er fornøyd med sitsen eller om problemer oppstår, vennligst kontakt din helsearbeider, hjelpemiddelsentral eller Bardum AS.

Kontaktinformasjon til helsearbeider og hjelpemiddelsentral finnes på etiketten "Spesialtilpasset produkt".

Produktet er produsert av Anatomic SITT AB

Postadresse Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping


Besøksadresse Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping

Telefon 011-161800 **Fax** 011-162005


E-post info@anatomicsitt.com **Web** anatomicsitt.com

Bruk av Mykstøpen


- 1) Sjekk at sitsen er montert ordentlig fast i understellet, og han den har korrekt helning.
- 2) Pass på at håndbremsen er låst og at rullestolen står på et stabil underlag.
- 3) Start med å tilte/tippe sitsen bakover så langt som mulig, før brukeren plasseres i sitsen.
- 4) Plasser brukeren i sitsen. Vær nøye på at brukeren kommer skikkelig inn i sitsen. Kontroller med hånden ved baken. Bekkenet skal være i en så rett posisjon som mulig. Etterjuster ved behov.
- 5) Fikser bekkenet med hoftebeltet. Om belteputer finnes skal de plasseres med fokus på siden som brukeren vrir/spenner utover først. Plasser hoftebeltet over hoften se fig.1. Juster beltets posisjon ved hjelp av de bakre båndene/innfestingen, dette gjøres for få beltespennen sentrert på brukeren. Juster hoftepolstrene slik at de ligger på hoftekammen. Stram til beltet. Beltet skal sitte starmt slik at bekkenet holdes på plass. Tommelfingerregel: du skal akkurat få plass til en finger mellom hoftekam og polster. Sjekk at spennen er lukket.

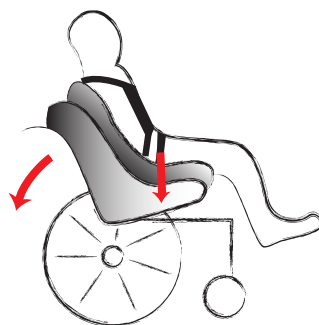

Bilde 1

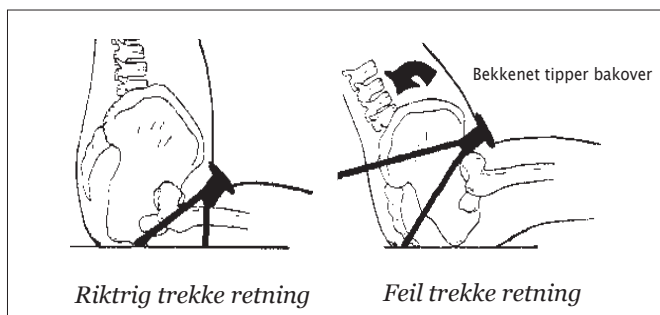

- 6) Fikser sele og evt. andre belter.
- 7) Tilt tilbake stolen i normal stilling. Bruk tiltfunksjonen i løpet av dagen for å skape variasjon i trykkfordelingen på kroppen.
- 8) Skjekk at alle støtter sitter korrekt og stabilt.

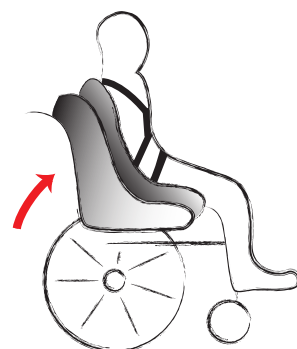

Å tenke på

Mange brukere orker bare å sitte i en aktiv stilling i korte perioder. Gjennom å endre fra aktiv sitting til hvilestilling flere ganger om dagen får brukeren en mer behagelig sitteopplevelse og trykket vil også fordeles. Dette forhindrer begynnende sittesår.

Vedlikehold og rengjøring

Mykstøpen har avtagbara foder för att underlätta rengöring. Trekkene kan vaskes i maskin på 60°. Trekkene er merket for å lette retur av de på setet.

Trekkene skal tørke i romtemperatur, eller i tørskeskap på lav temperatur. Trekkene skal ikke plasseres direkte mot en varmekilde. De skal ikke tørkes i tørketrommel, da kan de miste formen.




Skummet tørkes av med fuktig klut.

Plastskallet vaskes med svamp eller myk børste. Du kan bruke et mildt vaskemiddel eller desinfeksjonsmiddel om det trengs.

Coolmax® trekket er allergitestet og antibakterielt.

Coolmax® trekket har en kjølede effekt, dette hjelper til med å skape en behagelig temperatur.

Coolmax® effekten – Avleder fukt og har en kjølede effekt.

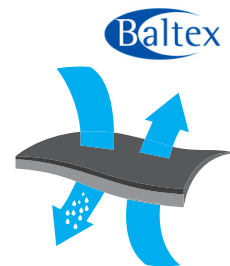

Kontroll av slitasje

Kontroller regelmessig posisjonerings- og fikseringsbåndene, spesielt ved festepunktene. Kontakt deres helsearbeider ved eventuelle utbedringer.


Montering av Mykstøpen

Bardum mykstøp kan i noen tilfeller være utstyrt med hurtigkobling for enkel montering på understell.

Festeplate

- 1) Trykk ned låsespaken og vri den til venstre (sett forfra) inn i sporet.
- 2) Skyv inn sitsen i sidesporet forfra til den stopper i bakkant.
- 3) Trykk ned låsespaken og vri den tilbake til sitt utgangspunkt, rett frem.

! *Vri låsespaken helt til du hører en "klikk" lyd. Nå sitter sitsen sikkert montert på understellet.*

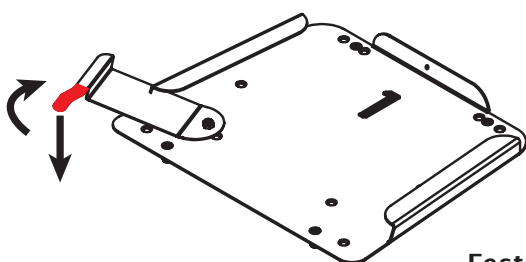


Festeplate

Adaptersystem

Adaptersystem muliggjør enkel forflytning av sittesystemet mellom forskjellige understell. Et adaptersystem består av en adapterplate på sittesystemet og en baseplate på de respektive understellene.

- 1) Monter baseplaten på understellet ved å skrue den fast med skruer, skiver og muttere som følger med.
- 2) Monter så adapterplaten ved å skyve kantene i de ytterste sporene på sittesystemets underside. Skru til skruer når ønsket posisjon er oppnådd.
- 3) Når adapterplate respektiv baseplate er montert på sittesystem og understell kan disse kombineres. Sittesystemet er korrekkt festet når du hører en klikkelyd.

! *Sjekk at sitsen sitter ordentlig fast på understellet før den tas i bruk.*

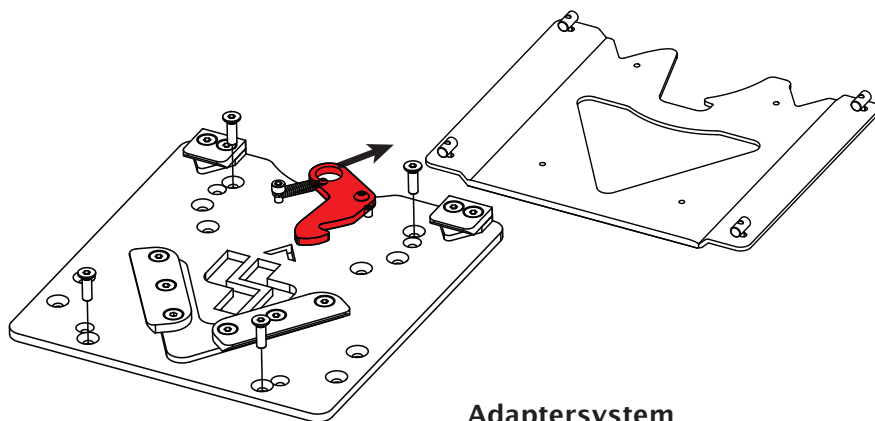

Adaptersystem

Montering av Mykstøp med festeremmer

Bardum Mykstøp kan i noen tilfeller ha to festeremmer. Remmen ved ryggen skal festes rundt f.eks. rullestolens kjørehåndtak. Remmen ved setet skal festes under f.eks. rullestolens seteplate.


! *Kontroller alltid at remmene er sikkert montert.*

Plassering

Plasser sitsen på understellet slik at det blir en god balanse på understellet.

Justering av bålstødsbredd

For å justere berdden mellom bolstøtter tar man vekk skummet og trekket fra plastskallet. Løsne litt på skruene (A) for å justere bredden. Skru dette fast skruene igjen og plasser skumryggen tilbake i plastskallet.

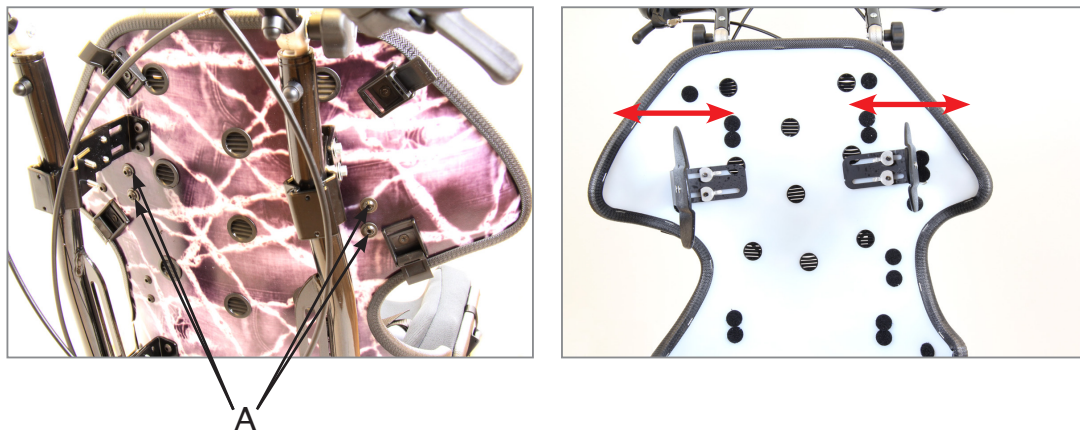

Håndtak (tilbehør)

Sitsen er utvendig utstyrt med fire båndhåndtak. Med dem kan hele sitsen forflyttes med brukeren i sitsen. I forkant på båndhåndtakene sitter et slissespor i metall, og gjennom dette kan medfølgende festebånd monteres for å fikse sitsen på andre plasser som f.eks. i bil, båt, fly eller på en stol.

Resirkulering

Kontroller alle bevegelige deler med fokus på slitasje. Bytt ved behov.
Om du kjenner deg usikker kan du kontakte oss på telefon 64 91 80 60 eller
via e-post: post@bardum.no

Gjenvinning

En oppbrukt del eller produkt demonteres og skrotes. Delene skal separeres etter
materialtype og leveres inn på lokal gjenvinningsstasjon.



Adresse Bardum AS, Håndverksveien 8, N-1405 Langhus

Telefon 64 91 80 60 **Fax** 64 91 80 66

E-post post@bardum.no **Web** www.bardum.no



Produktet er produsert av Anatomic SITT AB

Postadresse Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Besøksadresse Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Telefon 011-161800 **Fax** 011-162005

E-post info@anatomicsitt.com **Web** www.anatomicsitt.com