

# GLIDELAKEN

Glidelakenet forenkler vending av/for pasient, og i kombinasjon med stikklaken forenkler det også forflytting av pasient.

## **Bruksanvisning:**

Glidelaken Absorb-Plus EZ plasseres med glideflaten opp og sentreres midt i sengen, med øvre kant litt nedenfor puten.

NB: Markeringsømmen skal følge madrasskantene ved en sengebredde på 90cm. Sidepartiene brettes inn under madrassen, slik at glidelakenet ligger fast og stødig.

Vær nøye med at hele kroppen fra skuldre til sete hviler på glideflaten. Sidepartiene på lakenet fungerer som viktige bremseflater slik at brukeren ikke glir ut av sengen. De gir også støtte ved legging og oppreising i sengen.

Når personen skal snu seg selv skal en ligge direkte på glidelakenet. Lav friksjon gjør det enklere for personen å snu seg selv i sengen

Når en pleier skal snu personen skal det være et stikklaken mellom personen og glidelakenet. Pleieren kan da dra stikklakenet mot seg og deretter snu personen.

**Det unike** med Glidelaken er det blanke, friksjonsreducerende midtpartiet som gir den sengeliggende mulighet for å endre stilling ved å gli rundt sideveis. Bevegelsene blir lettere fordi friksjonen mellom glideflaten og brukerens klær eller kropp reduseres. Glidelaken er også et utmerket hjelpemiddel for pleiepersonell. Belastningen på rygg og skuldre reduseres fordi det på grunn av den lave friksjonen kreves mye mindre kraft for å snu en pasient.

**Glidelaken passer glimrende** for intensivpleie, operasjonsposter, langtidspasienter, rehabilitering, eldreomsorg, bokollektiv, hjemmetjenesten og lignende. Også gravide, slagrammede, hofteopererte, kreftpasienter, kvinner med bekkenløsning, nakkeslengskade, ryggmargsopererte, tunge pasienter og personer med akutte ryggplager, polio og MS vil kunne ha stor nytte av Glidelaken.

**Mange mennesker** har problemer med å kunne snu seg selv i sengen. Enkelte må også ha hjelp fra pleiere. Årsakene kan være mange og av kort eller lang varighet. Glidelaken kan løse eller gjøre problemene mindre for mange, eller lette belastningen for pleiere betraktelig.

## **Glidelaken/Sikkelaken Absorb-Plus (sideveis)**

Størrelse: 120x180 cm. 100% polyester. Vasketemp 85° C. Tørketemp: 70 ° C. Farge: Hvit. Fri forpakning.

