

Lightwriter SL40 Connect



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect.

Oppdateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: <http://www.toby-churchill.com>

Designet og produsert i Storbritannia av:

Toby Churchill Ltd

Toby Churchill House

Norman Way Industrial Estate

Over

Cambridge

CB24 5QE

United Kingdom

tel: +44 1954 281210

faks: +44 1954 281224

e-post: info@toby-churchill.com

Kontaktinformasjon for støtte og hjelp utenfor Storbritannia finner du på bunnplaten av Lightwriter.

® Lightwriter er et registrert varemerke som tilhører Toby Churchill Ltd.

Toby Churchill Ltd forbeholder seg retten til å endre eller modifisere produktene, materialene og tjenestene i rimelig grad når som helst og uten varsel.

Innhold

Velkommen til Lightwriter	4
Hva inneholder pakken?	6
Lade Lightwriter	8
Tastatur funksjoner	9
Slå på Lightwriter	13
Tale	15
Skrive tekst	16
Ordprediksjoner og ordbanker.....	18
Tastatur funksjoner	21
Telefon	22
Sette inn et SIM-kort.....	22
Telefonindikator	25
Saldokontroll.....	26
PIN-koder	27
SMS	28
Sende en SMS-melding.....	28
Innboks.....	29
Utboks	30
Å ringe	32
Å ringe.....	32
Tapte anrop	33
Nødsamtale	33
I en samtale.....	34
Talepost.....	38
Telefoninnstillinger	40
Kontakter	42
Notater	44
Fjernkontroll	47
Alarmer	50
Innstillinger	53
Administrere innstillinger	53
Avanserte innstillinger	53
Volum.....	54
Tale	56
Ordbanker og språk.....	58
Skjermer	61
Tastatur.....	62
Strøm	64
Informasjon.....	65
Snarveier	67
Minnepenn	68
Sette inn.....	68
Konfigurere	69
Ting du kan gjøre	70
Tastaturet	72
Bytte fingerguide	72
Endre tastaturlayouten	76
Holde tastaturet rent.....	78
Feilsøking	79
For minnepenn.....	80
Telefonen	81
Symbol-guide	83
Indeks	84

Velkommen til Lightwriter

Lightwriter SL40 Connect er et hjelpemiddel for tekst til tale-kommunikasjon utenom det vanlige. Lightwriter gjør det raskere og enklere å skrive og kommunisere, og i tillegg får du hjelp med:

- å snakke med Høy kvalitets Acapela-stemmer.
- å ringe og sende SMS-meldinger ved hjelp av den innebygde telefonen.
- å kontrollere utstyr rundt deg i hjemmet, som TV og stereo, med infrarøde signaler som du spiller inn.
- å skrive og lagre lange notater og tale dem senere.
- å lagre kontaktinformasjon om venner og familie.
- å stille inn alarmer som kan vekke deg eller minne deg om avtaler.

Lightwriter



Sender for fjernkontroll-koder



Partnerskjerm

Høyttaler

Minnepenn-port



Inngang for lader

Ladelampe

Inngang for ekstern mikrofon



Inngang for hodetelefon

SIM kort holder



Monterings-punkter

Tips

Lightwriteren kan ha begge skjermene dekket med beskyttende film. Du må fjerne disse før du tar Lightwriteren i bruk.

Hva inneholder pakken?

Lightwriteren leveres med en rekke tilleggsutstyr som du kan bruke for å tilpasse talemaskinen til ditt behov. Kontroller at alle delene følger med i Lightwriter-pakken.

Lader - Bruk denne til å lade batteriet i Lightwriter. **Du må lade Lightwriteren i 8 timer hver natt for å bruke den hele neste dag.** Du finner nærmere informasjon under **Lade Lightwriter**. Leverandøren kan også skaffe deg en lader for bruk i bil.



Tips

Bruk bare laderen som leveres med Lightwriter.



Fingerguide - Lightwriter leveres med tre ulike fingerguides som hever området rundt tastene for å gjøre det lettere å skrive presist. Se **Tastatur** for nærmere informasjon.

Verktøysett - Dette utstyret består av en nøkkelring, en skrutrekker og verktøyet for å løse fingerguidene. Du trenger dette utstyret for å fjerne fingerguidene og for å bytte SIM-kortet.



Minnepenn - Bruk minnepenn til å overføre tekstfiler og sikkerhetskopier mellom Lightwriteren og datamaskinen. Se **Menyen for minnepenn** for nærmere informasjon.

Bæreseske - Oppbevar Lightwriteren og alt tilleggsutstyret trygt i bæresesken når du er på farten.



Ekstra tilleggsutstyr

SIM-kort - Hvis du vil bruke den innebygde telefonen i Lightwriter til å sende SMS-meldinger og for å ringe, trenger du et SIM-kort. Nærmere informasjon om å **sette inn et SIM-kort** finner du under **Telefonmenyen**.



Det er også laget en rekke spesialutstyr for Lightwriter. Dette lar deg montere Lightwriteren på en rullestol eller et stativ på en trygg måte, bruke stropper eller alternative bæreverker som forenkler transport og bruk. Leverandøren kan gi deg nærmere informasjon om alt ekstrautstyret som er tilgjengelig for Lightwriteren.



Tips

Ta kontakt med leverandøren hvis du trenger å bytte noe av tilleggsutstyret til Lightwriter.

Lade Lightwriter

Før du slår på Lightwriteren den første gangen, må du sette inn laderen. Du må lade Lightwriteren i 12 timer før den er klar til bruk.


Deretter må du lade Lightwriteren i 8 timer hver natt, slik at den er fulladet og kan brukes hele neste dag.

Sett laderen inn i inngangen som vist på venstre side av Lightwriter. Batterilampen lyser grønt som tegn på at Lightwriter lades.




Tips

Bruk bare laderen som leveres med Lightwriter.

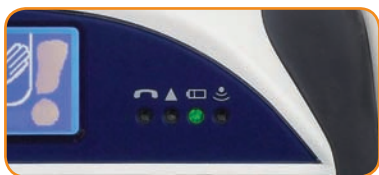

Batterilampen foran på Lightwriteren lyser også grønt når laderen er plugget inn. Du kan bruke Lightwriteren hele tiden mens den lader.

Når det begynner å bli lite strøm igjen på batteriet i Lightwriteren, skifter fargen på lyset i batterilampen til gult og deretter til rødt for å varsle deg om at du må sette laderen inn i kontakten. Det kan også dukke opp et ikon på skjermen: 

Hvis batteristrømmen blir for svak, slår Lightwriteren seg av, og da må du sette laderen inn i kontakten før du kan slå den på igjen og fortsette. Hvis du prøver å slå på uten laderen, lyser batterilampen rødt i 5 sekunder for å vise at du må lade batteriet.

Tastatur funksjoner

I tillegg til bokstavtastene har Lightwriteren en del andre taster for ulike funksjoner.

Nærmere informasjon om hvordan du endrer virkemåten til tastaturet, for eksempel hvordan du bruker tastatur-trykk og tastatur forsinkelse eller endrer layouten, finner du i **innstillinger**.

På og avbryt-tasten

Denne tasten slår alltid Lightwriteren på hvis den er i **hvilemodus** eller avslått. Hvis det er nødvendig å starte Lightwriteren på nytt, må du holde **On/C** nede til skjermen slår seg av (dette kan ta opptil 20 sekunder) og slippe.

Så snart du har slått på Lightwriteren, vil **On/C** avbryte det du holder på med og gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Når du taler eller skriver tekst, vil **On/C** stoppe det som er i ferd med å bli talt eller tømme tekstlinjen. Hvis du gjør en feil mens du skriver, som for eksempel å tømme tekstlinjen eller velge feil ordprediksjon, kan du angre handlingen ved å trykke **shift-On/C**.

Meny tasten !

Et trykk på denne tasten bringer deg alltid tilbake til **Hovedmenyen**.

Hvis du er midt i en telefonsamtale, vil du få anledning til å legge på.

OK-tasten

Trykk **OK** for å velge det uthevede elementet eller si teksten du har skrevet.

Lightwriteren kan også si alle ledetekster på skjermbildet som du selv ikke har skrevet, som for eksempel menyer eller meldinger på skjermen, ved at du trykker **shift-OK**.



Tilbake- og Neste-tastene

Bruk disse tastene til å flytte framover og bakover i menyer og lister. Når du skriver, brukes **tilbaketasten** til å slette det siste tegnet du skrev inn. Husk at du kan slette hele teksten på linjen samtidig med **On/C**.

Trykk **shift-Tilbake** eller **shift-Neste** for å flytte markøren til venstre eller høyre uten å slette noe, slik det indikeres av markørikonet: Du må ha slått på **Navigasjonslås** i **innstillinger** for å kunne gjøre dette.



Shifttasten

Et trykk på **shifttasten** forandrer virkemåten for den neste tasten du trykker. På denne måten kan du skrive store bokstaver og velge de oransje elementene i tastaturet, for eksempel tegnsetting eller hjelp. Når du trykker på **shifttasten**, får du se et ikon på høyre side av skjermbildet: **Shiftfunksjonen** slår seg automatisk av igjen etter at du trykker den neste tasten.

Hvis du har slått på **shiftlås** i **innstillinger**, kan du forandre hele teksten til blokkbokstaver ved å trykke to ganger på **shifttasten**.



Velgtasten

Trykk **Velg** mens du skriver tekst for å se listen med fraser som hjelper deg med å kommunisere hurtigere. Du kan også trykke **shift-Velg** for å se symbolvelgeren og velge tegnsetting, symboler og aksenter som ikke vises i tastaturet.

I **innstillinger** vil **velgtasten** alltid velge standardinnstillingene.



Signal-tasten

Et trykk på **signal-tasten** avgir umiddelbart en lyd som påkaller oppmerksomhet. Den kan trykkes når som helst. **Shift-Signal** gir en alternativ lyd. Du kan velge hvilke lyder denne tasten skal avgis i **Innstillinger**.

Alternativtasten

Et trykk på **alternativtasten** vil alltid vise deg alle tingene du kan gjøre i den gjeldende aktiviteten. For eksempel kan du redigere, slette eller lagre elementer som notater og SMS-meldinger.


Shift-Alt. kan dessuten brukes i alle sammenhenger for å se hurtig innstillings-menyen. Denne kan du bruke til å forandre **talevolum** og **skjermlysstyrke**.

Talltastene

I tillegg til å skrive inn tall i teksten du arbeider med, kan talltastene brukes til å velge elementer raskt fra menyer og lister. Dette kan være mye raskere enn å bruke **Tilbake-**, **Neste-** og **OK-tastene**. Hvis du for eksempel trykker **4** i Hovedmenyen, får du **notater**, og hvis du i **talemenyen** trykker **1, 2, 3** og **4**, velger du prediksjonsord. Bruker du **talltastene** er det enkelt å huske hvordan du kommer fram til noe uten å måtte se på hvert skjermbilde. Hvis du for eksempel fra **Hovedmenyen** trykker **7, 2, 1** og **1**, kan du endre **talevolumet**.

For å skrive inn tall mens du skriver bokstaver, må du først trykke **123..-tasten** for å slå på **nummerlås**.

123..- og Hjelp-tasten

 **123..-tasten** forandrer funksjonen til talltastene når du skriver tekst. Talltastene velger automatisk én av ordprediksjonene fra boksene under teksten. Hvis du trykker **123..-tasten**, vil talltastene derimot skrive inn tall i teksten, og til høyre på skjermbildet vises et ikon for å indikere at du har slått på **nummerlås**. Trykk **123..** igjen for å slå av **nummerlås**.

Shift-123.. kan brukes hvor som helst for å velge **hjelp**, som viser en kort beskrivelse av aktiviteten du bruker.

Bokstav- og mellomromstastene

Bruk bokstavtastene og mellomromstasten (Space) til å skrive teksten du vil si. Du skriver inn en stor bokstav ved å trykke **shifttasten** før du trykker en bokstavtast. Hvis du vil endre oppstillingen av bokstavtastene, må du gå til **Tastaturlayout** i **innstillinger**.

Tegnsetting- og aksenttaster

Tastaturet kan være utstyrt med ekstra taster for tegnsetting, bokstaver og aksenter tilpasset det lokale språket. Riktig bruk av tegnsetting i teksten kan gjøre talen klarere. Trykk **shift** først for å bruke elementer som vises med rød farge. For å hjelpe deg med å skrive hurtigere, legger Lightwriter automatisk til et mellomrom etter «.», «!» og «?».

Når du vil legge en aksent til en bokstav, skriver du først bokstaven, deretter aksenten. Hvis du for eksempel skriver «e» og deretter aksenten «´», får du tegnet «é». Du kan også trykke **shift-Velg** for å finne flere aksenter i symbolvelgeren hvis de ikke vises i tastaturet.

Stillemodustast

Norsk tastatur har en **stillemodustast**. Dette er en rask måte å slå på og av **stillemodus**. I **innstillinger** finner du nærmere informasjon om **stillemodus**.

Slå på Lightwriter

Etter at du har ladet Lightwriteren, er den klar til bruk. Trykk **On/C**-tasten for å slå den på. Lightwriteren bruker noen sekunder på å starte opp.

Hvis Lightwriteren står uvirksom en liten stund, slukker den skjermene og går inn i **hvilemodus**. Dette gjør at batteriet varer lenger. Trykk **On/C** for å vekke Lightwriter igjen. Du bestemmer selv hvor lenge Lightwriter venter før den går inn i **hvilemodus** ved å justere **hvilemodustid** i **innstillinger**.

Installasjonsveiviseren

Når du slår på Lightwriteren for første gang, får du se denne meldingen.




Det betyr at **installasjonsveiviseren** vil stille deg noen spørsmål for å hjelpe deg med å gjøre Lightwriter klar for bruk. Bruk **Tilbake**- og **Neste**-tastene for å se alle alternativene, og trykk **OK** for å velge ett av dem. Hvis du velger feil, kan du endre innstillingene senere.

- **Stemme** - Velg Acapela-stemmen du ønsker å snakke med. Husk at du kan trykke **shift-OK** for å høre en prøve av hver stemme mens du blar gjennom listen.
- **Talevolum** - Velg lydstyrken for stemmen din.
- **Signallyd** - Velg lyden du ønsker at **signaltasten** skal spille av. Du kan bruke **shift-OK** for å høre en prøve av hver lyd.
- **Tastetrykk volum** - Endre styrken på lyden du hører når du trykker på en tast. Trykk **Neste** for å øke lydstyrken eller **Tilbake** for å redusere lydstyrken eller slå lyden helt av.
- **Klokkeslett** - Still inn Lightwriterklokken. Riktig tid er nødvendig for Instilling av alarm. Juster timer og minutter.
- **Dato** - Når du har stilt inn klokkeslettet, stiller du inn den gjeldende dagen, måneden og året.

Hovedmenyen

Dette er **Hovedmenyen**. Dette er Lightwriterens viktigste skjermvisning; alle funksjoner i Lightwriteren er tilgjengelig fra denne hovedmenyen.

 Et trykk på **Menytasten** bringer deg alltid tilbake til **hovedmenyen**.

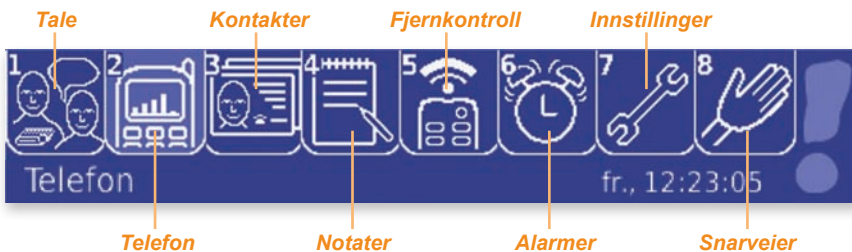

Hver av de 8 aktivitetene har et ikon på **Hovedmenyen**. Nederst til høyre på skjermbildet vises dato og klokkeslett.

Bruk **talltastene** eller **Tilbake, Neste** og **OK** for å velge en aktivitet. Alternativt kan du bare begynne å skrive for å starte **tale** automatisk. Navnet på den uthevede aktiviteten vises nederst til venstre på skjermbildet.


Tips

*Du får hjelp på hvert skjermbilde ved å trykke **shift-123**.. Da får du nærmere informasjon om aktiviteten du bruker.*

Ikonene på **Hovedmenyen**

vises også øverst til høyre på alle andre Lightwriter-skjermbilder for å vise deg hvilken aktivitet du bruker til enhver tid. Eksempelvis er skjermbildet nedenfor i **Alarmmenyen**, noe alarmklokkesymbolet viser.

Aktivitetsikonet

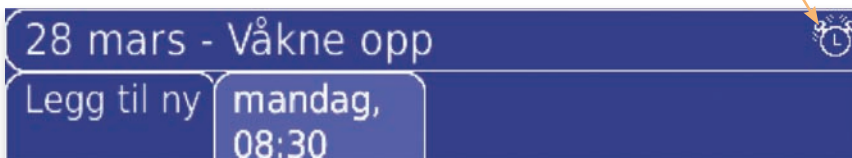

De neste avsnittene gir nærmere informasjon om hver aktivitet.



Tale

Lightwriterens hovedoppgave er å si det du skriver. Det oppnår du ved å bruke **Talemenyen**.



Alt du skriver dukker opp på den øverste halvdel av skjermen og vises samtidig på partnerskjermen, slik at de du kommuniserer med kan lese det.

Tips


*Hvis den du kommuniserer med ikke får med seg alt du skriver, kan du justere hvor mye tekst som skal være synlig på partnerskjermen med **partnerskjermlinjer** i **innstillinger**.*


Under teksten kan du se fire ordprediksjoner som oppdateres og foreslår det mest sannsynlige neste ordet du trenger mens du skriver. Velg en ordprediksjon med **talltastene** eller **Tilbake, Neste** og **OK**.

Trykk **OK** for å si all teksten du har skrevet. Du kan også få Lightwriter til å si hvert ord eller hver setning automatisk ved å justere **Talemodus** i **innstillinger**.


Hvis du ønsker å holde samtalen mer privat, kan du alternativt bruke **Andre samtale**, som slår av partnerskjermen. Se **Ting du kan gjøre med teksten**.

Skrive tekst

- **Store bokstaver** - For å skrive en stor bokstav, må du trykke **shifttasten** før du trykker bokstavtasten. Når du trykker **shifttasten**, vises dette ikonet: 

Hvis du vil skrive flere store bokstaver, for eksempel NRK eller UNICEF, kan du slå på **shiftlås** ved å trykke **shifttasten** to ganger. Da vil alt du skriver bli blokkbokstaver til du trykker **shifttasten** igjen. Så lenge **shiftlåsen** er på, vil dette ikonet vises: 

I **innstillinger** kan du slå av **shiftlås** eller bruke **blokkbokstaver** for å få all tekst skrevet med store bokstaver.

- **Tall** - For å skrive inn tall i et tekstskjerm bilde, må du slå på **nummerlås** ved å trykke **123..**-tasten. Et **123..**-symbol vises på høyre side av skjerm bildet når **nummerlås** er på: 

Trykk **123..** igjen for å slå av **nummerlås**. Talltastene velger ordprediksjoner når **nummerlås** er av. **Nummerlås** slås automatisk på i tekstskjerm bilder som ikke har ordprediksjoner, for eksempel når du skriver inn et navn eller telefonnummer i **Kontakter**.


Tips

Måten å skrive inn tekst på er den samme i alle aktivitetene på Lightwriteren.


- **Angre** - Hvis du gjør en feil i **Tale**, kan du angre handlingen ved å trykke **shift-On/C**. Hvis du for eksempel sletter hele avhandlingen din med **On/C** ved et uhell, kan du gjenopprette teksten med **shift-On/C**. Angretasten kan også fjerne alt du har skrevet ved en feiltakelse, en ordprediksjon du har valgt eller en automatisk rettelse. **Shift-On/C** lar deg angre opptil de 20 siste handlingene.
- **Slette** - Du kan slette det du har skrevet ved å trykke **Tilbake** for å slette ett tegn av gangen eller **On/C** for å slette hele tekstlinjen.

- **Tegnsetting** - Alminnelig tegnsetting og symboler er trykt på talltastene med oransje skrift; bare trykk **shift** etterfulgt av talltasten for å bruke dem. Tegnsetting som avslutter en setning, for eksempel «.», «?» og «!», etterfølges automatisk av et mellomrom.

Hvis du vil bruke tegnsetting og symboler som ikke er oppført i tastaturet, må du trykke **shift-Velg** for å se symbolvelgeren.

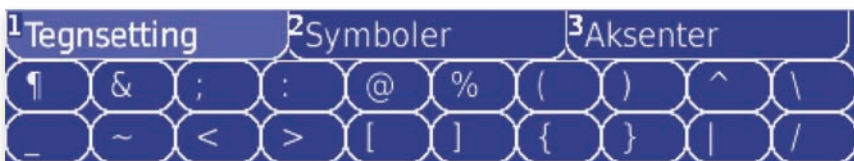

Symbolene vises i tre grupper. Bruk **Tilbake-** og **Neste-**tastene for å se hvilke symboler som er i hver gruppe. Når du ser symbolet du trenger, kan du trykke **OK** for å velge gruppen og bruke **Tilbake-**, **Neste-** og **OK**-tastene for å velge symbolet. Du kan også bruke talltastene til å velge en gruppe og symbolene på den øverste raden.

- **Aksenter** - Avhengig av hvilket språk du bruker, kan tastaturet ha ekstra diakritiske taster for bokstaver og aksenter. Bruk disse på samme måte som de vanlige bokstavtastene.
- **Flytte omkring i teksten** - Du kan flytte markøren til venstre eller høyre gjennom teksten uten å slette noe ved å trykke **shift-Tilbake** eller **shift-Neste** for å slå på **Navigasjonslås**. Når **Navigasjonslås** er på, vises dette ikonet: 

Så snart du kommer til punktet du vil redigere, kan du trykke en vilkårlig tast for å slå av **Navigasjonslås** og igjen skrive eller slette tekst.

Bruke ordprediksjoner og ordbanker


I tillegg til å hjelpe deg med å skrive teksten du ønsker å si, har Lightwriteren en rekke funksjoner som kan øke kommunikasjons-hastigheten.

- **Ordprediksjoner** - Lightwriteren husker automatisk ordene du bruker og hvordan du bruker dem. Mens du skriver i vei, prøver den å forutsi hva du har på tungen. Lightwriteren leveres med en del ord for å sette deg i gang, men jo mer du skriver og prater, desto mer treffende blir disse forutsigelsene.

De fire forslagene til ordprediksjoner vises i de firkantede kategoriene. Du kan velge en ordprediksjon ved hjelp av **talltastene** (sørg for at **nummerlås** er av) eller **Tilbake-**, **Neste-** og **OK-tastene**. Hvis du ikke ser ordet du ønsker, er det bare å skrive til du ser den riktige ordprediksjonen.

Tips


*Ordprediksjoner og andre hjelpemidler for å skrive tekst er også tilgjengelig i **telefon-** og **notatbok-**aktivitetene.*

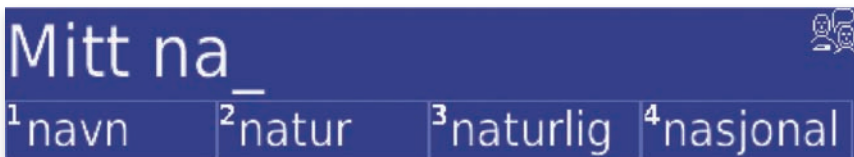

Hvis du ikke ønsker å bruke ordprediksjoner, kan du slå av funksjonen ved å gå til **ordprediksjonsskjermen** i **Innstillinger**. **Tale** vil da isteden vise to linjer.



- **Nye ord** - Lightwriteren har en stor ordliste, men kan mangle en del uvanlige navn og ord, som for eksempel **Ulvestufaret**. Du får spørsmål om å legge nye ord til ordlisten etter at du har skrevet dem tre ganger. Et ord vil ikke dukke opp som en ordprediksjon før du har lagt det til ordlisten.

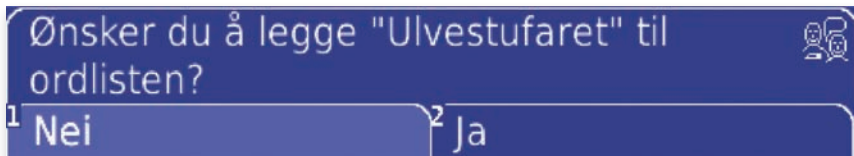


Fraser - Du kan også lagre og bruke korte tekster som fraser. For å lagre en frase er det bare å skrive den, trykke **Alt**, og velge **Lagre som frase**. Enklere kan det ikke bli.

Tips


*Ordlisterord, fraser, utvidelsesforkortelser, automatiske rettelselser og taleunntak kan også legges til, redigeres eller slettes i **ordbankene** som du finner i **Innstillinger**.*

Når du ønsker å bruke en frase, trykker du **Velg** for å velge den fra frasevelgeren. Lightwriteren leveres med en del ferdige fraser.

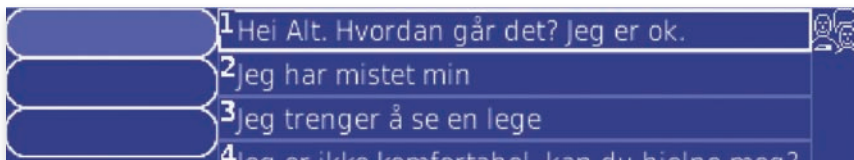

Alle frasene dine vises på høyre side av skjermbildet. De mest brukte frasene vises på toppen av listen. Du kan velge en frase med **talltastene** eller med **Tilbake-**, **Neste-** og **OK**-tastene.

Hvis du ikke ser frasen du tenker å bruke, kan du fort søke etter den ved å skrive inn et nøkkelord. Dette viser seg i den øvre boksen til venstre på skjermbildet. Hvis du for eksempel vil finne frasen «**Hei, jeg heter Toby.**», kan det passe å bruke «**Toby**» eller «**heter**» som nøkkelord, idet få fraser inneholder disse ordene.

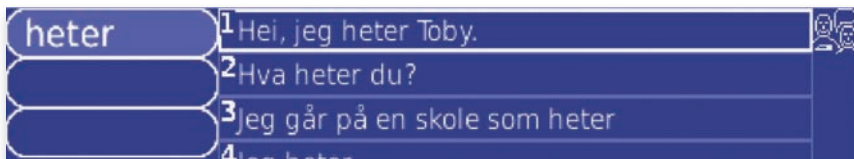

Du kan skrive inn flere nøkkelord ved å trykke **Space**-tasten. Du kan slette et nøkkelord ved å trykke **On/C**.

- **Utvidelsesforkortelser -**

Du kan opprette forkortelser for fraser og lengre ord ved å bruke utvidelsesforkortelser. Når du skriver inn forkortelsen, vises utvidelsen (frasen eller ordet) i ordprediksjonsboksene.

For eksempel kan du opprette forkortelsen **tc** for **Toby Churchill**.

For å lagre en utvidelsesforkortelse, skriver du all teksten i frasen eller ordet (f.eks. **Toby Churchill**), trykker **Alt.** og velger **Opprett en forkortelse**. Skriv den valgte forkortelsen (f.eks. **tc**) og trykk **OK** for å lagre den.

- **Automatiske rettelser -** Lightwriteren korrigerer automatisk vanlige stavefeil, og retter for eksempel **akn** til **kan**.

I tillegg kan du opprette dine egne automatiske rettelser hvis du konsekvent staver et ord feil. Velg **Nei** når du blir spurt om å legge det feilstavede ordet til ordlisten, så blir du spurt om å legge til rettelser for ordet i stedet. Bare velg **Ja** og skriv ordet slik du ønsker at det skal staves. Hvis du deretter skriver den samme feilen igjen, vil Lightwriter automatisk korrigere den for deg.

Du kan også opprette en automatisk rettelse i **ordbankene** i **Innstillinger**.

- **Taleunntak -** Kanskje du ønsker å få Lightwriter til å endre uttalen av enkelte ord. For å gjøre dette, må du opprette et taleunntak i **ordbankavsnittet** i **Innstillinger**.

Først skriver du ordet som Lightwriter sier feil. Deretter forsøker du å skrive ordet slik du ønsker at det skal lyde. Prøv å skrive inn ordet fonetisk, eller legg til bindestreker eller mellomrom for å bryte opp ordet i stavelser. For eksempel høres kanskje **Trondheim** bedre ut som **Trån-hjem** eller **Trånnhjem**. Den neste gangen du skriver **Trondheim**, blir det uttalt korrekt.

Tips

*En forkortelse bør ikke være lik med begynnelsen av et ord. Hvis du valgte «**to**» som forkortelse for **Toby Churchill** istedenfor «**tc**», ville **Lightwriter** foreslå «**Toby Churchill**» hver gang du skrev «**to**» eller begynte å skrive «**tog**» eller «**totakter**».*

Ting du kan gjøre med teksten

Trykk **Alt**. for å se hvilke alternativer du har med teksten som er på **talelinjen**.



- **Lagre som frase** - Dette lagrer den gjeldende **talelinjen** som en frase. Du kan se frasene dine ved å trykke **Velg** mens du skriver tekst.
- **Opprett forkortelse** - Dette lar deg lage en forkortelse for hele teksten du har skrevet. Husk å lage en forkortelse som ikke er lik med begynnelsen av et ord.
- **Send som SMS** - Dette lar deg sende alt på **talelinjen** som en SMS-melding. Du blir bedt om å bekrefte teksten og velge en kontakt å sende meldingen til. Se **SMS**-aktiviteten for nærmere informasjon.
- **Andre samtale** - Hvis du blir avbrutt under en samtale og ønsker å skrive en separat melding uten å slette det som er på **talelinjen**, velger du **Andre samtale**. Da får du en ny, blank **talelinje**. Når du er ferdig med å bruke den **andre samtalen**, trykker du **Alt**. igjen og velger **Første samtale** for å komme tilbake til den primære **talelinjen**. Ingenting i noen av samtalene går tapt.

Andre samtale kan også være nyttig hvis du ønsker en personlig samtale. Ikke noe av det du skriver her kan sees på partnerskjermen. Teksten blir heller ikke talt før du trykker **OK**, selv om den normalt blir talt for hvert ord eller setning automatisk.



Telefon

Du kan nå kommunisere med flere mennesker ved hjelp av den innebygde telefonen i Lightwriter. Du kan bruke den til å sende SMS-meldinger og prate i telefonen, kontrollere SIM-saldoen og lytte til talepostmeldinger.



Tips

*Nettverksnavnet du er tilkopleet vises over **Telefonmenyen**. Du får også beskjed dersom du ikke har noen nettverksforbindelse.*

Sette inn et SIM-kort

Du må ha satt inn et SIM-kort i Lightwriteren for å kunne bruke alle funksjonene i **Telefonmenyen**. Lightwriteren er ikke låst til noe nettverk, noe som betyr at du kan bruke et SIM-kort fra en eksisterende mobiltelefon eller anskaffe et separat kort bare for Lightwriteren. Hvis du foretar mange telefonsamtaler med Lightwriter, lønner det seg fort å skaffe seg et SIM-kort med månedsabonnement. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke SIM-kort kun for 3G (USIM) i Lightwriteren.

Det tar bare et par minutter å sette inn eller bytte et SIM-kort. Det kan hende at du trenger hjelp med dette hvis du har problemer med presise håndbevegelser.

1 Påse at Lightwriteren er avslått. Du kan bruke **Strøm Av** i **Innstillinger** til dette. SIM-kortet kan bli skadet hvis Lightwriteren fortsatt er på.

2 Legg Lightwriteren opp ned på et bord eller annen flat overflate, slik at tastaturet vender ned og skjermene bort fra deg. Du vil nå se SIM-holderen på venstre side av Lightwriter. Hvis det finnes noen monteringsplater for Lightwriter over SIM-holderen, må disse fjernes først.



SIM-luke

3 Bruk skrutrekkeren i verktøysettet som ble levert med Lightwriteren for å løsne de to små skruene på hver sin side av SIM-holderen og fjern lokket. Ta vare på skruene, fordi du må sette dem på plass igjen etter at du har satt inn / byttet SIM-kortet.



4 Du ser SIM-holderen så snart du har fjernet lokket. Skyv metallsperran bort fra deg slik at holderen løsner. Vipp opp den løsenede SIM-holderen slik at den står i rett vinkel til undersiden av Lightwriter.



5 Hvis det allerede sitter et SIM-kort i Lightwriteren, fjerner du det ved å skyve det opp og ut av SIM-holderen. Skyv det nye SIM-kortet med metallkontaktene vendt mot deg ned og inn i holderen med det avkuttete hjørnet på SIM-kortet vendt opp til høyre. Ikke tving SIM-kortet inn i holderen med makt, fordi dette kan påføre skade.



Tips

Behandle SIM-kortet forsiktig. Ikke berør metallkontaktene, ikke la SIM-kortet bli tilsmusset eller la det komme i kontakt med metallgjenstander.

6 Når SIM-kortet sitter på plass i SIM-holderen, fører du holderen tilbake i liggende stilling og skyver metallsperreren tilbake mot deg. SIM-holderen skal nå være fastlåst, og det avkuttede hjørnet på SIM-kortet skal være vendt ned til høyre.



7 Legg lokket tilbake over SIM-holderen og fest det igjen med de to små skruene, én på hver side, ved hjelp av skrutrekkeren som ble levert med Lightwriteren. Nå kan du slå på Lightwriteren igjen ved å trykke **On/C**. Du må kanskje også slå på **Telefonstrøm** i **Innstillinger**.



I tilfelle du også må feste noen monteringsplater igjen, bør du aller først sende en SMS-melding for å teste at SIM-kortet fungerer.

Telefonindikator

Telefonikonet på **hovedmenylinjen** har en signalindikator som forteller deg en hel del om den innebygde telefonen i Lightwriter. Lightwriteren må være koplet til et nettverk for å kunne sende SMS-meldinger og for å ringe.



Tilkoplet nettverk - Lightwriteren er koplet til nettverket, og du kan sende og motta SMS-meldinger og telefonsamtaler. Jo flere stolper du ser, desto sterkere er signalet.

Hvis disse stolpene er hule, betyr det at nettverket ikke er tilgjengelig for tilkopling. Du vil likevel trolig kunne foreta nødoppringninger.



Intet signal - Hvis ingen stolper vises, betyr det at Lightwriteren ikke har noe signal eller nettverksforbindelse. Du vil da verken kunne ringe eller sende SMS-meldinger.



Telefon Av - Du ser et strømikone hvis den innebygde telefonen er slått av. Se **Telefonstrøm i innstillinger**. (Det kan hende at du ser strømikonet en liten stund etter at du har slått på Lightwriteren).

Tips

Hvis du prøver å sende en SMS-melding uten en nettverksforbindelse, vil den bli lagret i utboksen og sendt når du er tilkoplet igjen. Meldinger i utboksen som ikke er sendt markeres med en asterisk ().*



Intet SIM-kort - Det er ikke satt inn noe SIM-kort i Lightwriteren. Du kan ikke bruke den innebygde telefonen uten et SIM-kort. Se Sette inn et SIM-kort for nærmere informasjon.



Opptattmodus - Hvis det er en pil over nettverkstolpene, er den innebygde telefonen **opptatt**. Alle innkommende anrop avvises automatisk, og mottaket av SMS-meldinger utsettes. Du finner nærmere informasjon i telefoninnstillinger.



Nye SMS-meldinger - Hvis du ser et SMS-ikon under nettverkstolpene, har du mottatt en ny SMS-melding. Tallet viser deg hvor mange nye meldinger du har i innboksen. Uleste meldinger i innboksen markeres med en asterisk (*).

Telefonlampen kan også fortelle deg noe om statusen til den innebygde telefonen.

Grønn - Det er en ny SMS-melding i innboksen.

Gul - Du er for øyeblikket opptatt i en telefonsamtale.

Rød - Oppgi en **PIN-kode** for å bruke SIM-kortet. Se PIN-koder for nærmere informasjon.



Saldokontroll

Denne funksjonen viser deg hvor mye penger du har igjen på et Kontantkort. Restbeløpet vises på skjermen. Nærmere informasjon om samtale- og SMS-kostnader på SIM-kortet får du hos tjenesteleverandøren.

Vær oppmerksom på at saldokontrollen ikke virker med alle SIM-kort eller med alle tjenesteleverandører. I så fall må du kanskje ringe eller sende en SMS-melding for å innhente denne informasjonen.




Øke kreditten på SIM-kortet

Hvis du bruker et kontantkort, reduseres beløpet etter hvert som du sender SMS-meldinger og når du ringer. Når kreditten nærmer seg null, må du fylle penger på kortet. Se bruksanvisningen som ble levert med SIM-kortet for informasjon om hvordan dette gjøres. Vær oppmerksom på at hvis du har en avtale om fakturering i ettertid, trenger du ikke fylle på SIM-kortet.


PIN-koder

Hvis du bruker et SIM-kort med PIN-kode aktivert, blir du bedt om å oppgi koden hver gang du slår Lightwriteren eller den innebygde telefonen av og på igjen. Du må skrive inn denne koden for å kunne bruke den innebygde telefonen i Lightwriter. Nærmere informasjon om PIN-koden finner du i materialet som fulgte med SIM-kortet.

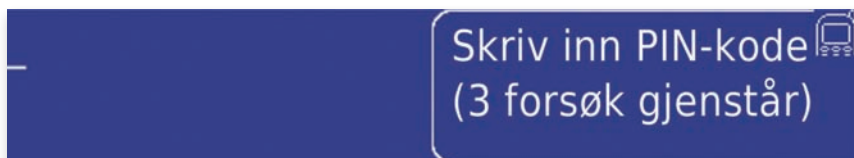

ADVARSEL: Hvis du skriver inn feil PIN-kode tre ganger, sperres SIM-kortet. Du må da bruke PUK-koden for å åpne det igjen. Hvis du ikke har mottatt PUK-koden, får du den av tjenesteleverandøren. Du har ti forsøk på å skrive inn PUK-koden før SIM-kortet blir blokkert.


Hvis du ikke ønsker å skrive inn PIN-koden (eller PUK-koden) når du slår på Lightwriter for første gang, kan du gjøre det senere i **Telefonmenyen**. Lightwriteren forøvrig fungerer som normalt, men telefonlampen lyser rødt for å vise at du må skrive inn en PIN-kode før du kan bruke den innebygde telefonen.

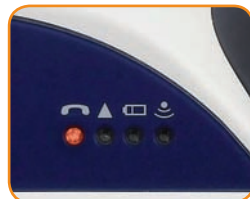



SMS

Du kan bruke den innebygde telefonen til å sende korte SMS-meldinger til hvem du vil hvor som helst.

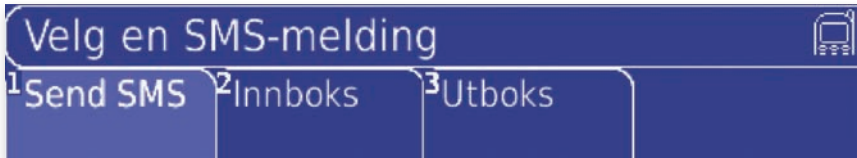

Sende en SMS-melding

I **SMS-menyen** velger du **Send SMS**.

1 Skriv meldingen. Alle skrivehjelpemidlene du er vant til i **Talemenyen** fungerer også når du skriver SMS, for eksempel ordprediksjoner, fraser og symbolvelgeren. Trykk **OK** for å bekrefte meldingen.

2 Velg en kontakt å sende SMS-meldingen til eller velg **Skriv inn nummer** hvis du vil oppgi det manuelt. Vær oppmerksom på at du bare kan bruke sifrene 0–9 og tegnene *, # og + i et telefonnummer.

3 Bekreft opplysningene for å sende meldingene.

4 Hvis du har skrevet inn et nytt nummer som du vil sende SMS-meldingen til, blir du spurt om du vil legge det til som en kontakt. Bare skriv et navn og trykk **OK** for å lagre.


Du kan trykke **On/C** når som helst mens du oppretter en SMS-melding for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Tips

SMS-meldinger kan inneholde opptil 160 tegn. Hvis teksten inneholder flere tegn, blir du spurt om det er i orden å sende opptil tre SMS-meldinger samtidig.

Innboks

Innboksen inneholder alle SMS-meldingene du har mottatt. De siste vises først, og alle nye meldinger markeres med en asterisk (*).

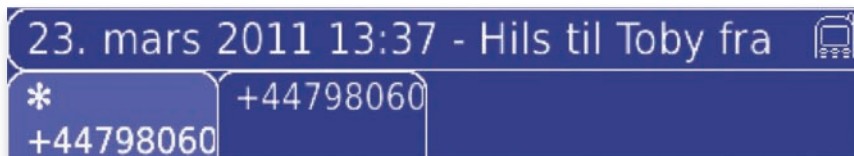

Bruk **Tilbake**- og **Neste**-tastene for å flytte mellom meldingene, og trykk **OK** for å se én av dem. Bruk **Tilbake**- og **Neste**-tastene for å rulle nedover og oppover i meldingen mens du leser.

Ting du kan gjøre med meldingene i innboksen

Når du har valgt en SMS-melding, kan du trykke **Alt**. for å se en liste med alternativer.

- **Svar på SMS** - Lar deg sende en SMS-melding tilbake til den som sendte meldingen du ser på. Bare skriv et svar og trykk **OK** for å sende.
- **Bruk detaljer** - Dette gir deg fire måter å bruke SMS-meldingen på:

- **Ring kontakt.** Ring til den som sendte meldingen. Velg en frase Du vil innlede anropet med og trykk **OK**.
- **Legg til kontakt.** Legg nummeret til den som sendte meldingen til som en ny kontakt. Bare skriv et navn og trykk **OK** for å lagre.
- **Kopier til Tale.** Kopier teksten i meldingen til **Tale** for Å si teksten. Du kan også si meldingen ved å bruke **shift-OK**.
- **Videresend SMS.** Send teksten i meldingen til en ny kontakt.

Tips

Hvis det begynner å ta lang tid for å finne meldinger i innboksen, kan du øke hastigheten ved å slette noen meldinger.

- **Slett SMS** - Dette fjerner SMS-meldingen fra innboksen for alltid. Så snart du har bekreftet at du ønsker å slette meldingen, kan du ikke angre.
- **Lagre som notat** - Lagre teksten i SMS-meldingen du ser på som et notat. Navnet eller nummeret til senderen, samt dato og klokkeslettet den ble sendt, blir foreslått som tittel for notatet.

Fordeler med å lagre en SMS-melding som et notat er at et notat er enklere å finne igjen, det kan kopieres til datamaskinen ved hjelp av **en minnepenn**, og du holder innboksen ryddig.

Utboks

Utboksen inneholder alle SMS-meldingene du har sendt. De siste vises først, og alle meldinger som venter på å bli sendt markeres med en asterisk (*).



Bruk **Tilbake**- og **Neste**-tastene for å flytte mellom meldingene, og trykk **OK** for å se én av dem. Bruk **Tilbake**- og **Neste**-tastene for å rulle nedover og oppover i meldingen mens du leser.

Ting du kan gjøre med meldingene i utboksen

Når du har valgt en SMS-melding, kan du trykke **Alt**. for å se en liste med alternativer.

- **Videresend SMS** - Lar deg sende teksten i meldingen du ser på til en ny kontakt.
- **Bruk detaljer** - Dette gir deg tre måter å bruke SMS-meldingen på:
 - **Ring kontakt.** Ring til personen SMS-meldingen ble sendt til. Velg en frase Du kan innlede samtalen med og trykk **OK**.
 - **Legg til kontakt.** Legg til nummeret til personen som meldingen ble sendt til som en ny kontakt. Bare skriv et navn og trykk **OK** for å lagre.
 - **Kopier til Tale.** Kopier teksten i meldingen du ser på til **Tale**, slik at den kan tales. Du kan også si meldingen ved å bruke **shift-OK**.
- **Slett SMS** - Dette fjerner SMS-meldingen fra utboksen for alltid. Så snart du har bekreftet at du ønsker å slette meldingen, kan du ikke angre.
- **Lagre som notat** - Lagre teksten i SMS-meldingen du ser på som et notat. Navnet eller nummeret til mottakeren samt datoen og klokkeslettet den ble sendt blir foreslått som tittel for notatet.

Fordeler med å lagre en SMS-melding som et notat er at et notat er enklere å finne igjen, det kan kopieres til datamaskinen ved hjelp av en **minnepenn**, og du holder utboksen ryddig.



Å ringe

Telefonen lar deg ringe med Lightwriteren for å prate med hvem som helst, hvor som helst.

Velg **Ring** i **telefonmenyen** for å ringe noen.



Å ringe

Du starter en ny telefonsamtale ved å velge **Ring** i **telefonmenyen**.

1 Velg en kontakt å ringe til eller velg **Skriv inn nummer** hvis du vil bruke et nummer som ikke er lagret som en kontakt. Vær oppmerksom på at du bare kan bruke sifrene 0–9 og tegnene *, # og + i et telefonnummer.

2 For å komme fort i gang med samtalen, kan du velge en frase som skal vises når samtalen begynner. Du kan enten velge et element fra de lagrede frasene dine eller skrive inn ny tekst. Trykk **OK** for å si frasen når samtalen begynner.


3 Til slutt blir du bedt om å bekrefte alle disse detaljene for å starte oppringningen.

Tips

*For å gjøre kommunikasjonen smidigere, kan det være lurt å lagre noen nyttige fraser før du starter en samtale. Deretter kan du bruke disse frasene under samtalen ved å trykke **Velg**.*

Besvare en telefonsamtale


Når noen ringer til deg, varsles anropet med navnet og nummeret til den som ringer. Du kan enten godta (besvare) eller avslå (avbryte) anropet. Hvis du trykker **On/C** eller **aktivitetstasten**, avslår du automatisk anropet.

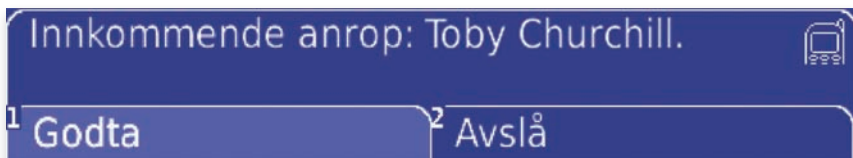

Hvis du ikke ønsker å motta noen telefonsamtaler eller SMS-meldinger midlertidig, kan du slå på **Opptattmodus** i **telefoninnstillinger**. Dette avviser automatisk alle innkommende anrop slik at du ikke blir forstyrret. Du kan likevel ringe ut og sende SMS-meldinger når **opptattmodus** er slått på.

Tapte anrop

Hvis du ikke godtar eller avslår et innkommende anrop, blir du varslet om at du har et tapt anrop. Velg Ja for å se nummeret og tidspunktet for det tapte anropet i **anropsloggen** eller tøm varslet med **On/C**.

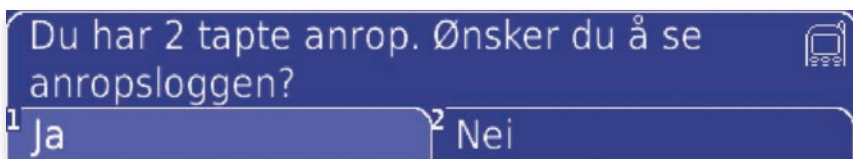

Nødanrop

Velg **Nødanrop** for å starte en samtale raskt i en akutt situasjon. Nummeret du har valgt i innstillinger for **Nødnummer** ringes automatisk, og frasen du har valgt i innstillinger for **Nødfrase** vises automatisk på skjermen så snart samtalen er i gang. Du finner nærmere informasjon i **Telefoninnstillinger**.

Nødanrop er en avansert funksjon; du må derfor ha satt **Avansert** til **På** i **Innstillingsmenyen** hvis du ønsker å bruke den.




Avslutte en samtale

Trykk **On/C** eller **aktivitetstasten** for å avslutte en samtale.

Hvis du utilsiktet forlater Lightwriteren i en samtale, avsluttes samtalen automatisk hvis ingen taster trykkes i løpet av den forhåndsinnstilte tiden valgt i **Samtale-tidsavbrudd**.

Du får spørsmål om du ønsker å legge til ukjente nummer som en kontakt når en samtale blir avsluttet. Bare skriv et navn å tilknytte nummeret og trykk **OK** for å lagre. Disse numrene er også tilgjengelige i **anropsloggen**.

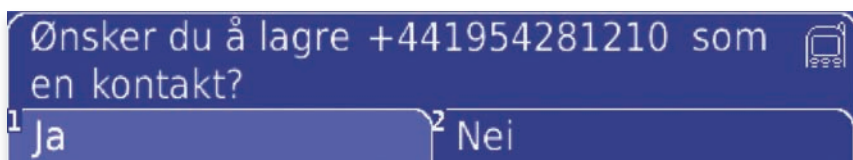

I en samtale

Idet en samtale besvares, forandrer telefonlampen farge til gult for å vise at du er i en pågående samtale. I tillegg angis samtalen med et aktivitetsikon på skjermen.

Aktivitetsikonet



Du kan skrive og prate som vanlig mens du er i en telefonsamtale. Samtalepartneren hører stemmen din, tasteklikk og bakgrunnslyder over telefonlinjen, og du hører alt som sies gjennom Lightwriter-høytaleren.

Hvis du ikke ønsker at noen rundt deg skal overhøre samtalen, kan du slå av **høytaleren** i **Telefoninnstillinger** og bruke hodetelefoner for å høre hva

Tips

*Alle skrivehjelpemidlene du er vant til i **Talemenyen**, for eksempel ordprediksjoner, fraser og symboler, fungerer også i telefonsamtaler. For å spare tid under samtaler blir du ikke spurt om å legge nye ord til ordlisten.*

samtalepartneren din sier. Da vil ikke samtalen kunne høres gjennom Lightwriterens høyttaler.

Samtalepartneren kan høre lyder og stemmer fra omgivelsene via den innebygde mikrofonen. Hvis du ikke finner det hensiktsmessig å bruke den innebygde mikrofonen i Lightwriter, kan du i stedet bruke en ekstern mikrofon. Bare sett den inn i mikrofonkontakten og slå den innebygde mikrofonen av i **Telefoninnstillinger**.



Fraser du bruker i en telefonsamtale vil automatisk dukke opp på toppen av fraseslisten i neste telefonsamtale. Dette betyr at frasene som du bruker når du ringer er tilgjengelige når du trenger dem.

Ting du kan gjøre i en telefonsamtale

Trykk **Alt**, for å se en liste med andre ting du kan gjøre i en samtale.




- **Privat samtale** - Dette alternativet lar deg slå av en kort prat med noen i nærheten uten at det du sier kan høres over telefonlinjen. Skriv meldingen og trykk **OK** for å prate på vanlig måte. Telefonpartneren hører en tone som forteller at du er opptatt.

Tips

*Hvis du ønsker å komme fort tilbake til samtalen fra et av de andre skjermbildene i løpet av en samtale, trykker du **Alt**, og velger «Ja» eller trykker **On/C** for å gå et skritt tilbake.*

- **Notater** - Dette valget lar deg si hva som helst som er lagret i **Notater**. Det kan være nyttig å forberede lengre tekster som du kan bruke i en samtale. Husk at du må dele opp teksten med tegnsetting for å gjøre den enklere å tale.

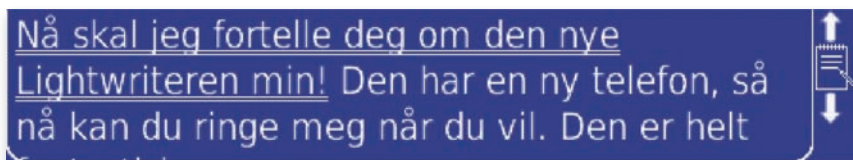

Velg et notat med **Tilbake**, **Neste** og **OK**. Den understrekede teksten vil bli talt når du trykker **OK**. Understrekingen går deretter automatisk videre til neste tekstdel som skal tales. Du kan gjenta eller hoppe over tekstdeler ved å bruke **Tilbake**- og **Neste**-tastene.

Du kan forandre hvordan notatene skal tales i en telefonsamtale ved å redigere **Telefonnotat** i **innstillinger**. Du finner nærmere informasjon nedenfor.


- **Kontakter** - Dette lar deg si navnet og nummeret til en kontakt i en samtale. Velg en kontakt med **Tilbake**, **Neste** og **OK** for å vise navnet og nummeret. Flytt den understrekede delen med **Tilbake** og **Neste**, og bruk **OK** for å snakke.



- **Fjernkontroll** - Dette lar deg bruke fjernkontrollkoder i en samtale. Du kan bruke disse til f.eks. å slå av TV-apparatet eller dempe stereoanlegget. Bruk **Tilbake**, **Neste** og **OK** for å velge og for å sende en kode.

Shift-Alt.-hurtiginnstillinger

På samme måte som du bruker **shift-Alt.** med andre aktiviteter på Lightwriter for å se hurtig innstillings-menyen og justere **talevolum** og **skjermlysstyrke**, kan du trykke **shift-Alt.** i en telefonsamtale for å justere de følgende innstillingene:

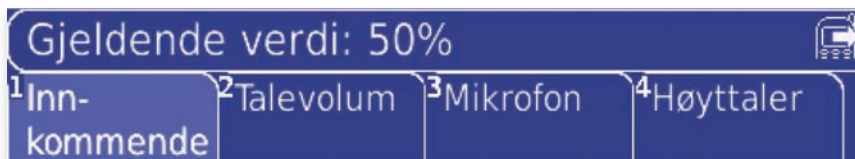


- Innkommende telefonvolum
- Talevolum i telefonen
- Mikrofon På/Av
- Høytaler På/Av

Velg et av disse innstillingene og juster dem som vanlig ved å bruke **Tilbake**, **Neste** og **OK**. Du finner nærmere informasjon om disse innstillingene i **Telefoninnstillinger**. Du behøver ikke bekymre deg for endringer du gjør her - de blir ikke lagret, men gjenoppretter de tidligere innstillingene så snart samtalen er avsluttet.

DTMF-toner

Hvis du trenger å bruke tall for å navigere i en meny, for eksempel når du kommer til et automatisk sentralbord, må du slå på **nummerlås** ved å trykke **123...**

Et **123...**-ikon vises når **nummerlås** er på:  Deretter sender Lightwriteren DTMF-toner når du trykker taltastene, * og #, slik at du kan bruke disse menyene.

Talepost

Du kan kople til taleposttjenesten din for å se om du har nye meldinger ved å velge **Sjekk talepost** i **Taletelefon**-menyen. Talepostnummeret skal være satt opp automatisk, men du kan endre nummeret i **Telefoninnstillinger** hvis det trengs.



Mens du er tilkopleet taleposten, må du følge instruksjonene gitt av nettverket. Avslutt samtalen på vanlig måte etter at du er ferdig med å sjekke taleposten.

Den første gangen du bruker taleposten, kan det være nødvendig å sette opp en velkomstmelding. Du bør lagre denne meldingen som en frase før du ringer for å forenkle prosessen.

Tips

*Under et talepostanrop er **nummerlås** automatisk på slik at du kan navigere i menyene med talltastene, * og # for å åpne meldingene.*

Anropslogg

Opplysninger om samtalene, inkludert kontaktnavnet eller nummeret, dato, klokkeslett og varighet er lagret i **anropsloggen**. Den lagrer tre slags samtaler:



- **Tapte anrop** - Innkommende samtaler som ble avslått eller ikke besvart.
- **Mottatte anrop** - Innkommende samtaler som ble godtatt.
- **Utgående anrop** - Samtaler ringt fra Lightwriter.

Bruk **Tilbake**, **Neste** og **OK** til å velge et element og se informasjonen.

Ting du kan gjøre med anropsloggen

Når du har valgt et element i anropsloggen, kan du trykke **Alt** for å se alternativene nedenfor:

- **Ring kontakt** - Ring til den viste kontakten. Velg en startfrase og bekreft oppringningen.
- **Legg til kontakt** - Legg det viste nummeret til som en kontakt. Bare skriv et navn og trykk **OK** for å lagre.
- **Slett anrop** - Fjern det viste elementet fra **anropsloggen** for alltid. Etter at du har bekreftet at du ønsker å slette anrops-elementet fra anropsloggen, kan du ikke angre.

Du kan også slette alle tapte, mottatte og utgående anrop samtidig ved å velge **Slett hele anropsloggen** i **Anropslogg**-menyen. Etter at du har bekreftet dette, kan du ikke angre. Denne valgmuligheten er bare synlig hvis **Avanserte innstillinger** er På.

Telefoninnstillinger

Velg **Telefoninnstillinger** i **Ringemenyen** for å se Flere innstillinger For telefon.



Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Svarfrase 1	Skriv inn en frase du normalt sett bruker for å svare på et innkommende anrop. Frasen vises og kan bli talt ved å trykke OK når du starter samtalen.	
Svarfrase 2	Skriv inn frasen du som regel bruker når du tar telefonen og nummeret er ukjent. Kanskje du vil forklare at du bruker et kommunikasjonshjelpemiddel. Frasen vises og kan bli talt ved å trykke OK når anropet starter.	
Mikrofon	Ved å slå på den innebygde mikrofonen kan samtalepartneren høre bakgrunnslyder hos deg. Dette er nyttig hvis du ønsker å kommunisere både ved å snakke og bruke Lightwriter-tale, og hvis noen i nærheten vil delta i samtalen. Hvis du ringer fra et støyfullt offentlig sted eller fra et kjøretøy er det kanskje best å slå av mikrofonen.	På, Av
Høytaler	Hvis du vil føre en privat samtale, kan du slå av høytaleren. I så fall må du bruke hodetelefoner for å kunne høre samtalepartneren.	På, Av

Avanserte telefoninnstillinger		
Opptattmodus	Slå på opptattmodus for å stoppe alle innkommende anrop og SMS-meldinger. Bruk disse innstillingene hvis du ikke vil bli forstyrret. Du kan fortsatt sende SMS-meldinger og ringe ut. Når du slår av opptattmodus igjen, mottar du alle ventende SMS-meldinger og får melding om alle tapte anrop.	På, Av
Samtale-tidsavbrudd	Disse innstillingene bestemmer tiden før Lightwriteren avbryter en samtale automatisk hvis ingen taster trykkes. Dette er nyttig hvis du forlater Lightwriter utilsiktet i en samtale.	Av, 2, 5 , 10, 20 minutter.
Talepost-nummer	Dette er nummeret Lightwriteren ringer for å kople deg til taleposttjenesten. Et nummer skal vises automatisk. Hvis det imidlertid ikke foreslås noe nummer, eller det foreslåtte nummeret ikke virker, kan du endre det til det korrekte nummeret. Se i materialet som fulgte med SIM-kortet eller ta kontakt med nettverksleverandøren for å finne denne informasjonen.	
Nødnummer	Angi nummeret du vil bruke for nødanrop. Se Nødanrop for nærmere informasjon.	
Nødfrase	Angi frasen du vil bruke for å innlede et nødanrop. Se Nødanrop for nærmere informasjon.	



Kontakter

Denne aktiviteten likner på en telefonkatalog. Du kan bruke den til å oppbevare telefonnumre og annen kontaktinformasjon om folk du kjenner.



Legge til en ny kontakt

Gå til **Kontaktmenyen** og velg **Legg til ny**.

- 1 Skriv navnet på kontakten. Sørg for at navnet er entydig, fordi du bare kan lagre ett nummer for hvert navn.
- 2 Skriv inn telefonnummeret, e-postadressen, gateadressen eller annen informasjon om kontakten. Hvis du ønsker å sende SMS-meldinger eller sette opp telefonsamtaler til denne kontakten, må du huske at telefonnummeret kun kan inneholde tallene **0–9** og tegnene *****, **#** og **+**.
- 3 Trykk **OK** for å lagre kontakten.

Bla gjennom kontakter

For å finne en kontakt, er det bare å begynne å skrive personens navn. Alle kontaktene som starter med de skrevne bokstavene vises; bruk **Tilbake**, **Neste** og **OK** for å velge en kontakt å se på.




Ting du kan gjøre med kontaktene

Når du har valgt en kontakt, kan du trykke **Alt.** for å se en liste med alternativer.



- **Rediger kontakt** - Du kan redigere både navnet og nummeret til en kontakt. Bruk **shift-Tilbake** og **shift-Neste** for å redigere det eksisterende navnet eller nummeret til en valgt kontakt. Trykk **OK** for å lagre.

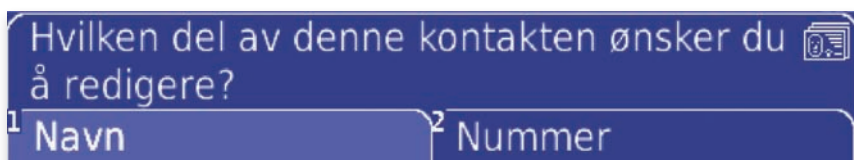

- **Bruk kontakt** - Dette gir deg fire måter å bruke kontakten på:
 - **Send SMS.** Send en SMS-melding til kontakten. Bare skriv meldingen og trykk **OK** for å sende den.
 - **Ring kontakt.** Velg en frase Du vil innlede samtalen med og trykk **OK.**
 - **Kopier til Tale.** Kopier kontaktens navn og nummer til **taleaktiviteten**, der du kan si dem. Du kan også si dem ved å bruke **shift-OK.**
 - **Videresend i SMS.** Kopier kontaktens navn og nummer til en SMS-melding og send dem til noen andre. Du kan redigere teksten før du sender den.
- **Slett kontakt** - Dette fjerner kontakten for alltid. Så snart du har bekreftet at du ønsker å slette kontakten, kan du ikke angre.



Notater

Du kan bruke **notater** til å oppbevare, redigere og si lengre tekster. Den er fin til å forberede hva du skal si før en avtale, eller du kan ganske enkelt bruke den til å lagre diverse tekst og informasjon.



I tillegg til å lagre tekst du har skrevet på Lightwriteren, kan du også overføre notater fra og til datamaskiner med en minnepenn. Se **minnepenn-menyen** for nærmere informasjon om hvordan du gjør dette.

Legge til et nytt notat

Gå til **Notatmenyen** og velg **Legg til ny**.


- 1 Skriv teksten du ønsker å lagre. Alle skrivehjelpemidlene du er vant til i **talemenyen** fungerer også når du skriver notater, for eksempel ordprediksjoner, fraser og symbolvelgeren. Trykk **OK** for å bekrefte teksten. Det er svært viktig å bruke tegnsetting for å bryte opp tekst du har tenkt å si høyt.
- 2 Angi en tittel for notatet. Påse at tittelen er entydig, fordi du bare kan lagre ett notat for hver tittel. Hvis du ikke kommer på en god tittel, kan du trykke **OK** med åpent skjermbilde og la Lightwriteren automatisk bruke de 10 første tegnene i notatet som tittel.
- 3 Trykk **OK** for å lagre notatet.

Tips

Notater er nyttige til å forberede hva du skal si før en avtale, som et legebefolk eller liknende. Det kan også være nyttig å forberede seg før en telefonoppringning hvis du vet hva du skal snakke om.

Bla gjennom Notater

Hvis du vil finne et bestemt notat, er det bare å begynne å skrive inn tittelen. Alle notater som starter med de skrevne bokstavene vises; bruk **Tilbake**, **Neste** og **OK** for å velge et notat å se på.

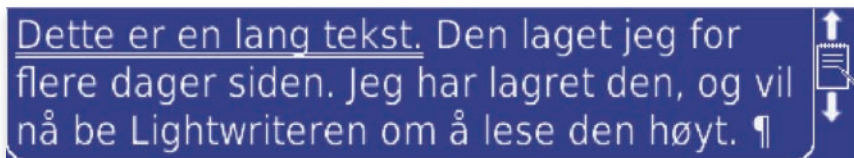

Den doble understrekingen viser tekstdelen som vil bli talt når du trykker **OK**. Etter at en del er talt, går understrekingen automatisk videre til neste tekstdel. Du kan også flytte rundt i teksten med **Tilbake**-, **Neste**- og **OK**-tastene.

Ting du kan gjøre med notatene

Når du har valgt et notat, kan du trykke **Alt**, for å se en liste med alternativer:

- **Rediger notat** - Rediger teksten i notatet. Husk å bruke **shift-Tilbake** og **shift-Neste** til å flytte rundt i teksten. Trykk **OK** for å bekrefte endringene.
- **Rediger tittel** - Du kan også redigere notattittelen. Husk at tittelen må være entydig. Trykk **OK** for å bekrefte endringene.
- **Slett notat** - Dette fjerner notatet for alltid. Så snart du har bekreftet at du ønsker å slette notatet, kan du ikke angre.
- **Talemønster** - Dette lar deg endre hvor mye tekst som skal være understreket av gangen når du taler notatet. Et trykk på **OK** vil alltid si den understrekede delen. Du kan velge ett av følgende alternativer:



- **Ord**. Hvert ord blir individuelt understreket, atskilt med mellomrom.
- **Frase**. Teksten deles opp ved all tegnsetting som etterfølges av mellomrom, som for eksempel komma og kolon.
- **Setning**. Hver setning blir individuelt understreket, atskilt med punktum, spørsmålsteget og utropsteget. Denne tegnsettingen må også etterfølges av mellomrom.
- **Avsnitt**. Du må bruke et avsnittsmerke – ¶ – for å markere avsnitt i teksten. Trykk **shift-Velg** for å finne avsnittsmerket i symbolvelgeren.




Fjernkontroll

Fjernkontrollen lar deg lagre infrarøde koder i Lightwriteren, slik at du kan styre utstyr, leker og enkelte kontrollsystemer i hjemmet. Du kan lagre opptil åtte ulike kommandoer.

Vær oppmerksom på at Lightwriteren ikke er i stand til å ta opp en del avansert utstyr, for eksempel de mest kompliserte audiovisuelle systemene.



Ta opp en IR-kode

Lightwriteren leveres ikke med noen innebygde koder fordi utvalget er så stort, så du må ta opp dine egne selv. For eksempel kan det være en fordel å ta opp **Volum +** eller **Kanal +** for TV-apparatet eller stereoanlegget. IR-kodemottakeren er under det 4. ikonet til høyre for brukerskjermen: 

Opptaket av en ny IR-kode starter med at du velger **Legg til ny** i fjernkontrollmenyen.



1 Lightwriteren ber deg om å være klar til å ta opp IR-koden. Sørg for at du har fjernkontrollen du ønsker å ta opp IR-koden fra foran deg og at den har nok strøm til å sende IR-koden. Du kan teste den ved å bruke fjernkontrollen på utstyret den styrer, f.eks. prøv å bruke **Volum +** på TV-apparatet før du tar opp.

2 Trykk **OK** for å fortsette når du er klar til å ta opp IR-koden. Lightwriter gir deg beskjed når du må trykke knappen på fjernkontrollen. Du må holde fjernkontrollen maksimalt 1 cm fra IR-kodemottakeren foran til høyre på Lightwriteren.



3 Etter at IR-koden er vellykket tatt opp én gang, blir du bedt om å gjennomføre prosedyren én gang til for å være sikker på at IR-koden er tatt opp korrekt. Det er viktig å ta opp den samme koden som i trinn 2.

4 Så blir du bedt om å teste IR-koden du har tatt opp. Dette anbefales for å forsikre at IR-koden virker. Rett senderen for fjernkontrollkoder, som er ved siden av partnerskjermen, mot utstyret du har tatt opp IR-koden for, for eksempel TV-apparatet, og trykk **OK**. Lightwriteren avgir et lydsignal for å fortelle at IR-koden er sendt.

Tips

Hvis du har problemer med å gjennomføre opptaket av en IR-kode, kan du prøve å dempe taklyset eller trekke for gardinene. Lys kan påvirke opptaket.



5 Når koden har blitt tatt opp og testet, blir du bedt om å skrive en kort tittel, for eksempel **Stereo volum +**, **TV-kanal +** eller **Spill**. Sørg for at tittelen er entydig, fordi du bare kan lagre én IR-kode for hvert navn. Trykk **OK** for å lagre IR-koden.

Bruke IR-kodene

Du kan velge og sende en av IR-kodene ved hjelp av **talltastene** 1–8 eller ved å bruke **Tilbake**, **Neste** og **OK**. Lightwriteren avgir et lydsignal for å fortelle at IR-koden har blitt sendt. Pass på at senderen for fjernkontrollkoder er rettet mot utstyret du ønsker å styre.

Ting du kan gjøre med IR-kodene

Bruk **talltastene** eller **Tilbake** og **Neste** for å utheve en IR-kode, og trykk **Alt.** for å se en liste med alternativer.

- **Ta opp IR-koden igjen** - Hvis du anskaffer nytt utstyr, for eksempel et TV-apparat eller stereoanlegg, eller en IR-kode ikke virker, kan du ha behov for å ta den opp igjen. Dette gjøres på samme måte som opptaket av en ny IR-kode, bare at du ikke blir spurt om en tittel.
- **Gi IR-koden nytt navn** - Dette lar deg redigere IR-kodetittelen. Husk at tittelen må være entydig.
- **Slett IR-koden** - Dette fjerner IR-koden for alltid. Så snart du har bekreftet at du ønsker å slette IR-koden, kan du ikke angre.



Alarmer

Du kan stille inn opp til fire alarmer på Lightwriteren for å minne deg om hendelser, avtaler eller vekke deg neste morgen. Disse kan stilles inn opp til en uke på forhånd. Etter at en alarm har blitt aktivert, blir den automatisk slettet.

Nå: tirsdag 22 mars 16.03.55



Legg til ny

Tips

Når **Legg til ny** er uthevet i **alarmmenyen**, vises gjeldende dag og klokkeslett øverst på skjermbildet. Sørg for at disse er korrekte før du setter en alarm. Se **Informasjon i Innstillinger** for å stille inn klokkeslettet og datoen.

Legge til en ny alarm

Gå til **alarmmenyen** og velg **Legg til ny**.

1 Først stiller du inn klokkeslettet for alarmen. Tiden vises med en 24-timers klokke og timen utheves først. Bruk **Tilbake**- og **Neste**-tastene for å velge riktig time, trykk **OK** og velg minutt på samme måte. Trykk **OK** for å sette alarmklokkeslettet.

07

30

Velg alarmklokkeslett
(time.minutt)




Utført

2 Still inn dagen for alarmen ved å bruke **Tilbake** og **Neste** til å rulle gjennom dagene i den kommende uken. Trykk **OK** for å velge dagen.

3 Du kan velge hvilken lyd som skal spilles av når alarmen aktiveres. Bruk **Tilbake**- og **Neste**-tastene for å rulle gjennom de tilgjengelige lydene, og trykk **shift-OK** for å høre dem før du bestemmer deg. Du kan velge **Ingen lyd** hvis du ønsker en stille alarm. Trykk **OK** for å velge lyden.

4 Du kan angi en tekst for alarmen for å minne deg om hva alarmen gjelder, som **Tannlegeavtale** eller **Svømmetime**. Trykk **OK** for å bekrefte teksten og lagre alarmen.

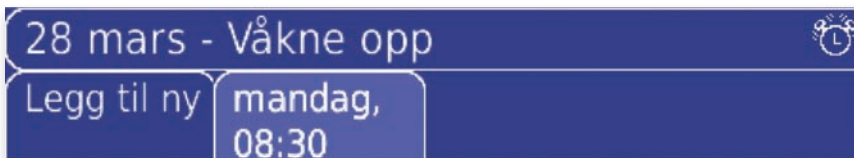

Tips

*Du kan når som helst trykke **On/C** mens du stiller inn en alarm for å gå tilbake og redigere det forrige skjermbildet.*

Tips

*Når du stiller inn alarmen, kan du trykke **Velg** for å endre dag, time og minutt tilbake til gjeldende tidspunkt.*

Når du har lagret en alarm, vises den på hovedskjermbildet for **alarm**. Bruk **Tilbake** og **Neste** for å utheve de ulike alarmene.

Ting du kan gjøre med alarmen

Trykk **Alt.** på en uthevet alarm for å se hvilke alternativer du har med den.

- **Rediger alarm** - Dette lar deg endre klokkeslettet, dagen, lyden eller påminnelsesteksten for alarmen. Velg den du vil redigere, så blir du vist hva alarmen for øyeblikket er stilt inn til. Endre den på samme måte som når du legger til en ny alarm, og trykk **OK** for å lagre.



- **Slett alarm** - Dette fjerner alarmen for alltid. Så snart du har bekreftet at du ønsker å slette alarmen, kan du ikke angre.


Tips

Alarmer slettes automatisk etter at de har blitt aktivert, slik at du ikke trenger å fjerne gamle alarmer.



Innstillinger

Innstillingsmenyen har en rekke alternative muligheter som lar deg gjøre Lightwriteren personlig. Innstillinger er ordnet i åtte grupper, slik at du enkelt finner det du ønsker. Navnet på den uthevede gruppen vises nederst til venstre på skjermbildet.

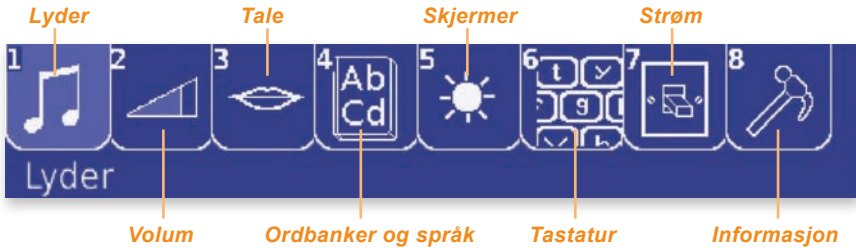

Administrere innstillinger

Du kan velge elementer i innstillingsmenyen med **talltastene** eller med **Tilbake**, **Neste** og **OK**. Når du har funnet innstillingene du ser etter, kan du endre det ved å bruke **Tilbake**- og **Neste**-tastene og trykke **OK** for å lagre det.

Hver innstilling har også en standardinnstilling som er anbefalt for Lightwriteren. Du kan enkelt gjenopprette en standardinnstilling ved å velge Innstillinger og trykke **Velg**. Trykk **OK** for å lagre denne innstillingen.

Studer tabellene nedenfor, som viser alle innstillinger i hver gruppe av **Innstillingsmenyen**, for å finne de innstillinger du ønsker. Hver tabell viser navn på innstilling, informasjon om hva de kontrollerer, og hva som er de tilgjengelige innstillingene. Standardinnstillingen er **uthevet**.

Avanserte innstillinger

For å gjøre det enklere å finne de mest brukte innstillingene, er noen av de mer kompliserte innstillinger bare tilgjengelig hvis **Avanserte innstillinger** er slått på. Det er sjelden behov for å endre disse innstillingene.



Lyder

For hver av disse innstillingene kan du velge mellom 14 ulike lyder. Husk at du kan trykke **shift-OK** for å høre lyden før du velger den.

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Signallyd	Dette er lyden som dannes når du trykker signaltasten .	Klinge
Lyd for SMS-mottak	Dette er lyden som forteller at du har mottatt en SMS-melding.	Telefon
Telefonring	Dette er lyden som forteller at du har en innkommende telefonsamtale.	Telefon
shift-signallyd	Dette er en alternativ lyd til den første signallyden , og den spilles av når du trykker shift-signallyd .	Visle



Volum

Triangelgrafikken viser hvor sterke lydene vil bli. Trykk **Neste** for å øke det skyggelagte området og gjøre lyden sterkere, eller **Tilbake** for å redusere lydstyrken. Når triangelet er tomt, er lyden avslått.



Volumoppsettene er delt i tre grupper; **Talevolum**, **Varslingsvolum** og **Telefonvolum**.

● Talevolum

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Talevolum	Justerer lydstyrken til den vanlige talestemmen i Tale- og Notat- menyen. Du kan også endre talevolumet i hurtiginnstillings-menyen raskt ved å trykke shift-Alt . på ethvert skjermbilde.	50 %
Ledetekstsvolum	Justerer lydstyrken til stemmen brukt når du trykker shift-OK .	60 %

● Varslingsvolum

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Signalvolum	Justerer lydstyrken til signaltasten . Signaltasten kan ikke gjøres lydløs.	80 %
Tasteklikkvolum	Justerer lydstyrken til klikkene du hører når du trykker en tast i tastaturet.	60 %
Avanserte systemvoluminnstillinger		
Shift-signalvolum	Dette justerer lydstyrken til signalet som spilles av når du trykker shift-Signal .	60 %
Varslingsvolum	Justerer lydstyrken til varslinger som alarmer og meldinger om svakt batteri.	60 %

● Telefonvolum

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Ringevolum	Justerer lydstyrken til lyden som repeteres når du mottar et anrop.	50 %
Innkommende volum	Justerer lydstyrken til stemmen du hører i en innkommende telefonsamtale.	50 %
Talevolum	Justerer lydstyrken til talestemmen din i en telefonsamtale. Det kan være nødvendig å øke denne hvis omgivelsene dine er støyende, slik at den du snakker med kan høre deg.	80 %
Avanserte telefonvoluminnstillinger		
Tasteklikkvolum	Justerer lydstyrken til tasteklikkene i en telefonsamtale. Tasteklikk hjelper samtalepartnern med å oppfatte når du skriver en melding.	50 %

● Stillemodusinnstillinger vises også ved siden av de andre gruppene.


Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Stillemodus	Dette slår av alle Lightwriter-lyder unntatt den fra signaltasten , shift-signaltasten og lydene når du er i en telefonsamtale. Du kan bruke disse innstillingene hvis du er på eksamen, kino, teater osv.	På/Av



Tale

Disse innstillingene lar deg justere den syntetiske stemmen.

Innstillingene for **Talehastighet** og **Ledeteksthastighet** vises som blokker for å indikere stemmehastigheten din. Fyll flere av blokkene for å gjøre talen raskere ved å trykke **Neste** eller trykk **Tilbake** for å gjøre den langsommere.

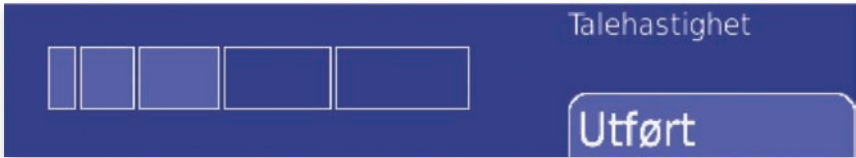

Taleinnstillingene er delt i to grupper, **Tale** og **Telefontale**.

• Tale

Innstillingsnavn	Beskrivelse	Verdier
Talemodus	Justerer når ord du skriver i Tale sies. Ved å trykke OK , sies alltid teksten din uansett hvilket alternativ du velger. Ord - Sier hvert ord for seg når du skriver et blanktegn. Setning - Sier hele setningen etter at du avslutter den med et punktum, spørsmålstejn eller utropstejn. Lightwriter legger automatisk til et blanktegn etter tegnsetting som avslutter en setning. All tekst - Sier teksten bare når du trykker OK -tasten.	Ord , Setning , All tekst
Talehastighet	Endrer hvor fort stemmen din snakker i Tale - og Notater . Stemmen kan bli klarere hvis du gjør den langsommere.	60 %
Avanserte taleinnstillinger		
Ledeteksthastighet	Endrer hvor fort stemmen din snakker når du trykker shift-OK .	60 %

- **Telefontale**

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Talemodus	<p>Justerer når ord du skriver i en telefonsamtale sies. Ved å trykke OK, sies alltid teksten din uansett hvilket alternativ du velger.</p> <p>Ord - Sier hvert ord når du avslutter det med et blanktegn. Dette anbefales for telefonsamtaler.</p> <p>Setning - Sier hele setningen etter at du avslutter den med et punktum, spørsmålstejn eller utropstejn. Lightwriter legger automatisk til et blanktejn etter tejnsetting som avslutter en setning.</p> <p>All tekst - Sier teksten bare når du trykker OK-tasten.</p>	Ord , Setning, All tekst
Talehastighet	Endrer hvor fort stemmen din snakker i en telefonsamtale. Lavere hastighet gjør talen din klarere for samtalepartnere.	40 %
Avanserte taleinnstillinger		
Notatmodus	Endrer hvor mye tekst som understrekes når du leser opp et notat i en telefonsamtale.	Ord, Frase, Setning , Avsnitt

- **Stemmeinnstillinger vises også ved siden av de andre gruppene.**

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Stemme	Velg en hovedstemme som skal snakke på ditt foretrukne talespråk.	



Ordbanker og språk

Det er tre grupper for disse Innstillingene, **Ordbank**, **Språk** og **Ordprediksjoner**. Du kan legge til, redigere og slette ordbankelementene som du bruker i **Talemenyen**, og i tillegg kan du endre talespråket og hvordan ordprediksjonen virker. Ordbankelementene endres hver gang du endrer språk, slik at du kan legge til atskilte elementer hvis du ofte bruker mer enn ett språk.

• Ordbank

Velg **Legg til ny** for å opprette et nytt element i **Ordbanken**. Hvis du vil finne et bestemt element, er det bare å begynne å skrive det første ordet. Når du har funnet et element, kan du trykke **Alt**. for å se hva du kan gjøre med det. Alternativene er listet i tabellen nedenfor. Se **Talemenyen** for nærmere informasjon om hvordan hvert element virker.

Innstillingsnavn	Beskrivelse	Ting du kan gjøre med ordbankene
Fraser	Administrer frasene som vises når du trykker Velg i talemenyen . Lightwriteren leveres med noen innebygde fraser. Skriv de første bokstavene i det første ordet for å finne en frase.	Legg til ny, Rediger frase, Slett frase
Utvidelsesforkortelser	Opprett forkortelser for lengre ord eller fraser. Skriv først en forkortelse og deretter utvidelsen (lengre ord eller frase) for å legge til en utvidelsesforkortelse. Utvidelsen vil deretter dukke opp i ordprediksjonsboksene når du skriver forkortelsen i Tale . Når du oppretter forkortelser, må du huske å gjøre dem forskjellig fra normale ord og unngå mellomrom. Skriv de første bokstavene i forkortelsen for å finne utvidelsesforkortelser.	Legg til ny, Rediger forkortelse, Rediger utvidelse, Slett forkortelse
Automatiske rettelsler	Automatiske rettelsler korrigerer feilstavinger automatisk mens du skriver. Skriv først det feilstavede ordet og deretter den riktige stavede rettelsen for å opprette en automatisk rettelse. Skriv de første bokstavene i det feilstavede ordet for å finne en automatisk rettelse.	Legg til ny, Rediger feilstaving, Rediger korreksjon, Slett automatisk rettelse

Taleunntak	Taleunntak endrer måten et ord blir uttalt på i det gjeldende språket. Når du vil opprette et taleunntak, skriver du først problemordet som ikke blir uttalt riktig og deretter unntaket for ordet. Prøv å stave unntaksordet fonetisk eller del det opp med bindestreker. For eksempel høres kanskje Trondheim bedre ut som Trån-hjem eller Trånnhjem . Du kan teste uttalen av unntaket med shift-OK eller lagre det, trykke Alt , og velge Si unntak . Skriv de første bokstavene i problemordet for å finne et taleunntak.	Legg til nytt, Rediger ord, Rediger unntak, Slett unntak, Si unntak
Avanserte ordbankinnstillinger		
Ordliste	Nye ord som Lightwriter ikke gjenkjenner automatisk, for eksempel enkelte navn, kan lagres her. Når du har lagt dem til ordlisten , vil de begynne å dukke opp som ordprediksjoner. Du blir spurt om du vil legge til nye ord hvis du skriver dem tre ganger i Tale . Skriv de første bokstavene i ordet for å finne det.	Legg til nytt, Rediger ord, Slett ord, Si ord

● Språk

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Stemme	Velg en hovedstemme som skal snakke på ditt foretrukne talespråk.	
Avanserte språkinnstillinger		
Talespråk	Endrer språket du skriver og prater med. Dette endrer hvilke stemmer du kan velge, ordprediksjoner og andre ordbankelementer.	
Ledetekstspråk	Endrer språket i menyer og varsler som du ser på skjermen. Du kan sette dette separat til å følge talespråket i tilfelle du bruker et sekundærspråk og ikke ønsker at alt på Lightwriteren skal være oversatt. Velg Følg språket for å få ledetekstspråket til alltid å være det samme som talespråket ditt.	Følg språket

● Ordprediksjoner

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Alle ordprediksjonsinnstillingene er avansert		
Ordprediksjonsvisning	Velg Skjul hvis du ikke ønsker å bruke ordprediksjoner i Tale- , SMS- , Telefonsamtale- eller Notat- aktivitetene. Du vil da i stedet se to tekstlinjer når du skriver tekst.	Vis , Skjul
Ordprediksjonslæring	Velg om Lightwriteren automatisk skal huske ordene du skriver og hvordan du bruker dem i Tale . Ordprediksjonene dine blir mer presise hvis Ordprediksjonslæring er satt På .	På , Av



Skjermer

Disse innstillingene lar deg endre hvordan skjermbildene vises på de to Lightwriter-skjermene.

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Skjermlysstyrke	Justerer hvor lyssterke skjermene skal være. Du kan også endre skjermlysstyrken i hurtig innstillingsmenyen i en fart ved å trykke shift-Alt . på ethvert skjermbilde. Merk – Lightwriter-batteriet varer lengre med lavere lysstyrke i skjermene.	20 %
Avanserte skjerminnstillinger		
Menynumre	Velg om det skal vises et nummer øverst til venstre i alle menykategorier. Det kan være enklere å bruke talltastene som snarveier hvis menynumrene vises. Merk – Du må starte Lightwriteren på nytt hvis du endrer disse innstillingene.	På, Av
Partnerskjerm-linjer	Velg hvor mange tekstlinjer du vil vise på partnerskjermen, som kommunikasjonspartneren din kan se når du skriver tekst i Tale .	1, 2, 3
Blokkbokstaver	Når blokkbokstaver er på, blir alt du skriver gjort om til store bokstaver. Alle ordprediksjonene og frasene vises også med store bokstaver hvis du slår på blokkbokstaver .	På, Av



Tastatur

Det er viktig at du Lærer deg hvordan Lightwriter tastaturet fungerer. Disse innstillingene lar deg justere hvordan tastene er lagt ut og hvordan de virker.

Hvis du synes det er vanskelig å treffe tastene nøyaktig eller være stø på hånden, kan det hende at funksjonene **tastatur-trykk** og **tastaturforsinkelse** vil gjøre det lettere for deg å bruke Lightwriteren. Det kan også bli enda enklere med en annen fingerguide. Se **Tastatur**-avsnittet for nærmere informasjon om fingerguidene.

Innstillingsnavn	Beskrivelse	Verdier
Tastatur-trykk	Dette setter hvor lang tid du må holde ned en tast før den godtas. Lengre tid forhindrer at taster du trykker utilsiktet blir godtatt. Imidlertid kan for lang tid senke skrivehastigheten din.	0–5 sekunder i intervaller på 0,1 sekund (0,0)
Tastaturforsinkelse	Dette setter hvor lang tid det skal ta etter at du har trykket en tast før et annet tastetrykk godtas. Dette avhjelper problemer med skjjelving, fordi et hurtig gjentatt tastetrykk blir ignorert. Imidlertid kan for lang tid senke skrivehastigheten din.	0–5 sekunder i intervaller på 0,1 sekund (0,0)

• Høyre qwerty



• Høyre abc



Avanserte tastaturinnstillinger		
Shiftlås	Shiftlås setter deg i stand til å skrive blokkbokstaver ved å trykke shifttasten to ganger i Tale . Når du trykker shifttasten igjen, får du vanlige bokstaver. Skru shiftlås av hvis du vil at shifttasten bare skal gi én stor bokstav av gangen.	På, Av
Navigasjonslås	Navigasjonslås holder shiftfunksjonen på etter at du har trykket shift-Tilbake eller shift-Neste for å flytte markøren omkring i teksten uten å slette noe. Du kan da bruke Tilbake og Neste til å flytte markøren videre. Hvis Navigasjonslås er av, slås shiftfunksjonen automatisk av etter at markøren har forflyttet seg ett mellomrom.	På, Av
Tastaturlayout	<p>Dette endrer hvordan tastene er lagt ut i tastaturet. Hver layout har tre deler. Et trykk på Velg vil alltid sette layouten tilbake til standard for Lightwriteren. Layoutbildene nedenfor viser alternativene for språket ditt. Hvis du endrer disse innstillingene, må du umiddelbart flytte tastene til nye fysiske posisjoner for å matche layouten. Se Tastatur-avsnittet for informasjon om hvordan du gjør dette.</p> <p>Språk - Endrer du språket, får du nye layoutmuligheter, som for eksempel qwertz eller azerty, og anledning til å endre tilgjengelige aksenter og valutasymboler i tastaturet.</p> <p>Layout - Velg layouten for bokstavtastene. Disse alternativene avhenger av språket du har valgt, men kan være qwerty, abc, qwertz eller azerty. Standard er normalt qwerty.</p> <p>Hendig - Velg om funksjonstastene, for eksempel Alt., signal, Tilbake, Neste, Velg og OK skal være til høyre eller til venstre for bokstavtastene. Som standard er de til høyre, men du kan endre dette hvis du hovedsakelig bruker den venstre hånden for å skrive tekst.</p>	

• Venstre qwerty



• Venstre abc





Strøm

Disse innstillingene viser ulike måter å slå av Lightwriteren.

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Hvilemodustid	Stiller inn hvor lenge Lightwriteren vil vente på et tastetrykk før den automatisk går i hvilemodus . Hold hvilemodustiden kort for å spare batteristrøm. Trykk On/C for å vekke Lightwriteren når du vil bruke den igjen.	1 minutt , 2, 5, 10 minutter
Strøm Av	Dette slår Lightwriteren helt av når du ikke skal bruke den på en lang stund. Det er ikke nødvendig å lade Lightwriteren på flere uker hvis du bruker Strøm Av . Trykk On/C for å slå på Lightwriteren når du vil bruke den igjen.	
Reisemodus	Denne slår av Lightwriteren helt på samme måte som Strøm Av . Den låser også tastaturet, og On/C kan ikke brukes til å slå på Lightwriteren igjen før du setter inn laderen. Dette er nyttig på reise, og når du må legge Lightwriteren i en veske og ikke ønsker at den skal slå seg på. Hvis du må lade Lightwriteren før du kan slå den på, lyser batterilampen rødt i 5 sekunder når du trykker On/C .	
Telefonstrøm	Her kan du slå den innebygde telefonen på og av. Det kan hende at du må slå av telefonen når du besøker sykehus eller reiser med fly. Hvis du ikke ønsker å bli forstyrret av telefonen, kan du alternativt bruke opptattmodus i Telefonaktiviteten .	På, Av
Avanserte strøminnstillinger		
TCLink	For å kople til TCLink. Se nærmere informasjon i TCLink-pakken.	På, Av



Informasjon

Dette lar deg lagre informasjon om Lightwriteren. Du må opprette en ny sikkerhetskopi hver uke for å være sikker på at all informasjon er lagret. Det er viktig å stille inn korrekt klokkeslett og dato for at alarmer skal virke riktig.

Innstillings navn	Beskrivelse	Verdier
Sikkerhetskopi	<p>Dette viser deg alle lagrede sikkerhetskopier, som lagrer alt på Lightwriteren, noe som omfatter alle de gjeldende innstillingene, notater, kontakter og ordprediksjoner. De nyeste sikkerhetskopiene vises først.</p> <p>Velg Legg til ny for å opprette en ny sikkerhetskopi. Tittelen vil vise deg datoen og klokkeslettet da sikkerhetskopien ble opprettet.</p> <p>Det anbefales at du sletter gamle sikkerhetskopier som du ikke trenger. Bare velg den eldste sikkerhetskopien med tilbaketasten, og trykk Alt for å slette.</p> <p>Du kan også kopiere sikkerhetskopier til en minnepenn for sikker oppbevaring og for gjenoppretting av Lightwriteren. Se minnepenn-menyen for nærmere informasjon.</p>	
Avanserte innstillinger	Endre Avanserte innstillinger til På hvis du ønsker å se avanserte innstillinger og andre muligheter som nødanrop i telefonmenyen .	På/Av
Om SL40	Dette viser en del teknisk informasjon om Lightwriteren som du kan få spørsmål om hvis du trenger å ringe til teknisk brukerstøtte. Den viser også hvor mye minne Lightwriteren bruker på notater, ordprediksjoner og SMS-meldinger.	

Avanserte informasjonsinnstillinger		
Still inn klokkeslett	Stiller inn gjeldende klokkeslett for Lightwriteren. Tiden vises med en 24-timers klokke og timen utheves først. Når du har bekreftet timen, flytter uthevingen automatisk til minuttene.	Time, minutt (24-Timers klokke)
Still inn dato	Stiller inn gjeldende dato for Lightwriteren. Du må velge dag, måned og år. Trykk OK for å bekrefte hvert avsnitt.	Dag, Måned, År
Installasjonsveiviseren	Denne starter veiviseren som går gjennom noen av de grunnleggende innstillingene på Lightwriteren. Se avsnittet Installasjonsveiviseren for nærmere informasjon.	Kjør nå, Kjør etter dvale
Slettebehandler	Denne lar deg slette ALLE SMS-meldingene i SMS-innboksen eller -utboksen. Advarsel – etter at disse meldingene er slettet, vil du ikke kunne gjenopprette dem. Hvis du ønsker å beholde noen få utvalgte SMS-meldinger, kan du oppbevare dem som notater i Notater ved å velge Lagre som notat i SMS-menyen.	Innboksen eller utboksen



Snarveier

Noen av de mest brukte innstillingene er lett tilgjengelig under **snarveimenyen**. Velg denne gruppen fra **Hovedmenyen** for å finne disse fire innstillingene:

- Hvilemodus
- Stillemodus
- Talevolum
- Opptattmodus

Nærmere informasjon om disse finner du i **innstillinger**.

Husk at du kan også trykke **shift-Alt** i ethvert skjermbilde på Lightwriteren for å se hurtig innstillings-menyen. Denne gjør det enkelt å endre **talevolum** og **skjermlysstyrke**.



Bruk **talltastene** eller **Tilbake**, **Neste** og **OK** for å øke eller redusere hvert innstillinger. Trykk **On/C** for å lagre innstillingen og returnere til det du holdt på med.

Minnepenn

Du kan bruke minnepenn til å overføre notater og sikkerhetskopier mellom Lightwriteren og en datamaskin. På denne måten kan du opprette og redigere notater på datamaskinen din og si dem på Lightwriteren, samtidig som filene oppbevares trygt i tilfelle noe skulle skje med Lightwriteren.



Minnepennen som leveres med Lightwriteren kan gjenkjennes på Toby Churchill-logoen. Det er en fordel å bruke en egen minnepenn spesielt for Lightwriteren.

Sette inn en minnepenn



Minnepennen må settes inn i minnepenn port vist ovenfor. Sørg for at du setter den riktig inn, med den solide delen av kontakten nærmest Lightwriter-høytaleren. Du hører to pip som forteller at Lightwriteren gjenkjenner minnepennen. Dette kan ta et par sekunder.


Tips

Du må alltid sette inn laderen og forsikre deg om at Lightwriteren står støtt før du setter inn en minnepenn. Hvis batteriet går tomt eller minnepennen kommer borti noe, kan det oppstå skade på Lightwriteren og/eller minnepennen.

Konfigurere minnepennen

Første gang du bruker en ny minnepenn sammen med Lightwriteren vil den opprette noen mapper på minnepennen. Disse vil inneholde alle filene som kopieres fra og til Lightwriteren. Andre data som finnes på minnepennen vil ikke bli flyttet eller slettet. Straks minnepennen er konfigurert, kan du begynne å kopiere filer til og fra Lightwriteren.

Følgende mapper blir opprettet på minnepennen:

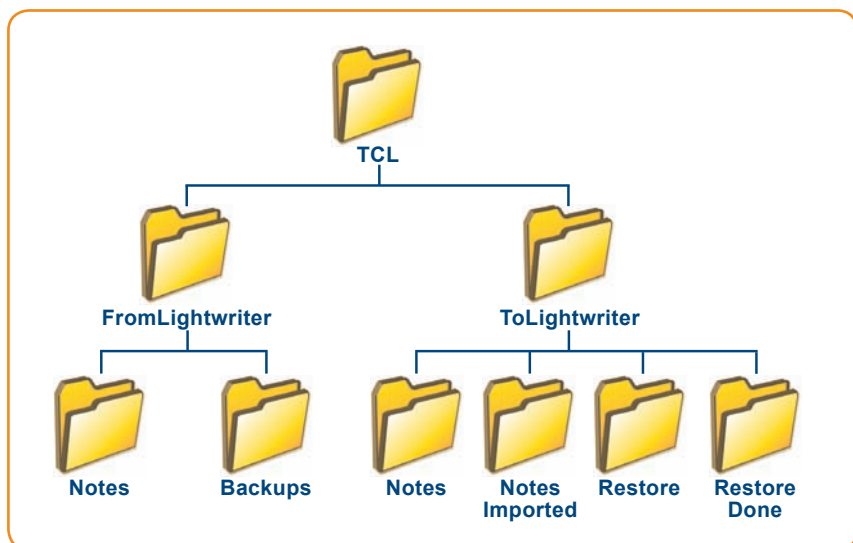

Du kan se mappene og innholdet i dem ved å sette minnepennen inn i en datamaskin.

Tips

Før du tar minnepennen ut av Lightwriteren, må du vente på en melding som forteller deg at minnepennen er blitt fjernet etter at kopieringen er fullført. Hvis du tar den ut for tidlig, eller mens Lightwriteren kopierer data, kan du tape eller skade filene.

Ting du kan gjøre med minnepennen

- **Notater** - Du kan bruke minnepennen til å kopiere tekstdokumenter til og fra Lightwriteren. På denne måten kan du oppbevare filene dine på en trygg måte i tillegg til at du kan redigere dem på datamaskinen og deretter kopiere dem til Lightwriteren for å bli talt.

Når du setter minnepennen inn i Lightwriteren, blir alle elementene i **Notater** automatisk kopiert til **Notes** i **FromLightwriter**-mappen på minnepennen. Dette skjermbildet viser framgangen:



Tips

Alle notater opprettet på datamaskinen må lagres i Microsoft Word 97-2003-format (.doc) eller rikt tekstformat (.rtf) og kun inneholde ren tekst, fordi Lightwriteren ikke kan vise bilder eller formatering. Lightwriteren kan ikke importere Microsoft Word 2007-filer eller .docx-filer.

Overføring av filer til Lightwriteren foregår ved at du ganske enkelt først setter minnepennen inn i datamaskinen og så kopierer dokumentene til **Notes** i **ToLightwriter**-mappen. Når du setter minnepennen inn i Lightwriteren, blir disse filene automatisk kopiert til **Notater**.

Etter at et notat har blitt kopiert til Lightwriteren, flyttes det til **Notes Imported**-mappen for å sikre at det bare blir kopiert én gang.

- **Sikkerhetskopiering** - Det er viktig å sikkerhetskopiere hyppig. Sikkerhetskopier inneholder informasjon om alt på Lightwriteren, inkludert ordprediksjoner, fraser, SMS-meldinger, kontakter og notater. Se **innstillinger** for nærmere informasjon om hvordan du oppretter sikkerhetskopier.

Når du setter minnepennen inn i Lightwriteren, blir nye sikkerhetskopifiler i likhet med notater automatisk kopiert til **Backups** i **FromLightwriter**-mappen på minnepennen.

- **Gjenoppretting** - Hvis det skjer noe galt med Lightwriteren, kan du bruke sikkerhetskopiene til å gjenopprette alle dataene dine. **Dette vil erstatte alt på Lightwriteren.** Alle ordprediksjoner, notater, SMS-meldinger, kontakter, fraser og andre elementer som du har laget i Lightwriteren siden sikkerhetskopien ble opprettet går tapt.

Kopier ganske enkelt sikkerhetskopien du ønsker å bruke til **Restore** i **ToLightwriter**-mappen på minnepennen før du setter minnepennen inn i Lightwriteren. Du må svare på en melding som ber deg bekrefte gjenopprettingen:



Etter at gjenopprettingen er fullført, må du fjerne minnepennen og trykke **OK** for å starte Lightwriteren igjen. Sikkerhetskopifilen blir automatisk flyttet til **Restore Done**-mappen for å sikre at Lightwriteren ikke blir gjenopprettet igjen neste gang du bruker minnepennen.

Tips

Sikkerhetskopifilene inneholder klokkeslett og dato i titlene for når de ble opprettet, slik at det er lett å finne den riktige filen når du vil gjenopprette Lightwriteren.

Tastaturet

Du kan velge en annen fingerguide eller en annen layout for tastene hvis det gjør det enklere å bruke. Det er også viktig å holde tastaturet rent ettersom tastene ellers kan bli klebrige og lite responsvillige over tid.

Tips

*Hvis du finner tastene vanskelige å treffe nøyaktig eller er ustø på hånden, kan det være nyttig å endre funksjonene **tastatur-trykk** og **tastatur forsinkelse** i **Innstillinger**.*

Bytte fingerguide

Fingerguidene brukes til å heve området rundt tastene for å hjelpe til med å føre fingrene til de riktige tastene når du skriver tekst. Lightwriteren leveres med tre fingerguider av ulik dybde.

Tips

Den mest brukte fingerguiden er montert på Lightwriteren ved levering. Du kan prøve de andre fingerguidene for å se hvilken som fungerer best for deg.

Standard fingerguide



Flat fingerguide



Dyp fingerguide



Det tar bare et par minutter å bytte fingerguide. Det kan hende at du trenger hjelp med dette hvis du har problemer med presise håndbevegelser. Det du trenger er skrutrekkeren og verktøyet for å løsne fingerguiden som følger med i Lightwriterens verktøysett.

Fjerne en fingerguide

1 Legg Lightwriteren på et bord eller annen flat overflate og slå den av ved hjelp av **Strøm Av** i **innstillinger**. Bruk skrutrekkeren i verktøysettet som ble levert med Lightwriteren for å løsne de to skruene på hver sin side av tastaturet. Ta vare på skruene, fordi du må sette dem på plass igjen.



2 Når skruene er fjernet, må du sette verktøyet for å løsne fingerguiden inn i det høyre anleggspunktet nederst på fingerguiden. Bøyen på verktøyet for å løsne fingerguiden må vende mot deg, slik at den passer inn i bøyen på anleggspunktet. Skyv verktøyet forsiktig nedover slik at fingerguiden blir løftet av Lightwriteren. Du skal høre et klikk idet den frigjøres.



3 Gjenta trinn 2 med anleggspunktene til venstre og i midten til fronten av fingerguiden er løsnet fra Lightwriteren. Hvis den ikke slipper lett, kan du bruke verktøyet for å løsne fingerguiden i alle anleggspunktene igjen.



4 Hold forsiktig i den nedre kanten av fingerguiden når den er helt løs og trekk den opp og forover, bort fra Lightwriteren. Hvis noen av tastene løsner når du fjerner fingerguiden, trykker du dem bare tilbake på plass på gummimatten. Pass på at de sitter godt fast.



Montere fingerguiden igjen

5 Velg en ny fingerguide og still den på linje med Lightwriter-tastaturet. Du kan se hvilken vei fingerguiden skal stilles på sporet til den brede **On/C-**tasten øverst til venstre i tastaturet. Hold fast i bunnen av fingerguiden og skyv toppen av fingerguiden forsiktig inn under brukerskjermen.



6 Når toppen av fingerguiden er på plass, skyver du fronten av fingerguiden forsiktig ned mot området der anleggspunktene er. Du skal høre eller føle et lite klikk idet fingerguiden glir på plass. Kontroller at ingen av tastene er i klemme under fingerguiden og at alle kantene er trykket helt på plass.



7 Bruk skrutrekkeren som leveres med Lightwriteren til å feste de to skruene på hver sin side av fingerguiden igjen.

Ikke stram disse skruene for mye ettersom dette kan skade fingerguiden eller Lightwriter-kabinettet. Den nye fingerguiden er nå montert.



Endre tastaturlayouten

For å endre layouten til tastene, må du først endre innstillinger for tastaturlayout i Innstillingsmenyen. Du kan velge mellom fire ulike layouter for språket ditt, hver med sitt arrangement av bokstavtastene og funksjonstastene til venstre eller til høyre i tastaturet. De fire alternativene for Lightwriteren er:

• Høyre qwerty



• Høyre abc



• Venstre qwerty



• Venstre abc



Når du har valgt en layout med **Tastaturlayout i Innstillinger**, må du flytte tastene til riktig plass i tastaturet.

1 Fjern fingerguiden ved å følge følgende trinn 1 til 4 i **Bytte fingerguide**. Husk å ta vare på skruene, fordi du må sette dem på plass igjen.



2 Når du har fjernet fingerguiden, kan du enkelt ta alle tastene ut av tastaturet. Vær forsiktig så du ikke mister noen av tastene.



3 Bruk bildet av **tastaturlayouten** du har valgt i tastaturlayoutinnstillinger og erstatt tastene på gummimatten i henhold til det nye arrangementet. Tastene må settes på plass så de er jevne og sikre. Dette kan være enklere hvis du fukter gummimatten litt når du fester tastene.



4 Når alle tastene er plassert, settes fingerguiden på igjen ved å følge trinn 5 til 7 i **Bytte fingerguide**. Det nye tastaturet er nå klart til bruk.



Holde tastaturet rent

Hvis tastene er blitt klebrige og lite responsvillige, kan det være på tide å rengjøre tastaturet. Dette er enkelt å gjøre og tar normalt bare et par minutter.

1 Fjern fingerguiden ved å følge følgende trinn 1 til 4 i **Bytte fingerguide**. Husk å ta vare på skruene, fordi du må sette dem på plass igjen.



2 Når du har fjernet fingerguiden, fjerner du alle tastene fra gummimatten og legger dem i varmt såpevann sammen med fingerguiden. La dem ligge i bløt noen minutter for å være sikker på at alt smuss er fjernet. Vær forsiktig så du ikke mister noen av tastene.



3 Mens fingerguiden og tastene ligger i bløt, kan du rengjøre gummimatten forsiktig med en fuktig tannbørste eller bomullspinne. Ikke gni maten for kraftig, fordi gummi kan revne. Tørk av med en klut og kontroller at det ikke finnes noen vannrester.



Merk – Bruk så lite vann som mulig, fordi vann som kommer under gummimatten kan ødelegge Lightwriteren.

4 Ta tastene ut av vannet og tørk dem med en klut. Sett dem tilbake på gummimatten ifølge bildet av tastaturlayouten. Tastene må settes på plass så de er jevne og sikre. Det går lettest hvis de er litt fuktige på undersiden.



5 Når alle tastene er plassert, settes fingerguiden på igjen ved å følge trinn 5 til 7 i **Bytte fingerguide**. Det nye tastaturet er nå klart til bruk.



Feilsøking

Hvis du får noen problemer med Lightwriteren, kan feilsøkingsguiden hjelpe deg. Hvis denne ikke løser problemet, må du ta kontakt med leverandøren.

Problem	Årsak	Løsning
Lightwriter har frosset eller reagerer ikke på tastene.	Mulig systemfeil	Hold On/C nede til skjermene slår seg av og slipp for å starte Lightwriteren på nytt.
Lightwriteren virker ikke og ingen skjermbilder vises. Rød LED-lampe lyser når du trykker On/C .	Flatt batteri	Lad Lightwriteren noen timer – du kan bruke Lightwriteren mens den lader.
	I reisemodus	Sett inn laderen og trykk On/C for å slå på Lightwriteren.
	Batteriet må byttes	Kontakt leverandøren eller Toby Churchill Ltd.
Ladelampen tennes ikke når laderen settes inn.	Ikke strøm i stikkkontakten	Kontroller at det er strøm i stikkkontakten.
	Feil på laderen	Kontakt leverandøren eller Toby Churchill Ltd.
Tastene må alltid holdes lenge nedtrykket før de virker.	For lang Tid innstilt i tastatur trykk	Reduser tiden for Tastatur trykk i Innstillinger .
Bokstaver mangler når jeg skriver hurtig.	For lang Tid Innstilt i tastatur forsinkelse	Reduser tiden for Tastatur forsinkelse i Innstillinger .
Tastene er klebrige og lite responsvillige.	Tastaturet må rengjøres	Se avsnittet Holde tastaturet rent for nærmere informasjon.
Lightwriteren vil ikke snakke.	Talevolumet er for lavt	Øk talevolumet i Innstillinger .
	Stillemodus er på	Slå av stillemodus i snarveiaaktiviteten .
Noe er blitt sølt på Lightwriteren.	Ta det helt med ro	Slå av Lightwriteren og tørk opp så mye av sølet du kan. La Lightwriteren få tid til å tørke helt, og rengjør om nødvendig tastaturet.
Søk etter SMS-meldinger, notater eller kontakter går tregt.	Aktiviteten begynner å bli full	Prøv å slette noen elementer eller overfør dem ved hjelp av En minnepenn . Du kan slette alle SMS-meldingene samtidig med slettebehandleren i innstillinger .

Feilsøking for minnepenn

Problem	Årsak	Løsning
Minnepenn passer ikke i minnepenn porten	Minnepennen er for stor	Bruk minnepennen som ble levert med Lightwriteren istedenfor.
		Du kan anskaffe en skjøtekabel for minnepennen.
Minnepennen virker ikke sammen med Lightwriteren	Minnepennen er full	Hvis det ikke er nok ledig plass på minnepennen, kan ikke Lightwriteren kopiere notater og sikkerhetskopier til den. Fjern noen gamle notater og sikkerhetskopier fra minnepennen.
	Minnepennen er ødelagt	Prøv å formatere minnepennen igjen på datamaskin.
	Ikke formatert i FAT32	Prøv å formatere minnepennen igjen i FAT32-format eller bruk minnepennen som ble levert med Lightwriteren.
Kan ikke kopiere notatet til Lightwriteren	Notatet er ikke lagret i .doc- eller .rtf-format	Notater opprettet på datamaskinen må lagres i Microsoft Word 97-2003-format (.doc) eller rikt tekstformat (.rtf) og kun inneholde ren tekst.
Kan ikke gjenopprette Lightwriteren	Sikkerhetskopifilen er feil	Du må ikke prøve å gjenopprette med andre filer enn sikkerhetskopifiler laget direkte fra Lightwriter og lagret som .tgz-filer. Du må ikke redigere eller endre en sikkerhetskopifil på noen måte.

Feilsøking for den innebygde telefonen

Problem	Årsak	Løsning
Kan ikke sende eller motta SMS-meldinger eller sette opp telefonsamtaler	Telefonen er slått av	Kontroller at Telefonstrøm i innstillinger er På .
	SIM-kortet er ikke satt inn	Det må være satt et SIM-kort i Lightwriteren for å kunne bruke telefonen . Se Sette inn et SIM-kort for nærmere informasjon.
	Intet nettverk tilgjengelig	Kontroller signalindikatoren på hovedmenylinjen – Lightwriteren må være koplet til et nettverk for at telefonen skal fungere.
	Ingen penger på SIM-kortet	Bruk Saldokontroll i telefonmenyen for å se hvor mye penger det er igjen på SIM-kortet. Se informasjonen som ble levert med SIM-kortet om hvordan du fyller på kontoen.
SMS-meldingen sendes ikke	SMS-meldinger med datafeil i utboksen	Slett alle usendte meldinger, markert med en *, fra utboksen. De kan blokkere sendingen av nye meldinger.
Kan ikke motta SMS-meldinger eller telefonsamtaler	Opptattmodus er slått på	Slå av Opptattmodus i telefoninnstillinger eller snarveiaktiviteten . Opptattmodus forhindrer at du mottar telefonsamtaler og SMS-meldinger.
SIM-kortet mitt virker ikke	3G-SIM innsatt	Du kan ikke bruke SIM-kort kun for 3G (USIM) i Lightwriteren. Du må sette inn et nytt SIM-kort.
	Lightwriter var ikke avslått da SIM-kortet ble satt inn	Start Lightwriteren igjen ved å holde On/C nede til skjermene slår seg av og slipp tasten. Du må slå av Lightwriteren når du setter inn et SIM-kort.
Telefonsamtalen ble avbrutt	Flatt batteri	Lad Lightwriteren noen timer – du kan bruke Lightwriteren mens den lader.
	Nettverket falt bort	Nettverksforbindelsen kan ha blitt brutt under samtalen, særlig hvis du beveget deg.
	Samtale-tidsavbrudd	Ingen tastetrykk ble registrert, så samtalen ble automatisk avsluttet. Du må øke Samtale-tidsavbrudd i telefoninnstillinger .
Kan ikke høre den som ringer eller det er mye støy på linjen	Innkommende volum for lavt	Øk Innkommende volum i Innstillinger .
	Dårlig nettverksforbindelse	Hvis nettverksforbindelse ikke er sterk, kan telefonsamtalene bli uklare. Prøv igjen senere.

Den som ringer kan ikke høre meg	Talevolumet er for lavt i telefonen	Øk Talevolum i telefonen i innstillinger .
	Støyende omgivelser	Hvis du er på et offentlig sted eller annet sted med støy, kan du prøve å skru av Mikrofonen i Telefoninnstillingsmenyen for å gjøre Lightwriteren klarere.
Kan ikke foreta nødanrop	Nødnummer ikke satt	Du må ha valgt et telefonnummer du bruker som nødsamtale-nummer. Se Nødnummer i telefoninnstillinger . Her kan du også velge en Nødfrase .
Kan ikke sjekke taleposten	Talepostnummer ikke satt	Du må ha valgt et telefonnummer å ringe til for å sjekke taleposten i Talepostnummer i telefon innstillingsmenyen . Dette nummeret finnes i informasjonen som fulgte med SIM-kortet.
Jeg må stadig oppgi PIN-koden	PIN-kode aktivert	Ta SIM-kortet ut av Lightwriteren og slå av PIN-koder ved hjelp av en mobiltelefon.
Jeg har ikke fått vite eller har glemt PIN-koden	PIN-kode nødvendig	Les informasjonen som fulgte med SIM-kortet eller kontakt nettverksleverandøren for å få PIN-koden.

Symbol-guide

Tastaturikoner	
	Aktivitetstasten
	Signaltasten
	Shifttasten
	Stillemodustasten

Lightwriters eksterne ikoner	
	Batterilampe
	Telefonlampe
	Mottaker for fjernkontrollkoder
	Mikrofon
	Hodetelefoner
	
Ladelampe/strømtilførsel	

Funksjonsikoner på skjermen	
	Batteri
	Shiftlås
	Navigasjonslås
	Nummerlås
	Andre samtale
	Shift-indikator
	Stillemodus

Aktivitetsikoner på skjermen			
	Tale		Alarm
	Telefon		Innstillinger
	Telefonsamtale		Snarvei
	Signalindikator		Lyd innstillinger
	Opptattmodus		Volum innstillinger
	SIM-indikator		Tale innstillinger
	SMS-indikator		Ordbanker- og språk innstillinger
	Ny SMS i innboksen eller utboksen		Skjerm innstillinger
	Kontakter		Tastatur innstillinger
	Notater		Strøm innstillinger
	Fjernkontroll		Informasjons innstillinger

Indeks

123.-tasten.....	11, 16, 37	Bruk kontakt.....	43
Aksenter	10, 12, 17, 63	Dato	13, 14, 50, 51
Aktivitetstasten	9, 14	Still inn dato	66
Alarmer.....	52, 55, 65	DTMF-toner.....	37
Alarmmenyen	52	Fingerguide	72
Alt.		Bytte.....	72
Alarmer	52	Fingerguider	6
Anropslogg	39	Fjernkontrollkoder.....	36, 49
Fjernkontrollkoder	49	Opptak	47
Innstillinger.....	53	Sende.....	49
Kontakter.....	43	Fjernkontrollmenyen	49
Menyprat.....	21	Fraser.....	10, 19, 20, 21, 58
Notater	46	Telefon.....	32, 35
SMS-innboks.....	29	Gjenopprette	65, 71
SMS-utboks.....	31	Hjelp	11, 14
Telefonsamtale	35	Hodetelefoner	34, 40
Alternativtasten.....	11	Hovedmenyen.....	9, 14
Andre samtale	21	Høytaler	34, 37, 40
Angre.....	9, 16	Hurtiginnstillinger	11, 67
Anleggspunkter	74	I samtale	37
Anropslogg.....	33, 39	Hvilemodus.....	9, 13, 64, 67
Automatiske rettelser	16, 20, 58	Hvilemodustid.....	13, 64
Avanserte innstillinger	33, 53, 65	Informasjonsinnstillinger.....	65
Avsnittsmerke	46	Innboks.....	26, 30, 66
Bæreveske.....	6	Innstillingsmenyen	53
Batterilampe	8, 64	Installasjonsveiviseren.....	66
Blokkbokstaver	16, 61	Klokkeslett	13, 14, 50
Bruk detaljer		Still inn klokkeslett.....	66
Fra innboksen	29	Kontakter	28, 32, 34, 39, 40, 43
Fra utboksen	31	Bla gjennom.....	42
		I samtale	36

Kontaktmenyen	43	Mikrofon	
Kopier til Tale		Ekstern	35
Fra kontakter	43	Innebygd.....	35, 37, 40
Fra SMS-innboksen	29	Kontakt	35
Fra SMS-utboksen.....	31	Minne.....	65
Lader	6, 8, 64, 68	Minnepenn.....	6, 30, 31, 71
Lading	6, 8, 61, 64, 68	Montere	7, 23
Lagre som notat	66	Mottatte anrop	39
Innboks	30	Navigasjonslås	10, 17, 63
Utboks.....	31	Nestetasten	10, 17, 45
Ledetekst.....	9, 54	Nettverksforbindelse.....	25
Ledeteksthastighet	56	Nødanrop	33
Legg til kontakt		Nødfrase.....	33, 41
Fra anropsloggen.....	39	Nødnummer.....	33, 41
Fra SMS-utboksen.....	31	Notatbokmodus	57
Legg til ny		Notater.....	30, 31, 46
Alarm	50	Bla gjennom.....	45
Automatisk rettelse.....	58	I samtale	36, 57
Fjernkontrollkode	47	Overføre	70
Frase	58	Notatmenyen	46
Kontakt.....	42	Nummerlås	11, 16, 37, 38
Notat	44	Nye ord.....	18, 34, 59
Ordlisteord.....	59	OK-tasten	9, 15, 46, 53, 56, 57
Taleunntak.....	59	Om SL40.....	65
Utvidelsesforkortelse	58	Omstart.....	9, 71
Lyder.....	54	On/C-tasten	9, 10, 13, 16, 19,
Shift-Signal.....	54	32, 34, 64, 67
Signal.....	13, 54	Opprett forkortelse	21
SMS-varsel.....	54	Opptattmodus	25, 41, 67
Telefonring.....	54	Ordbank	18, 58
Menynumre.....	11, 61	Ordbanker og språkinstillinger.....	58
Menytasten.....	9, 14, 32, 34	Ordliste.....	18, 59

Ordprediksjoner ..	15, 16, 18, 20, 59, 60	SIM-kort	7, 25
Ordprediksjonslæring.....	60	Legge til kreditt	27
Ordprediksjonsvisning	60	Sette inn	22
Partnerskjermlinjer	15, 61	Sjekk talepost	38
PIN-koder	26, 27	Skjermer	
Privat samtale	35	Partner	15, 21
PUK-koder	27	Skjerminnstillinger	61
Redigere		Skjermlysstyrke.....	11, 61, 67
Alarm	52	Skrive tekst	9, 10, 12, 14, 16, 72
Automatiske rettelser	58	Skriv inn nummer.....	28, 32
Frase	58	Skrutrekker	6, 23, 73
Kontakt.....	43	Slette	
Notat	46	Alarm	50, 52
Ordlisteord	59	Anropslogg	39
Taleunntak.....	59	Automatiske rettelser	58
Utvidelsesforkortelse	58	Fjernkontrollkode	49
Reisemodus.....	64	Fraser	58
Ringemenyen	37	Kontakt.....	43
Ring kontakt		Notat	46
Fra anropsloggen.....	39	Ordprediksjoner.....	59
Fra kontakter	43	Sikkerhetskopiering.....	65
Fra SMS-innboksen.....	29	SMS-meldinger	30, 31, 66
Fra SMS-utboksen.....	31	Taleunntak.....	59
Saldokontroll	26	Tekst.....	16
Samtale-tidsavbrudd	34, 41	Utvidelsesforkortelse	58
Send SMS.....	28	Slettebehandler	66
Fra kontakter	43	Slett hele anropsloggen	39
Send som SMS.....	21	SMS-meldinger.....	21, 26, 28, 41, 66
Shiftlås.....	10, 16, 63	SMS-menyen	28
Shifttasten.....	10	Snarveimenyen.....	67
Signalindikator.....	25	Space-tasten	12, 17, 19, 56
Signaltasten.....	10, 55	Språk	58, 59
Sikkerhetskopiering	65, 71	Ledetekst	59
Overføre	70	Tale.....	57, 59

Stemme	13, 54, 56, 57, 59	Telefonlampe	26, 27, 34
Stillemodus	12, 55, 67	Telefonsamtale.....	26, 37, 41
Stillemodustasten	12	Fra kontakter	43
Store bokstaver.....	12, 16	Fra SMS-innboks.....	29
Strøm Av	64	Fra SMS Utboks	31
Strøminnstillinger.....	64	Telefonstrøm	24, 25, 64
Svarfraser	40	Telefontall.....	28, 32, 42
Svar på SMS.....	29	Telefon Volum.....	55
Symbolvelger.....	10, 12, 17, 46	Tilbaketasten	10, 16, 17, 45
Talehastighet	56	Utboks	25, 31, 66
Telefon.....	57	Utgående anrop	39
Taleinnstillinger.....	56	Utvidelsesforkortelser.....	20, 21, 58
Talemenyen	14, 15, 58	Varsling Volum.....	55
Talemodus	15, 56	Velgtasten.....	10, 19, 51, 53
Telefon.....	57	Verktøyet for å løsne fingerguiden .	6, 73
Talemønster	46	Verktøysett	6, 23, 73
Talepost	38	Videresende SMS	
Talepostnummer.....	41	Fra SMS-innboksen.....	29
Taleunntak	20, 59	Fra SMS-utboksen.....	31
Tale Volum	54	Videresend i SMS.....	43
Talltastene.....	11, 14, 16	Volum.....	54
Ta opp IR-koden igjen	49	Ledetekst	54
Tapte anrop	33, 39, 41	Shift-Signal.....	55
Tastatur		Signal	55
Rengjøring	78	Tale.....	11, 13, 54, 67
Språk.....	12, 17	Tasteklikk.....	13, 55
Taster	9	Telefon innkommende	37, 55
Tastatur forsinkelse	62, 72	Telefonring.....	55
Tastaturinnstillinger.....	63, 76	Telefontale	37, 55
Tastaturlayout	9, 12, 63, 76	Telefontasteklikk.....	55
Tastatur trykk	62 72	Varsel	55
TCLink.....	64		
Tegnsetting.....	12, 17, 36, 44, 46, 56		
Telefonindikatorer	37		

Tekniske data

Størrelse:	240mm x 140mm x 55mm
Vekt:	870 gram
Talesyntese:	Acapela HQ, Kari og Olav
Batteri:	Oppladbart Nickel Metal Hydride batteri
Siemens GSM modul (for plassering av SIM-kort)	

Sikkerhet

Det er utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 14791 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument. Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på. Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør. Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS' økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

Versjon: oktober 2011