

Bruksanvisning

Comp S



Innhold

Original CE declaration of conformity	3
Introduksjon	4
Teknisk informasjon	5
Ta sykkelen i bruk.....	6
Sikkerhetstips.....	9
Siste sjekk	9
Vedlikehold	9

ALOIS PRASCHBERGER

Rolltechnik & Sport GmbH Sebi 9
A-6342 Niederndorf

Tel.+43(0)5373/42570

Fax: +43 (0) 5373 / 42570-10
rolltechnik@praschberger.com

www.praschberger.com

Original CE declaration of conformity

**according to EC machinery directive 2006/42/EG
according to annex VII of the council directive 93/42/EEC**

the design of the machine

Brand / Type: **Praschberger Handbike, Speedbike**

Model: **Speedbike Comp S / CC / CC FD**

With auxiliary drive **PowerBike**

Or

With auxiliary drive **BionX**

Is developed, designed and manufactured in
conformance with the aforementioned EC directives, at
the sole responsibility of

Manufacturer: **Alois Praschberger
Rolltechnik & Sport GmbH
Sebi 9
6342 Niederndorf**

Following harmonizing standards were applied

Qw **()NORM EN 12100:2010, Safety of Machines,**

Equipment and Plants. Responsible for the documentation:

Fa. Alois Praschberger Rolltechnik & Sport GmbH

There exists a complete technical documentation.




Introduksjon

Les bruksanvisningen nøye for å få en optimal opplevelse og full utnyttelse av sykkelen.

Takk for at du har valgt en håndsykkel av høy kvalitet fra Prashberger.
I denne bruksanvisningen vil vi gjøre vårt ytterste for å gi deg all nødvendig informasjon om produktet.

Kontakt din leverandør for ytterligere spørsmål.

Teknisk informasjon

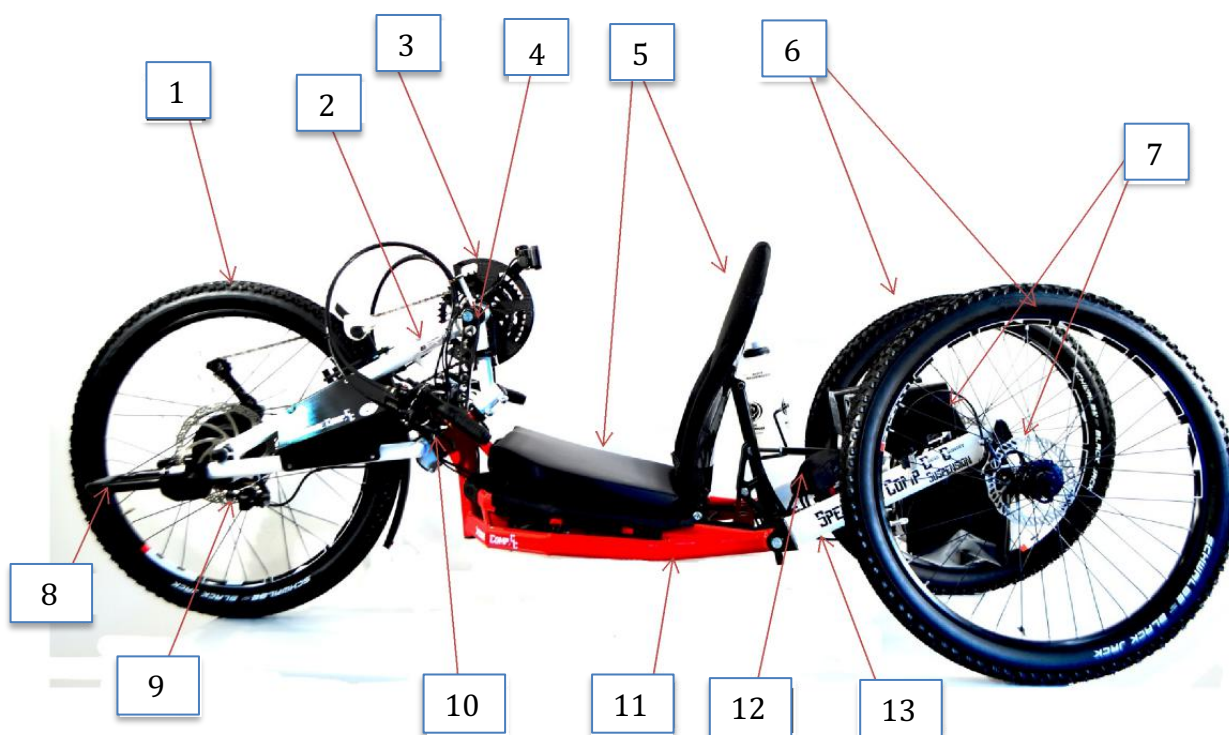

1. Framhjul
2. Fremre ramme
3. Kjedebeskytter i karbon
4. Justerbar aluminiumskrank
5. Justerbart sete og rygg i karbonfiber
6. Bakhjul
7. Skivebrems bak
8. Justerbare fothvilere
9. Skivebrems fremme
10. Gummigrep på hendlene
11. Hovedrammen
12. Dempet (alternativ)
13. Bakre ramme

Ta sykkelen i bruk

Setedybden, fothvileren, krankbredden og ryggen kan enkelt justeres. Følg veiledningen nedenfor.

Justere setedybden

Løsne skruene på hver side av setet og løsne reimene på setet som sitter rundt rammen. Nå kan du skyve til du har funnet ønsket setelengde. Fest skruene og juster setetrekket om nødvendig.

Justere fothvileren



Løsne klemfestet. Justér deretter fothvileren i ønsket posisjon. Pass på at den ikke sklir for langt ut av rammerøret, da kan fothvileren falle ut. Stram til klemfestet etter justering.



Justere krankbredden



Løsne skruene og fjern endestykket. Deretter kan du fjerne spacere og krankarmer. Tilpass etter ønsket bredde. Pass på at avstanden er den samme på begge sider. Montér endestykket og stram til skruene.

Justere ryggvinkelen



Juster ryggvinkelen i ønsket posisjon ved å løsne på hurtigkoblingen som vist på bildet. Stram til etter endt justering



Hurtigkoblingen vist som åpen



Ryggen og vinkelstaget sett i sin helhet

Sikkerhetstips

1. Test kjøre- og bremseegenskapene før du sykler din første tur
2. Styregummien er til for å unngå brå bevegelser på styret ved høy fart
3. Anbefalt toppfart er 25 km/t
4. Maksimal brukervekt er 120 kg
5. Bruk alltid begge hender på styrehendlene under sykling
6. Tilpass farten etter ferdigheter og forhold
7. Følg trafikkreglene og vær aktsom
8. Bruk alltid hjelm
9. Bruk parkeringsbremsen ved av- og påstigning
10. Reparasjon av sykkelen bør utføres av kvalifisert personell

Siste sjekk

1. Sjekk lufttrykket i dekkene
2. Sjekk bremsene
3. Se over at sykkelen er hel og i god stand

Vedlikehold

Som alt annet teknisk utstyr trenger også sykler jevnlig vedlikehold.

Rengjør rammen med en fuktig klut. Ikke bruk vaskemidler da dette kan gjøre skader på lakken.

Jevnlig service av sykkelens gir og bremsesystem er også påkrevd. Kontakt en autorisert forhandler for disse servicene.

The logo for Bardum, featuring the word "Bardum" in a bold, dark blue, sans-serif font. A curved line underlines the letters "u" and "m", extending from the bottom of the "u" to the bottom of the "m".

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus