

PREVALON™



PREVALON™ REDUSERER RISIKO FOR FEILSTILLING OG GIR OPTIMAL TRYKKAVLASTNING FOR HEL OG ANKEL

BRUKSANVISNING:

1. Vreng Prevalon™ slik at den grå innsiden vender ut.
2. Legg helen godt over hullet slik at helen blir liggende fritt.
3. Trekk Prevalon™ opp over foten slik at den blå yttersiden ligger ut. Pass på at fotbladet blir liggende i 90 grader for å unngå feilstilling.
4. Fest stroppene på Prevalon™ - sort mot sort og hvitt mot hvitt. Det skal ikke være for stramt.
5. Prevalon™ skal ikke vaskes i maskin, men tørkes av med en våt klut hvis behov.

NB! Hvis det er sidestøtte (wedge) på Prevalon™ - skal den legges på siden av foten for å gi støtte, og ikke under helen!!!

