

Bruksanvisning

2015-06-24

Sitteputer

Gjelder produktene:

Contur EX

Trekk Delux

Hygienetrekk

Utjevningsplate

Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017



Innhold

| | |
|-------------------------------|----|
| Viktige sikkerhetsforskrifter | 3 |
| Introduksjon | 4 |
| Produktbeskrivelse og ytelse | 5 |
| Bruk | 7 |
| Rengjøring | 8 |
| Annen informasjon | 9 |
| Tilbehør | 11 |

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les alle instruksjonene før bruk

ADVARSEL!

1. Produktet må kun brukes til det det er tiltenkt for i henhold til beskrivelsen i denne bruksanvisningen. Produktet må heller ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler, tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen eller i annen dokumentasjon fra Helab.
2. Hvis puten har hygienetrekk, må du ikke bruke andre heldekkende plasttrekk i kombinasjon med puten. Trekkets evne til å slippe gjennom damp kan påvirkes.
3. MÅ IKKE brukes i nærheten av eller i kontakt med brannkilder/varme overflater, slik som ild, glødende sigaretter eller varme lamper. Produktet er branntestet, men kan skades ved kontakt med brannkilder.
4. Produktet må plasseres og brukes slik at det ikke blir klemt eller skadet.
5. Hvis puten har blitt utsatt for høye temperaturer, for eksempel ved å ha blitt oppbevart i direkte sollys, må man kontrollere at puten ikke er for varm før den brukes igjen.
6. Du må alltid kontrollere at puten har tiltenkt størrelse.
7. Før bruk må du alltid kontrollere at puten ikke er skadet.
8. Unngå skader på hygienetrekket som følge av skarpe gjenstander.
9. Langvarig stillesitting øker risikoen for DVT (dyp venetrombose).
10. Kontroller regelmessig at huden ikke er rød. Hvis det avdekkes rød hud, må du umiddelbart slutte å bruke puten og kontakte forskriveren.
11. Puten skal brukes i rullestol eller stol med rygg og armlener. Ved bruk i rullestol med hengesete kan det brukes utjevningsplate som tilbehør.
12. Puten må alltid brukes med trekk.
13. Kontroller at trekket sitter godt på puten, passformen skal være god.

1 Introduksjon



Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1.1 Generell informasjon

Denne puten er et medisinsk produkt som er CE-merket i henhold til MDD 93/42/EEC. I følge Läkemedelsverkets forskrifter om medisintekniske produkter plikter produsenten å rapportere uhell og hendelser. Vi setter derfor pris på at eventuelle ulykker og hendelser som gjelder våre produkter blir rapportert til Helab umiddelbart.

1.2 Tiltentkt bruk

Helabs sitteputer er en serie svenskproduserte, trykkfordelende og trykkavlastende puter, utformet for stabilitet og god sittekomfort. Putene er beregnet for brukere med følelse, som kan endre sitteposisjonen sin og som har lav risiko for trykksår. Puten må desinfiseres mellom hver bruker.

1.3 Øvrig informasjon

Vi anbefaler en strukturert og planlagt arbeidsmåte for å få best mulig resultater ved bruk av dette produktet. I vår retningslinje "Handlingsplan trykksår" finner du eksempler som kan være nyttige ved bruk av våre produkter. Denne informasjonen finner du på hjemmesiden vår www.careofsweden.no. Du kan også bestille den fra vår kundeservice. Se kontaktinformasjon på siste side.

2 Produktbeskrivelse og ytelse

Helabs sitteputer er tilgjengelige i en rekke ulike utforminger og størrelser. Puten kan brukes i/til alle de vanligste rullestolene på markedet. Se punkt 2.2 for tilgjengelige standardstørrelser. Kontakt oss hvis du har behov for andre størrelser.

For mer informasjon om produktene kan du kontakte oss på telefon (+47) 69 67 66 00, info@careofsweden.no eller se vår hjemmeside www.careofsweden.no.

2.1 Forklaring av trekk

Alle trekk er enkle å håndtere og vedlikeholde, og de overholder strenge krav til rengjøring og hygiene. Se punkt 4 for informasjon om rengjøring.

Hygienetrekk – Et væsketett trekk som slipper gjennom damp og som er enkelt å håndtere og vedlikeholde. Trekket er elastisk, har sklisikker underside og glidelås i bakkant.

Trekk Deluxe – Et avtakbart trekk av polyesterplysj på utsiden og selventilerende materiale på innsiden. Glidelås i bakkant. Et elastisk materiale på oversiden som motvirker glidning, underside av sklisikkert materiale.

2.2 Beskrivelse av produkter

Helabs puter kjennetegnes av høy komfort og god funksjonalitet. De er enkle å rengjøre, og med avrundet bakkant og uttak for rullestolens ryggstøtterør gir de god passform. Merking på puten gjør det enkelt å plassere den på riktig måte.

Contur EX

En trykkfordelende sittepute som består av en anatomisk formstøpt base av polyuretanskum med viskoelastisk skum fra plassert på undersiden.

Klassifisering: ISO-kode 18 10 06 – Trykkfordelende

Material i pute: Polyuretanskum, viskoelastisk skum

Høyde: 5 cm

Garanti: 2 år

Brann: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16.

Artikkelinformasjon Contur EX inkludert trekk Deluxe.

| Artikkelnr. | Størrelse (BxDxH) | Anb. maks. brukervekt/kg | Artikkelnr. | Størrelse (BxDxH) | Anb. Maks. brukervekt/kg |
|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 513030-32 | 30x30x5 cm | 70 | 514240-32 | 42x40x5 cm | 125 |
| 513035-32 | 30x35x5 cm | 70 | 514245-32 | 42x45x5 cm | 125 |
| 513530-32 | 35x30x5 cm | 70 | 514250-32 | 42x50x5 cm | 125 |
| 513535-32 | 35x35x5 cm | 70 | 514540-32 | 45x40x5 cm | 125 |
| 513540-32 | 35x40x5 cm | 70 | 514545-32 | 45x45x5 cm | 125 |
| 513545-32 | 35x45x5 cm | 70 | 514550-32 | 45x50x5 cm | 125 |
| 513735-32 | 37x35x5 cm | 100 | 514740-32 | 47x40x5 cm | 125 |
| 513740-32 | 37x40x5 cm | 100 | 514745-32 | 47x45x5 cm | 150 |
| 513745-32 | 37x45x5 cm | 100 | 514750-32 | 47x50x5 cm | 150 |
| 513750-32 | 37x50x5 cm | 100 | 515040-32 | 50x40x5 cm | 150 |
| 514040-32 | 40x40x5 cm | 125 | 515045-32 | 50x45x5 cm | 150 |
| 514045-32 | 40x45x5 cm | 125 | 515050-32 | 50x50x5 cm | 150 |
| 514050-32 | 40x50x5 cm | 125 | | | |

Utjevningsplate (tilbehør)

Dette tilbehøret kan brukes når det er behov for å utjevne sitteflaten. Det er en innleggsplate som plasseres i trekket, mot undersiden av puten.

Materiale: Cellepolyeten

Garanti: 2 år

Brann: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikkelinformasjon Utjevningsplate.

| Artikkelnr. | Størrelse (BxDxH) | Artikkelnr. | Størrelse (BxDxH) | Artikkelnr. | Størrelse (BxDxH) |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 583535-30 | 35x35x2,5 cm | 584540-30 | 45x40x2,5 cm | 584750-30 | 47x50x2,5 cm |
| 584040-30 | 40x40x2,5 cm | 584545-30 | 45x45x2,5 cm | 585045-30 | 50x45x2,5 cm |
| 584045-30 | 40x45x2,5 cm | 584550-30 | 45x50x2,5 cm | 585050-30 | 50x50x2,5 cm |
| 584240-30 | 42x40x2,5 cm | 584740-30 | 47x40x2,5 cm | 585550-30 | 55x50x2,5 cm |
| 584245-30 | 42x45x2,5 cm | 584745-30 | 47x45x2,5 cm | 585555-30 | 55x55x2,5 cm |

Andre størrelser?

Hvis du har behov for andre størrelser enn de som er angitt her, kan du kontakte Care of Sweden AS.

3 Bruk


Ved utpakking må du kontrollere at godset ikke er skadet. Fjern plastposen og eventuelt beskyttelsesmateriale. Du bør ikke bruke kniv da den kan skade produktet.

Puter

1. Kontroller at puten ligger riktig i trekket. Følg merkingen på trekket og puten.
2. Plasser puten i rullestolen eller stolen, følg merkingene på puten. Kontroller at putens størrelse er riktig for stolens sete.
3. Nå kan brukeren bruke puten.

Utjevningsplate

Plasser platen i trekket under puten, med den avrundede bakkanten vendt bakover og den fasede undersiden vendt ned mot trekkets underside. Platen er også merket med korrekt plassering.

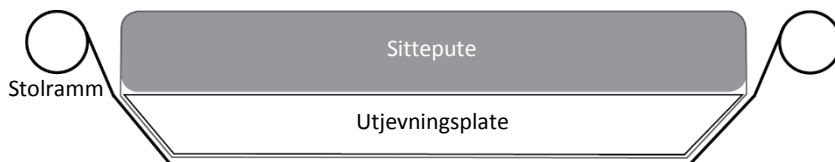

4 Rengjøring

Det er viktig å følge anvisningene nedenfor før produktet brukes igjen til en ny bruker. Konsulter den hygieneansvarlige eller Helab for hjelp og instruksjoner hvis du er i tvil.

OBS!

Følg lokale anvisninger og rengjøringsmiddelets bruksanvisning nøye.

Trekk Delux



Trekket må være helt tørt før det monteres. Lukk glidelåsen hvis trekket har det.

Hygienetrekk



Trekket kan tørkes av med et mildt rengjøringsmiddel (for eksempel håndoppvaskmiddel) og vann eller med et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel, for eksempel DAX overflatedesinfeksjon. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. Avførings- og blodflekker fjernes mest effektivt med kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger nøye.



Rengjøringsmidler som inneholder klor og fenoler, kan påvirke PU-overflaten negativt og bør unngås. Hvis det likevel brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks. 1 %.

PUTE



Punktrenngjøring med mildt rengjøringsmiddel (f.eks. håndoppvaskmiddel) og vann eller ved behov med et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel beregnet til formålet, slik som DAX overflatedesinfeksjon e.l. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes.

Press forsiktig ut eventuelt vann. OBS! Du må ikke vri eller rulle madrassen for å få ut vannet. La madrassen tørke i et varmt, ventilert rom (ikke i sollys). Den skal være helt tørr før den tas i bruk igjen.

Utjevningsplate (tilbehør)



Punktrenngjøring med mildt rengjøringsmiddel (f.eks. håndoppvaskmiddel) og vann eller ved behov med et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel beregnet til formålet, slik som DAX overflatedesinfeksjon e.l. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes.

Den skal være helt tørr før den tas i bruk igjen.

5 Øvrig informasjon

5.1 Oppbevaring

Oppbevar puten flatt med trekket på. Oppbevares på et tørt sted med romtemperatur. Oppbevar puten slik at den ikke kan utsettes for støt, slag eller annen mekanisk påvirkning. Ikke utsett puten for direkte sollys.

5.2 Merking

Puten er merket med produksjonsdato, ordrenummer, artikkelnummer, størrelse, vedlikeholds- og vaskeråd samt EAN-nummer. Den er også merket med hvordan den skal plasseres i stolen.

5.3 Garanti

Garantitiden angis under punkt 2.2.

Garantien gjelder produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje eller forverring av produktet. Den gjelder heller ikke skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feil håndtering og vedlikehold.

5.4 Service og vedlikehold

Puten krever ikke annen service eller vedlikehold enn rengjøring i henhold til denne bruksanvisningen.

5.5 Levetid

Putens forventede levetid er 2 år.

5.6 Demontering og kildesortering

Puten kan resirkuleres i sin helhet, den skal kildesorteres som "brennbart avfall". Ingen demontering er nødvendig.

5.7 Retur og reklamasjoner

Reklamasjoner må gjøres til Care of Sweden AS. Returnering av produkt skal skje i henhold til våre instruksjoner og kan først skje etter at reklamasjonen er sendt til Care of Sweden AS. Transportskade skal være meldt til transportselskapet. Se kontaklinformasjon på siste side.

5.8 Symbolforklaring



Artikkelnummer

XXXX-XX-XX

År-måned-dag



Les bruksanvisningen



CE-merket iht.
MDD 93/42/EEC



Resirkulering



Anbefalt
brukervekt



Brukerinformasjon
– kategori



Maskinvask 95 °C



Klor



Tørketromling



Drypptørking



Må ikke strykes



Ikke kjemisk vasking



Avtørking

6 Tilbehør

Det finnes en rekke tilbehør til disse putene. Du ser dem nedenfor.

Utjevningsplate

Ved behov for å utjevne sitteflaten kan du bruke en plate som plasseres i trekket, mot undersiden av puten. Se side 7 for mer informasjon.

Trekk

Hygienetrekk (Contur EX), artikkel no: 50xxyy-10*

Trekk Delux (Contur EX), artikkel no: 50xxyy-08*

*xxyy i artikkelnummeret angir produktets størrelse. For eksempel angir 504045-10 et Hygienetrekk til Contur i størrelsen 40x40x5 cm (xx= bredde, yy=dybde).

Hvis du har behov for annet tilbehør eller mer informasjon om produktene våre, kan du kontakte oss på telefon (+47) 69 67 66 00 eller se vår hjemmeside www.careofsweden.no.



Produsent/produisert av



En del av Care of Sweden AB

Kontakt:

Telefon: (+46) 771 106 600

Faks: (+46) 325 128 40

E-post: info@careofsweden.no

Internett: www.careofsweden.no

Postadresse:

Helab Produktion AB

Box 146

514 23 Tranemo, Sweden

Besøksadresse:

Fabrikgatan 5A

514 33 Tranemo, Sweden

Fraktadresse:

Byns väg 4A

514 33 Tranemo, Sweden

Forhandler Norge

Care of Sweden AS

Valløveien 14

3151 Tolvsrød, NORGE

Telefon: (+47) 69 67 66 00

E-post: info@careofsweden.no

Internett: www.careofsweden.no