



Monterings og bruksanvisning for Hepro Stol/Sengebord





Nr. Kommentar

1. Legg esken på et stabilt underlag

Bilde



2. Snitt opp tapen og åpne. I den lille esken ligger skruer og tilbehør



3. Sjekk at innholdet i esken stemmer:

Unbrakonøkler, 8, 6 og 5mm
1 stk. Fastnøkkel 13mm
2 stk. maskinskruer 8 x 20mm
1 stk. linsehodeskruer 8x20 mm
1 stk. fjærskive 16/8mm
1 stk. maskinskruer 8x100mm
1 stk. sprengskive 18/10mm
1 stk. låseratt






4. Monter bordet «opp ned»
Start med å vri bordfoten slik at hullene for bolter passer med sporene. Fest skruene løst først.



5. Bruk skruen med linsehode til å stabilisere den minste platen. Bruk fjærskiven, sett den inn slik Roger gjør her; med «spissen» ned. Stram godt!



6. Skru fast låserattet slik at bordbeinet står stødig.

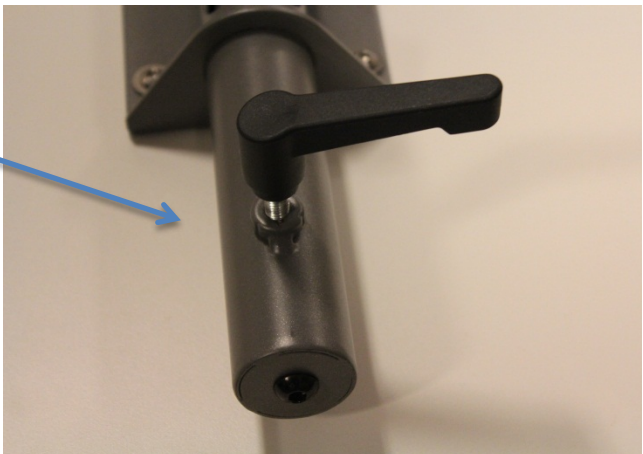




7. Stram til skruene
Til slutt den i rør enden



8. Fest trinsene til
understellet

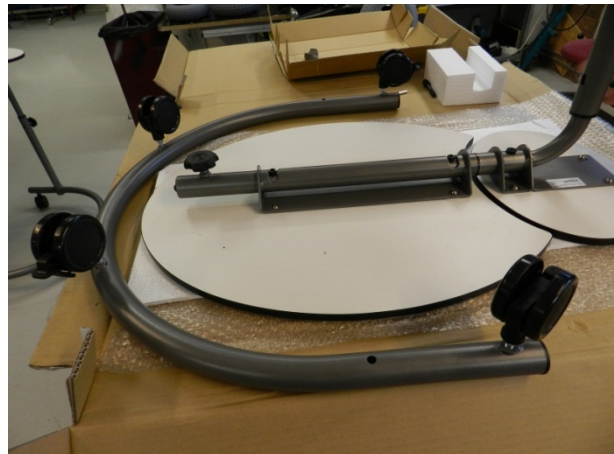

9. Bruk fastnøkkelen som
følger med, eller en
annen 13 mm nøkkel





10. Bordet kan monteres på begge sider av understellet. Sjekk at du setter det fast i den siden som passer best til bruken.

Løft understellet slik at det passer i klaven, sett i skruen uten å stramme. Åpne vinkelen mellom plate og understell så mye som mulig. Stram så skruen godt til. Husk sprengskiven!



11. Pass på at låserattet vender ut fra bordet.





12. Snu bordet og plugg i plastpluggen i det ledige hullet.



13. Ferdig bord

Bordet kan vaskes med en fuktig klut med mildt såpevann



14. Høyden justeres ved å åpne rattet og presse eller dra platen til ønsket posisjon. Stram så til. Høyden kan som standard justeres fra 73 til 93 cm.





15. Platen kan tiltes begge veier. Åpne håndtaket og tilt til det passer. Stram godt til



16. Alle trinsene har brems. Trinsen til høyre på bildet er åpen, den andre er stengt. Trykk forsiktig ned for å bremse, vipp opp for å løsne





Nr.	Dato	Endring
Utg. 01		Ny til anbudet
Utg. 02		Forenklet montering
Utg. 03	6. 2. 2013	Skiftet bilde at strammespake. Inkludert bruksanvisning
Utg. 04	4. 2. 2013	Presisert punkt 10.