

SmartVision by KAPSYS

SmartVision Lite



HURTIGSTART-GUIDE

Introduksjon

SmartVision er den første Android smarttelefonen som er laget for mennesker med synshemming. SmartVision er den første ordentlig tilrettelagte alt-i-en smarttelefon med fysiske taster, berøringsskjerm og stemmestyrte brukergrensesnitt.

Brukergransnitt og funksjoner er fullt ut integrert for å sikre at SmartVision er enkel å håndtere og enkel i bruk. Programmene er organisert slik at man har enkel tilgang og har valgbare, store fontstørrelser.

SmartVision brukergrensesnitt inkluderer også stemmestyrte kommandoer, stemmekontrollert «dikteringsmodus» for å skrive meldinger. I tillegg finnes programmer som fotgjenger-navigasjon(*), digital lupe med kontrastfilter, OCR(*) side-oppsporingsmodus og NFC(*) teknologisystem er inkludert i SmartVision.

SmartVision har de beste egenskapene smarttelefoner kan tilby, enkel i bruk, og med en enestående brukervennlighet.

Denne hurtigstart-guiden beskriver bare de mest brukte funksjonene. For mer detaljert informasjon, se bruksanvisningen.


-1-

SmartVision oversikt

Front



Bakside

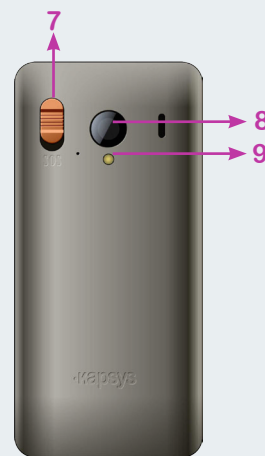

-2-


- 1 PÅ/ AV (langt trykk)
Ut av stand-by modus (kort trykk)
- 2 Volum-knapp +/-
- 3 Mini USB tilkobling (lader- og PC-tilkobling)
- 4 Hodetelefon jack 3.5 mm
- 5 Meny tilknyttet aktuelt skjermbilde
Hjem-skjermbilde
Tilbake (forrige skjermbilde)
- 6 OK Besvare en samtale eller bekrefte valg
Δ∇ Navigere innen menyer eller rundt i skjermbildet
C Avslutt samtale eller slett inntasting
- 7 SOS-bryter. Skyves ned for å utløse nød-prosedyre
- 8 Kameralinse
- 9 Blits
- 10 Kontaktpunkter til docking-stasjonen

Hvis din SmartVision går i stand-by modus, trykk kort på PÅ/AV-knappen for å reaktivere


-3-

Komme igang

Sette i SIM-kort og batteri

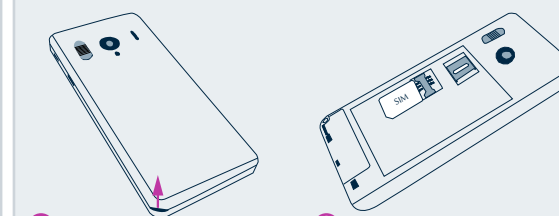

- 1 Snu telefonen rundt, finn hakket i nedre venstre hjørne, og løft av bakdekslet
- 2 Sett i SIM-kortet med forsiden ned og med det avkuttete hjørnet ned til høyre. Skyv SIM-kortet oppover inn i slissen.

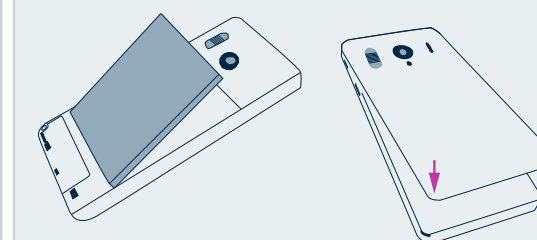


- 3 Sett i batteriet ved å plassere den nedre siden først, med øvre del først, klem så kontaktpunktene nede til høyre, klikk så at et fast klikk høres. batteriet på plass
- 4 Til slutt, sett på bakdekslet ved å feste den øvre del først, klem så de andre sidene slik at et fast klikk høres.

-4-

Lading av batteriet

Første gang man bruker SmartVision, anbefales det å lade batteriet i minst 4 timer. Lad batteriet ved enten å bruke docking-stasjonen eller plugg ledningen som følger med direkte i mikro USB-kontakten

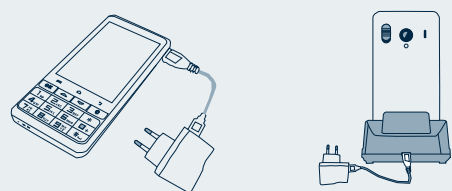

SmartVision kan ikke lades i docking-stasjonen mens den sitter i etuiet

Tilbehør

SmartVision fra Kapsys blir levert med:

- Et batteri
- En 220/110 volt lader – 5 volts USB
- En dockingstasjon for lading (*)
- En USB / mikro-USB kabel
- En bæresnor
- Et sett stereo ørepropper med mikrofon og knapp
- Et etui (*)
- Dokumentasjon

-5-

Slå din SmartVision på / av

Slå på SmartVision med et langt trykk på PÅ/AV-knappen på toppen av telefonen.



Når telefonen slås på for første gang, vennligst følg instruksjonene for oppsett.

SmartVision er klar til bruk når Hjem-skjermbildet vises.

For å slå av SmartVision, trykk et langt trykk på PÅ/AV-knappen og følg instruksjonene.

-6-

Hjem-skjermbildet

Hjem-skjermbildet viser hovedelementene og programmer for SmartVision.



- 1 Telefon-programmet brukes til å ringe, sjekke tapte anrop og gir tilgang til talepostkassen (telefonsvarer).
- 2 Melding-programmet for sending og mottak av SMS og MMS.
- 3 E-post-programmet for sending og mottak av elektronisk post forutsatt at en konto er opprettet.
- 4 Programm-ikon for opplisting av programmer som er tilgjengelig på din SmartVision.
- 5 Favoritt-ikon gir tilgang til dine mest brukte programmer.
- 6 Innstilling-ikon for konfigurering av telefonen.

Statuslinjen på toppen av hjem-skjermbildet gir informasjon om slikt som nettverksdekning, batterinivå etc.

For å gå tilbake til hjem-skjermbildet, trykk

-7-

Tastatur, berøringsskjerm eller talekommandoer

SmartVision har tre ulike brukergrensesnitt: tastatur, berøringsskjerm og talekommandoer:

- **Tastaturet** brukes til å skrive tall eller tekst. For å gjøre deg kjent med tastaturet, se nøyaktig beskrivelse ovenfor der funksjonene til hver tast er beskrevet.
- **Berøringsskjerm** er standardmåten å bruke smarttelefoner på. Brukeren kan da navigere gjennom menyene med fingertuppene. Med et kort trykk på skjermen kan du velge et punkt eller bekrefte en handling. I tilgjengelighetsmodus kan man også bruke andre måter for å navigere gjennom de ulike skjermbildene og mulighetene som finnes på smarttelefonen.
- **Talekommando**-modus gir deg muligheten til å bruke din SmartVision med stemmen, slik at man taler inn telefonnumre etc. For å bruke talekommando trykker man inn talekommando-knappen på høyre langside av telefonen.



-8-

Stemmegjenkjenning-funksjonen er et resultat av den nyeste teknologien. Alle funksjoner i displayet kan man styre med stemmen

Et kort trykk etterfulgt av en pipetone, gir muligheten til å aktivere en funksjon ved å uttale funksjonen som er i displayet (f.eks. starte et program eller gjøre en innstilling), eller bruke et nøkkelord (1) for å få informasjon om SmartVision status (dvs. «batterinivå?» eller «Hva er klokken?»)

Trykk og hold inne talekommandoknappen gjør det mulig å legge inn uttalt tekst (f.eks.»Hvordan har du det») i felt for innskriving. Slipp knappen for å avslutte. Vær oppmerksom på at denne funksjonen krever tilkobling til 3G eller Wi-Fi.

Man kan kombinere ulike måter å legge inn data på. F.eks. kan man begynne med å legge en tekst med talekommando for så å bruke berøringsskjermen eller tastaturet for å legge inn mer eller korrigerer innholdet ved hjelp av C-tasten.

(1) Komplette liste over nøkkelord finnes i bruksanvisningen.

-9-

Ringe ut

Med tastatur



1. Fra hjem-skjerm bildet brukes opp- og nedpilene på tastaturet Δ / ∇ til man finner Telefon-programmet ☎ . Trykk **OK**, og programmet starter
2. Tast nummeret med tastaturet, trykk **OK** for å bekrefte og ring opp..

Har man tastet feil nummer, trykk **C** for å fjerne siste siffer

Med berøringsskjerm



1. Trykk og hold fingeren på ☎ og trykk **OK**-knappen samtidig

-10-

4. Velg ☎ for å vise alle samtaler.

Med talekommando



På hjem-skjerm bildet, trykk kort på talekommandoknappen. Etter pipetonen, si nøkkelordet «Ring» etterfulgt av navnet på personen du ønsker å ringe. Personen må stå oppført i kontaktlisten.

Følg instruksjonene for å bekrefte oppringningen.

Eksempler på talekommandoer:


1. «Ring Pål Johnsen»
3. «Ring Pål Johnsen mobil» (hvis man har lagret mer enn ett nummer på kontakten)

-11-

Man kan også ringe direkte fra Kontaktliste, Favorittliste eller Historikklister ved å uttale kontaktens navn.

Besvare et anrop

Når man mottar et anrop vises nummeret i displayet, evt. navnet på den som ringer hvis vedkommende står i kontaktlistene.

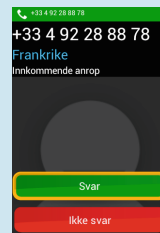

Med tastaturet brukes **OK** for å svare eller **C** for å avvise anropet.

Man kan også besvare et anrop ved å trykke grønne **Svar** eller trykke på røde **Ikke svar**.

-12-

Sende en melding


Med tastatur

På Hjem-skjerm bildet brukes opp- og nedtastene for å finne Melding-programmet ✉ . Trykk **OK** og programmet starter.

1. Bruk opp- og nedtastene for å velge Ny melding-knappen og trykk **OK**.
2. Tast mottakerens nummer, velg så **Skriv melding** og klikk **OK** for å bekrefte
3. Skriv beskjeden på det alfanumeriske tastaturet. Når meldingen er ferdig skrevet velg **Send** og bekreft med **OK**


Med berøringsskjerm

Trykk og hold fingeren på ✉ og trykk **OK**-knappen samtidig

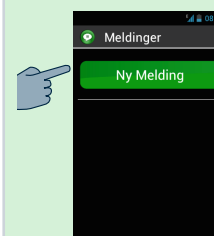


1. Velg **Ny Melding** for å lage en ny SMS eller MMS

-13-

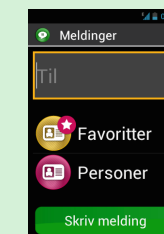


2. Skriv mottakers nummer eller velg fra kontaktlisten.

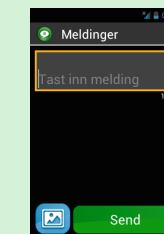

3. Velg **Skriv melding**, skriv meldingen på det virtuelle tastaturet og trykk **Send**

For å skrive tall, berør tasten **123**, for å skrive bokstaver, berør tasten **ABC**

Med talekommando

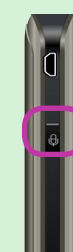

Fra Hjem-skjerm bildet, trykk kort på Talekommando-knappen. Etter pipetonen, si «Send en melding til» etterfulgt av navnet på mottaker. Vær oppmerksom på at navnet må ligge i kontaktlisten. Følg instruksjonene for å skrive meldingen og sende den.


Eksempel på talekommando:

«Send en beskjed til Pål Johnsen»


-14-

Opprette en kontakt

1. Fra Hjem-skjerm bildet, velg først ☰ deretter ☎ for å starte dette programmet.

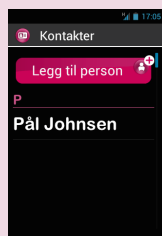

2. Velg **Legg til kontakt. Ny kontakt** kommer opp.

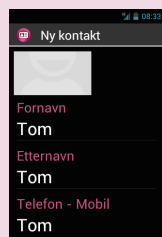

3. Skriv inn i hvert av feltene (fornavn, etternavn, telefonnummer etc). Trykk **OK** nederst i skjerm bildet for å bekrefte og lagre kontakten.

4. Man kan også legge ved et bilde på kontakten. Man kan ta bilde selv eller velge et fra galleriet 📷 .

Man kan legge inn kontakter ved hjelp av alle 3 modi: Tastatur, berøringsskjerm og talekommando

-15-

SOS funksjon

Av sikkerhetshensyn har SmartVision inkludert en SOS-funksjon som gir mulighet til å automatisk ringe og/eller sende stedsbasert nødmelding til forhåndsdefinerte kontakter (inntil 10 kontakter) når SOS-bryteren blir aktivert


Skulle en nødssituasjon oppstå, kan man aktivere denne funksjonen ved å bruke SOS-bryteren på baksiden av telefonen ved å trykke og skyve bryteren ned.



For å bruke denne funksjonen må man konfigurere programmet.

Innstillinger for programmet

Fra Hjemskjerm bildet, velg ☰ , så **SOS** og gjør så følgende innstillinger :

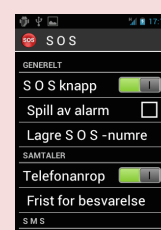

-16-

SOS-knapp: aktiverer eller deaktiverer bryteren på baksiden av telefonen.

Spill av alarm: utløser alarmsignal via høyttaleren


Lagre SOS-numrene: Legg inn numrene du ønsker å ringe eller sende melding når SOS-knappen er aktivert.

Telefonanrop: Får telefonen til å ringe definerte numre når SOS-bryteren blir aktivert.


Send melding: Får telefonen til å sende melding til definerte numre når SOS-bryteren blir aktivert.

Send posisjon: Telefonen sender geografisk stedsangivelse av hvor man er. Vær oppmerksom på at denne informasjonen ikke er garantert riktig!

Meldingstekst: man kan lage egen innholdstekst i meldingen som sendes.

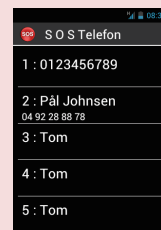

-17-

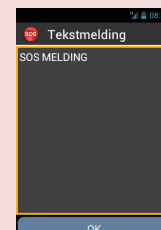

Andre Programmer

- 🕒 Vekkerklokke: still alarm
- 📞 Fjernhjelp: tillater en tredjeperson å ta kontrollen over telefonen
- 🌐 Nettleser: bruk av internet
- 📊 Kalkulator
- 📅 Kalender: legg inn avtaler
- 📷 Kamera: ta bilder eller spill inn videoer
- 📻 FM-radio: lytt til radio
- 🖼️ Galleri: Sorter og se dine bilder og videoer
- 🧭 Kapten(*): Talende, stemmestyrte GPS
- 🔍 Lupe: øker størrelsen på et bilde eller en tekst
- 🎵 Musikk: Hør på musikken som er lagret på telefonen
- 📶 NFC(*): Program som leser NFC-merker
- 📄 OCR(*): skan og få opplært dokumenter

-18-

- 🗣️ Lydopptak: Spill inn og spill av talemeldinger
- 🔍 Søk: finne noe på telefonen
- 📺 Videospiller: se innspilte videoer på telefonen

Vennligst se SmartVision bruksanvisning for full beskrivelse av andre programmer og funksjoner

*Ikke tilgjengelig på **SmartVision Lite**

About this guide

The information published in this document may change without notice. Kapsys reserves the right to amend the contents of this document with no obligation to notify any person or entity whatsoever that it has done so. Kapsys cannot be held liable in the event of any technical or publishing errors or omissions contained herein. Kapsys makes every effort to continuously improve the quality and functions of its products and Kapsys accordingly suggests that you visit its website (www.kapsys.com) for the latest updates to documentation regarding the use and operation of its products.

-19-