

Hepro Aktiv arbeidsstol

Med gassløft



Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:

EN 12182

EN 1335-1, 2, 3

EN ISO 14971

EN ISO 14971

EN 1021 – 1, 2

EN 1021-2

EN 60601-1-2



HEPRO AS •

Tlf. +47 756 94 700 •

www.hepro.no

Tilsiktet bruk

Hepro Aktiv arbeidsstol er laget for å være til hjelp for personer som har problemer med å stå eller flytte seg til og fra arbeidsplassen. Stolen har store spaker med tydelige symboler og kan enkelt justeres slik at den passer ergonomisk mens den samtidig tar hensyn til kroppens bevegelser. Den gir god plass til beina og triller lett men står stødig når bremsen er aktivert.

Montering og regulering av ryggen

Ryggen er ikke montert når stolen leveres. Den monteres ved å trykke den forsiktig ned over ryggstolpen mens man samtidig holder inne reguleringsknappen på høyre side. Trykk ryggen helt ned. Etterpå brukes samme knapp for å løsne og regulere til ønsket høyde.



Regulering av armlener

Armleneputen kan enkelt skyves frem eller tilbake.

Høyden reguleres ved å holde oppe den utvendige kappen og flytte armlenet dit det passer for deg.


Hele armlenet kan vippe bort ved å trykke opp plasthendelen helt nederst.

Reguleringer

Ved å løfte spake 1 utløses gassfjæra og stolen kan heves eller senkes.

Spake 2 åpner setegliden og setet kan flyttes frem eller tilbake.

Spake 3 har to funksjoner. Vri bakover og stolens ryggvinkel kan endres. Vri fremover 90° og både sete og ryggvinkel er frikoblet og innstiller seg etter kroppen.

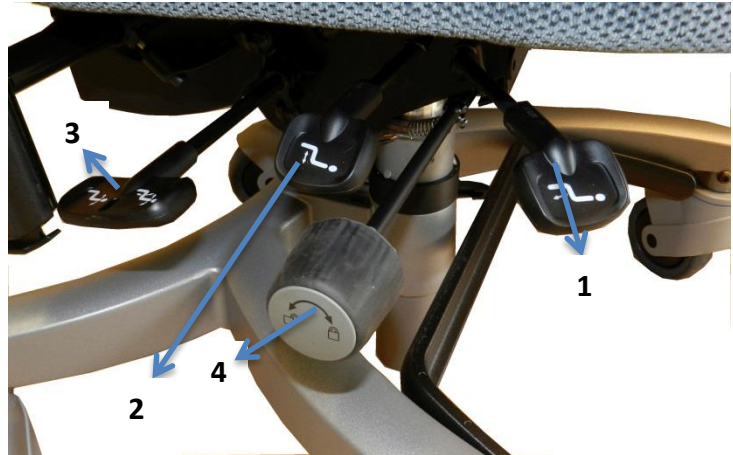

For modeller med seterotasjon vris spake 4 på for å åpne eller låse rotasjonen. Den kan låses på hver 90°

Hjulbremsen låses ved å skyve bremsehendelen framover. Da låses både rotasjon og sving slik at stolen står helt i ro.

Regulering av bremsestaken

Bremsestaken kan flyttes sidevegs ved å åpne eksenterlåsen å flytte spaken slik at den passer. Den kan også flyttes til andre siden. Posisjonen låses ved å stenge eksenterlåsen. Dersom låsen ikke låser godt nok, finnes det en stramme skrue rett over låsen, som kan strammes forsiktig med en 3 mm unbrakonøkkel.



Rengjøring

Trekket kan vaskes på 60 °C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.

Garanti

Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll

Dersom stolen er brukt i samsvar med bruksanvisningen yter Hepro 2-års garanti mot material- og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet skal produktets serienummer alltid oppgis som referanse.

Sikkerhet

Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som "leketøy" for barn. Største tillatte brukervekt er 150 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på bruker og produkt.

Ikke stå på fotringen! Stolen kan velte!

Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, må det vises forsiktighet ved bruk av åpen ild nær stolen