



VELA Tango 500

VARIANT: 500/500F/500E/500EF

Manual nr. 105232



ALB
RYGG

VELA Tango 500



ES5
RYGG

VELA Tango 500F



T3
RYGG

VELA Tango 500F



ALB
RYGG

VELA Tango 500E



ES5
RYGG

VELA Tango 500E



T3
RYGG

VELA Tango 500EF

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0. INNLEDNING	3
1.1. SIKKERHET	4
1.1.1. Bruk	4
1.1.2. Transport	4
1.2. GARANTI/REKLAMASJONSRETT	4
1.3. VEDLIKEHOLD	5
1.3.1. Hjul	5
1.3.2. Understell	5
1.3.3. Varetrekk	5
1.4. DEPONERING	5
1.5. UTPAKKING AV STOLEN	6
1.5.1. Fjerning av beskyttelsesnett	6
1.5.2. Påsetting av ryggstøtte	6
1.6. BRUKSANVISNING	7
1.6.1. Høydeinnstilling (VELA Tango E/EF)	7
1.6.2. Høydeinnstilling (VELA Tango)	7
1.6.3. Innstilling av setevinkel	7
1.6.4. Innstilling av ryggvinkel	7
1.6.5. Innstilling av korsryggstøtte (ALB rygg)	8
1.6.6. Innstilling av rygghøyde	8
1.6.7. Innstilling av armlene, høyde	8
1.6.8. Innstilling av armlene, bredde	8
1.6.9. Nedfellbart armlene	9
1.6.10. Rotasjon (tilvalg)	9
1.6.11. Bremse	9
1.6.12. Lading (VELA Tango E/EF)	9
1.6.13. Oppfellbar fotstøtte	10
1.6.14. Fotstøtte (tilvalg)	10
1.6.15. Skyvebøyle (tilvalg)	10
1.6.16. Fotpedal til bremse (tilvalg)	10
1.6.17. Vinkelplugg (tilvalg)	11
1.6.18. Håndkontroll (tilvalg)	11
1.6.19. El-bremse (tilvalg)	11

1.0. INNLEDNING

KJÆRE KUNDE!

Vi vil gjerne takke deg for at du valgte en VELA Tango. Vi er sikre på at denne stolen vil bli til glede for deg hver dag. Denne bruksanvisningen inneholder nyttig informasjon om innstilling, betjening og vedlikehold av VELA Tango.

Viktig

Les denne bruksanvisningen grundig og ta vare på den for senere bruk. Den bør alltid være tilgjengelig for brukeren og følge med stolen. Bruksanvisningen finnes også på VELAs webområde: www.vermundlarsen.no, der du også kan finne annen relevant informasjon om VELA Tango.

Kontakt VELA-forhandleren hvis du har spørsmål.

VELA forbeholder seg retten til å foreta endringer.

Vermund Larsen Norge AS

Solgaard Skog 4
1599 Moss
Norge
www.vermundlarsen.no

GENERELT

1.1. SIKKERHET

Denne stolen er CE-merket og oppfyller gjeldende EU-regler. Stolen er produsert av:

VELA, Gøteborgvej 8–12,
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Tango 500E/EF er EMC-kompatibel og oppfyller alle EUs krav til elektrisk sikkerhet.

1.1.1. BRUK

VELA Tango er en innendørs stol til sittende personer.

- :: Stolen er ikke bygget for å stå på
- :: For sikker forflytning av en person til og fra stolen skal bremsen alltid slås på.

V Alle varianter av VELA Tango 500 er testet og godkjent for en brukervekt på maks. 160 kg.

Merk: Personer som bruker sele i VELA Tango, skal alltid være under oppsyn når selen er i bruk.

1.1.2. TRANSPORT

Ved transport av stolen i bil, fly og andre transportmidler bør stolens bremses alltid brukes. Stolen er ikke godkjent som passasjer sete i transportmidler og må derfor ikke brukes som dette.

Stolen tåler følgende transportspesifikasjoner:

Temperatur: -40 °C til +70 °C

Luftfuktighet: 15–95 %

Lufttrykk: PPP opp til 1000 meter over havnivå

1.2. GARANTI/REKLAMASJONSRETT

VELA gir 2 års garanti på feil og mangler på varer som er levert i henhold til gjeldene rammeavtale med NAV, forutsatt normal bruk i samsvar med bruksanvisningen.

Ved reklamasjon eller annen henvendelse om produktet skal produktets identifikasjonsnummer oppgis (finnes under stolsetet).

1.3. VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler årlig ettersyn av VELA Tango for å finne frem til for eksempel defekte og slitte deler. Man bør selv regelmessig kontrollere at alle avtakbare deler sitter ordentlig fast.

1.3.1. HJUL

Det anbefales å kontrollere hjulene med jevne mellomrom og fjerne eventuelle trådrester og lignende.

1.3.2. UNDERSTELL

Rengjøres med lunkent vann, eventuelt tilsatt pH-nøytralt vaskemiddel.

1.3.3. VARETREKK

Stoff: Rengjøres med kjemisk rens, med møbelrensemiddel eller en godt oppvridd klut med vann.

Kunstlær: Rengjøres med vann eller mild såpe.

Medisinske tekstiler: Rengjøres som ovenfor. Desinfeksjonsmiddel og teknisk sprit kan også brukes.

Lær: Rengjøres ved støvsuging med myk børste. Ikke bruk rengjøringsmiddel.

1.4. DEPONERING

Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer som plast, metall og elektrisk og elektronisk utstyr, etc. Som et resultat av dette, må avhending av produktet utføres i samsvar med lokal lovgivning og det må skilles fra vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending og resirkulering bidrar til å forhindre at produktet har

en negativ innvirkning på miljøet og mennesker.

Merk! Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med ikonet nedenfor. Dette identifiserer utstyr som inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være skadelige for menneskers helse og for miljøet hvis de ikke bortskaffes riktig, og må derfor samles separat.



Det er viktig at du leverer brukte batterier til designerte mottakssteder. Dette sikrer at batteriene gjenvinnes i samsvar med gjeldende lovgivning og ikke påfører miljøet unødvendig belastning.

1.5. UTPAKKING AV STOLEN

VELA Tango leveres i miljøvennlig pappemballasje. Kontakt VELA umiddelbart ved mangler eller transportskade på stolen. I slike tilfeller må du ikke selv forsøke å reparere eventuelle skader eller ta stolen i bruk.

Esken som stolen leveres i, skal inneholde:

- :: VELA Tango stol
- :: Bruksanvisning for stolen

Ta stolen ut av pappemballasjen



1.5.1. FJERNING AV BESKYTTELSESNETT

Fjern det røde plastbeskyttelsesnettet fra hjulene



1.5.2. PÅSETTING AV RYGGSTØTTE

Sett ryggstøtten ned i hullet. Skru håndtaket på igjen, og stram det godt til. HUSK at plastskiven skal sitte som vist her.



Stolen er nå klar til å tas i bruk

1.6. BRUKSANVISNING

Utskifting av gassfjær og elektrisk heis skal kun utføres av teknikere fra VELA eller av person med opplæring innenfor dette feltet.



1.6.1. HØYDEINNSTILLING (VELA TANGO E/EF)

Kan betjenes fra undersiden av enten høyre eller venstre armlene - avhengig av hvor pluggen er montert. VELA Tango El fås også med høydeinnstilling via håndkontroll (hvis pleiepersonale skal kunne stille inn høyden).

Merk: Høydefunksjonen må bare brukes kontinuerlig i ett minutt, deretter ni minutters pause.



1.6.2. HØYDEINNSTILLING (VELA TANGO)

Still inn ved å trekke opp i det fremste håndtaket på høyre side.



1.6.3. INNSTILLING AV SETEVINKEL

Still inn ved å trekke opp i det midtre håndtaket på høyre side. Trykk håndtaket nedover for å låse i ønsket setevinkel.

Merk: Vær oppmerksom på klemfare ved bruk av setevinkling!



1.6.4. INNSTILLING AV RYGGVINKEL

Stilles inn ved å trekke opp i det bakre håndtaket på høyre side. Håndtaket trykkes nedover for å låse den ønskede ryggvinkelen.

Merknad: Innstilling av vinkelen på ryggstøtten og setet skal alltid gjøres med føttene flatt på gulvet.



1.6.5. INNSTILLING AV KORSRYGGSTØTTE (ALB RYGG)

Ryggstøtten kan stilles inn til å gi optimal korsryggstøtte ved å trekke opp håndtaket på høyre side av ryggstøtten. Ryggstøtten stilles inn slik at den passer til og støtter korsryggen. Slipp håndtaket, og ryggstøtten blir stående i ønsket korsryggvinkel.



1.6.6. INNSTILLING AV RYGGHØYDE

Løsne håndtaket som er plassert bak på ryggen. Still inn ryggen. Husk å stramme håndtaket etterpå.



1.6.7. INNSTILLING AV ARMLENE, HØYDE

Stilles inn ved å løsne skruen på armlenestangen og regulere høyden på armlenet. Husk å stramme skruen igjen.



1.6.8. INNSTILLING AV ARMLENE, BREDDE

Stilles inn ved å løsne skruen under setet bak på sitteplaten og regulere bredden på armlenene ved å trekke armlenet utover. Husk å stramme skruen igjen.



1.6.9. NEDFELLBART ARMLENE

Når armlenet skal felles ned, trykkes knappen på siden av armlenet inn og armlenet skyves bakover og ned.

Merk: Armlenet er bare låst når det står i oppreist posisjon. For at armlenet skal kunne felles ned, må breddeinnstillingen for armlenene tillate det.



1.6.10. ROTASJON (TILVALG)

Roter setet ved å dra bakut i det fremre håndtaket på venstre side. Rotasjonen kan dreies og låses i følgende posisjoner: 90 ° til venstre og 90 ° til høyre.

Merk: Bruk bare rotasjonen når setet er i vannrett posisjon og ryggen i loddrett posisjon.



1.6.11. BREMSE

Stolen bremses ved å føre håndtaket på siden av stolen fremover.

Lås opp stolen ved å føre håndtaket tilbake i oppreist posisjon.

Merk: Bremsen kan flyttes til den andre siden ved å løsne vingskruen på bremsestangen, fjerne plastproppen i hullene på motsatt side og sette inn bremsestangen. Husk å skru vingskruen godt fast igjen.



1.6.12. LADING (VELA TANGO E/EF)

Daglig opplading anbefales. Sett inn ladepluggen i en ladekontakt. Hvis stolen lades, lyser en diode på laderen gult. Hvis stolen er oppladet, lyser dioden grønt. Hvis batterispenningen er for lav ved bruk, høres en hyletone. Da bør stolen lades så snart som mulig.

Merk: Stolen må ikke brukes under lading.




1.6.13. OPPFELLBAR FOTSTØTTE

Stabiliserende fotstøtte som også kan brukes som stiggrett inn og ut av stolen.



1.6.14. FOTSTØTTE (TILVALG)

Lengden på fotstøtten kan stilles inn ved å løsne håndskruen som sitter bak på fotplatestangen. Husk å stramme skruen igjen. Fotplaten kan felles opp, slik at den ikke er i veien når man reiser seg fra og setter seg i stolen.

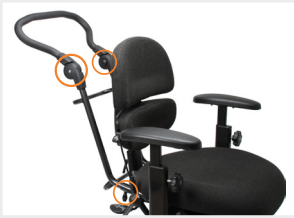

1.6.15. SKYVEBØYLE (TILVALG)

Skyvebøyle til persontransport i stolen. Skyvebøylen monteres i beslag under setet ved hjelp av to fingerskruer som også stiller inn dybden. Høyden stilles inn ved å trykke inn de to knappene på innsiden av bøylen samtidig som håndtaket plasseres i ønsket høyde.



1.6.16. FOTPEDAL TIL BREMSE (TILVALG)

VELA Tango med fotpedal bremses ved å trykke øverste del på pedalen fremover. Lås opp stolen ved å føre fotbremsen tilbake i oppreist posisjon.

Merk: Fotpedalen kan monteres på venstre eller høyre side bak på stolen.



1.6.17. VINKELPLUGG (TILVALG)

Montert på undersiden av høyre eller venstre armlene - avhengig av behov. Husk å sette inn pluggen riktig (se pkt. 1.6.3.).



1.6.18. HÅNDKONTROLL (TILVALG)

Håndkontrollen brukes via trykknapper i forkant. VELAs håndkontroller kan ha en eller flere funksjoner. Symbolene på håndkontrollen viser hvilke funksjoner knappene dekker.

Merk: Sett inn pluggen i håndkontrollen for å betjene funksjoner.



1.6.19. EL-BREMSE (TILVALG)

VELA Tango med el-bremse bremses og låses opp med håndkontroll eller vinkelkontakt. Bremsen er hydraulisk, så det anbefales å bremse / låse opp stolen helt når denne funksjonen er i bruk.

Merk: Denne bremsen kan bare brukes med kontakter under armlene, kontakter på håndkontroll eller vinkelkontakt.

