



brukerveiledning

RS madrasser



Vennligst se viktige tips og bemerkninger i brukerveiledningen før utstyret tas i bruk.

INTRODUKSJON

Alle våre madrasser leveres med vesketett hygienetrekk av førsteklasses kvalitet. Trekket puster, er flammehemmende, meget elastisk og føyer seg etter kroppens bevegelser. Dette betyr maksimal liggekomfort og redusert fare for trykksår.

Hygienemadrass:

Skumkjernen er av høykvalitets flammehemmende kaldskum HR36 (barnemadrass HR30).

Hygienemadrassene leveres i bredder fra 70 til 120cm og lengde fra 120 til 220cm.

Kan leveres på spesialmål ved forespørsel.

Celsius madrass:

Celsius helskum er laget av et flammehemmende viskoselastisk materiale med åpne porer, som gjør at madrassen puster. Celsius madrass leveres som overmadrass eller kombimadrass. Celsius kombi er en kombinasjonsmadrass med HR skum på den ene siden og Celsius skum på den andre siden.

Leveres i bredder fra 70 til 120cm og lengde fra 120 til 220cm.

Kan leveres på spesialmål ved forespørsel.



VIRKEMÅTE

Gjennom kombinasjonen av høy kvalitet kaldskum og med elastisk pustende trekk gir god liggekomfort og støtte.

Celsius Helseskum er laget av et flammehemmende viskoelastisk materiale med åpne porer, som gjør at madrassen puster.


Kroppens trykk og temperatur påvirker materialet slik at skummet former seg etter kroppen og dermed blir mottrykket jevnt fordelt over hele kroppen.

Ryggsøylens korrekte stilling oppnås best ved hjelp av Celsius Helseskum.

I sideleie vil ryggsøylen forbli i rett linje, i ryggleie vil den opprettholde sine naturlige kurvaturer.

Celsius helseskum bør brukes forebyggende og anbefales til personer med:

Fare for trykksår. Rygg- og muskelsmerter. Dårlig blodsirkulasjon. Stive og ømme muskler. Søvnproblemer. Giktledelser. Fibromyalgi.

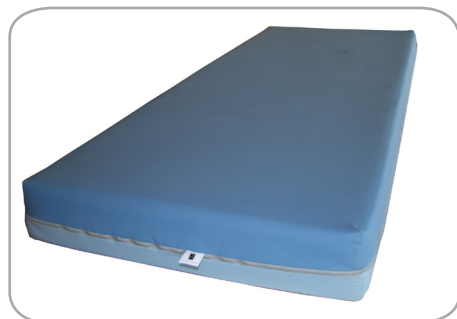

VIKTIGE HENVISNINGER FOR BRUK

Madrassene er velegnet for bruk i standard-senger og pleie- og sykehussenger. Innstillinger på sengen kan gjøres uten at det påvirker funksjonaliteten i madrassen. Les brukerveiledningen før madrassen tas i bruk. På kombimadrassen er det tofarget trekk hvor den mørke siden er den siden hvor det er Celsiusskum. Ved bruk av sengegrinder på regulerbare pleiesenger, må man sikre en tilstrekkelig avstand mellom toppen av madrassen og toppen av sengegrinden. Om nødvendig må sengegrind forhøyes monteres for å sikre at pasienten ikke kan falle ut av sengen.

RISIKO VED BRUK

Allergier

Madrassen bør ikke anvendes dersom man har allergi for stoffer som er i skumgummi. Inkontinens

Fordi skum er et materiale som er svært absorberende og lagrer væsker, bør det alltid benyttes vannrett, men pustende inkontinensstrekk.

Madrassen leveres som standard med inkontinensstrekk. Trekket kan fjernes når som helst, og det kan vaskes. Se også instruksjoner for rengjøring og vask.

RENHOLD




Madrassen har som standard inkontinens beskyttende trekk med glidelås. Dette for å hindre forurensning av selve skummadrassen. Inkontinens trekket er vaskbart i 95°C. Trekket kan desinfiseres med vanlige desinfeksjonsmidler.

DAGLIG VEDLIKEHOLD

Det er ikke nødvendig med noen form for vedlikehold ut over vanlig renhold og tilsyn med at produktet er helt og uskadet.

TEKNISKE DATA

- Hygienemadrass av 13cm, HR36 flammehemmende kaldskum
 - Barnemadrass av 10cm, HR30 flammehemmende kaldskum
 - Madrass Celsius kombi 15cm, kombinerer flammehemmende kald skum HR36 og Celsius helskum
 - Overmadrass Celsius 7cm, flammehemmende Celsius helskum
- Klassifisering: Medisinsk produkt Klasse I
Bruksområde: Omgivelsestemp 10° til 40° C
Luftfuktighet 20% til 75%
Garanti: 24 Måneder
Mål (B/L/H) 70-120 x 120-200 x 10-15 cm
Spesialmål på forespørsel
Pasientvekt: 20 kg til 250 kg avhengig av madrassstype

	Vaske temperatur 80° C Hygienetrekk 95° C
	Ikke bruk blekemiddel
	Må ikke strykes
	Ved maks. 60° i tørketrommel
E	Må ikke kjemisk renses



Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand
Postboks 8343 • 4676 Kristiansand
Tlf. +47 38 14 48 00 • hjelpemidler@varodd.no
www.varodd.no