

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...



Videoklip RotoFlex®

## RotoFlex® Kort betjeningsvejledning

RotoFlex bør ikke benyttes af personer der ikke er introduceret i brugen af sengen.

Den maksimale vægt som RotoFlex kan klare er på 175 kg.

Vær opmærksom på at hverken børn eller dyr befinder sig under sengen eller i kort afstand fra sengen når sengens indstillinger bevæges.

Når sengens bendel er hævet, må denne ikke belastes, ved at man sidder på den eller stiller tunge genstande på den.

RotoFlex sengen skal udelukkende betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen:

De øverste tre par knapper aktiverer indstillingen af ryglæn, bendel og højden på sengen.

De nederste par knapper aktiverer indstillingen fra seng til stolefunktion og visa versa.

Når sengen er i gang med at dreje, kan man ikke benytte de øverste knapper. Disse funktioner vil være låst indtil sengen er i stolefunktion eller inden for sengerammen.

Bevægelsen fra stolefunktion til sengfunktion sker ved at holde en af de røde knapper for neden inde.

Sengens motorer kan nulstilles, ved at holde de to røde knapper på fjernbetjeningen inde samtidig i ca. 5 sekunder.

Reparation af sengen må kun udføres af uddannet personale.



### Sengeheste:

Sengehestene kan tages af ganske enkelt ved at trykke på det lille beslag fornedet samtidig med, at sengehesten løftes.

Sengehestene sættes på igen og låser automatisk.




### Centralbremse:

RotoCare er udstyret med centralbremse.

Låses ved at trykke ned på pedalen tættest ved fodenden.

Åbnes ved at trykke ned på pedalen tættest ved hovedgærdet.

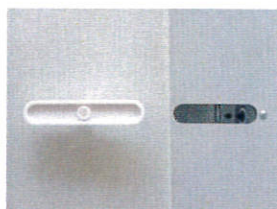

### Madras:

Madrasen er udstyret med finger-skruer på bagsiden, 5 stk. i alt.

De 3 nederste placeres i rillerne i liggefladen og drejes

De 2 øverste placeres mellem lamellerne i det korte siddestykke, hvorefter de drejes, så madrassen holdes fast.

Det lille madrasstykke placeres i holderne i fodenden.

**LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...**