

Brukerhåndbok

2016-12-22

Apollo 6

Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001656



7 331345 070254



Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon	2
1 Innledning	3
2 Produktbeskrivelse og -ytelse	4
3 Pakke ut madrassen	4
4 Rengjøring og rekondisjonering	5
5 Diverse	6
6 Symbolforklaring	7

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les hele bruksanvisningen før bruk

ADVARSEL!

1. Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produktet må ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler, tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne håndboken eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden.
2. MÅ IKKE BRUKES i nærheten av eller i kontakt med åpen ild eller varme overflater, for eksempel peis, tente sigaretter eller varme lamper. Selv om produktet er branntestet, kan det bli skadet hvis det kommer i kontakt med varme.
3. Produktet må plasseres og brukes slik at det ikke kommer i klem eller blir skadet. NB! Vær spesielt oppmerksom ved bruk av sengehester.
4. Kontroller alltid at madrassen har riktig størrelse.
5. Madrassen har hygienetrekk og må ikke brukes med andre plasttrekk. Trekkets dampgjennomtrengelige egenskaper kan reduseres.
6. Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men det er dampgjennomtrengelig (damp ledes bort). Påse at pasienten er riktig plassert for å unngå kvelningsrisiko.
7. Ikke skad hygienetrekket med skarpe gjenstander.

1 Innledning



Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1.1 Generell informasjon

Madrasen er medisinsk utstyr som er CE-merket i samsvar med MDD 93/42/EEC. I samsvar med Läkemedelsverket i Sveriges regler for medisinsk utstyr er produsenten forpliktet til å rapportere uhell og nesten-uhell. Derfor er vi takknemlige dersom eventuelle uhell eller nesten-uhell knyttet til våre produkter umiddelbart rapporteres til Care of Sweden. Den oppfyller de aktuelle delene av følgende standarder: SS-EN 597-1, SS-EN 597-2.

1.2 Tiltentkt bruk

Apollo 6 er en hygienemadrass som kan brukes i alle typer pleiemiljøer for å forebygge trykksår og i behandling av inntil grad 2. Anbefalt brukervekt er inntil 140 kg. Dette er en overmadrass som legges på eksisterende madrass.

Vi anbefaler regelmessig endring av liggstilling. Tidsintervallet må fastsettes av ansvarlig helsepersonell, avhengig av brukerens status, diagnose og allmenntilstand.

1.3 Øvrig informasjon

Handlingsplan for trykksår

For best mulig resultat når disse produktene brukes, anbefaler vi en strukturert og planlagt tilnærming. Du finner eksempler på hvordan våre produkter kan brukes i retningslinjene «Handlingsplan for trykksår».

Madrasseveiledningen

Denne veiledningen inneholder informasjon til personell og forskrivere når det velges en madrass fra Care of Sweden. Optimal standardmadrasser er madrasser i funksjonsgruppe C. Du finner informasjon på www.careofsweden.com, og du kan også bestille informasjon fra kundeservice (se kontaktinformasjon på siste side).

2 Produktbeskrivelse og -ytelse

Apollo 6 er tilgjengelig i følgende standardstørrelser: 80/85/90/105/120 x 200/210 cm. Kontakt Care of Sweden hvis du trenger andre størrelser.

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Care of Sweden eller din lokale forhandler.

2.1 Introduksjon til trekk

Trekket er et såkalt hygienetrekk. Det er enkelt å håndtere og vedlikeholde, og det overholder de strenge kravene til rengjøring og hygiene. Hygienetrekket er dampgjennomtrengelig, noe som betyr at damp transporteres bort slik at risikoen for hudbløtting reduseres.

2.2 Produktbeskrivelse

Kjerne: Viskose elastisk skum 55 kg/m³

Høyde: 6 cm

Trekk: Polyuretan

Anbefalt brukervekt: 0–140 kg*

Garanti: 2 år

*Legg merke til at undermadrassen påvirker funksjonen, inkludert anbefalt brukervekt.

3 Pakke ut madrassen

Madrassene våre leveres komprimert og pakket i resirkulerbar plast. Grunnen til at vi komprimerer dem, er at kundene våre da får en pakke som er enklere å håndtere, samtidig som det er snillere for miljøet, siden det blir mindre volum som skal transporteres.

1. Det første du må gjøre, er å undersøke at varene ikke har blitt skadet. Fjern plastposen og alle beskyttende materialer. Ikke bruk kniv, da den kan skade hygienetrekket.
2. Juster trekket. Legg trekket over madrassen, og lukk glidelåsen.
3. Det er lurt å pakke ut madrassen og la den ligge flatt i to timer før den brukes. Madrassen kan imidlertid tas i bruk med en gang ved behov. Det kan ta opp til en uke før madrassen har oppnådd full bredde/lengde/høyde etter komprimeringen.



4 Rengjøring og rekondisjonering

Det er viktig å følge instruksjonene nedenfor før en ny bruker tar produktet i bruk. Kontakt din hygieneansvarlig eller forhandleren for hjelp og instruksjoner hvis du er usikker.

4.1 Rengjøring

MADRASSTREKK



Du kan tørke av trekkene med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Hvis det brukes et annet middel, må du velge et som ikke påvirker platen på pumpehuset.

Avføring og blodflekker må fjernes omgående med kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.



Trekk som består av flere lag skal separeres før vask. Vask med like farger.



Klor- og fenolbaserte rengjøringsmidler kan påvirke PU-overflaten negativt og bør unngås. Hvis det brukes klor, anbefaler vi en blanding på maksimalt 1 %.

SKUMKJERNE



Hygienetrekket beskytter skumkjernen helt, noe som betyr at man sjelden trenger å rengjøre kjernen. Hvis kjernen av en eller annen grunn må rengjøres, bruker du et mildt rengjøringsmiddel og vann (sprayes for eksempel på). Klem vannet forsiktig ut.

La skumkjernen tørke på et varmt, godt ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys.

Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt. Du kan bruke en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.

Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.

NB:

Kontroller hygienetrekket hver gang produktet rengjøres. Hvis det er skadet, må det skiftes eller repareres. Følg lokale regler og instruksjoner for bruk av vaskemidler.

5 Diverse

5.1 Oppbevaring

Madrassen må oppbevares flatt eller forsiktig brettet / rullet sammen, med lukket glidelås. Den skal oppbevares ved romtemperatur på et tørt sted. Madrassen må oppbevares slik at den ikke kan bli utsatt for støt eller annen mekanisk påvirkning. Madrassen må ikke utsettes for direkte sollys. Hvis madrassen skal oppbevares lenger enn tre måneder, anbefaler vi at den oppbevares flatt.

5.2 Merking

Madrasene er merket med produksjonsdato, varenummer, størrelse, vedlikeholdsråd og EAN-nummer. I tillegg er det plass til egne notater (for eksempel avdelingsnummer og navn).

5.3 Garanti

Se punkt 2.2 for informasjon om garanti. Garantien gjelder produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje, svekkelse av produktet eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig håndtering.

5.4 Service og vedlikehold

Madrassen trenger ikke annen service eller vedlikehold enn rengjøring, som beskrevet i denne bruksanvisningen.

5.5 Reparasjoner

Ta kontakt med leverandøren for instruksjoner.

5.6 Resirkulering

Alle sengeprodukter kan resirkuleres i sin helhet, og de skal sorteres som «brennbart avfall». Det er ikke behov for demontering.

5.7 Returer og reklamasjoner

Reklamasjoner rettes til leverandøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til leverandørens anvisninger og først etter at klagen er meldt. Transportskader skal meldes til transportøren.

6 Symbolforklaring



Artikkelnummer



Produsent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Les bruksanvisningen



CE-merket i samsvar med
MDD 93/42/EEC



Gjenvinning



Anbefalt brukervekt



Oppå eksisterende madrass



Kan roteres



Kan snus



Motvirker
vevsforskyvning



Plasseres øverst



Maskinvaskes ved 95 °C



Klor
<1%



Trommelørking



Drypptørkes



Kan ikke strykes



Skal ikke renses



Tørkes ren



Produsert av



Kontakt:

Telefon: + 46 771 106600

E-post: info@careofsweden.se

Internett: www.careofsweden.com

Adresse:

Care of Sweden AB

P.O. Box 146

SE-514 23 Tranemo

SVERIGE

Leverert av:

