

Bruksanvisning
2015-12-01

CuroCell S.A.M.[®]
Static Antidecubitus Mattress

Artikelnummer for bruksanvisning: 95-001361



Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon	3
Innledning	4
Produktbeskrivelse	5
Installasjon og oppstart	6
Rengjøring og rekondisjonering	9
Oppbevaring	10
Vedlikehold	10
Feilsøking	11
Teknisk beskrivelse	12
Reservedeler	14
Tilleggsutstyr og tilbehør	15
Garanti	16
Annen informasjon	16
Egne notater	17

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les hele bruksanvisningen før bruk

ADVARSEL! For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller fysisk skade:

1. Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produktet kan ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler (f.eks. pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden.
2. Pumpen må ikke brukes i våtrom eller der det er risiko for at den kommer i kontakt med vann eller annen væske. Ikke ta i en pumpe som har vært i berøring med vann/væske. Trekk støpselet ut av stikkkontakten omgående, og send produktet til en autorisert servicetekniker for service.
3. **MÅ IKKE BRUKES** i nærheten av eller i kontakt med brannkilder / varme overflater som åpen ild, tente sigaretter eller varme lamper. Produktet er branntestet, men det kan bli skadd hvis det kommer i berøring med brannkilder.
4. Plasser og bruk produktet på en måte som hindrer at det kommer i klem eller blir skadd. NB: Vær spesielt oppmerksom på klemskader ved bruk av sengehester.
5. Bruk aldri produktet hvis pumpens strømfledning eller støpsel er defekt, pumpedekselet er skadd eller det ikke fungerer som det skal. Ta kontakt med servicetekniker for undersøkelse og reparasjon.
6. Kontroller jevnlig produktets funksjonalitet med hånden (se punkt 3.4). Kontroller også at komfortinnstillingen er korrekt som angitt i tabellen på pumpen.
7. Det er nødvendig med kontinuerlig overvåkning når produktet brukes til personer som krever spesielt tilsyn, for eksempel barn.
8. Madrassen er beskyttet av en hygienebeskyttelse; unngå å bruke flere hygienebeskyttelser samtidig på denne madrassen. Det kan skade de dampgjennomtrengelige egenskapene.
9. Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men er dampgjennomtrengelig. Påse at pasienten er riktig plassert for å unngå kvelningsrisiko.
10. Unngå at hygienetrekket skades av skarpe gjenstander.
11. Hvis trekket har håndtak på langsiden, skal disse kun brukes til å løfte og flytte selve madrassen. All annen bruk skjer på egen risiko og omfattes ikke av produktgarantien.

1. Innledning

CuroCell S.A.M.[®] er en statisk luftmadrass som kan brukes i en rekke pleiemiljøer og som er svært funksjonell og kostnadseffektiv.



Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1.1 Generell informasjon

Denne CuroCell[®]-madrassen er et medisinsk utstyr i henhold til MDD 93/42/EEC. I henhold til lovbestemte forskrifter gitt av myndighetene når det gjelder medisinsk utstyr, skal produsenten rapportere alle ulykker eller hendelser som involverer deres produkter. Vi setter stor pris på om all informasjon om ulykker eller hendelser som angår våre produkter, umiddelbart rapporteres til oss i Care of Sweden. Systemet er testet og godkjent i henhold til følgende standarder: EN 60601-1, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

1.2 Tiltenkt bruk

CuroCell S.A.M.[®] kan brukes i alle typer pleiemiljøer for å forebygge og behandle trykksår opptil og inkludert kategori 2⁽¹⁾. Anbefalt brukervekt er inntil 200 kg.

Den er tilgjengelig i to modeller. Som overmadrass (CuroCell S.A.M.[®] eller CuroCell S.A.M.[®] CF10) som legges oppå en eksisterende madrass, eller som erstatningsmadrass (CuroCell S.A.M.[®] CF16)

Vi anbefaler regelmessige posisjonsendringer. Tidsintervallet må fastsettes av ansvarlig helsepersonell, avhengig av brukerens status, allmentilstand og diagnostiske tilstand.

Madrassen skal alltid rengjøres ved bytte av bruker.

NB!

- Ved bruk sammen med posisjoneringsputer må man lese bruksanvisningen for puten nøye for å sikre at pasienten plasseres korrekt.
- Hvis du bruker dette produktet med et evakueringslaken, er det brukerens ansvar å påse at det er trygt å bruke til evakuering.
- Vær forsiktig ved bruk av sengehester eller annen beskyttelse på sengen, slik at madrassen ikke kommer i klem eller blir skadd.
- Madrassen må ikke løftes når en person ligger på den, eller brukes til noen annen form for transport bortsett fra eventuell evakuering ved bruk av evakueringslaken.
- Denne madrassen er uegnet for bruk under røntgenundersøkelser på grunn av risikoen for uskarpe bilder eller artefakter som kan resultere i feildiagnostisering.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.3 Øvrig informasjon

Handlingsplan vedrørende trykksår

For å få best mulig resultat av dette produktet, bør arbeidsmiljøet være godt planlagt og strukturert. I våre retningslinjer "Handlingsplan" vil du finne eksempler som kan anvendes ved bruk av våre produkter.


Madrassveiledning

Denne praktiske veiledningen gir deg som helsearbeider hjelp til å velge riktig madrass fra utvalget til Care of Sweden. CuroCell S.A.M® er en madrass i funksjonsgruppe B. Denne informasjonen finner du på vårt webområde www.careofsweden.com, eller du kan bestille en kopi fra vår kundeservice ved å sende dine opplysninger til info@careofsweden.se.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Pumpe

1. Frontpanel

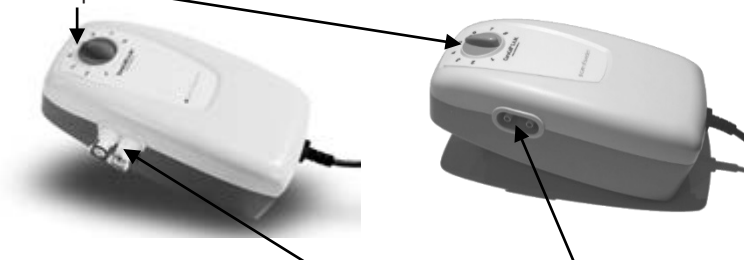

2. Slangekoblinger, med hurtigkobling og uten hurtigkobling

Bakside

1. Sengekroker

2. Hovedstrømbryter (side)

Til å slå pumpen av/på.

Grønn lampe lyser når pumpen går.

3. Strømledning



2.2 Frontpanel

Komfortinnstillinger


Komfortinnstillingen justerer lufttrykket i madrassen. Når bryteren vris medurs, øker lufttilførselen og -trykket i madrassen. Når bryteren vris moturs, avtar lufttilførselen og -trykket i madrassen.

Et passende lufttrykk ligger på mellom 1 og 8. Tabellen på pumpen gir veiledning.



2.3 Madrass

1. Celler/luftblære 2. Slanger 3. Slangeholder 4. HLR (rask tømming)

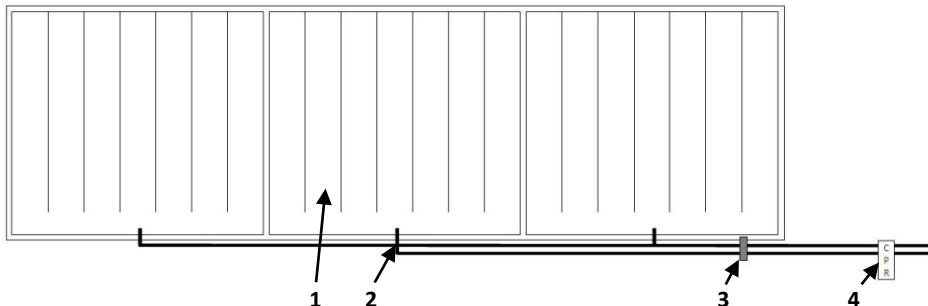

2.4 Andre deler

Hygienetrekk

Innvendig trekk Soft (tilbehør)

Transport- og oppbevaringsveske (tilbehør)

Pumpeveske (tilbehør)

Integrert skumkjerne (kun CuroCell S.A.M.® CF16)

3. Installasjon og oppstart

3.1 Installasjon

Kontroller ved utpakking av madrassen at ingen av delene er skadd. I tilfelle skade, kontakt Care of Sweden eller forhandleren før produktet tas i bruk.

1. Legg madrassen oppå en eksisterende madrass. Fest den om mulig ved å dra de elastiske båndene på bunnen over hjørnene på den underliggende madrassen.


NB! Hvis madrassen har integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® CF16), legger du madrassen direkte på sengebunnen. Bruk stroppene på trekket til å feste madrassen til sengebunnen.

2. Heng pumpen på sengegavlen, eller sett den på et flatt, stabilt underlag. Plasser strømledningen slik at ingen kan snuble i den, kjøre over den med sengehjul eller slik at den ikke kommer i klem når du hever eller senker sengen.



NB! En pumpeveske kan fås som tilbehør.

3. Koble til luftslangene fra madrassen på siden av pumpen. Hvis pumpen og slangene har hurtigkobling, hører du et «klikk» når de er montert på riktig måte.

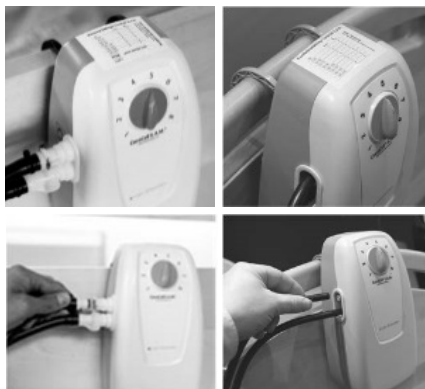

4. Forviss deg om at strømbryteren står på "0" (av). Sett støpselet i en godkjent stikkontakt (220 V).

NB!

- Re opp sengen med laken for økt brukerkomfort.
- Kontroller at HLR-ventilen er stengt.

3.2 Oppstart og innstillinger




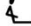
NB! Les alltid bruksanvisningen før bruk.

1. Start pumpen ved å trykke på "1" (på), på siden av pumpen. Den grønne lampen lyser.
2. Pumpen begynner å fylle madrassen med luft. Det tar 15–20 minutter.
3. Om nødvendig kan pasienten ligge på madrassen selv om den ikke er blåst opp. Da vil underlaget bære lasten. Når det brukes en madrass med luftunderlag, må denne være blåst opp.

3.3 Komfortinnstillinger

Luftrykket i madrassen kan justeres etter pasientens ønske om komfort. Rådfør deg alltid med den som har foreskrevet bruken eller annet behørig personell om riktig innstilling.

Juster trykket med komfortinnstillingsbryteren i henhold til tabellen på pumpen.

kg		
0-20	1	2
30-50	2	3
60-70	3	4
80-90	4	5
100-120	5	6
130-150	6	7
160-180	7	8
190-200	8	8

NB!

- Når hodeenden på sengen heves, skal trykket økes med minst ett (1) steg.
- For brukere med amputasjon, der bare en del av madrassen er belastet, skal trykket økes med 1–2 steg.
- Anbefalt brukervekt er opptil 200 kg.

3.4 Håndkontroll

Håndkontroll utføres for å kontrollere at madrassen er korrekt oppblåst. Dette skal gjøres regelmessig, én gang per skift, og ved posisjonsendringer eller ved endring av komfortinnstillingen.

Åpne trekket. Stikk en flat hånd inn under cellene under pasientens seteparti og kjenn etter at brukeren ikke ligger rett på den underliggende madrassen. Vi anbefaler 1-2 fingres margin.

Hvis du kjenner at vekten av pasienten hviler mot hånden din, må du øke komfortinnstillingen til neste øvre steg. Vent 10 minutter og foreta en ny håndkontroll.



3.5 HLR

Ved et nødstilfelle der HLR (hjerte-lunge-redning) må utføres på brukeren: Trekk raskt i HLR-båndet på slangene mellom pumpen og madrassen. Løsne slangekoblingene på siden av pumpen for raskest mulig tømming.

NB! Påse at HLR-ventilene er satt fast riktig etter bruk.



3.6 Lavt trykk

Ved unormalt lavt lufttrykk, se kapittel 7 for feilsøking.

3.7 Transportfunksjon

Hvis det finnes hurtigkoblingsfunksjon og brukeren må flyttes i sengen, kan slangene kobles sammen (løsnes fra pumpen) og madrassen stilles i "Transportfunksjon". Vi anbefaler at denne funksjonen kun brukes over kortere tid.

ADVARSEL!

Hvis lufttrykket holder seg lavt, må du se etter skader på madrassen og slangene. Reparer ved behov, eller ta kontakt med leverandøren.

4. Rengjøring og rekondisjonering

Det er viktig at anvisningene nedenfor følges før produktet brukes av en ny bruker. Ta kontakt med hygieneansvarlig eller leverandøren for hjelp hvis du er usikker.

4.1 Rengjøring

PUMPE

ADVARSEL!

Pumpehuset må ikke åpnes – fare for elektrisk støt. Service og vedlikehold skal utføres av autorisert tekniker. Pumpen må ikke bli våt eller senkes i væske.



Tørk av pumpen med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Hvis det skal brukes et annet middel, må man velge et som ikke påvirker plasten på pumpehuset.

MADRASSTREKK



Rengjør trekket med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Avføring og blodflekker må fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.



Trekk som består av flere lag skal separeres før vask. Vask med like farger.



Klor- og fenolbaserte rengjøringsmidler kan påvirke PU-overflaten negativt og bør unngås. Hvis klor likevel brukes, anbefaler vi en blanding på maks. 1 %.

INNVENDIG TREKK SOFT (tilbehør)



Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.

4.2 Rekondisjonering

PUMPE

Se anvisninger under 4.1.

MADRASS

1. Koble fra slangene og slipp ut luften, og åpne samtidig HLR-ventilen.
2. Ta av trekket. Se anvisningene under punkt 4.1 for rengjøring av trekk. Hvis produktet har skumkjerne, skal denne tas ut og rengjøres separat.
3. Flytt madrassen til et rent og egnet vaskeområde.
4. Tørk av cellene, alle slangene og HLR-ventilen med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.
5. Tørk av og desinfiser alle arbeidsflater med et egnet spritbasert desinfeksjonsmiddel.
6. Sett sammen madrassen. Hvis celler har løsnet fra slangene av en eller annen grunn, må de settes tilbake i henhold til tegningen i punkt 2.3.

SKUMKJERNE (CuroCell S.A.M.® CF16)



Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70%, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.

Klem vannet forsiktig ut. La skumkjernen tørke på et varmt, godt ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys. Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt.

NB!

Kontroller hygienetrekket hver gang produktet rengjøres. Trekket må skiftes eller repareres hvis det er skadd. Kontroller også pumpen, slangekoblingene og strømledningen ved rengjøring. Skadde deler må skiftes ut eller repareres.

5. Oppbevaring og pakking

Vi anbefaler å oppbevare madrassen og pumpen i produktvesken (tilbehør). Det pakkede produktet må håndteres svært forsiktig. Legg ikke tunge gjenstander oppå det.

6. Vedlikehold

1. Kontroller at strømledningen og støpselet er uten skader og riper.
2. Kontroller at madrastrekket er uskadd og at trekket og cellene er riktig satt sammen.
3. Kontroller at det kommer luft fra utløpene på siden av pumpen.
4. Kontroller at slanger og koblinger ikke er skadd eller i klem.

Kontakt fabrikanten eller den lokale forhandleren ved behov for reservedeler.

7. Feilsøking

Problem	Løsning
Pumpen starter ikke	Kontroller at strømledningen er plugget i stikkontakten. Kontroller at alle sikringer er OK.
Brukeren ligger direkte på sengen	Trykket kan være feil innstilt. Juster det i henhold til vekttabellen, og vent et par minutter. Kontroller på ny me "håndkontroll", se kapittel 3.4. Kontroller at HLR-ventilen er stengt.
Madrassen ligger ikke stille	Kontroller at madrassen er festet til den underliggende madrassen med de elastiske båndene. Hvis madrassen imidlertid har integrert skumkjerne (CuroCell S.A.M.® CF16), fester du den til sengebunnen med stroppene på trekket.
Pumpen støyer, eller vibrerer	Kontroller pumpens opphenging på sengen. Fjern pumpen og lytt etter en forskjell. Kan løses ved å plassere pumpen på et flatt, stødig underlag eller ved å legge et håndkle mellom pumpen og sengen. Pumpeveske (tilbehør) kan også brukes.

Hvis du ikke får svar på spørsmålene dine av informasjonen over, vennligst kontakt Care of Sweden eller din lokale forhandler for ytterligere bistand.

8. Teknisk beskrivelse

8.1 Tekniske spesifikasjoner

PUMPE		SPESIFIKASJONER
Modell		CuroCell S.A.M.®
Spenning		220 V-240 V, 50 Hz
Strømforbruk		0,05 A
Sikringstype		T1AL, 250 V
Dimensjoner (LxBxH)		25 x 12,5 x 8,5 cm
Vekt		1,4 kg
Omgivende miljø	Temperatur	Drift: 10 °C - 40 °C
		Oppbevaring: -15 °C - 50 °C
		Transport: -15 °C - 70°C
	Fuktighet	Drift: 10 % - 90 % ikke-kondenserende
		Oppbevaring: 10 % - 90 % ikke-kondenserende
	Atmosfærisk trykk	700 hPa–1013,25 hPa
Klassifisering		Klasse II, Type BF, IP21
MADRASS		SPESIFIKASJONER
Modell		CuroCell S.A.M.®,/ CuroCell S.A.M.® CF10 /CuroCell S.A.M.® CF16
Dimensjoner (BxLxH)		80/85/90/105/120x200/210x10/16 cm
Vekt		2,7 kg

NB! Produsenten kan når som helst endre spesifikasjonene for produktet.

ADVARSEL!

Følg bruks- og vedlikeholdsanvisningene nøye for å forebygge så vel personskader som skader på produktet eller annet utstyr.

8.2 Merking

Madrasen er merket med produktnavn, produksjonsdato, artikkelnummer, størrelse, vedlikeholds- og vaskeinstruksjoner, EAN-strekkode samt plass til egen merking. Det er også merket hvilken side som er opp/ned og hva som er hode-/fotende.

8.3 Symbolforklaringer



Artikkelnr.



Produzent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Fotplassering



Les bruksanvisningen



Funksjonsgruppe



CE-merket iht. MDD
93/42/EEC



Gjenvinning



Ikke i husholdningsavfall,
følg
resirkuleringsinstruksjoner



Anbefalt brukervekt



Pasientinformasjon
– kategori



Rett på sengebunn



Oppå eksisterende madrass



Motvirk skjærkraft



Hælfunksjon



Må ikke vaskes



Maskinvaskes ved 70 °C



Maskinvaskes ved 95 °C



CL
<1%
Klor



Trommeltørking



Ikke trommeltørking



Drypptørkes



Kan ikke strykes



Skal ikke renses



Avtørking



Klasse II-utstyr
(dobbeltisolert)



Type BF



IP-klasse (kapslingsgrad)



Temperaturområde



Madrassen skal bare brukes
med brukeren liggende i
lengderetningen

9. Reservedeler

Trekk, CuroCell S.A.M.[®] og CuroCell S.A.M.[®] CF10

Trekk Steel, blå

Art.nr.	Størrelse
294-080200	80x200 cm
294-080210	80x210 cm
294-085200	85x200 cm
294-085210	85x210 cm
294-090200	90x200 cm
294-090210	90x210 cm
294-105200	105x200 cm
294-105210	105x210 cm
294-120200	120x200 cm
294-120210	120x210 cm

CuroCell S.A.M.[®] CF16

Størrelse	Overtrekk Olivia	Overtrekk Steel	Overtrekk Stone	Undertrekk CuroCell
80x200 cm	431-080200	451-080200	452-080200	CC-905610
80x210 cm	431-080210	451-080210	452-080210	CC-905611
85x200 cm	431-085200	451-085200	452-085200	CC-905612
85x210 cm	431-085210	451-085210	452-085210	CC-905613
90x200 cm	431-090200	451-090200	452-090200	CC-905614
90x210 cm	431-090210	451-090210	452-090210	CC-905615
105x200 cm	431-105200	451-105200	452-105200	CC-905616
105x210 cm	431-105210	-	452-105210	CC-905617
120x200 cm	431-120200	451-120200	452-120200	CC-905618
120x210 cm	431-120210	-	452-120210	CC-905620

Luftceller inkl. hurtigkobling og sikkerhetsventil

Art.nr.	Størrelse
CC-250570	80x200x10 cm
CC-250571	80x210x10 cm
CC-250573	85x200x10 cm
CC-250574	85x210x10 cm
CC-250576	90x200x10 cm
CC-250577	90x210x10 cm
CC-250578	105x200x10 cm
CC-250580	105x210x10 cm
CC-250579	120x200x10 cm
CC-250581	120x210x10 cm

Art.nr.	Beskrivelse
CC-250101-E3	CuroCell S.A.M. [®] , pumpe uten hurtigkobling
CC-250102	CuroCell S.A.M. [®] , pumpe inkl. hurtigkobling
CC-908032	Slangesett inkl. HLR

Luftceller inkl. slanger med HLR og hurtigkobling

Art.nr.	Størrelse
CC-250630	80x200x10 cm
CC-250631	80x210x10 cm
CC-250633	85x200x10 cm
CC-250634	85x210x10 cm
CC-250636	90x200x10 cm
CC-250637	90x210x10 cm
CC-250638	105x200x10 cm
CC-250639	105x210x10 cm
CC-250640	120x200x10 cm
CC-250641	120x210x10 cm

Ved behov for andre reservedeler, vennligst kontakt Care of Sweden eller din lokale forhandler.

10. Tilleggsutstyr og tilbehør

10.1 Tilleggsutstyr

Innvendig trekk Soft

Øker komforten ytterligere, kan også brukes for svært følsomme brukere. Dette er inkludert for CuroCell S.A.M.[®] CF10 og CuroCell S.A.M.[®] CF16. Legg luftcellene inn i trekket med den myke skumsiden opp.

Solid transportveske

Transport- og oppbevaringsveske.

Trekk

Med sveisede sømmer.

10.2 Tilbehør

Trekk, Curocell S.A.M.[®] og CuroCell S.A.M.[®] CF10

Innvendig trekk Soft

Art.nr.	Størrelse
CC-928040	80x200 cm
CC-928041	80x210 cm
CC-928043	85x200 cm
CC-928044	85x210 cm
CC-928046	90x200 cm
CC-928047	90x210 cm
CC-928048	105x200 cm
CC-928050	105x210 cm
CC-928049	120x200 cm
CC-928051	120x210 cm

Art.nr. Beskrivelse

CC-9091	Transport- og oppbevaringsveske
CC-9093	Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M. [®] med innvendig trekk Soft
58-900909	Transport- og oppbevaringsveske for CuroCell S.A.M. [®] CF16
CC-9098	Pumpeveske, svart

CuroCell S.A.M.[®] CF16

Innvendig trekk Soft med skumlumme

Art.nr.	Størrelse
CC-928060	80x200 cm
CC-928061	80x210 cm
CC-928063	85x200 cm
CC-928064	85x210 cm
CC-928066	90x200 cm
CC-928067	90x210 cm
CC-928068	105x200 cm
CC-928070	105x210 cm
CC-928069	120x200 cm
CC-928071	120x210 cm

10.3 Annet tilbehør

For beste komfort anbefaler vi bruk av tilbehør fra Care of Sweden, ettersom disse produktene er tilpasset til å fungere godt sammen. Ta kontakt med Care of Sweden eller din lokale forhandler ved behov for tilbehør eller mer informasjon om våre produkter.

11. Garanti

11.1 Omfang

Dette CuroCell®-systemet omfattes av en 2 års garanti vedrørende produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje eller svekkelse av produktet eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig håndtering/stell.

11.2 Service og reparasjon

Denne CuroCell®-madrassen er et medisinteknisk produkt i henhold til MDD 93/42/EEC, til bruk i forebygging og behandling av trykksår. Derfor anbefaler vi at pumpen regelmessig underkastes service og kontroll for å opprettholde funksjonalitet og yteevne. En velstelt pumpe arbeider bedre og holder lenger, i likhet med annet teknisk utstyr.

Service og vedlikehold skal alltid utføres av Care of Sweden eller en av våre autoriserte teknikere. Bruk kun reservedeler som er godkjent av Care of Sweden. Bruk av reservedeler som ikke er godkjent, opphever garantien.

Et garantikrav skal meldes til Care of Sweden før produktet returneres.

Ta kontakt med Care of Sweden eller din lokale forhandler hvis du har spørsmål vedrørende garanti og service.

11.3 Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 3 år.

12. Annen informasjon

12.1 Demontering og gjenvinning

Nesten alle materialer i CuroCell®-produkter kan energigjenvinnes i forbrenningsanlegg, unntatt visse deler av pumpene.

Pumpe:

En brukt CuroCell®-pumpe skal ikke demonteres. Den skal leveres til en gjenvinningsstasjon og kildesorteres som elektronikkavfall.

Madrass:

En brukt CuroCell®-madrass leveres på gjenvinningsstasjon og sorteres som brennbart avfall.

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Care of Sweden eller din lokale forhandler.

12.2 Returer og reklamasjoner

Reklamasjoner rettes til leverandøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til leverandørens anvisninger og først etter at klagen er meldt. Transportskader skal meldes til speditøren.



Produsert av

 **care of sweden**
Supporting Life

Kontakt:

Telefon: 69 67 66 00

E-post: info@careofsweden.no

Internett: www.careofsweden.no

Adresse:

Care of Sweden AB

Valløveien 14

3151 Tolvsrød