



HOMEADAPT ELITE

Trappeheis for rett skinne
Brukermanual

Teknisk support: service@homeadapt.com
www.homeadapt.com

Oppbevar denne manualen på et trygt og tilgjengelig sted for framtidig bruk.

Unit 1, Windsor Industrial Estate, Rupert Street, Aston
Birmingham B7 4PR
U.K.

Tel: (0) 121-333 5186 Fax: (0) 121-359 6194

REV. 15 April 2013

Representant i Norge:



Ergoservice

Ergoservice AS

Tante Ulrikkes vei 54B

0984 OSLO

Telefon: (+47) 906 71 577

Epost: post@ergoservice.no

Foretaksnummer: 980 276 848 MVA

Nettsider: www.ergoservice.no

Skjema for registrering av produkt

home ADAPT *for your independence* **Product Registration Form**
Please print in CAPITAL letters.

Please be assured that Homeadapt **does not** share or sell the information you provide.

* = required field

*First Name _____

*Last Name _____

*Street Address _____

*City _____ *County/Province _____

*Zip/Postal Code _____

Break Address _____

Telephone No. _____

Date of Purchase (MM/DD/YY) _____

*Serial No. _____

Please rate your satisfaction with your Homeadapt device:
 excellent good average poor

Please rate your satisfaction with your Homeadapt product:
 excellent good average poor

Homeadapt reserves the right to use information indicated on this form in its online, video, audio and printed materials. Names will be abbreviated to ensure the privacy and anonymity of the individual.

©2008 Homeadapt Rev. 02-09-08
P/N PREG REG LR

Homeadapt er stolt av å tilby dette tilgjengelighetsproduktet.

Registreringsskjema for produktet er vedlagt i et plastomslag som skal følge med denne manualen. Det er svært viktig at du fyller ut og sender dette skjema til oss så snart du kan, slik at vi kan utstede garantibeviset som følger med ditt produkt.

Serienummeret for produktet finner du på merkelapp som er festet til denne manualen og på selve trappeheisen.

Serienummer og modellnummer må opplyses ved reklamasjon, service eller når deler må bestilles. Vi anbefaler deg derfor å alltid ha disse opplysningene tilgjengelige.

Vennligst noter:

Garantien som følger med dette produktet vil ikke være gyldig hvis produktet er installert av personer som ikke er autorisert av Homeadapt.

Innhold

Tekniske spesifikasjoner	4
Erklæring om samsvar med gjeldende standarder	5
Sikkerhet/Bruk i nødsituasjoner	6-8
Oversikt	9
Hovedsikring	10
Setefunksjoner	11
Bruk av trappeheis	12-22
Heis m/dreiesete(Standard)	12-13
Heis m/motorisert dreiesete(Ekstraustyr)	14-15
Heis m/motorisert fotbrett(Ekstraustyr)	16
Heis m/ foldbar skinne(Ekstraustyr)	17-18
Heis m/ motorisert foldbar skinne(Ekstraustyr)	19-22
Diagnostikk koder	23
Ladning	24
Batteri lader	25-26
Vedlikehold/ Bytting av batteri på fjernkontroll	27
Feilsøking	28-29
Ved opphør av bruk i lengre perioder	30
Garanti	31



Denne heisen skal kun installeres i samsvar med gjeldende retningslinjer fra:

- EN 81-40:2008 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser – spesialheiser for transport av personer og varer – Del 40: Trappeheiser og løfteplattformer ment for brukere med begrenset bevegelighet
- ASME A18.1:2011 Sikkerhetsstandard for plattformheiser og trappeheiser
- CAN/CSA-B613-00 (R2005) – Heiser i privat bolig for personer med fysisk funksjonshemming
- ASME A17.5/CSA B44.1 – 2011 Heiser og rulletrapper, Elektrisk Installasjon
- NFPA 70 : Nasjonal Elektrisk Kode(rettighetsbeskyttet)
- CSA C22.1 Canadisk Elektrisk Kode

Verifiser at lokale retningslinjer fastsatt av regulerende myndigheter følges i de tilfeller det er aktuelt.

Tekniske spesifikasjoner

Løfteevne-vekt(kg)	30 st (190 kg)
Brukerkontroll	Jevnt trykk(armlene og to fjernkontroller)
Høyeste stigningsgrad	45 grader
Dreiesete	0,60 og 90 grader på topp; 45 grader i bunn
Batterilader	24 VDC batterilader drevet av 240V strømuttak



CE DECLARATION OF CONFORMITY CERTIFICATE

We:

Bruno Independent Living Aids, Inc.

Headquartered at:

1780 Executive Drive
Oconomowoc, WI 53066 USA

An ISO-9001:2000 registered company

Declare that under our sole responsibility, our manufactured product:

MODEL: **SRE-2010G**

has been designed and tested to meet (where applicable) the following laws, directives, specifications and standards pertaining to the Machinery Directive or Powered Inclined Stairlifts for those who have physical impairments:

DIRECTIVES

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
Directive
2006/42/EC Machinery Directive
2006/95/EC Low Voltage Directive

STANDARDS

BS5776:1996
EN 60204 Part 1:2006
EN 60335 Part 1:1994
EN ISO 12100-2:2003
EN 294:1992
EN 61000
EN 954 Part 1:1996
EN ISO 12100-1:2003
EN 349:2008
CISPR 11

When installed in accordance to the manufacturer's specifications and operated in accordance with manufacturer's operating instructions.

We hereby appoint:

Homeadapt AB
Unit 1, Windsor Industrial Estate
Rupert Street, Aston
Birmingham B7 4PR
United Kingdom

To act as Responsible Manufacturer's Representative.

Date of Issue: 15 April 2013

Location: Oconomowoc, WI USA

BY: William W. Belson III
Director of Engineering

REVISION:
BY:

For din sikkerhet

- Les og studer nøye brukermanualen og sikkerhetsrutinene som beskriver bruk av *Elite Stairlift*
- Sørg for at trappeløpet er fri for hindringer før du benytter heisen
- Vær alltid oppmerksom på underlaget i det du stiger av og på trappeheisen
- Unngå å ta med objekter som kan hindre eller forstyrre heisens kjørebane
- Unngå løse tekstiler/klær som kan bli fanget opp når heisen beveger seg
- Fest alltid setebeltet før du benytter heisen
- Sørg for at setet er låst i kjøreposisjonen under ferdsel
- Påse at setet har fri bane for å dreie ved av/påstigning
- Husk at setet alltid skal være låst i posisjon før av/påstigning
- Fjern nøkkel etter å ha slått av heisen, dette for å hindre at noe/noen støter bort i nøkkelen
- For brukere med redusert bevegelighet anbefales det å alltid ta med mobiltelefon eller varslingsenhet ved bruk av heis i de tilfeller man er alene i huset

For din sikkerhet

Trappeheisen er konstruert slik at den vil kjøre ned trappen i et noe lavere tempo enn den benytter på vei Opp.

Fotstøtten har sikkerhetsfunksjon som oppdager og stanser heisen hvis det oppstår hindringer i trappeløpet.

Hvis en slik situasjon skulle inntreffe, kjør heisen i motsatt retning (ved å benytte Opp/Ned vippebryteren på armlenet), fjern hindring i trappeløpet og fortsett din ferd videre.

Elite Stairlift er batteridrevet og vil derfor fortsette å fungere ved et Strømbrudd. Batteriets tilstand, trappeløpets lengde og vekten av brukeren vil påvirke hvor lenge heisen vil være operativ.

Kun ved lengre strømbrudd(mer enn en time) vil det være nødvendig å slå av heisen(hovedsikring på heisens understell) og koble fra ledningen til batterilader, dette for å ikke tappe batteriet unødige.

For **modeller med motorisert dreiesete**: En sensor for overbelastning vil stoppe setets dreiebevegelse hvis en hindring registreres.

For **modeller med motorisert fotstøtte**: En sensor for overbelastning vil returnere fotstøtten til sin opprinnelige posisjon i tilfeller der en hindring registreres.

For din sikkerhet

Bruk i nødsituasjoner

Sørg for at nødvrider er trygt oppbevart sammen med evt. nødnummer.


- Slå av strømmen på heisens understell.
- Fjern hette.
- Sett inn nødvrider.
- Drei nødvrideren som henvist. Følg nøye med på heisens bevegelser under nødsenkning.
- Sett på hette.
- Påse at heisen undersøkes av en kvalifisert tekniker.




Ved all endring av bruksområde for heisen, skal Homeadapt varsles, dette for å vurdere om evt. tilpasninger må foretas. Endring av bruksområde kan, men er ikke begrenset til å være:

- Endrede mobilitets behov hos brukeren av heis.
- Endring av bruker.
- At heisen flyttes til andre fysiske omgivelser.

ELITE

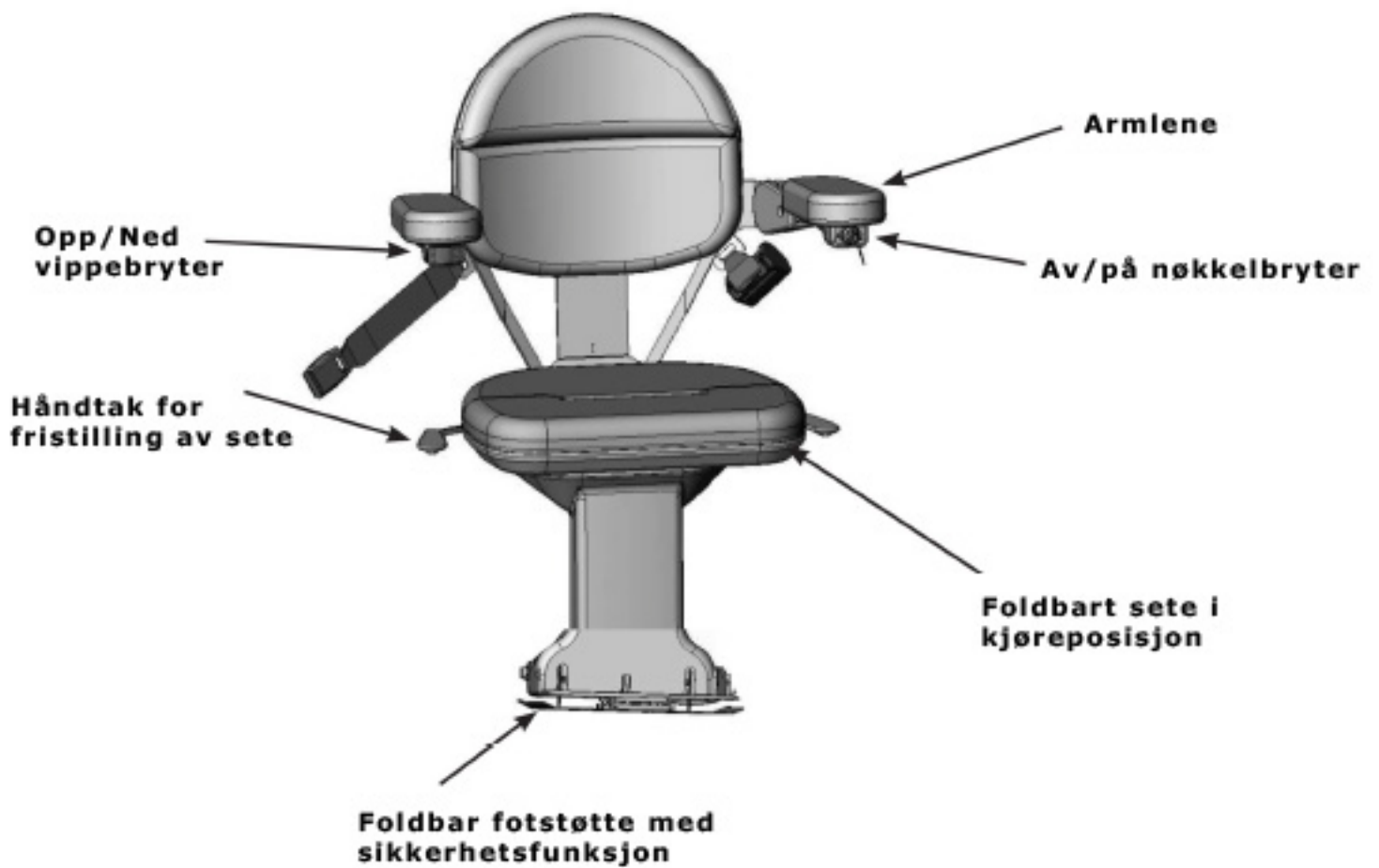

Hovedsikring

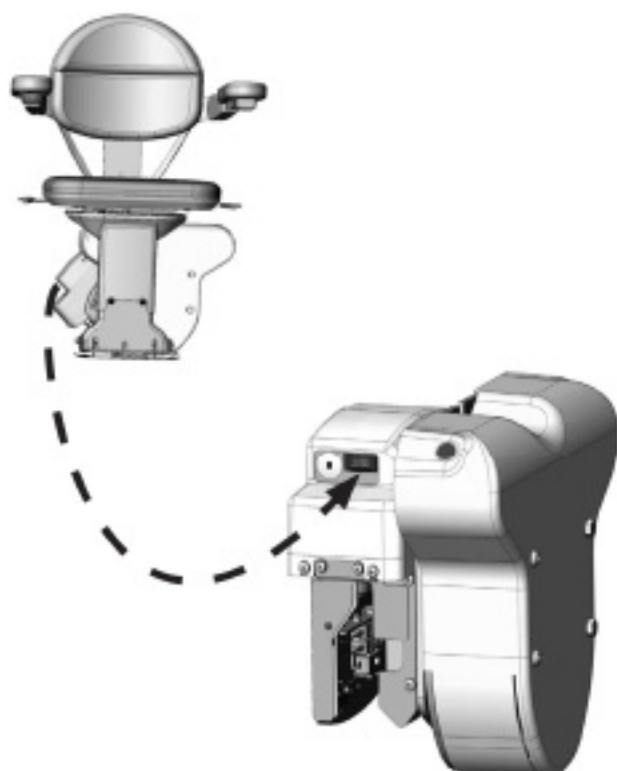

Elite trappeheis er utstyrt med en Av/På bryter for hovedsikring som er lokalisert bak på heisens understell.


Hovedsikringen hindrer skade på batteri, kontroll og motor kretsene på heisen.

Ved normal bruk av heisen vil ikke sikringen utløses, men ved opphør av bruk i lengre perioder, bør sikringen kontrolleres. Skru av/på om nødvendig.

Mulige grunner for utløst sikring:

- Ved hindring på drivverk/skinne.
- Ved overbelastning av løftekapasitet.

Setefunksjoner

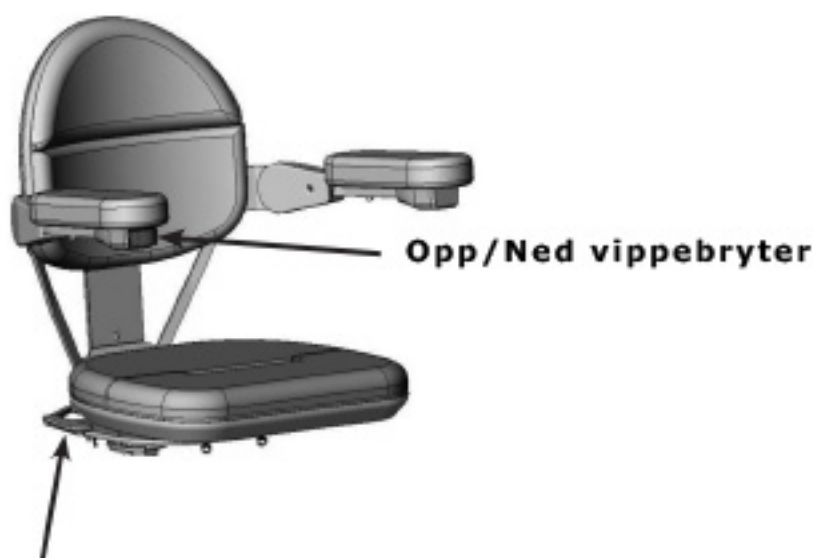

Hendel for fristilling av sete(en på hver side av seteputen)

Sete konstruksjonen på Elite gir mulighet for å dreie 90 grader (med standard armlene), sete kan låses i følgende posisjoner:

0, 60 og 90 grader på toppen og (ekstrautstyr) 45 grader i bunn*.

Ved å bevege en av de to hendlene som er festet nær seteputen opp, frigjøres sete fra låst posisjon og kan dreies for å behjelpe ved av/påstigning.

Når sete er bevegtes, vil det igjen låse seg i den nærmeste av de tre posisjoner nevnt ovenfor.


Når setet er foldet opp, trykker du enkelt seteputen ned for å folde det ut i posisjon for kjøring.

* på modeller med motorisert dreiefunksjon for sete, vil setet **kun** dreie mellom 0-90 grader på toppen av trappeløpet.

Bruk av trappeheis

Elite har en **soft-start** funksjon innebygget, denne hindrer heisen fra å bevege seg brått i det Opp/Ned vippebryteren trykkes inn.

Ved å trykke på Opp/ Ned vippebryteren og holde den inne et øyeblikk, vil heisen forsiktig akselerere opp mot sitt normale tempo.

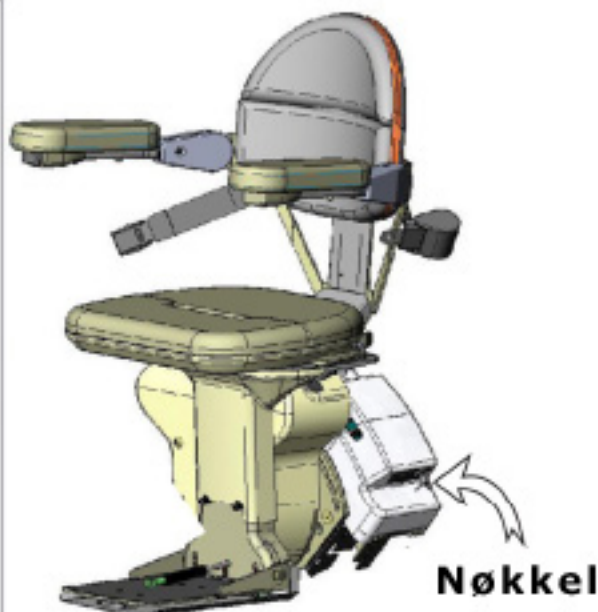

Ved å holde vippebryteren inne vil heisen bevege seg helt til den ankommer enden av skinnegangen, heisen vil også stoppe i det vippebryteren slippes.

Standard dreiesete

1. Vri nøkkel på understell til posisjonen På.
2. På toppen av trappeløp, drei setet:
 - a. Sett deg til rette på setet.
 - b. Fest setebeltet.
 - c. Drei setet slik at du sitter med ryggen mot veggen i trappeløpet.

Heisen vil kun bevege seg når setet er låst i denne posisjon for kjøring.

3. Sitt med begge bena på fotstøtten og armene hvilende på armlenene.
4. Trykk og hold inne Opp/Ned vippebryteren (lokalisert på forkanten av et av armlenene) for å kjøre Opp/Ned på skinnen.


Bruk av trappeheis

To (2stk.) fjernkontroller gjør deg i stand til å aktivere heisen fra begge ender av skinnegangen.

Fjernkontroller er **kun** ment til å styre en heis med tomt sete.
Fjernkontroller er ikke konstruert for å manøvrere et sete med passasjer på.

5. Når heisen har kommet til endepunktet for skinnegangen vil den stoppe opp. Opp/Ned vippebryter skal da slippes.
6. Drei setet for å klargjøre avstigning.
7. Ta av sikkerhetsbeltet og forlat heisen forsiktig.
8. Drei det tomme setet tilbake til låst posisjon.

Bruk av trappeheis

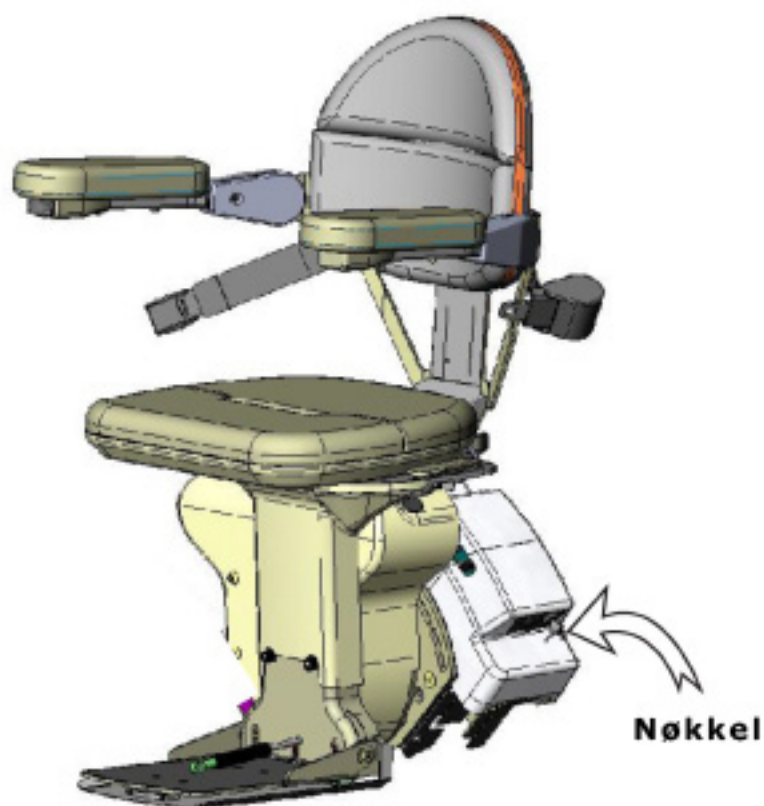

Motorisert dreiesete

1. Vri nøkkel på understell til posisjonen På.
2. På toppen av trappeløp, drei setet:
 - a. Sett deg til rette på setet.
 - b. Fest setebeltet.
 - c. Drei setet slik at du sitter med ryggen mot veggen i trappeløpet.

Heisen vil kun bevege seg når setet er låst i denne posisjon for kjøring.

3. Sitt med begge bena på fotstøtten og armene hvilende på armlenene.
4. Trykk og hold inne Opp/Ned vippebryteren (lokalisert på forkanten av et av armlenene) for å kjøre Opp/Ned på skinnen.
5. Når heisen har kommet til endepunktet for skinnegangen vil den stoppe opp. Opp/Ned bryteren skal da slippes.

Bruk av trappeheis

Motorisert dreiesete

6. På toppen av trappeløpet, trykk på Opp/Ned vippebryteren i samme retning som du har reist for å dreie heisen til posisjon for avstigning.
7. Slipp Opp/Ned bryteren når setet har dreiet helt ut for avstigning.
8. Ta av sikkerhetsbeltet og forlat heisen forsiktig.

Noter:

- Du kan benytte fjernkontrollen for å dreie setet tilbake til posisjon for kjøring.
- Hvis heisen stopper under ferdsel kan dette være på grunn av hindringer i skinnegangen eller ved overbelastning. Heisen vil bare kunne bevege seg i motsatt retning inntil overbelastningen er fjernet.

Bruk av trappesheis

Motorisert fotstøtte

Hvis din heis er utstyrt med motorisert fotstøtte, gjelder følgende instruks ved bruk:

1. Løft opp sete i foldet stilling, fot støtte vil da folde seg opp samtidig.
2. Trekk sete ned for å folde ut fotstøtte for kjøring av heis.

Noter:

- Forsøk aldri å folde fotstøtten manuelt. Manøvrer fotstøtten ved å heve/senke setet. Heisen kan skades om denne instruksjonen ikke følges.
- Hvis det oppstår en hindring i det fotstøtten foldes opp/ned, vil fotstøtten returnere til sin opprinnelige posisjon. Dette vil registreres som en feilmelding av heisen.

Ta følgende skritt for å gjenopprette normal funksjon for fotstøtte:

- Fjerne evt. hindringer for fotstøtte.
- Fold sete opp og ned for å aktivere motorisert fotstøtte.
- Hvis du opplever at problemet vedvarer, kontakt service tekniker for ditt Homeadapt produkt.

Bruk av trappeheis



Ekstrauststyr

Foldbar skinne

Høyrejustert installasjon vist her.

For å folde *Opp* skinne:

1. Trykk hendelen ned på nedsiden for å løse ut skinne.
2. Løft skinnen opp.

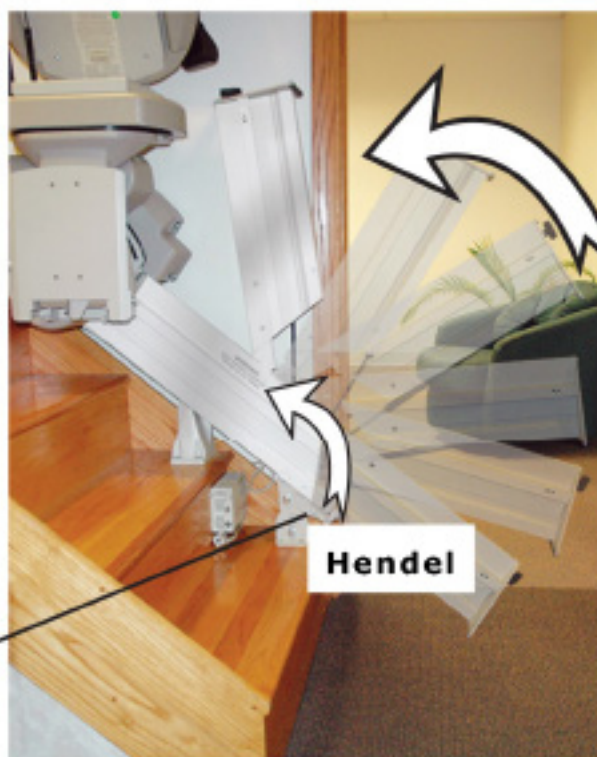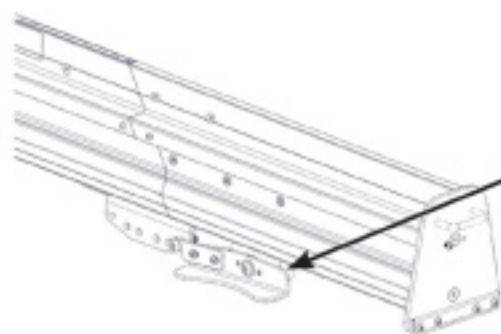

Løft endestykket på skinnegangen.



Heisen må stå parkert midtveis i skinnegangen eller helt på topp når endestykket skal foldes Opp.

Heisen vil bli skadet om den er parkert lavere enn midtveis i skinnegangen når endestykket foldes opp.



Bruk av trappeheis

Ekstraustyr

Foldbar skinne

For å folde ned skinne:

1. Fold endestykket på skinnen ned
2. Trykk ned på toppen av hendel for å låse i posisjon

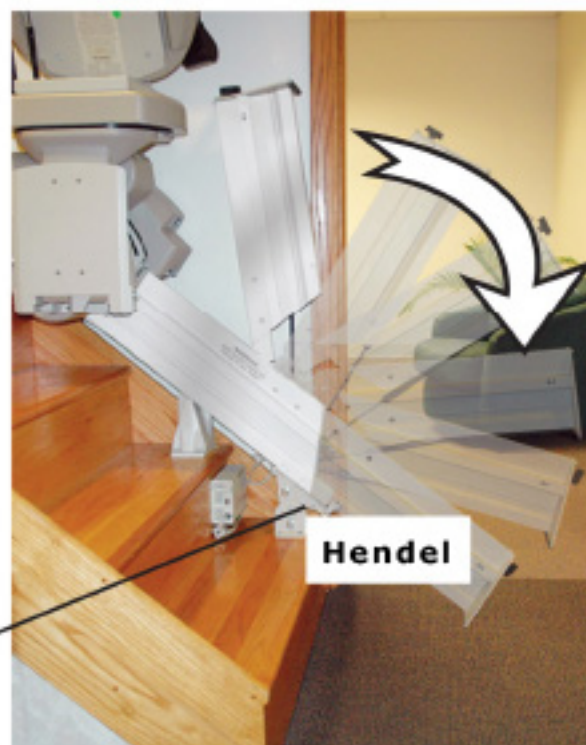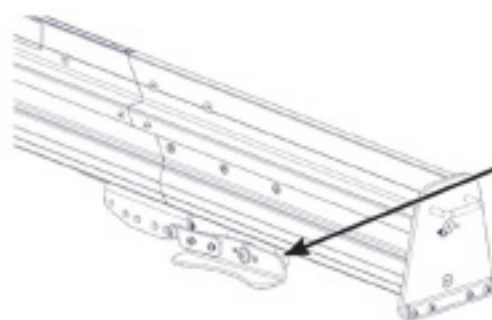

Høyrejustert installasjon vist her

Bruk av trappeheis
Ekstraustyr
Motorisert foldbar skinne

	Advarsel
Klemfare!	
Sørg for at det ikke finnes noen hindringer over og under den foldbare skinnen før den settes i bevegelse.	
Barn og kjæledyr bør holdes på trygg avstand.	
Følg disse advarslene for å unngå skader på personer og/eller at heisen blir ødelagt.	

Forskjellen på den **motoriserte** foldbare skinnen og den manuelle, er at den motoriserte skinnen har en enhet bygget inn i hengslene som automatisk senker og hever det foldbare endestykket av skinnen.

Den motoriserte foldbare skinnen parkerer heisen midtveis i trappeløpet.

- Befinner heisen seg **over** midtveis i trappeløpet, skal skinnen alltid **foldes opp**.
- Befinner heisen seg **lavere** enn midtveis i trappeløpet, skal skinnen alltid **foldes ned**.

Forsøk aldri å folde skinnen manuelt!

For å folde skinnen opp/ned benytt følgende alternativer:

- Ved å kjøre heisen selv.
- Ved å benytte fjernkontroll.

Ved kjøring av trappeheis:

Hvis du befinner deg på toppen av trappeløpet, kjør nedover som tidligere angitt helt til heisen parkerer midtveis i trappeløpet.
(forts. Neste side)

Bruk av trappeheis


Ekstraustyr

Motorisert foldbar skinne

Noter:

Du vil høre et signal så lenge skinnen er i bevegelse. Dette for å advare alle som måtte være i nærheten.

I tillegg vil et **gult LED lys blinke** på kontrollenheten.

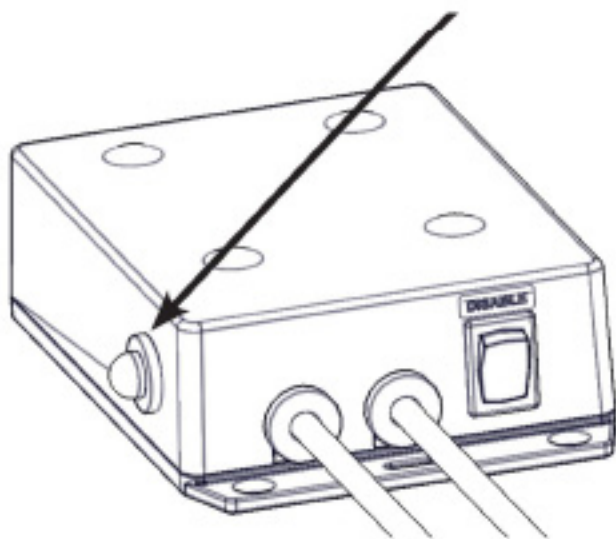

Undersøk at det ikke finnes noen hindringer for at skinnen skal senke seg ned på gulvet!

Trykk Opp/Ned vippebryteren i retning ned. Skinnen vil nå senkes ned. Heisen vil ikke bevege seg nedover før skinnen ligger helt ned mot gulvet.

Når skinne er foldet helt ned kjøres heisen nedover ved å trykke Opp/Ned vippe-bryteren i retning ned. Hold bryteren inne helt til du når bunnen av trappeløpet.

På vei oppover vil heisen også parkere midtveis i trappeløpet, sørg for at det ikke finnes noen hindringer for at skinnen skal folde seg opp!

Trykk nå Opp/Ned vippebryteren i retning opp. Skinnen vil nå folde seg opp. Heisen vil ikke bevege seg før skinnen er fullstendig hevet opp.

Når skinnen har slutte å bevege seg kan du kjøre videre ved å benytte Opp/Ned bryteren i retning Opp.
(forts. Neste side)

Bruk av trappeheis


Ekstraustyr

Motorisert foldbar skinne

Noter:

Du vil høre et signal så lenge skinnen er i bevegelse. Dette for å advare alle som måtte være i nærheten.

I tillegg vil et **gult LED lys blinke** på kontrollenheten.

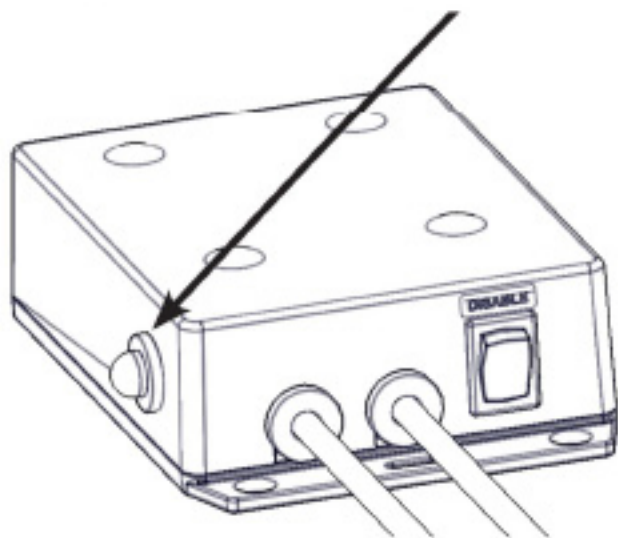

Ved bruk av fjernkontroll:

Hvis du befinner deg i bunnen av trappeløpet kan du benytte fjernkontrollen for å tilkalle heisen. Trykk Opp/Ned knappen i retning ned.

Hvis heisen står på et høyere punkt enn midtveis i trappeløpet, vil skinnen senkes ned etter at heisen har parkert midtveis. Trykk Opp/Ned bryteren ned igjen for å senke skinnen.

Sørg for at du står i sikkerhet når skinnen senkes!

Befinner du deg nederst i trappeløpet og vil parkere heisen med en hevet skinne, gjør følgende: Benytt fjernkontrollen for å sende heisen oppover til midt punktet der den parkerer. Trykk igjen på Opp/Ned bryteren i retning opp for å heve skinnen.

Sørg for at du står i sikkerhet når skinnen heves!

Bruk av trappeheis

Ekstraustyr

Motorisert foldbar skinne

Den motoriserte foldbare skinnen er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som skal hindre skader på mennesker og dyr, samt eiendom.

Hvis en hindring skulle oppstå i det skinnen beveger seg, vil skinnen stoppe opp, for så å trekke seg tilbake et lite stykke i retningen den kom fra.

For å gjenoppta bevegelse i ønsket retning:


1. Sørg for å fjerne hindring
2. Trykk Opp/Ned bryteren på armlene eller fjernkontroll i motsatt retning av den du benyttet.
3. Trykk Opp/Ned bryteren på armlenet i den ønskede retning.

Bryter for frakopling

Kontrollboksen har en knapp for å frakople. Sett vippebryteren i posisjon **Disable** for å hindre at skinnen kan foldes opp eller ned.

Frakopling kan være aktuelt når du ønsker at skinnen skal stå nedsenket i lengre perioder.

Husk å sette bryteren i posisjonen motsatt av **Disable** for å gjenopprette normal drift av skinnen.

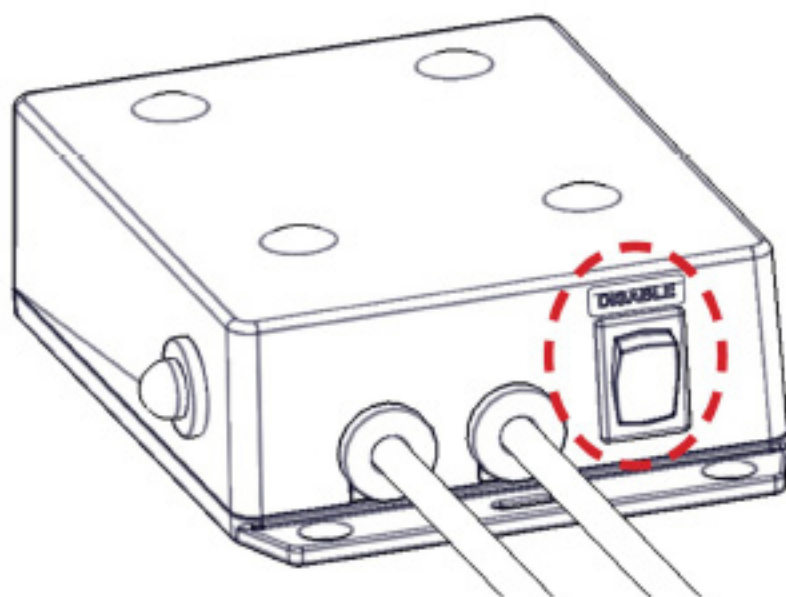

Diagnostikk koder (under setet)

- A2** *Setet er foldet OPP (bryter påvirket)*
- A3** *Setet ute av posisjon for kjøring (Dreiekontroll påvirket)*
- A7** *Sete eller fotstøtte er hindret (Feil på aktuator)*
- C1** *Heisen lader*
- C2** *Heisen benytter batterikraft*
- C4** *Heisen er parkert men finner ikke lader*
- C5** *Batterinivå kritisk (Batteriet må lades umiddelbart)*
- C6** *Batterinivået er lavt*
- L1** *Setets sikkerhets bryter er påvirket?*
- L2** *Øvre endebryter er påvirket*
- L3** *Nedre endebryter er påvirket*
- L6** *Midtveis parkering i skinnegang aktiv*
- L8** *Myk stopp aktiv*

Ladning



Grønt LED lys vises når heisen lader.


Sørg for at batteriet er ladet slik at din *Elite* heis kan fungere optimalt.

Batteriet lades kontinuerlig så lenge heisen er parkert på en av endestasjonene.

Batterier som lades helt ut vil ha sterkt redusert levetid, påse derfor for at batteriet ikke tømmes.


Det grønne LED lyset på heisens understell (se illustrasjon over) indikerer at batteriet lades.

Batterilader LED lys

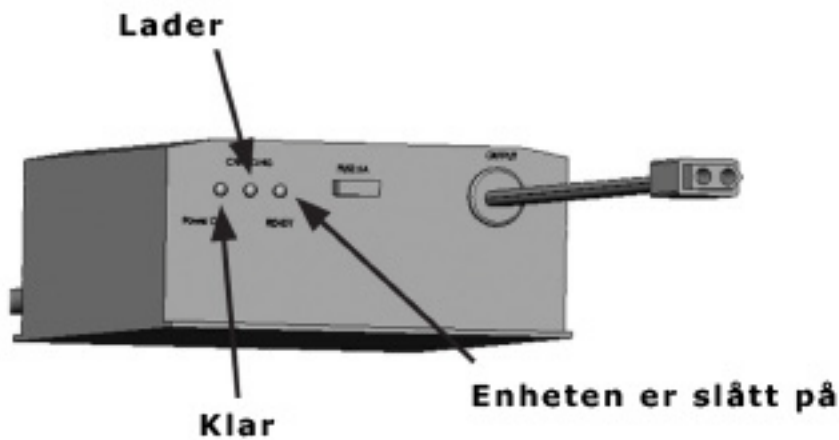

Rød	Gul	Grønn	Blå	Status
På	På (< 1 sek.) Av	Av	Av	Lader ikke tilkoblet batteri
På På På	På (< 5 sek.) Av Av	På (< 5 sek.) Blink (5 sek.) Av	Av	Batteri frakoplet, gul og grønn LED slås av etter 5 sekunder.
På	På	Av	Av	Lader gir maksimal Amp. (2.2A)
På	På	Av	Av	Lader på maks volt. Amper fortsetter å synke.
På	Av	På	Av	Batteriet er fullt ladet opp. Gul LED slås av i varierende intervall
På	Alternerende blinking	Alternerende blinking	Av	Lav spennings indikator
Alternerende blinking	Alternerende blinking	Av	Av	Batteri defekt eller overladet.
På	Av	Rask blinking	Av	Delvis åpen krets; dårlig kontakt eller overlading.
			På	Batteri kontakter er feil vei.

Bytte av sikring på batteri lader

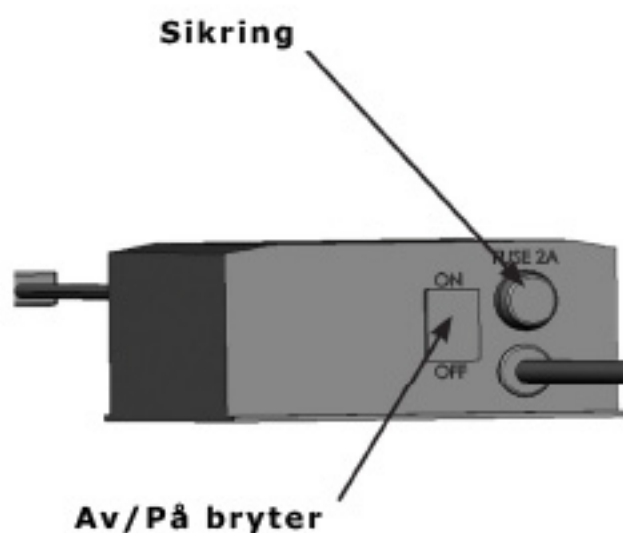

Ved overledning på strømnettet kan AC sikringen på batteriladeren bli utløst. Bildet til venstre illustrerer hvor sikringen er lokalisert.

Ved bytte av sikring:

1. Skru av batteriladeren.
2. Trekk ut ledningen fra strømuttaket.
3. Vri hetten og trekk ut for å fjerne sikringen.
4. Erstatt med sikring av samme type (Bussmann GMD-2A eller liknende) 2A, Slo-Blow, 5 x 20 mm.

Vedlikehold



**9V batteri
(Deksel er fjernet)**

Din Elite trappeheis er konstruert for mange års drift med et minimum av vedlikehold.

For at heisen skal fungere optimalt:

- Hold skinnen ren og fri for ansamlinger av støv.
- Parker alltid heisen på en av endestasjonene slik at batteriet lades.
- Batterilader må alltid være koplet til et strømuttak.
- Sørg for at heisen undersøkes, rengjøres og smøres **minst en gang i året** av en kvalifisert og autorisert service tekniker fra Homeadapt.

Bytte av batteri til fjernkontroll

For å bytte batteri på fjernkontrollen, fjern dekslet som sitter på baksiden. Fjernkontroll benytter et 9V batteri. **Sørg for at batteri byttes hvert år.**

Feilsøking

Heisen fungerer ikke slik den skal. Hva bør du gjøre?

Før du kontakter din Homeadapt forhandler bør du undersøke de punktene som er nevnt nedenfor. Dette kan spare deg for en henvendelse på servicetelefon!

- **Dreiesete.** Er setet låst i posisjon for kjøring?
- **Fotstøtte.** Er det en hindring i trappen som berører fotstøtten?
- **Sikkerhetspaneler.** Er det hindringer i trappen som kommer i kontakt med sikkerhetspanelet?
- **Batterilader.** Hvis batteriet er utladet vil heisen bevege seg sakte for så å stoppe helt opp når spenningen opphører. Hvis dette skulle inntreffe, la heisen stå i et par øyeblikk, for så å kjøre den ned til enden av skinnen der du kan stige av.

Delvis utladet batteri vil kunne føre heisen ned, men ikke opp trappeløpet. Kontakt din Homeadapt forhandler slik at heisen kan bli kontrollert.

(Forts. på neste side)

Feilsøking(forts.)

- **Batterilader(forts.)** Bekreft at laderen er koplet til strømuttak og vent på at batteriene lader.

Rød og Grønn LED lyser.

Fungerer strømuttaket? Benytt ikke strømuttak som kan slås av/på med bryter på vegg.

Lyser det røde på lyset?

Har hovedsikringen i huset løst seg ut?

Sjekk husets sikringsskap, har en sikring gått?


- **Ta oversyn av heisen.**

Er noe endret eller utom det vanlige?

Hvis heisen fortsetter å ha begrenset eller ingen funksjonalitet, kontakt din autoriserte Homeadapt forhandler.

Forhandleren vil utføre alt det vedlikehold som kreves for enheten.

Ved opphør av bruk i lengre perioder

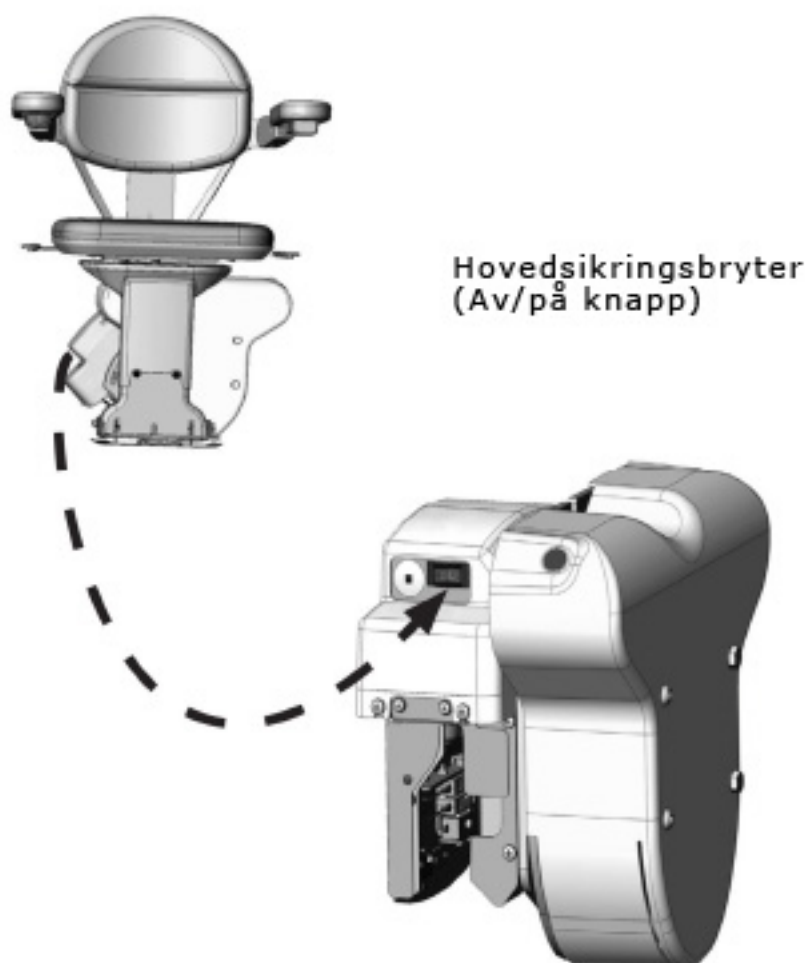

Hvis trappeheisen ikke skal benyttes over et lengre tidsrom, skal hovedsikringen som sitter på heisens understell slås av (se ovenfor). Batteriladeren skal da koples fra strømuttaket.

Noter:

For å gjenopprette normal drift kan batteriene måtte lades opp på forhånd om heisen har vært frakoplet i mer enn fire uker.

Ved gjenoppladning av batterier, slå på hovedsikringen, kople batteriladeren til strømuttak, vent på at laderens røde og grønne LED er tent. Batteriene er da ferdig ladet.

**FIVE YEAR MAJOR COMPONENTS WARRANTY
TWO YEAR LIMITED WARRANTY
for
Homeadapt Stairlifts**

Homeadapt warrants to the original purchaser of a Homeadapt Stairlift that the Homeadapt Stairlift is free from defects in material and workmanship for a period of two years from date of purchase. In addition, Homeadapt warrants that the motor, gear box and rail (the Major Components) will be free from defects in materials and workmanship for a period of five years from the date of purchase.

The exclusive remedy for a defect in a Homeadapt Stairlift shall be the repair or replacement, at the option of Homeadapt, of the defective part or component. If repair or replacement of a Homeadapt Stairlift is not commercially practical or cannot be timely made, Homeadapt may elect to refund the purchase price of the Homeadapt Stairlift instead of repairing or replacing the Homeadapt Stairlift.

IN NO EVENT SHALL HOMEADAPT BE RESPONSIBLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER SUCH DAMAGES ARISE FROM CLAIMS BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR PRODUCT LIABILITY. Some counties do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN THEIR DURATION TO THE LENGTH OF THE WARRANTY STATED ABOVE FOR THE AFFECTED COMPONENT. Some counties do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

To obtain warranty service, you must follow these procedures:

1. Obtain return authorization by calling Homeadapt UK;
2. Return the Homeadapt Stairlift, carriage prepaid, to the address provided by your Homeadapt dealer or Homeadapt with proof of purchase indicating the date purchased.

Homeadapt will pay for shipping back to the purchaser within the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Ireland if a defect in material or workmanship is discovered. Return freight and repair charges will be the responsibility of the purchaser if the problem is not covered by warranty.

This warranty does not cover damage or failure caused by misuse, abuse, accidents, physical damage, modifications not made by Homeadapt, damage in shipment, or repairs undertaken by anyone other than Homeadapt factory employees or authorized distributors. The "original purchaser" of a Homeadapt Stairlift that is leased or rented shall be the person or entity acting as the lessee or rental provider.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from county to county. Homeadapt specifically does not authorize any person to extend the time or scope of this warranty.

For further information regarding this limited warranty, please contact Homeadapt by calling + (0)121-333 5186 or writing to Homeadapt at the following address:

Homeadapt
Unit 1, Windsor Industrial Estate
Rupert Street, Aston
Birmingham B7 4PR
United Kingdom

P/N GLOBAL 2010G-O