



Bruksanvisning
Special Tomato Eio barnevogn

BANO LIFE

INNHold

INNHold.....	2
Ta av / sette på bakhjul	3
Ta av / sette på forhjul.....	3
Regulering av rygg / ryggvinkel	4
Regulering av fotbrett	4
Kalesje	5
Putesett sidestøtter og setesidestøtter.....	5
Justering av sele	6
Regulering av selens skulderbøyle	6
Parkeringsbrems.....	7
Legge sammen vogn	7
Sprengskisse.....	8

Ta av/sette på bakhjul

Det er hurtigkopling på hjulene

Ta av hjul

Press inn knappen i senter av hjulet og ta av hjulet.

Sette på hjul

Dytt hjulakslen inn til du hører et klikk, nå sitter hjulet på.



Ta av/sette på forhjul

Press ned knappen og ta av hjulet




Dytt hjulakselen opp til du hører et klikk, nå sitter hjulet på.

Svinghjullås forhjul



Løft opp hendelen til du hører et klikk, hjulet er IKKE låst nå.
Press hendelen ned til du hører et klikk, NÅ er hjulet låst.
NB! Husk å gjøre dette på begge hjulene.
NB! Forhjulene må stå MED kjøreretningen for å låses!

Regulering av ryggvinkel/rygg opp/ned

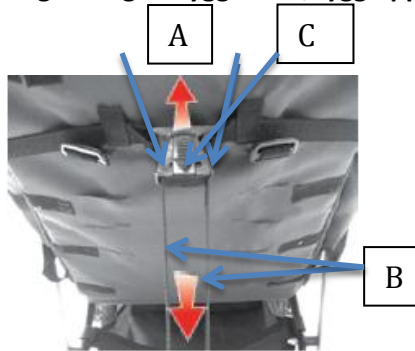

Baksiden av ryggen

Rygg opp: A: Ta tak på begge sider av spennen, dytt inn mot ryggen mens du trekker i beltet **(B)** i den røde pilens retning.

Rygg opp: C: På spennen er det merket en pil; press i pilens retning (nedover) og ryggen legges bakover. Slipp pila når ryggen er i ønsket posisjon.


Regulering av fotbrett

Knevinkelen kan reguleres




Knevinkelen kan varieres i flere posisjoner. Press inn knappene på begge sider, når disse holdes inne kan fotbrettet senkes helt ned. Ønsket knevinkel oppnås ved å løfte opp i forkant av fotbrettet, det høres et klikk hver gang fotbrettet er i låst posisjon (fire forskjellige posisjoner).

Kalesje

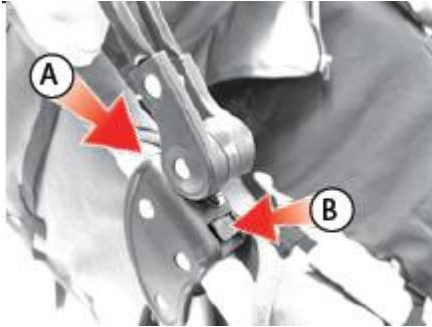

A: Kalesjen settes på ved å skyve kalesjefestene på kalesjen ned i kalesjefestene på rammen av vognen.
B: Kalesjen tas av ved først å kneppe opp reimen (1) på begge sider deretter presse inn knapp (B) på begge sider og trekk kalesjen opp.

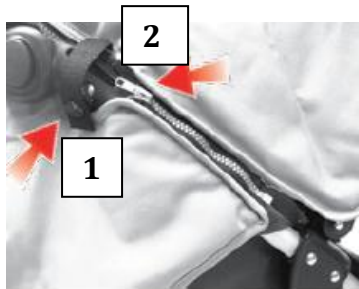


Nedre del av kalesjen er festet med glidelås (2), denne kan tas av.

Putesett sidestøtter og setesidestøtter



Putesettet består av fire separate puter. Disse er festet med velcro og kan enkelt tas av eller monteres.

Justering av sele

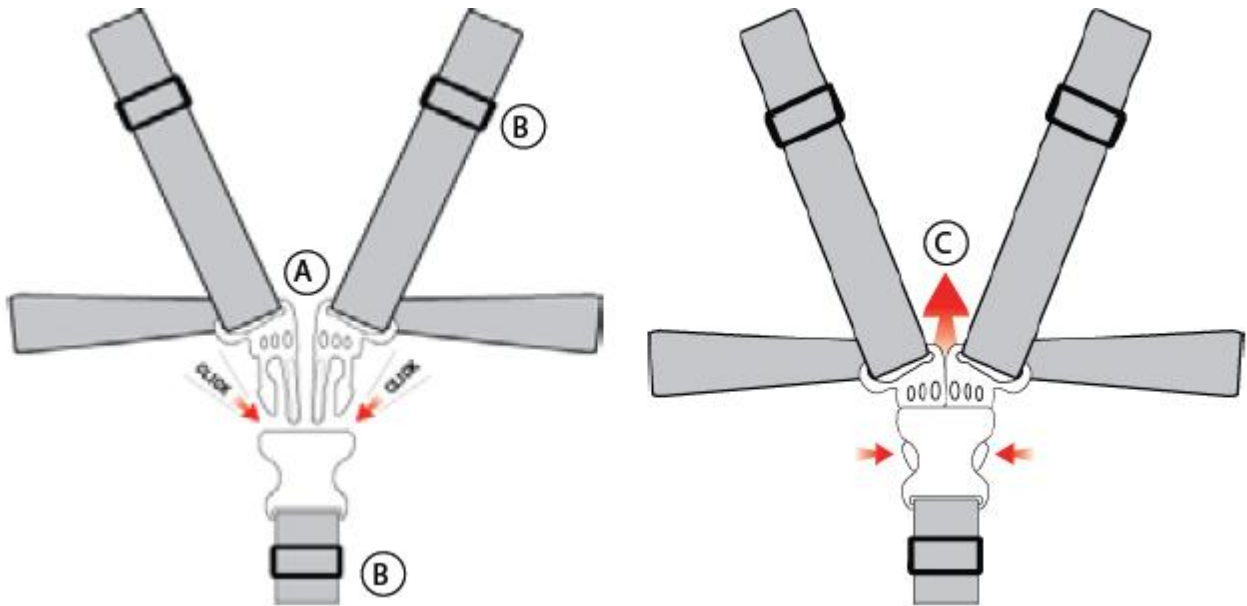

- A: Fest selen i låsen.
- B: Tilpass selelengden.
- C: Beltelåsen åpnes ved å presse inn på hver side av låsen og trekk opp

Regulering av selens skulderhøyde



Rygg sett innenfra

Høyden på skulderselen kan reguleres ved å trekke ut selen og flytte den til ønsket høyde i de ferdige slissene.

Parkeringsbrems



Press ned bremsen med foten for å låse bremsen. Løft opp for å løsne bremsen. Bremsen virker på begge hjulene samtidig.

Legge sammen vogn



A: Ryggen helt tilbake.
B: Sørg for at nedre del av kalesjen er plassert slik i forhold til ryggen.
C: Plasser kjørebøylen i oppreist stilling.
D: Forhjulene skal IKKE være låst og de skal peke MOT kjøreretningen.
E: Fotbrett i nederste stilling.
F: Stå bak vognen, trekk opp låsemekanismen på begge sider (sitter på rammen under polsteret på hver side) og trekk opp sikkerhetslåsen på høyre side.

Legge sammen vognen forts.




A: Låse mekanismen er nå åpen.
B: Press ned på kjørebøylene.












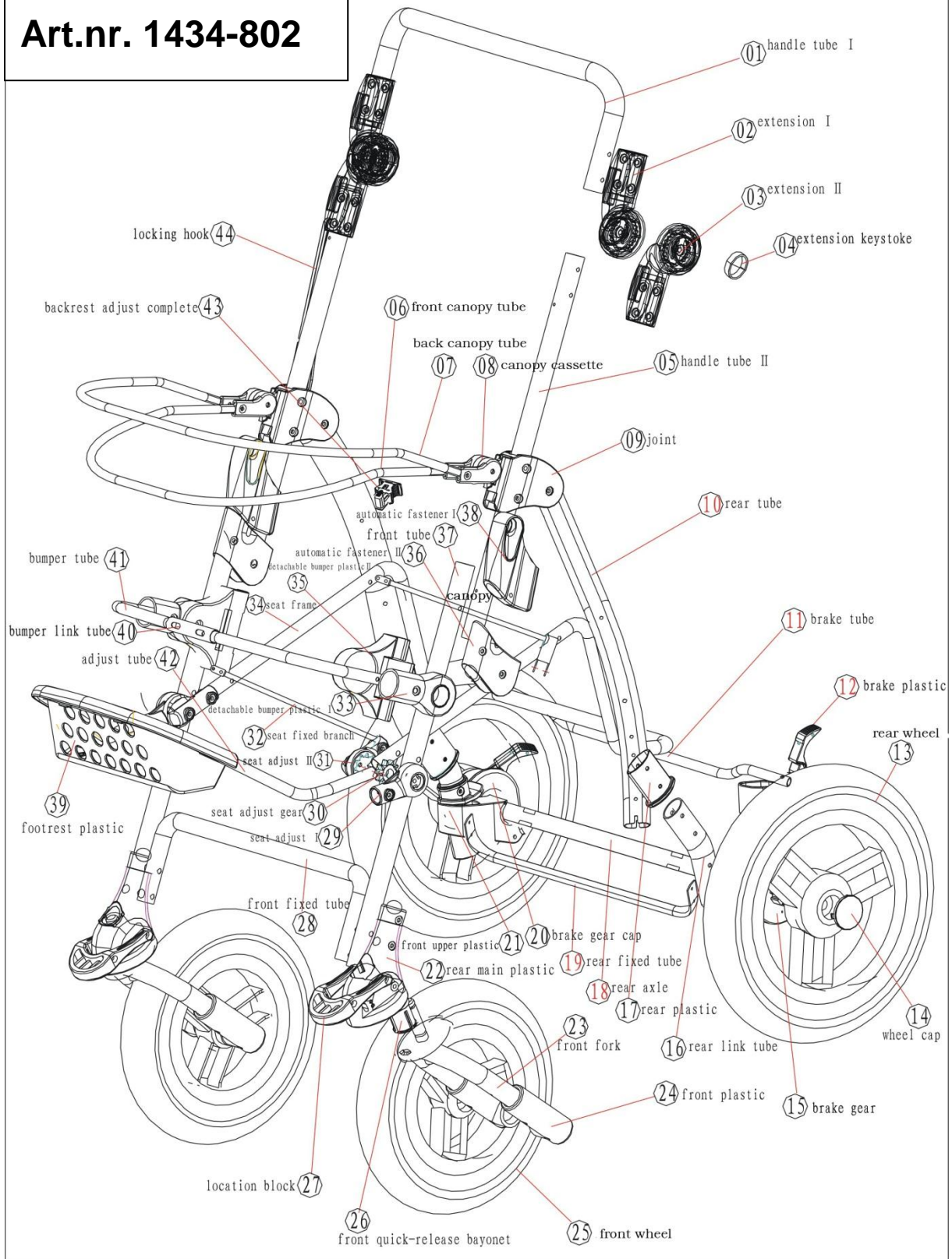


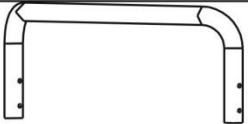


A: For å holde vognen sammen når den er foldet med hendelen som er plassert på rammen over kalesjefestet på høyre side.

EIO barnevogn

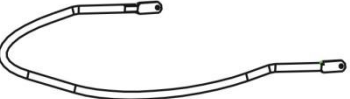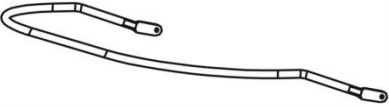

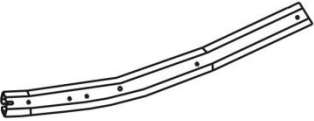

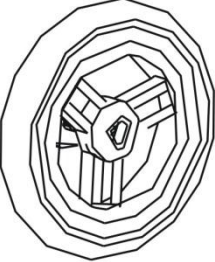




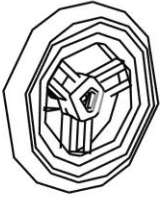






Art.nr. 1434-802





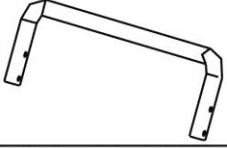




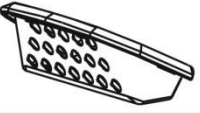

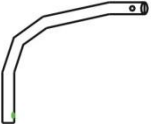
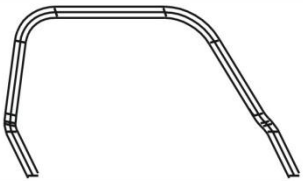


EIO barnevogn reservedeler side 1

Item No	Parts	Description	Component
01		handle tube I	Iron
02		extension I	PA6
03		extension II	PA6
04		extension keystone	PA6
05		handle tube II	Iron
06		front canopy tube	Iron
07		rear canopy tube	Iron
08			PA
09		joint	PA
10		rear tube	Aluminum
11		brake tube	Iron
12		brake plastic	PA
13		rear wheel	EVA+PP
14		wheel cap	PA
15		brake gear	PA

EIO barnevogn reservedeler side 2

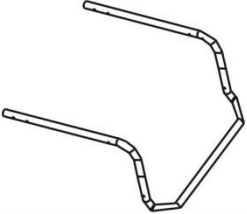Item No	Parts	Description	Component
16		rear link tube	Aluminum
17		rear plastic	PA
18		rear axle	Iron
19		rear fixed tube	Iron
20		brake gear cap	PA
21		front upper plastic	PA
22		rear main plastic	PA
23		front fork	Iron
24		front plastic	PA
25		front wheel	EVA+PP
26		front quick-release bayonet	PA
27		location block	PA
28		front fixed tube	Iron
29		seat adjust I	PA
30		seat adjust gear	POM
31		seat adjust II	PA

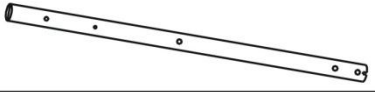EIO barnevogn reservedeler side 3

Item No	Parts	Description	Component
32		seat fixed branch	Iron
33		detachable bumper plastic I	PA
34		seat frame	Iron
35		detachable bumper plastic II	PA
36		automatic fastener II	PA
37		front tube	Iron
38		automatic fastener I	PA
39		footrest plastic	PP
40		bumper link tube	Iron
41		bumper tube	Iron
42		adjust tube	Iron
43		backrest adjust complete	POM
44		locking hook	PA+5%fiber



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no