

## Brukerveiledning



## HOCKEYKJELKE

# **Brukerveiledning**

Innhold	Side
1 Generell informasjon	
1.1 Forord	2
1.2 Bruksområder	2
1.3 Garanti	2
2 Sikkerhet	
2.1 Symbolforklaring	3
2.2 Sikkerhetsanvisninger for bruk	3
3 Leveranse	5
4 Klargjøring for bruk (montering)	
4.1 Nødvendig verktøy	5
4.1 Razor	7
5 Vedlikehold og pleie	
5.1 Vedlikehold	7
5.2 Pleie	7

# **1 Generell informasjon**

## **1.1 Forord**

Takk for at du har kjøpt vårt produkt. I Unique Inventions blir våre hockeykjelker bygget i samsvar med regelverket til IPC (Internasjonal Paralympisk komité). Vennligst husk å ta hensyn til IPCs regelverk når du gjør personlige tilpasninger.

## **1.2 Bruksområde**

Hockeykjelkene fra Unique Inventions er sportsutstyr designet utelukkende for kjelkehockey.

## **1.3 Garanti**


Produsentens garanti gjelder kun hvis produktet har blitt brukt under de forhold og bruksområdene som beskrevet. Vi anbefaler at produktet blir brukt og vedlikeholdt i henhold til instruksjonene.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av komponenter eller reservedeler som ikke er godkjent av produsent.

Vi ønsker at fotografier av feil og mangler blir sendt til oss på epost. Etter gjennomgang vil vi avgjøre om det er en produksjonsfeil/ resultat av normalslitasje, eller skade og misbruk.

## Sikkerhet

### 2.1 Symbolforklaringer

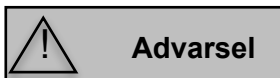

mulig risiko for ulykke eller skade



risiko for teknisk skade



Informasjon angående bruk.

### 2.2 Sikkerhetsanvisninger for bruk

#### INFORMASJON

Vennligst les brukerveiledning før bruk. Bli kjent med produktet og håndtering av det, samt funksjoner. Å ikke følge instruksjonene kan gå på bekostning av din sikkerhet.

#### INFORMASJON

Unique Inventions kjelker er utformet for å absorbere kraften som blir generert under kjelkehockey. De overholder IPC-regler og er egnet for bruk i henhold til internasjonale standarder. Likevel kan muligheten for skader når man deltar i idrett ikke utelukkes. Disse risikoene kan minimeres ved å bruke egnede verneklær, følge reglene og alltid være oppmerksom mens du spiller.

### Risiko som følge av feil montering eller innstillinger



**Risiko for tipping på grunn av feil balanseinnstillinger.** Ved ekstreme innstillinger kan sleden tippe bakover. Ekstreme innstillinger anbefales kun for erfarne spillere.

**Risiko på grunn av løse/skadede skøyteståler.** Hvis skøytebraketten eller skøytestålet ikke er festet godt nok, kan sleden tippe over sidelengs. Kontroller at skøytebraketten og skøytestålet er godt festet før bruk.

## Risiko ved påstiging



### Advarsel

**Risiko for skade på grunn av feil påstiging.** En assistent skal alltid være til stede når man går inn og ut av kjelken. Kjelken må alltid være i en stabil stilling ved påstiging.



### Advarsel

Ved justering av beltet, pass på at fingrene ikke kommer i klem i beltespenen.

## Risiko under spill



### Advarsel

**Risiko for ulykker for uerfarne brukere.** Bruk av produktet uten erfaring kan føre til fall eller andre farlige situasjoner. Bli derfor kjent med skiftene i kjelkens tyngdepunkt på treninger først.



### Advarsel

**Risiko for skader.** Unngå å få hendene under kjelken, samt sørg for å alltid bruke beskyttelsesutstyr, inkludert hjelm og medfølgende fotstropp for å unngå skader under spill.

## Advarsel mot skade på Razor hockeykjelke

### MERK

**Risiko for skader på grunn av overvekt.** Maksimalt tillate brukervekt i hockeykjelken er 110 kg. Ved høyere brukervekt må kjelken forsterkes.

### 3 Levering

Våre kjelker er delvis montert ved levering. Pakk ut innholdet og se at alle delene er der.

Følgende deler følger alltid med:

Anntall	Beskrivelse
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sete med festebraketter (alternativt med justerbart høydestag)</li><li>• Setereimer med jekkemekanisme er festet til setet</li><li>• Skumpolster til bunn og seterygg• Lårbeskytter</li></ul>
1	<p>Hovedrammen inneholder følgende deler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komplette skøytebrakett med skøytestål</li><li>• siderør</li><li>• 1 front (inkludert U-bolt/plastikk isbøyle, hvilereim og festereim fot i velcro)</li></ul>

### 4 Klargjøring for bruk

Kjelkene må bli satt sammen av en voksen.

#### 4.1 Nødvendig verktøy:

##### **Nødvendig verktøy for montering og tilpasning:**

2 - 7/16" fastnøkkel (For å feste seteramme og skøytebrakett)


1/2" fastnøkkel (For U Bolt)

2 - 3/16" unbraconøkkel (for å løsne skøytestål)

3/8" fastnøkkel & 5/32" unbrakonøkkel (til fronten)




## Monteringsanvisning

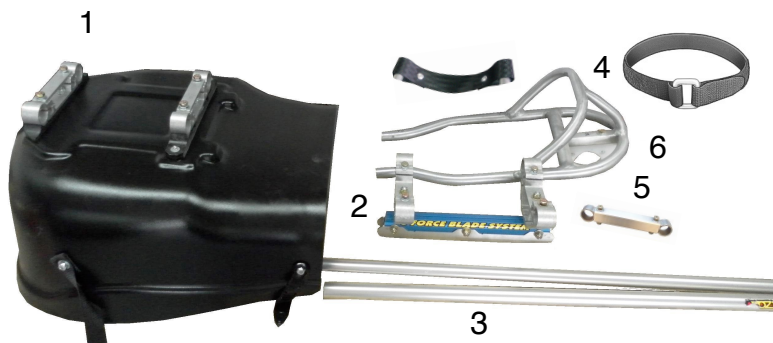


1. Sete med festebrakett og setereimer festet
2. Skøytebrakett med skøytestål
3. Siderør
4. Front med hvilereim og festereim med velcro
5. Rammeavstiver
6. Plastikk isbøyle

1. Plasser skøytebraketten på setet som vist, i front av seterammen og de justerbare høydestagene. Sett inn siderørene. De er merket venstre og høyre.

2. Stram seterammen (alle fire boltene). Hvis kjelken din kommer med justerbart høydestag, må de fire boltene til denne også strammes.

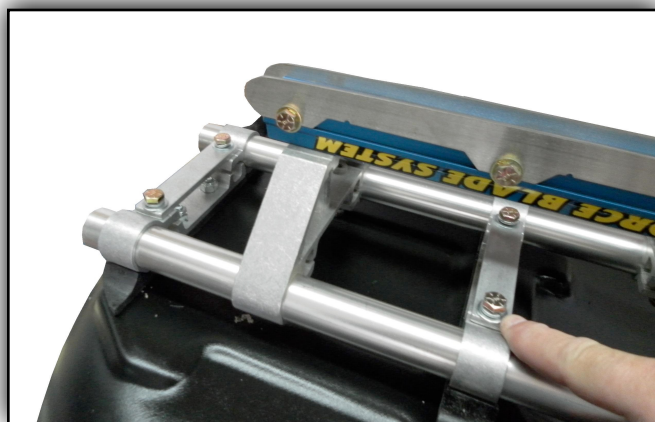

3. Skyv rammeavstiveren inn på siderørene. Skyv fotstøtten inn på frontstykket, og fest det deretter til siderørene. Sikre med medfølgende bolter. Når du har funnet balansepunktet, stram skøytebraketten.

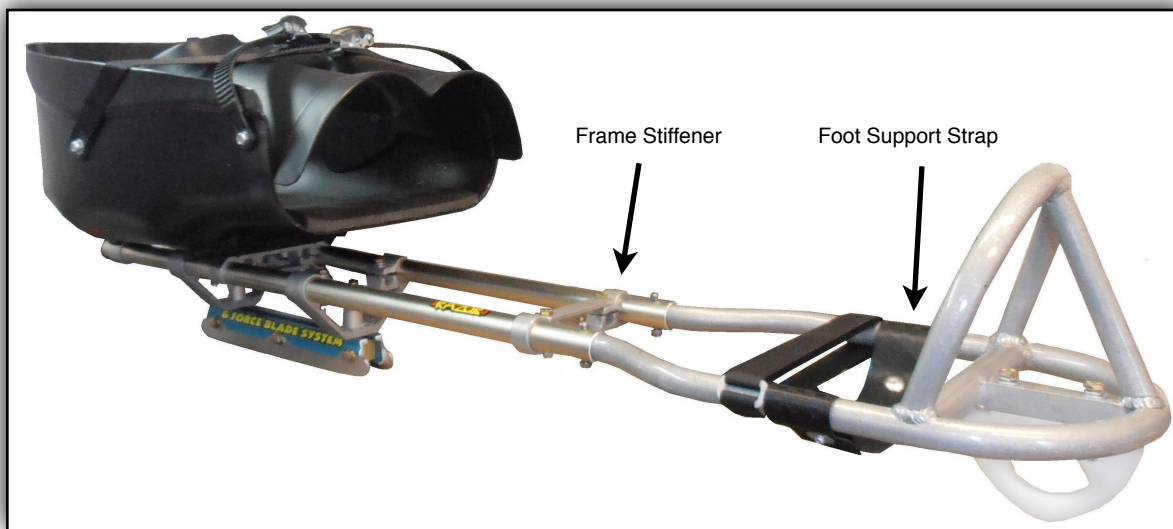

## 5 Vedlikehold og pleie

### 5.1 Normalt vedlikehold



#### Advarsel

**Fare for skade på grunn av skadede / løse komponenter.** Skadede deler og løse bolter representerer en fare for bruker og medspillere. Ramme, beslag og bolter må jevnlig inspiseres for skade.

Som alt utstyr til utøving av sport, krever våre kjelker regelmessig vedlikehold. Alle deler av kjelken må inspiseres før hver bruk.

Sørg spesielt for alle bolter og muttere er stramme.

### 5.2 Pleie

Unike Inventions hockey kjelker er laget av korrosjonsbestandige materialer av høy kvalitet. Etter bruk bør du tørke alle aluminiumdelene av sleden med en absorberende klut.

Spesielt bør den indre bøsken rengjøres regelmessig. Svette og fuktighet kan redusere levetiden til skuminnsatsen. Regelmessig rengjøring er også avgjørende for hygiene.

#### MERK

Ikke bruk kautiske/etsende og sterke rengjøringsprodukter, da det kan skade overflaten på materialene.

Adresse: Rosenholmveien 22, 1252 Oslo  
Tlf: +47 66 81 60 70 • Fax: +47 66 81 60 71  
firmapost@hm-spes.no • www.hm-spes.no

hm  
Hjelpemiddelspesialisten as