

TELEFONFORSTERKER UA-50





Forhandler: AurisMed AS
Postboks 294 - 3201 Sandefjord
Telefon: 33 42 72 50
e-mail: aurismed@aurismed.no

Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker UA-50. Denne forsterkeren er kompatibel med nesten alle modulære telefonsystemer. UA-50 er et unikt produkt som forsterker lyd både på håndsett og hodesett. Den forbedrer taletydighet og øker styrken på innkommende telefoner (opp til 170 ganger) for høyere og tydeligere telefonsamtaler.


INNHold:

1. Styrkekontrollhjul
2. Av/På indikator
3. Kompatibilitetsbryter
4. Tonekontrollbryter
5. Hodesettmikrofonbryter
6. Håndsett jack
7. Hodesett jack
8. Styrkebryter med indikator (BOOST)
9. Hodesettbryter med indikator
10. Jack til telefon
11. Jack for DC adapter
12. Batterideksel

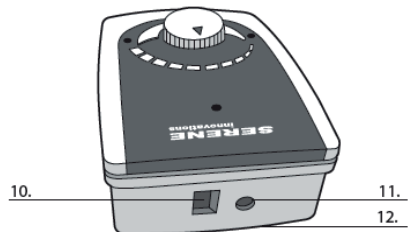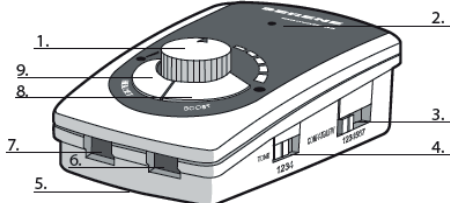


INSTALLASJON OG BRUK

1. Sett inn et 9-volts batteri (ikke inkludert). Koble telefonhåndsett og hodesett (valgfri) til UA-50 som vist på tegningen. Bruk kun den medfølgende "korte ledningen" for å koble UA-50 til telefonbasen. (Anm. Ignorer AV/PÅ indikator mens du holder på med oppsett/tilkobling av UA-50). For sikkerhets skyld, koble fra UA-50 fra telefonbasen når man skal skifte batteriet. Bruk en mynt eller lignende for å åpne batteridekselet.

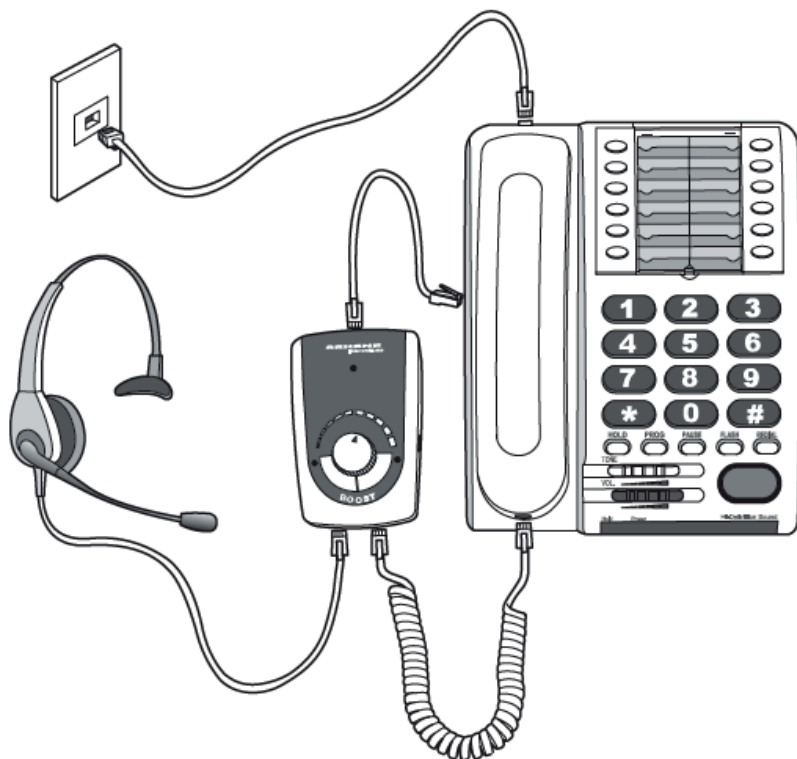


2. Sett styrkekontrollen til midtstyrke. Sett tonekontrollen til posisjon 2. Sett hodesettmikrofonbryteren til posisjon 1. Pass på at hodesettbryteren er opp og at hodesett LED indikator er av.

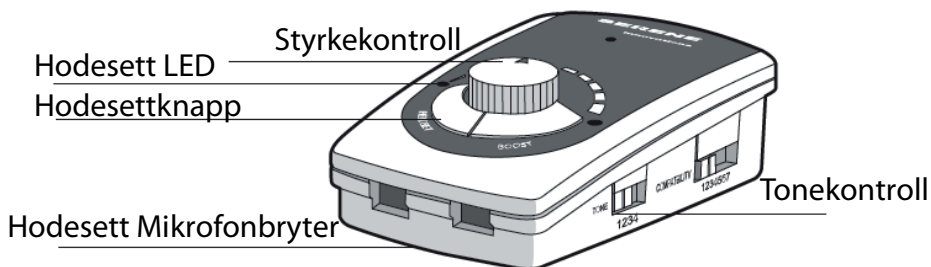


3. Oppsett av kompatibilitetsbryter: Denne bryteren har 7 posisjoner. Posisjon 1 til 6 er kompatibilitetsposisjoner. Posisjon 7 fungerer som "by-pass" posisjon and brukes ikke for normalt oppsett. Posisjon 7 har ingen forsterkning og brukes kun ved nødtilfeller når strømmen har gått.
 - A. Sett kompatibilitetsbryteren til posisjon 1 (Anm. Brukes av de fleste og fungerer på de fleste telefonapparatene. Ignorer AV/PÅ indikator status mens du bruker denne bryteren).
 - B. Ta opp telefonrøret og sjekk at du får ringetone.
 - C. Hvis du ikke får tydelig tone, legg på røret og skyv kompatibilitetsbryteren til neste posisjon og gjenta skritt B.
 - D. Hvis du får en tydelig tone, sjekk at du kan endre styrken på tonen ved og dreie styrkekontrollhjulet.
 - E. Hvis du ikke kan endre styrken, legg på røret og skyv kompatibilitetsbryteren til neste posisjon og gjenta skritt B.
 - F. Foreta en samtale og sjekk at dere hører hverandre.
 - G. Hvis dere kan høre hverandre, da er denne posisjonen den korrekte for ditt telefonapparat. Skriv ned dette oppsettet. Gå til skritt 4.
 - H. Hvis dette ikke fungerer, skyv kompatibilitetsbryteren til neste posisjon og prøv igjen inntil dere kan høre hverandre.
4. Mens du prater i telefonen sjekk at du kan endre styrken på håndsettet ved å dreie på styrkekontrollhjulet på forsterkeren. (Advarsel: sett styrken ned hvis du hører en "hylende" lyd i telefonrøret).

5. Mens du prater i telefonen, kan du justere styrkekontrollen for innkommende samtaler. Sett ned styrken hvis du hører en "hylende" lyd i telefonrøret. Når du har funnet den ideelle tonen, behøver du ikke å endre den igjen. Skriv ned dette oppsettet som referanse for fremtidige telefonsamtaler.

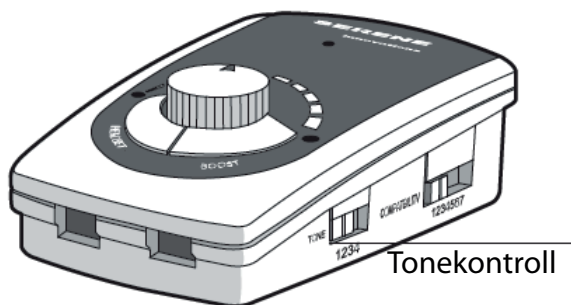


6. Trykk og hold ned BOOST knappen. Sjekk at stemmen til innkommende samtalen blir høyere og at BOOST LED lyset lyser. Når det er din tur til å snakke må du slippe BOOST knappen fordi din stemme blir dempet mens denne knappen trykkes/holdes ned.

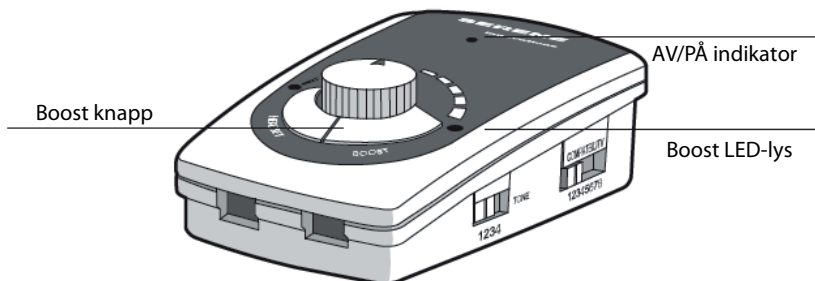


7. AV/PÅ lysindikator skal være på når du er under en samtale. 8 til 15 sekunder etter at du har lagt på rører vil den slokne (også når det ikke er lyd eller stemme på 15 sekunder).

HOSETTFUNKSJON


1. Trykk på hodesettknappen på UA-50. Hodesettindikator vil lyse nå. Det skal være mulig å høre på samtalepartneren i hodesettet. La telefonrøret ligge på bordet mens du bruker hodesettet.

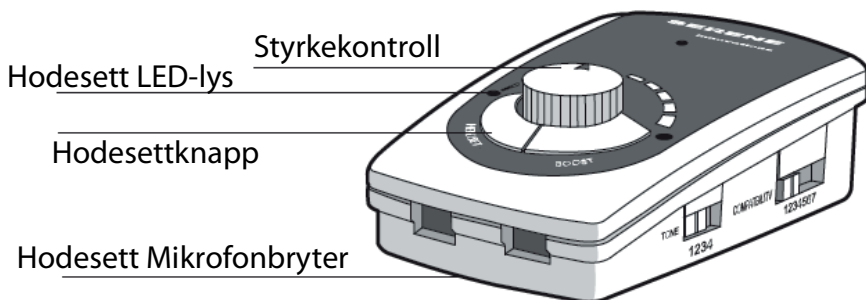


2. Pass på at samtalepartneren også kan høre deg. Hvis ikke, skyv hodesettmikrofonbryteren fra posisjon 1 til 2 eller omvendt. Skriv ned den posisjonen som fungerer for deg.

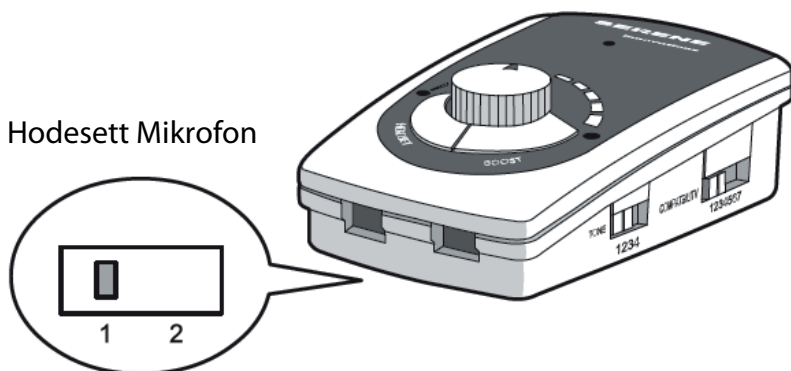

3. For å gå tilbake til å bruke håndsettet (telefonrøret), trykk på hodesettknappen igjen. Hodesett indikator vil slutte å lyse.

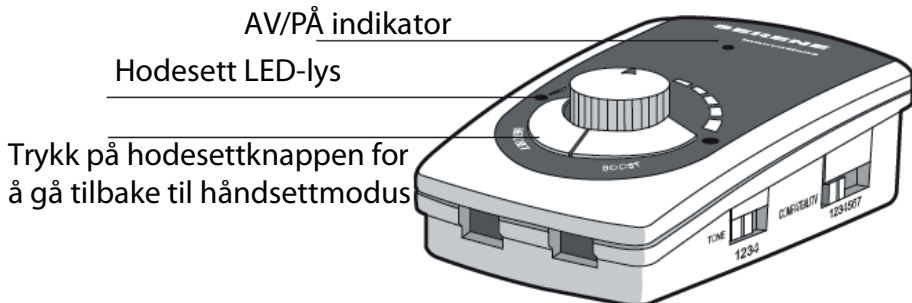

4. AV/PÅ indikatoren vil lyse mens du er i en samtale. Den vil slutte å lyse 8 til 15 sekunder etter at du har lagt på røret (eller hvis det ikke er lyd/stemme i 15 sekunder).
5. Legg på røret for å avslutte samtalen.
6. Vennligst tilkoble 9-volt DC adapteren. Sett kontakten i vegguttaket. Koble pluggen til DC jack på baksiden av UA-50.

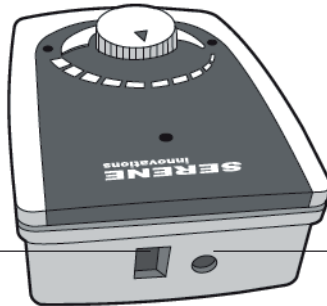

Til telefonbase

Jack for medfølgende
DC adapter

7. DC adapter forsyner UA-50 med strøm og batteriet fungerer som reserve. Batteriet bør skiftes annet hvert år eller tidligere hvis AV/PÅ indikator ikke fungerer.

SPØRSMÅL

1. AV/PÅ indikator lyser ikke: Skift batteri og sjekk at DC adapteren er ordentlig tilkoblet.
2. Kan ikke høre ringe tone eller kan ikke høre hverandre under en samtale når du bruker håndsettet (telefonrøret): Sjekk at hodesettindikatoren ikke er på. Sjekk at kompatibilitetsbryteren ikke er blitt skjøvet ved et uhell. Gjenta skritt A til D av skritt nr. 3 ovenfor.
3. Kan ikke høre hverandre når man bruker hodesettet. Sjekk at hodesettindikatoren lyser. Sjekk at hodesettmikrofonbryteren er i riktig posisjon (se skritt 2 under Hodesettfunksjon).
4. Høy "hylelyd" i håndsett eller hodesett. Sett styrke eller tone ned inntil "hylelyden" forsvinner.

GARANTI

Vi tilbyr 2 års garanti fra leveringsdato. Garantien omfatter fabrikkasjons- og materialfeil. Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet omfattes ikke av garantien.

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER:

ADVARSEL – Når man bruker telefon- eller elektriske apparater, må man følge noen grunnforsiktighetsregler for å unngå brann, elektrisk støt eller skader.

1. Les denne bruksanvisningen før du tar i bruk UA-50.
2. For å redusere risiko for skade, tilsyn er nødvendig dersom man bruker UA-50 i nærheten av barn.
3. Ikke forsøk å koble bevegelige deler eller utildekkede metalliske flater.
4. Bruk kun tilbehør anbefalt av fabrikken/leverandøren.
5. Ikke bruk UA-50 utendørs. Ikke bruk UA-50 i nærheten av vann (badekar, svømmebasseng, fuktig kjeller).
6. Slå av alle kontroller før du kobler enheten fra vegguttaket.
7. Ikke dra i ledningen for å koble UA-50 fra strømuttaket. Ta tak i pluggen som sitter i strømuttaket.
8. Koble fra enheten når den ikke er i bruk eller før service og rengjøring.
9. Ikke bruk UA-50 hvis ledninger eller pluggen er skadet eller når enheten ikke fungerer ordentlig eller om den har fått et støt. Send enheten til din nærmeste hjelpemiddelsentral eller utleveringssted.
10. Bruk kun ledninger og batterier som beskrevet i denne manualen. Ikke kast batteriene i ildsteder for de kan eksplodere. Lever batteriene til din nærmeste gjenvinningsstasjon.
11. Både pluggen og strømadapteren skal være lett tilgjengelige og i nærheten av enheten.
12. Ikke bruk telefonapparatet under en storm. Det er risiko for elektrisk støt fra lyn.
13. Ikke bruk telefonen for å rapportere om gasslekkasje som har oppstått i nærheten.
14. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN.

TEKNISKE DATA

Strømkilde:	9 volt alkalisk batteri (ikke inkludert)
Batteriforbruk:	10 mA; slås av automatisk hvis det ikke er lyd på
15	15 sekunder
Batteriets levetid:	6 til 12 måneder, avhenging av forbruk
Forsterkning uten BOOST:	30 dB
Forsterkning med BOOST:	45 dB
Slås av automatisk	etter 15 sekunder, dersom det ikke høres lyd/stemme
Kompatibilitetsbryter:	6 posisjoner + "by-pass" posisjon
Indikatorer:	AV/PÅ og BOOST
Kontroller:	Styrke, BOOST, Hodesett, Håndsett, Mikrofon, Tone og Kompatibilitet
DC adapter:	9 vdc. 200 mA
Driftstemperatur:	0 til 45 grader C
Lagringstemperatur:	-20 til 50 grader C