

# FlexiBlink

Varenr. 1533  
HMS-nr.: 233425

## Senderknapp FLEXIKNAPP



## Brukerhåndbok

---

Dok. nr.: 2300A1  
Dato: 2017.04.19

# Innholdsfortegnelse

---

<b><u>1. Innledning</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2. Oversikt</u></b>	<b><u>4</u></b>
Utvendig	4
Batteriet	4
<b><u>3. Komme i gang</u></b>	<b><u>5</u></b>
Still inn Huskoden	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Sette inn batteriet	5
Montering	6
<b><u>4. I bruk</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>5. Viktig informasjon</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>6. Resirkulering</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>7. Tekniske data</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>8. Feilsøking</u></b>	<b><u>7</u></b>

## 1. Innledning

---

Senderknappen FLEXIKNAPP er et produkt i FlexiBlink-serien. Den benyttes for å varsle til FlexiBlink mottakere. Den kan benyttes både innen- og utendørs.

FlexiBlink er et trådløst varslingsystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.

FLEXIKNAPP kan f. eks. varsle dørklokke, sykesignal og assistanse ønskes. I tillegg har FLEXIKNAPP mulighet for å sende generell alarm og varslinger som kan tilpasses i IRIS Touch og AppSender.


FLEXIKNAPP benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.




## 2. Oversikt

---


### Utvendig

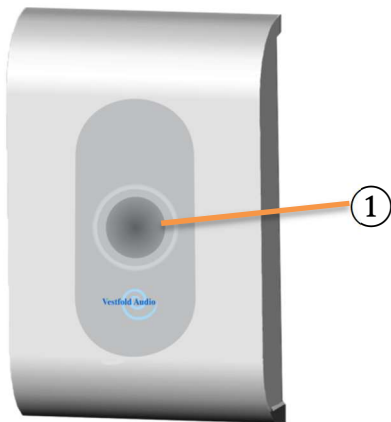

Figur 1 Forside

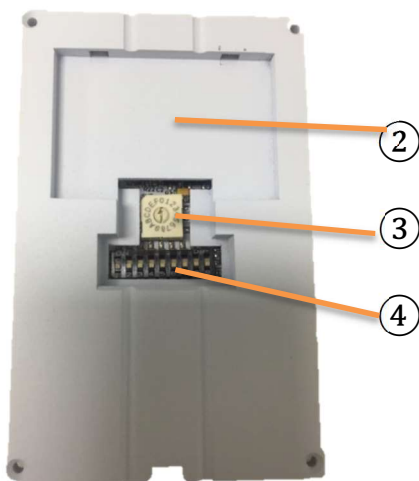

Figur 2 Bakside

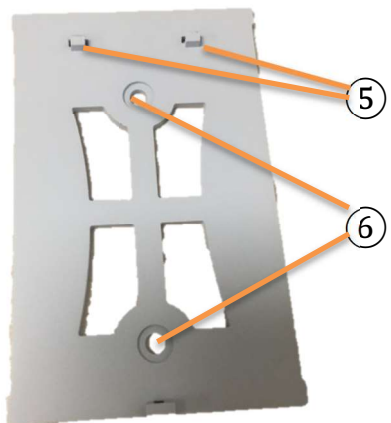

Figur 3 Festebrakett

### Betydning:

- ① Trykknapp med lysindikator
- ② Plass for borrelås
- ③ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ④ Huskodevelger (kanal)
- ⑤ Feste for FLEXIKNAPP
- ⑥ Skruehull for festebrakett

### Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



### 3. Komme i gang

#### Still inn Huskoden


Alle FlexiBlink varslingsprodukter du har i boligen, må stilles inn med lik huskode. Skyv knappene i huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger  
(fabrikkinnstilling)

#### Velg funksjon (ID-velger)


FLEXIKNAPP har innebygget flere varslinger. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne.

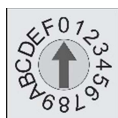

Funksjonsvelger  
(fabrikkinnstilling)

#### Sette inn batteriet

Åpne boksen ved å skru ut de fire skruene på baklokket. Sett inn batteriets kontakt og legg inn batteriet.

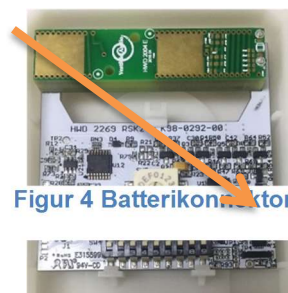

Ved tilkobling av batteri kan FLEXIKNAPP

blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.

Lukk igjen boksen og skru igjen de fire skruene før montering av FLEXIKNAPP.



#### Tips

Skriv inn dato på batteri-lappen i lokket når batteriet ble koblet til.

ID	Varsler om	Signal-type
0	Det ringer på døren	Daglig
1	Det ringer på hoveddøren	Daglig
2	Det ringer på dør 2	Daglig
3	Sykesignal	Daglig
4	Sykesignal 2	Daglig
5	Assistanse ønskes	Daglig
6	Kom nå!	Alarm
7	Kom snart	Daglig
8	Generell	Daglig
9	Generell	Alarm
A	Barnet har stått opp	Daglig
B		
C	Hjelp meg nå – (Nabo)	Alarm
D	Opplest klokke (Fra IRIS Touch) (*1)	Daglig
E	Varsel til IRIS Touch/AppSender (kode 400)	Ingen varsel
F	Varsel til IRIS Touch/AppSender (kode 402)	Ingen varsel

\*1 - Når denne benyttes, forteller IRIS Touch hva klokka er.



## Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

## Montering

### Utendørs

Benytt den vedlagte veggbraketten og skru denne fast på veggen. FLEXIKNAPP kneppes deretter på plass i braketten.

### Innendørs

FLEXIKNAPP monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med veggbraketten som for utendørs montasje.

## 4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri

## 5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

## 6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 7. Tekniske data

---

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm
Vekt m/ batteri:	140 g
Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	142,475 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C

## 8. Feilsøking

---

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	FLEXIKNAPP lyser ikke grønt.	Bytt batteri.
	FLEXIKNAPP mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom FLEXIKNAPP og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i FLEXIKNAPP er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
Det varsles med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i FLEXIKNAPP	Batteriet i FLEXIKNAPP er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

