

FlexiApp-Sender

Varsling på smarttelefon

AppSender



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
AppSenderen	4
3. Komme i gang	5
Still inn Huskoden	5
Montering av AppSenderen	5
AppSender tilkoblinger	5
AppSender i drift	5
Installere FlexiApp	6
FlexiApp Menylinjen	6
4. Koble til FlexiApp	6
Med WiFi	6
Legg til manuelt	7
Navngi AppSenderen	7
5. Daglig bruk	7
HJEM	7
SENDERE/ENHETER	7
SØK	8
6. Avansert bruk	8
Varslinger	8
Enheter	8
Tilpasse	9
Test	9
7. Viktig informasjon	10
Resirkulering	10
8. Tekniske data	10
9. Feilsøking	11

1. Innledning

Med en **AppSender** installert i boligen får du FlexiBlink-varsling rett til **FlexiApp** på smarttelefonen din.

Denne løsningen er praktisk for personer "i farta" som har behov for varsling på steder der det ikke er FlexiBlink varslingsmottakere.



AppSenderen mottar FlexiBlink varslings signaler og sender dem videre via Internett til telefoner med **FlexiApp**. Mobiltelefonen må ha mobildata påslått eller være tilkoblet Internett via WiFi.

Opp til 10 smarttelefoner kan være registrert samtidig til **AppSenderen**.

Du kan registrere din **FlexiApp** til flere **AppSendere**, som for eksempel hjemme og på arbeidsplass.


FlexiApp finnes for både iPhone og Android-telefoner.

FlexiApp
Android og iOS

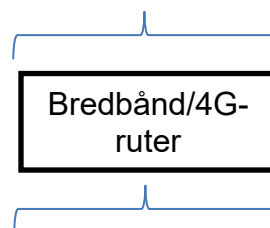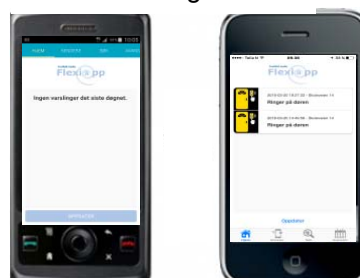


2. Oversikt

AppSenderen

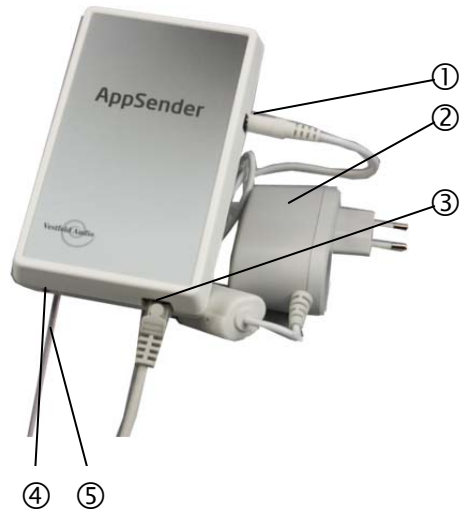

Figur 1 Forside

- ① Tilkobling strømforsyning
- ② Strømforsyning
- ③ Tilkobling bredbåndsruter
- ④ Lysdiode/statusindikator
- ⑤ Antenne
- ⑥ Huskodevelger (under proppen)

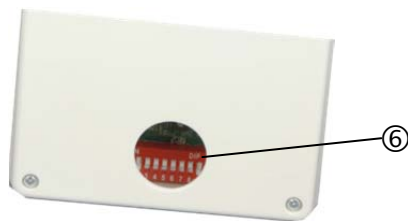

Figur 2 Bakside

3. Komme i gang

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter som installeres i boligen må stilles inn med lik Huskode.

Skyv knappene i Huskodevelgeren på **AppSenderen** til det valgte mønsteret.



Huskodebryter
(fabrikkinnstilling)

Montering av AppSenderen

AppSenderen må installeres på et sted der den er innen rekkevidde fra de FlexiBlink varslingsenderne den skal videresende fra.

Samtidig skal det være en plassering som tillater kablet tilkobling til bredbånds-ruter.

AppSenderen skal monteres på vegg med antennen hengende rett ned. Benytt de medfølgende borrelåsene.

Rengjøre flatene med spritservietten og vent 1 minutt. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.



Tips

Vi anbefaler at du tar av lappen med PIN-kodene og klistrer den på baksiden av denne håndboken. Oppbevar PIN-kodene på et trygt sted.

AppSender tilkoblinger

- 1 Strøm
Koble strømforsyningen til **AppSenderens** strømkontakt, og sett strømforsyningen i kontakten på veggen.
- 2 Internett
Sett den ene enden av nettverkskabelen i **AppSenderen** og den andre enden i en ledig port i bredbånds-ruteren.

AppSender i drift

Når enheten er i drift vises status i lysindikatoren:

Slukket	IKKE KLAR
Blinkende grønt	Klar
Grønt	Varsel sendes
Gul	Mottar signal fra FlexiBlinksender
Blinkende grønt/rødt	Ikke kontakt med server



Tips

Når AppSenderen er på og er klar til bruk, vil den grønne lysdioden blinke.

Installere FlexiApp

FlexiApp finnes for både iOS (iPhone) og Android smarttelefoner, og den kan lastes ned fra AppStore og PlayButikk. Gjør slik:

- 1 Søk opp "**FlexiApp**".
- 2 Installer og åpne **FlexiApp**.
- 3 Startsidene gir deg nyttig informasjon:



- 4 Fortsett i kapittel 4 *Koble til FlexiApp*.

FlexiApp Menylinjen

FlexiApp fungerer likt på iPhone og Android-telefoner, men utseendet er litt forskjellig. Android har menylinjen i toppen, mens iPhone har den nederst.

HJEM	Viser varslinger
SENDERE	Slå på/av varslinger
SØK	Søke etter AppSender
AVANSERT	Avanserte funksjoner

4. Koble til FlexiApp

Du kan koble deg til **AppSenderen** enten ved å søke den opp på WiFi eller du kan legge til manuelt.

Med WiFi

- 1 Sjekk at WiFi er slått på og at du er tilkoblet det trådløse nettverket til bredbåndsruteren hvor **AppSenderen** er tilkoblet. Til dette kreves det normalt et WiFi-passord.

Viktig

Systemet forutsetter at det er et trådløst nettverk (WiFi) i forbindelse med bredbåndsruteren for første gangs tilkobling til smarttelefonen.

- 2 Start **FlexiApp** og gå til «Søk»-siden for å søke opp **AppSenderen**.
- 3 Du får nå opp en liste der **AppSenderen** vises med det navnet den er gitt på klistrelappen. Trykk på  for å koble smarttelefonen til **AppSenderen**.



Legg til manuelt

- 1 Trykk på valget "legg til appsender manuelt".
- 2 Skriv inn Bruker PIN-kode.

Navngi AppSenderen

- 1 Dersom du vil endre navnet på **AppSenderen**, kan du gjøre det nå. Dette navnet vises som en del av meldingen når du får en varsling.

Navn

Når du legger til en AppSender, vil du motta varsler på din telefon ved hendelser i ditt FlexiBlink system.

Varslingene vil bli sendt som Push-meldinger. Dette krever at telefonen er tilkoppelt internet enten via WiFi eller mobildata

- 2 Trykk "LEGG TIL" for å koble til **AppSenderen**.
- 3 Dersom du ikke får opp noen AppSendere, eller du ikke er på samme WiFi-nettverk som AppSenderen, kan du legge den inn manuelt. Trykk «Legg til AppSender manuelt», og skriv inn Bruker PIN og ditt ønskede navn på AppSenderen.

5. Daglig bruk

Straks du har utført siste instruksjon i foregående avsnitt, kan du motta varslinger på smarttelefonen.



Smarttelefonen må ha tilgang til Internett over mobilt nettverk eller WiFi.

HJEM


Når du trykker på FlexiApp-ikonet, og når du trykker på et mottatt varsel, kommer du til HJEM-siden. Her vises de varslene du har mottatt på telefonen de siste 24 timene.



SENDERE/ENHETER

På denne meny-siden kan du velge hvilke varsler du vil motta. Ved å velge Mottak "av", får du ingen varsler. Ved å velge "Motta kun alarmer", varsles du bare av alarmer.

"Avslutt" bryter tilkoblingen til denne AppSenderen og du må eventuelt gjenta kapittel 4 for å koble til igjen.

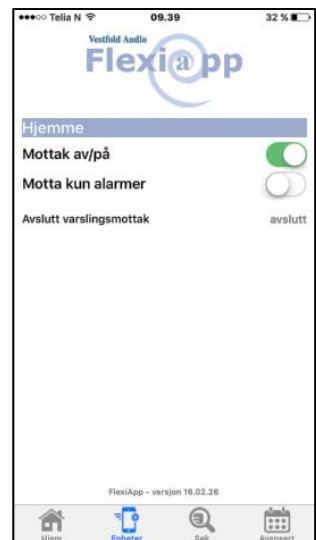

Tips

Hvis du har slått "Mottak" av, vil ingen varsler mottas eller vises på HJEM-siden.

Viktig

Varslingene i **FlexiApp** er underlagt telefonens basis varslingsinnstillinger for lyd, vibrasjon og visning. Se telefonens bruksanvisning.


SØK

Velg denne siden hvis du vil koble deg til en ny **AppSender**. Se kapittel 4 over.

6. Avansert bruk

Funksjonene på denne siden krever pålogging med PIN-kode. PIN-kodene finner du på lappen på **AppSenderen**. Disse funksjonene er for den avanserte brukeren.

Det finnes to nivåer for pålogging:

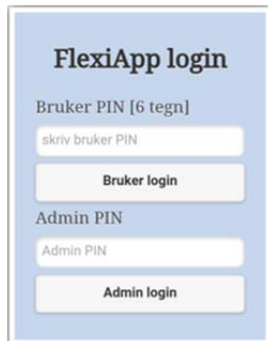

Bruker login Tilgang bare til varslingshistorikk

Admin login Varslingshistorikk og administrator-funksjoner

Når du logger inn, kommer du først til denne siden med informasjon om versjon o.l.

Nederst finnes tilgang til avanserte funksjoner.

Varslinger




På denne siden vil du varslingshistorikk for en begrenset tidsperiode.

Enheter

For å få tilgang til denne fanen må du logge på som "Admin". Her kan du administrere telefonene som er koblet til AppSenderen.

Klikk på den telefonen du ønsker å gjøre noe med. Du kommer da til denne siden:


Her kan du endre telefonens navn og visningsnavnet til AppSenderen.

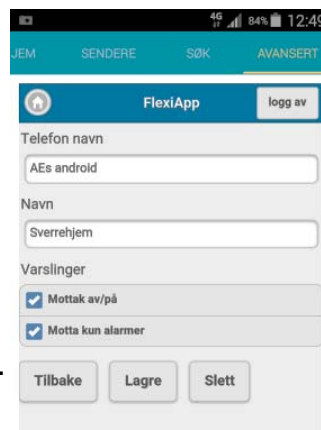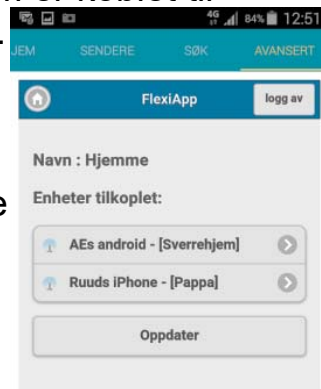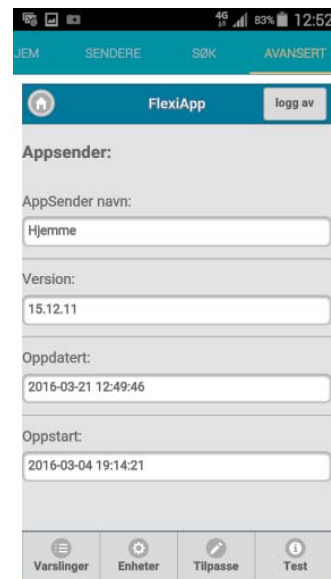


Trykk "Lagre" for å lagre endringene.
Trykk "Slett" for permanent å stoppe varsling til denne telefonen.

Tilpasse

På denne siden kan du endre varslingstekst og varslingslyder fra det som er standard.

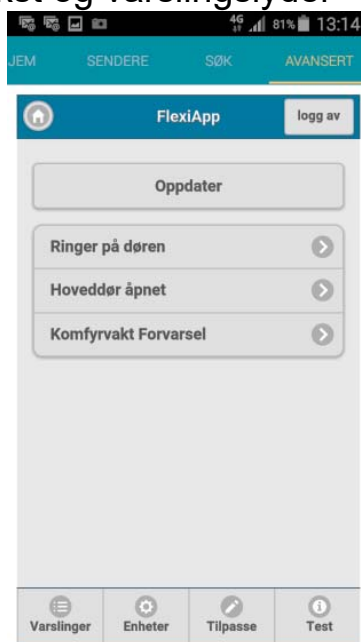

Alle typer varslinger som AppSenderen har mottatt fra varslingssendere er listet opp. Hvis du ønsker å endre på en varsling, trykker du på pilen til høyre.

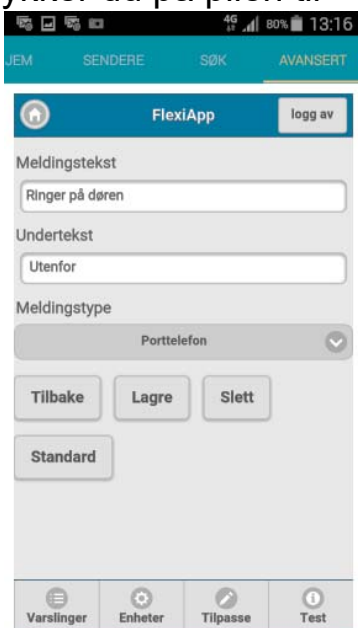


F.eks. kan du spesifisere hvilken dør det ringer på.
Velg hvordan varslet skal lyde fra menyen "Meldingstype".
Trykk "Lagre" for å lagre endringene.

Trykk "Slett" for fjerne varslings-
typen fra listen.

Trykk "Standard" for å
tilbakestille til fabrikkinnstilling.

Test

Under denne fanen kan du få
systemet til å sende deg en test-
alarm.

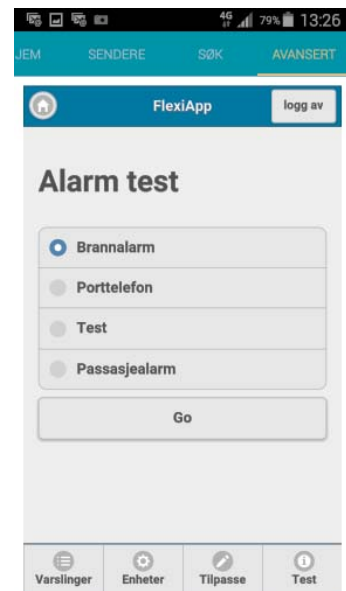

Du kan velge mellom 4 standard-
varslinger.
Velg en og trykk på "Go".

7. Viktig informasjon

- **AppSender** kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- **AppSender** er for innendørs bruk.
- Temperatur: -10°C-+40°C
- Ikke kondenserende luft.



Tips

Husk å starte **FlexiApp** etter omstart av mobilen for å motta varsler.



Viktig

Tidsforsinkelser på varslinger kan oppleves og avhenge av Internett-forbindelse og mobilnettet.

Resirkulering

AppSender skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



8. Tekniske data

AppSender:

Dim. (bxhxd): 90x145x34mm

Strømforsyning: 15VDC

LAN: 10/100Mbps

Mottaker: 142.475MHz

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger	
AppSenderen blinker ikke grønt.	Strømforsyningen er ikke tilkoblet.	Kontroller tilkoblingen.	
	Det er ikke kontakt med bredbåndsruteren	Kontroller tilkoblingen til ruteren og at ruteren er på.	
	Bredbåndsruteren har ikke kontakt med Internett.	Sjekk linjer.	
FlexiApp finner ikke AppSenderen	WiFi er ikke tilgjengelig	Skru på WiFi til det samme nettet der AppSender er tilkoblet.	
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet WiFi-nettet.	Logg på WiFi.	
FlexiApp mottar ikke varslinger	Varsling er avslått i FlexiApp.	Slå på varsling i FlexiApp, fane "Sendere".	
	"Bare alarmer" er valgt.	Slå av "Bare alarmer" i FlexiApp.	
	AppSenderen fungerer ikke.	Kontroller AppSender og tilkoblinger.	
	Får ikke gult blinkende lys.	Sjekk rekkevidde mellom sendere og AppSender.	
	Smarttelefonen er ikke tilkoblet AppSenderen.	Koble til FlexiApp, fane "Søk".	
	AppSenderen har feil Huskode.	Still inn Huskodevelger likt senderne i boligen.	
	Mobildata/WiFi/Internett er ikke tilgjengelig.	Slå på mobildata og/eller logg på et WiFi-nett.	
	Telefonen er satt i "flymodus".	Slå av "flymodus".	
	Varslinger mottas, men ingen lyd eller vibrasjon.	Smarttelefonen er satt til "lydløs"-modus.	Slå på lyd og/eller vibrasjon.
	FlexiApp varsler for sent	Smarttelefonens strømsparing er aktivert.	Slå av strømsparingsfunksjonen.
Smarttelefonen har vært utenfor dekningsområde.		Om mulig: Oppsøk områder med god dekning.	
Smarttelefonen er opptatt med å bytte mellom mobildata og WiFi.		Om mulig: Velg enten mobildata eller WiFi.	
Internett-linjen i boligen er ustabil.		Sjekk linje og tilgang.	
Smarttelefonen har andre "app'er" som stjeler prioritet.		Forsøk å slå av andre "app'er".	

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

AppSenders Bruker PIN: _____

AppSenders Admin PIN: _____

Plass til **AppSenders** klistrelapp:



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

