

FlexiBlink

Varenr. 1511
HMS-nr.: 232372

Telefonsender

TLS10



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2298A1
Dato: 2017-02-06

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>4</u>
Utvendig	4
Under lokket	4
Batteriet	4
<u>3. Komme i gang</u>	<u>5</u>
Still inn Huskoden	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Tilkobling	5
Montering	5
Bruk av repeater	5
Sette inn batteriet	6
<u>4. I bruk</u>	<u>6</u>
<u>5. Viktig informasjon</u>	<u>6</u>
Resirkulering	6
<u>6. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>7. Feilsøking</u>	<u>7</u>

1. Innledning

Telefonsender TLS10 er et produkt i FlexiBlink-serien. Den benyttes for å varsle til FlexiBlink mottakere at telefonen ringer.

FlexiBlink er et trådløst varslingsystem med sendere og mottakere. Systemet kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass, og systemet er enkelt å sette opp.


Telefonsenderen aktiveres av ringesignal på analog telefonlinje eller på *analog utgang* på bredbåndsmodemet.

TLS10 benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.




2. Oversikt

Utvendig

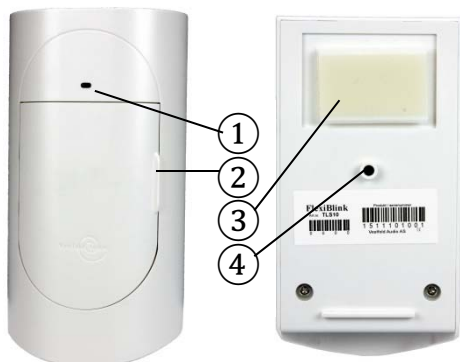

Figur 1 Forside


Figur 2 Bakside

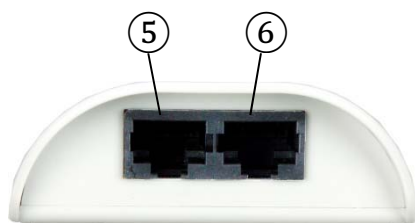

Figur 3 Bunn med telefontilkoblinger

- ① Lysindikator
- ② Løkk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Telefonkontakt
- ⑥ Telefonkontakt

Under lokket

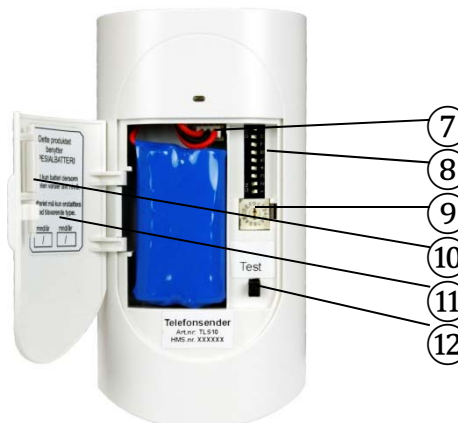

Figur 4 Under lokket

- ⑦ Batterikontakt
- ⑧ Huskodevelger (kanal)
- ⑨ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑩ Verktøy for innstillinger
- ⑪ Batteriinformasjon
- ⑫ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



3. Komme i gang

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter du har i boligen må stilles inn med lik Huskode. Skyv knappene i Huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

TLS10 kan varsle flere telefoner. Vri Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i varslingsmottakerne.

Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinstilling)

ID	Varsler om
0	Telefon
1	Telefon Nr. 1
2	Telefon Nr. 2
3	Telefon Nr. 3
4	Telefon
5	Telefon Nr. 1
6	Telefon Nr. 2
7	Telefon Nr. 3

Tilkobling

Den medfølgende ledningen kobles mellom telefonuttaket i veggen og den ene telefonkontakten i telefonsenderen. Ledningen fra telefonen settes inn i den andre telefonkontakten i senderen.

ID-valg 0-3, registrerer når telefonen blir besvart. Denne funksjonen er avhengig av at spenningsnivået på telefonlinja er innenfor gitte grenser. Dersom en opplever ustabilitet med varslingen med ID-velgeren i disse posisjoner, bør ID-valg 4-7 benyttes.

Montering

TLS10 monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelåstapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til vegg gjennom festehullet under batteriet.

Bruk av repeater

Dersom det er behov for å benytte en repeater i systemet, må repeateren settes opp til å videresende telefonsignaler. Ta kontakt med Vestfold Audio for nærmere opplysninger. Repeater settes til ingen forsinkelse.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Ved tilkobling av batteri kan TLS10 blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Skriv inn dato på batteri-lappen i lokket når batteriet ble koblet til.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende</i>	
<i>rødt/grønt</i>	Bytt batteri

Ringesignalet på analoge telefonlinjer varsler med 1 sekunds ringing, etterfulgt av 4 sekunder stillhet. Dersom det benyttes ID 4-7, kan det som følge av dette ta opp til 6 sekunder fra du tar telefonen, til varslingsmottakeren slutter å varsle.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne



resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Radiofrekvens: 142,475 MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C

7. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere		Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Feil huskode	Sjekk at huskodebryteren er lik i sender og mottaker
	Ikke koblet til mellom vegg eller telefon	Sjekk at alle tilkoblingene er festet ordentlig
	Avstanden mellom TLS10 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater (må eventuelt settes opp til å videresende telefonsignaler).
	Batteriet i TLS10 er tomt / det blinker rødt/grønt.	Bytt batteri.
	TLS10 mangler batteri	Sett inn batteri.
Det varsler for kort tid	ID-velgeren står i pos. 0-3	Sett ID-velgeren i pos. 4-7
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i TLS10	Batteriet i TLS10 er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

